

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

RT-4551KV1 kVue™ стандартты ендірімесі
RT-4551KV2 kVue™ қысқа ендірімесі
RT-4551KV17 Virtual Indexing™ жүйесінсіз
kVue™ стандартты ендірімесі



EC REP

Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatara, BKR 4013
Malta



АҚШ-та жасаған өндіруші
Qfix
440 Church Rd,
Avondale, Pennsylvania,
USA
+1 484-720-6053 www.
Qfix.com

2001447_KK_A / 2023-08

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӨРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 484-720-6054 НӨМІРІ НЕМЕСЕ TECHSUPPORT@QFIX.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША QFIX КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

! ЕСКЕРТУ ! ONETOUCH – ДӨЛ ӨЛШЕУ МЕХАНИЗМІ ЖӘНЕ ТЕК МАҚҰЛДАНҒАН QFIX kVue ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫМЕН ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. МАҚҰЛДАНБАҒАН, QFIX КОМПАНИЯСЫ РАСТАМАҒАН QFIX ШЫҒАРМАҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ҚАУІПТІ БОЛУЫ МҮМКІН ЖӘНЕ ОЛАР ҚОЛДАНЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА КЕПІЛДІКТІҢ КҮШІ ЖОЙЫЛАДЫ.

ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР

Елеулі оқыс оқиғалар (мысалы, өлімге немесе ауыр жарақаттарға әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін оқиғалар) туралы Qfix компаниясына да, еліңіздің құзыретті органына да хабарлаңыз.

НОМИНАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ

Қайсысының салмағы аз болуына байланысты, үстел табанына түсірілетін 249 кг (550 фунт) біркелкі бөлінген жүктемеден немесе максимум жұмыс жүктемесінен асыруға БОЛМАЙДЫ.

! ЕСКЕРТПЕ ! Түпнұсқа жабдық өндірушісінің үстел табанымен біріктірілген кезде, номиналды жүктеме екі қауіпсіз жұмыс жүктемесінің төменгісі болады. kVue үстел бетінің жүктемесін үстел табанының өндірушісінің техникалық сипаттамаларынан асыруға БОЛМАЙДЫ. Түпнұсқа жабдық өндірушісі берген өнім құжаттарын қараңыз.

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын Qfix.com сайтынан қараңыз.



НЕМЕСЕ



kVue ЕНДІРМЕСІН ОРНАТУ ЖӘНЕ ШЫҒАРЫП АЛУ

! ЕШ УАҚЫТТА kVue ЕНДІРМЕСІНІҢ ҰШЫНАН ҰСТАП КӨТЕРМЕҢІЗ !

Ұштастырғыш істіктер майысып немесе сынып, kVue ендірімесін жарамсыз етуі мүмкін.

kVue ендірімесін орнату және шығарып алу нұсқауларын kVue үстел бетін орнату нұсқаулығынан қараңыз.



НЕМЕСЕ



«NO STEP» (БАСУҒА БОЛМАЙДЫ) СЫЗЫҒЫ (БОЛСА)

kVue ендірімесіндегі сары сызық тірек білеулерінің ұшын білдіреді. Сызық артындағы аймақ номиналды жүктемеден аспайтын емделушінің жоғарғы кеуде бөлігін немесе денесінің төменгі бөлігін демеу үшін жасалған және сыналған.

kVue ендірімесіндегі «No Step» (Басуға болмайды) сызығынан кейінгі бөлігіне тұру немесе отыру салдарынан kVue ендірімесі зақымдалуы немесе адам жарақаттануы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

Бұл құрылғы сәулелік терапиядан өтіп жатқан емделушілерді қозғалтпай ұстауға, жайғастыруға және дене қалпын өзгертуге арналған.

! ЕСКЕРТПЕ ! АҚШ федералдық заңына сәйкес, бұл құрылғыны тек дәрігерге немесе оның тапсырысы бойынша сатуға рұқсат етіледі.

МАҚСАТТЫ ЕМДЕЛУШІ ТОПТАРЫ

Рентгенотерапия немесе диагностикалық визуализация процедураларынан өтіп жатқан емделушілер.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Өнімнің мақсатты пайдаланушысы – аймақтың нормативтік талаптарына сәйкес білікті тұлға.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ

kVue ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ


kVue үлкен радиотерапиялық емдеу жүйелерінің барлығында қолдануға келеді. Жылдам орнату тәсілі орнату кезіндегі сызықтық жылдамдатқыштың бос тұру уақытын барынша азайтады. Арнайы орнату ақпаратын kVue үстел бетін орнату нұсқаулығынан қараңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! kVue үстел бетін орнату нұсқаулығында толық берілгендей, kVue бетінің соңғы биіктігі бастапқы жүйдегіден өзгеше болуы мүмкін. Алғаш қолданар алдында жүйені нөлге (бастапқы күйге) қалпына келтіру үшін түпнұсқа жүйенің нұсқауларын қараңыз.

kVue ЕНДІРМЕСІН ОРНАТУ

1. Стандартты ендірімені тірек білеулерінің үстіне қойыңыз да, екі ұштастырғыш істікті OneTouch ысырмасындағы қабылдау тесіктерімен туралаңыз.
2. kVue бас жақ ұшынан стандартты ендірімені тікелей қабылдау тесіктеріне сырғытып кіргізіңіз.

Стандартты ендіріме орнына бекітілген кезде, «сырт» еткен дыбысты естисіз. Дұрыс орнатылғанда, ТЕК жасыл түйме беті көрінеді.

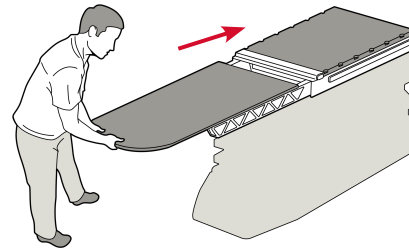


Стандартты ендірімесі бар kVue

БАПТАУ

ПОЗИЦИЯЛЫҚ ТАҚТАЙШАНЫ ОРНАТУ

Позициялық тақтайшада көптеген стандартты орналастыру керек-жарақтарына сәйкес келетін екі позициялық істік бар. Бекіту үшін позициялық тақтайшаның кез келген ұшынан тиісті Varian Exact® құрылғысымен үйлесімді көрсеткіш ойықтарына салып, орнына бекітіңіз.

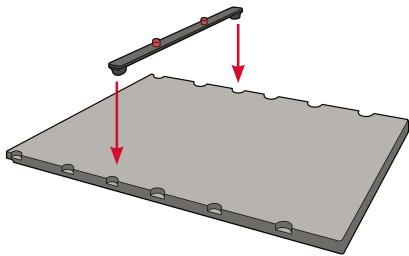

ШЫҒАРЫП АЛУ




ПОЗИЦИЯЛЫҚ ТАҚТАЙШАНЫ ШЫҒАРЫП АЛУ

Позициялық тақтайшаның кез келген ұшынан көтеріңіз.

KVUE ЕНДІРМЕСІН ШЫҒАРЫП АЛУ

! ЕШ УАҚЫТТА KVUE ЕНДІРМЕСІНІҢ ҰШЫНАН ҰСТАП КӨТЕРМЕҢІЗ !
МЕХАНИЗМ ӨТЕ БЕРІК БОЛҒАНЫМЕН, ҰШТАСТЫРҒЫШ ІСТІКТЕР МАЙЫСЫП
НЕМЕСЕ СЫНЫП, KVUE ЕНДІРМЕСІН ЖАРАМСЫЗ ЕТУІ МҮМКІН.

1. Иітіректі сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
2. Бұрылған иітіректі kVue ендіrmесі босағанша kVue ендіrmесін бір жағынан тартыңыз.
3. Ендіrmені kVue құрылғысынан әрі қарай сырғытыңыз.

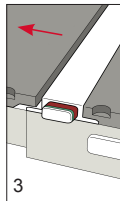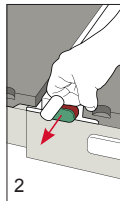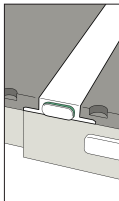

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ НҰСҚАУЛАРЫ

Құрылғыны жұмсақ, сызат түсірмейтін тазалау немесе зарарсыздандыру ерітіндісімен тазалау керек. kVue бетіне сұйықтықтар шашуға немесе құюға болмайды, себебі олар OneTouch ысырмасына немесе үстел табанындағы механизмдерге кіріп кетуі мүмкін. Тазалау үшін ерітіндіні таза шүберекке жағып, бетін сүртіңіз.

Төмендегі тазалау материалдарына сынақ жүргізіліп, kVue құрылғысы мен стандартты ендіrmе беттерін тазалауға жарамды деп танылды. Стандартты ендіrmе бетін зарарсыздандыру үшін тазалағыш ерітінді өндірушісі ұсынған арнайы нұсқауларды қараңыз.

- Су
- 10% Clorox® ағартқыш ерітіндісі
- Изопропил спирті
- Cidex® 2,4% белсендірілген диальдегид ерітіндісі
- Сабын мен су

Тікелей kVue құрылғысына немесе стандартты ендіrmеге сұйықтық шашуға және негізгі жақтауға кіруіне жол беруге БОЛМАЙДЫ.

kVue құрылғысының немесе стандартты ендіrmенің үстіне өткір заттар қоюға БОЛМАЙДЫ.

СИПАТТАМАЛАРЫ

ҰЗЫНДЫҒЫ (RT-4551KV1 ЖӘНЕ RT-4551KV17): 1325 мм

ҰЗЫНДЫҒЫ (RT-4551KV2): 959 мм

АЛЮМИНИЙ БАЛАМАСЫ: 100 кВ шыңы болғанда ~0,5 мм

СУ БАЛАМАСЫ: 6 MB болғанда 6 мм

САЛМАҚ ШЕГІ: 249 кг (550 фунт) біркелкі бөлінген жүктеме

kVue және OneTouch – Qfix компаниясының сауда белгілері.

Exact® – Varian Medical Systems компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Clorox® – The Clorox Company компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Cidex® – Johnson & Johnson компаниясының тіркелген сауда белгісі.