

TOOTE- JA KASUTUSJUHEND

RT-4551KV8

kVue[™] universaalne otsakate





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Valmistatud USAs, tootja: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	---

kVue ja OneTouch on ettevõtte Qfix kaubamärgid.

Exact® on ettevõtte Varian Medical Systems kaubamärk.

Clorox® on ettevõtte The Clorox Company registreeritud kaubamärk.

Cidex® on ettevõtte Johnson & Johnson registreeritud kaubamärk.

SISUKORD

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD	4
HOIATUSLAUSED	4
RASKED JUHTUMID	4
NIMIKOORMUS	4
HOIATUSSILDID JA KIRJELDUSED	5
KASUTUSOTSTARVE	6
KASUTUSJUHISED	7
PAIGALDAMINE	7
SEADISTAMINE	8
EEMALDAMINE	9
HOOLDUS	10
SPETSIFIKATSIOONID	11
SEADISTUSLEHT	12

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUSLAUSED

! HOIATUS ! SELLE SEADME MODIFITSEERIMINE ON KEELATUD. KUI SELLE SEADME MINGILE OSALE ON AVALDATUD KATASTROOFILIST KOORMUST, SEE ON KAHJUSTATUD VÕI EI TÖÖTA ÕIGESTI, LÕPETAGE KOHE SELLE KASUTAMINE JA VÕTKE ÜHENDUST ETTEVÕTTEGA QFIX TELEFONIL +1 484-720-6054 VÕI AADRESSIL TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! HOIATUS ! ONETOUCH ON TÄPPISSEADE JA ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS AINULT KOOS HEAKS KIIDETUD QFIX KVUE SEADMETEGA. QFIXI POOLT VALIDEERIMATA HEAKS KIITMATA MITTE-QFIX SEADMETE KASUTAMINE EI PRUUGI OLLA OHUTU NING MUUDAB KASUTAMISEL GARANTII KEHTETUKS.

RASKED JUHTUMID

Andke teada igasugustest rasketest juhtumitest (nt juhtumitest, mis lõppevad või millel on potentsiaal lõppeda surma või raske vigastusega) nii kaubamärgile Qfix kui ka oma riigi pädevale asutusele.

NIMIKOORMUS

ÄRGE ületage 249 kg (550 naela) koormust, mis on ühtlaselt jaotatud universaalse otsakatte ja tagapaneeli vahel, või lauaaluse maksimaalset töökoormust (sõltuvalt sellest, kumb on väiksem).


ÄRGE ületage 25 cm kaugusel eesservast peale kaalu 38,5 kg (85 naela).

! MÄRKUS ! Kasutamisel koos OEM-i lauaalusega on nimikoormus väikseim kahest ohutust töökoormuse nimiväärtusest. kVue ravilaua koormus EI tohi ületada originaallauaaluse kohta tootja poolt antud spetsifikatsioone. Palun lugege originaaltootja poolt esitatud tooteinfot.



ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD

HOIATUSSILDID JA KIRJELDUSED

Sümbolite nimekirja ja nende tähendusi vaadake veebisaidilt Qfix.com.

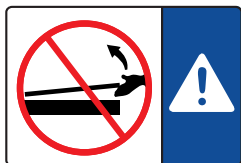

EGA

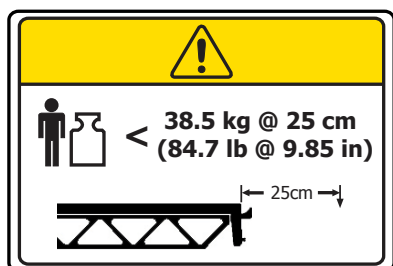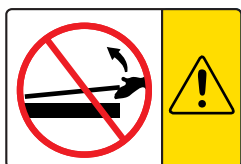

KVUE KATTE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

! ÄRGE MITTE KUNAGI TÕSTKE KVUE KATTE OTSA !

Ühendustihvtid võivad painduda või puruneda, muutes kVue kasutuskõlbmatuks.

kVue paigaldamise ja eemaldamise juhiseid vaadake kVue ravilaua paigaldamise juhendist.

OTSA NIMI KOORMUS

Nimikoormus 38,5 kg 25 cm kaugusel (84,7 naela 9,85 tolli kaugusel)

KASUTUSOTSTARVE

Seade on ette nähtud kiiritusravi saava patsiendi immobiliseerimiseks, paigutamiseks ja ümberpaigutamiseks.

! MÄRKUS ! Ameerika Ühendriikide föderaalseadused lubavad seda seadet müüa ainult arstil või arsti korraldusel.

PATSIENTIDE SIHTGRUPID

Patsiendid, kellele tehakse kiiritusravi või diagnostilisi kuvaprotseduure.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Toodete kasutajaks on ette nähtud vastava piirkonna regulatiivsete nõuete kohaselt kvalifitseeritud isik.

KASUTUSJUHISED

PAIGALDAMINE

KVUE PAIGALDAMINE


kVue on välja töötatud sobituma enamike kiiritusravisüsteemidega. Kiire paigaldamine vähendab paigaldamisaegset lineaarkiirendi ooteaega. Spetsiifilisi paigaldusjuhendeid vaadake kVue ravilaua paigaldamise juhendist.

! MÄRKUS ! Nagu üksikasjalikult kirjeldatud kVue ravilaua paigaldamise juhendis, võib kVue pinna lõplik kõrgus erineda originaalsüsteemi kõrgusest. Süsteemi nulli (algväärtuse) lähtestamist enne esmast kasutamist lugege originaalsüsteemi juhendist.

KVUE KATTE PAIGALDAMINE

1. Pange standardne kate tugivõrede peale ja joondage kaks ühendustihvti OneTouchi riivil olevate aukudega.
2. Libistage standardne kate kVue peapoolsest otsast alates otse riivil olevatesse aukudesse.

Standardse katte oma kohale lukustumisel kostub klõps. Õigel paigaldamisel jääb näha AINULT roheline nupupind.

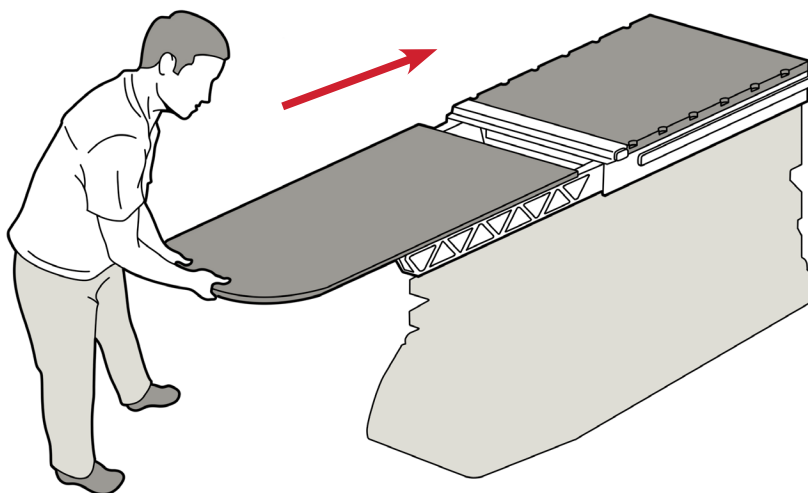


kVue koos standardse kattega

KASUTUSJUHISED

SEADISTAMINE


POSITSIONEERIMISVARDA PAIGALDAMINE

Positsioneerimisvardal on kaks positsioneerimistihvti, mis sobituvad enamike standardsete positsioneerimise lisatarvikutega. Ühendamiseks pange positsioneerimisvarda emb-kumb ots süsteemi Varian Exact® vastavatesse ühilduvatesse indekssäilkudesse ja vajutage klõpsuga oma kohale.

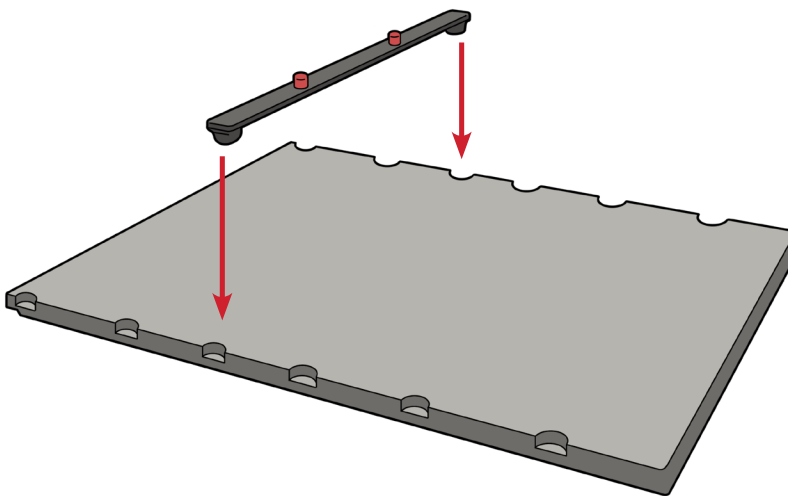

LISATARVIKUTE PAIGALDAMINE

1. Hoidke paigaldatavat lisatarvikut käes ja kallutage see 30-kraadise nurga all tugikonsooli.
2. Fikseerige lisatarvik tugikonsooliga ja laske sellel allapoole vajuda seni, kuni see toetub kindlalt konsoolile ja magnetid kinnituvad.

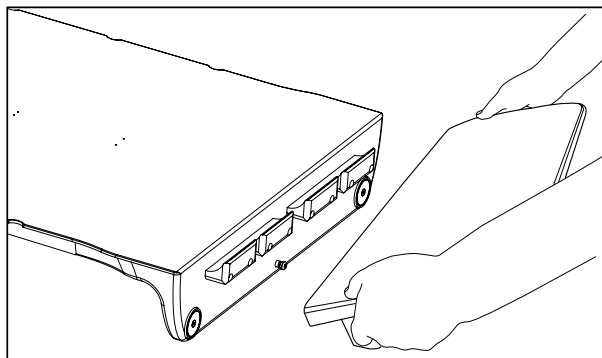

KASUTUSJUHISED

EEMALDAMINE

LISATARVIKUTE EEMALDAMINE

Eemaldage otsapaneel, kallutades seda seni, kuni see on võimalik tugikonsoolide pealt ära tõsta.




POSITSIONEERIMISVARDA EEMALDAMINE

Tõmmake üles positsioneerimisvarda emmast-kummast otsast.

KVUE KATTE EEMALDAMINE

! ÄRGE MITTE KUNAGI TÕSTKE KVUE KATTE OTSA ! KUIGI MEHHAANISM ON VÄGA TUGEV, VÕIVAD ÜHENDUSTIHVTID PAINDUDA VÕI PURUNEDA, MUUTES KVUE EBASTABIILSEKS.

1. Pöörake kangi vastupäeva.
2. Tõmmake pööratud kangi kVue ühelt küljelt, kuni kVue kate vabaneb.
3. Libistage kVue kate kVue'lt eemale.

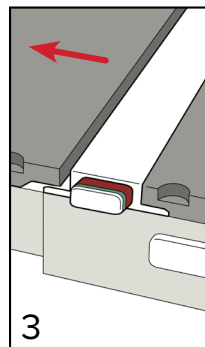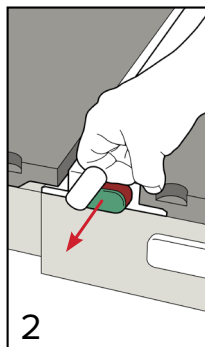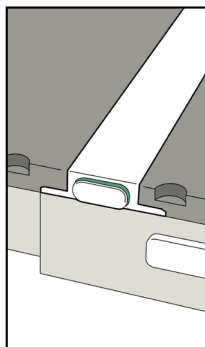

HOOLDUS

Seadmeid võib puhastada nõrgatoimelise mitteabrasiivse puhastusvahendi või desinfitseerimislahusega. Ärge pihustage ega valage vedelikke seadmete pinnale, sest see võib voolata OneTouchi riivisüsteemi või lauaaluse mehhanismidesse. Puhastamiseks kandke lahust puhtale lapile ja pühkige pinnad puhtaks.

Alljärgnevaid puhastusaineid on uuritud ning on leitud, et need sobivad seadmete pindade puhastamiseks. Pinna desinfitseerimiseks vaadake puhastusvahendi tootja vastavaid juhiseid.

- Vesi
- 10% Clorox®-i pleegituslahus
- Isopropüülalkohol
- Cidex®-i 2,4% aktiveeritud dialdehüüdi lahus
- Seep ja vesi

SPETSIFIKATSIOONID

PIKKUS: 950 mm

ALUMIINIUMIEKVIVALENT: ~0,5 mm 100 kVp juures

VEE-EKVIVALENT: 6 mm 6 MV juures

KAALUPIIR: 38,5 kg (85 naela) 25 cm eesmisest servast pikendatuna ja 249 kg (550 naela), kui koormus on ühtlaselt jaotatud kVue katte ja tagapaneeli vahel

SEADISTUSLEHT

RT-4551KV8 – KVUE™ UNIVERSAALNE OTSAKATE

Patsiendi nimi:


Patsiendi tunnusnumber:

Häälestaja:

Arst:

Kuupäev:

Kommentaariid:

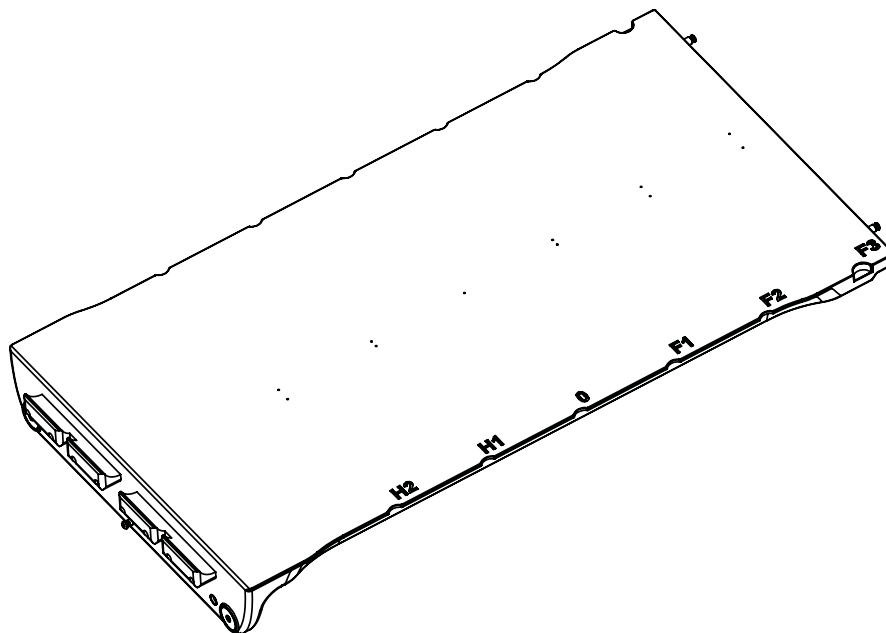

Liikuva raami asukoht:

Märkused:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com