

## Aquaplast PS™熱可塑性鼻用スプリントの装着方法

1. 水を入れる容器 (mini Aquapanなど) に水を入れて70°C (160°F) に予熱しておきます。
2. ガーゼまたはペーパータオルを使用して、目的とするパターンを設計します。患者の装着感を確認します。
3. スプリントブランクにパターンを配置します。
4. パターンに沿ってはさみで切り取ります。
5. Mastisol®液またはベンゾインを鼻に塗布します (密着性を高めたい場合の任意の処置です)。
6. 医療用粘着テープまたは紙テープを鼻に貼り付けます (スプリントを密着させるために必要です)。
7. パターンにしたスプリントをメッシュパンライナーに載せてお湯に入れ、柔らかくします。スプリントが完全に透明 (アイボリー)、または半透明 (カラー) になったら、取り付けることができます。
8. 柔らかくなったスプリントを、メッシュパンライナーに載せたままmini Aquapanから取り出します。指を火傷しないよう、鉗子や舌圧子を使用してください。
9. スプリントをタオルまたはガーゼスポンジの上に置き、両面を乾かします。スプリントは数秒で快適な体温まで冷却されますが、約15~20秒間は成形作業が可能です。
10. 柔らかくなったスプリントを、患者の鼻の紙テープの上に置きます。
11. 指先を湿らせて鼻の輪郭をなぞり、浮腫を取り除きます。スプリントは、硬化するにつれて徐々に元の色に戻ります (室温で約2分、アイスパックや冷却スプレーを使用するとさらに速くなります)。
12. さらに成形が必要な場合は、スプリントを取り外し、お湯を使用してもう一度柔らかくしてから再度取り付けます。

**！注記！** 本デバイスは、敏感な一部の人の皮膚に接触すると、軽度の感作を起こす場合があります。本製品の使用または使用不能から生じる傷害、損失または損害については、それが直接的か間接的にかかわらず、製造者も販売者も責任を負いません。本製品を使用する前に、本製品が用途に適合するかどうかを判断する必要があります。使用者は、これに関連するすべてのリスクと責任を負うものとします。

記号およびその定義のリストについては、[Qfix.com](http://Qfix.com)を参照してください。


Aquaplast PSはQfixの商標です。  
Mastisol®はFerndale Laboratories, Inc.の登録商標です。



## Aquaplast PS™熱可塑性鼻用スプリント

非滅菌の状態を提供されます。各スプリントは、患者1人用です。

- すばやく簡単に、迷わず装着可能
- 卓越した成形性で正確なフィット感を実現
- 穴あけ加工により通気性が改善
- 装着時に目立ちにくいカラー

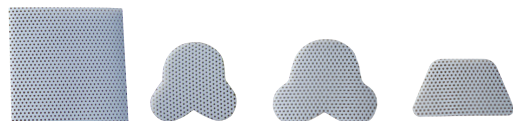

	3 x 3インチ、スプリントブランク	「シルバー」スプリント (小)	「シルバー」スプリント (大)	台形スプリント
色/厚さの種類	10パック	10パック	10パック	10パック
アイボリー - 厚さ1.6 mm	PS-1688	PS-1690	PS-1693	PS-1675
ブラッシュ - 厚さ1.6 mm	PS-1300	PS-1302	PS-1304	PS-1309
アイボリー - 厚さ2.4 mm	PS-1728	PS-1790	PS-1793	PS-1775



米国での製造者名

**Qfix**

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA  
+1 610.268.0585 | Fax: 800.831.8174  
[www.NasalSplint.com](http://www.NasalSplint.com) | [Sales@Qfix.com](mailto:Sales@Qfix.com)

EC REP

**Advena Ltd.**  
Tower Business Centre, 2nd Flr  
Tower Street, Swatar,  
BKR 4013 Malta



2001988\_JA\_A  
2023-04

### 用途

手術後に鼻を固定して保護するための、鼻用固定具として使用します。

**！注記！** 米国連邦法により、本デバイスの販売は、医師によるもの、または医師の指示によるものに制限されています。

### 対象患者

固定具を必要とする整形手術またはその他の処置を受けている患者。

### 意図する使用者

製品の意図する使用者は、規制地域の要件に従って認定を受けた資格者です。

### 重大な有害事象

重大な有害事象 (例えば、死亡または重傷をもたらす、またはその可能性がある事象) があれば必ず、Qfixと、設置した国の所管官庁の両方に報告してください。

この取扱説明書は、次の部品番号に適用されます。

製品コード	概要	包装数量
PS-1300	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、 3 x 3インチ鼻用スプリントブランク	10
PS-1302	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、シルバースプリント(小)	10
PS-1304	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、シルバースプリント(大)	10
PS-1309	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、台形鼻用スプリント	10
PS-145BL	ブラッシュ、 $\frac{3}{32}$ インチ、18 x 24インチシート	1
PS-146BL	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、18 x 24インチシート	1
PS-148BL	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、9 x 12インチシート	1
PS-149BL	ブラッシュ、 $\frac{1}{16}$ インチ、12 x 18インチシート	1
PS-1671	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、6 x 9インチシート	8
PS-1675	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、台形鼻用スプリント	10
PS-1678	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、Martin下顎ステント	3
PS-1682	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、18 x 24インチシート	1
PS-1683	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、12 x 18インチシート	1
PS-1684	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、9 x 12インチシート	1
PS-1685	鼻用スプリントキット、 $\frac{1}{16}$ インチ、 アイボリー3 x 3インチブランク付き	1
PS-1686	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、6 x 18インチシート	1
PS-1688	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、 3 x 3インチ鼻用スプリントブランク	10
PS-1689	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、 3 x 3インチ鼻用スプリントブランク	100
PS-1690	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、シルバースプリント(小)	10
PS-1692	鼻用キット、アイボリー $\frac{1}{16}$ インチ、 シルバースプリント(小)付き	1
PS-1693	アイボリー、 $\frac{1}{16}$ インチ、シルバースプリント(大)	10
PS-1695	鼻用キット、アイボリー $\frac{1}{16}$ インチ、 シルバースプリント(大)付き	1
PS-1728	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、 3 x 3インチ鼻用スプリントブランク	10
PS-1736	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、 Dr. Silver's Stents(小)拡張長、 シルバースタイルステント	1
PS-1737	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、Dr. Silver's Stents(大)	1
PS-1771	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、6 x 9インチシート	8
PS-1772	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、9 x 12インチシート	1
PS-1775	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、台形鼻用スプリント	10
PS-1782	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、18 x 24インチシート	1
PS-1783	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、12 x 18インチシート	1
PS-1790	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、 シルバースプリント(小)	10
PS-1792	鼻用キット、 $\frac{3}{32}$ インチ、 アイボリーシルバースプリント(小)付き	1
PS-1793	アイボリー、 $\frac{3}{32}$ インチ、 シルバースプリント(大)	10
PS-1795	鼻用スプリントキット、 $\frac{3}{32}$ インチ、 シルバースプリント(大)付き	1