

Hur man applicerar Aquaplast PS™ Thermoplastic Nasal Splints

1. Förvärm en mini Aquapan eller annan behållare med vatten till 70 °C (160 °F).
2. Designa ett önskat mönster med gasväv eller pappershanddukar. Kontrollera patientpassningen.
3. Placera ett mönster över en skena.
4. Klipp ut mönstret med en sax.
5. Applicera Mastisol®-vätska eller benzoin på näsan (tillval för extra vidhäftning).
6. Applicera medicinska självhäftande remsor eller papperstejp på näsan (krävs för att skenan ska fästa).
7. Mjuka upp mönstret för skenan i varmt vatten på nätskyddet. Skenan är redo att användas när den blir helt genomskinlig (elfenbensvit) eller halvgenomskinlig (med färg).
8. Ta bort den uppmjukade skenan från mini Aquapan med en pincett eller en tungspatel för att undvika att bränna fingrarna.
9. Placera på en handduk eller en gaskompress och låt torka båda på sidorna. Skenan kyls ned på några sekunder till en behaglig kroppstemperatur, men kan fortfarande formas under omkring 15–20 sekunder.
10. Placera den uppmjukade skenan över papperstejpen på patientens näsa.
11. Forma försiktigt med fuktade fingertoppar, som att mjölka ett ödem från näsan. Skenan återgår gradvis till dess ursprungliga färg när den hårdnar (omkring 2 minuter vid rumstemperatur, mycket snabbare om en isförpackning eller kylspray används).
12. Om ytterligare formning krävs tar du bort skenan, mjukar upp den på nytt i varmt vatten och sätter sedan tillbaka den.

! OBS ! Användning av denna enhet kan orsaka lätt överkänslighet vid hudkontakt för vissa känsliga personer. Tillverkare eller säljare ska inte hållas ansvariga för personskada, förlust eller skada, direkt skada eller följdskada, till följd av användning av eller oförmåga att använda produkten. Före användning ska användaren avgöra om produkten är lämplig för dess avsedda användning. Användaren tar på sig alla risker och allt ansvar i samband därmed.

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.


Aquaplast PS är ett varumärke som tillhör Qfix.
Mastisol® är ett registrerat varumärke som tillhör
Ferndale Laboratories, Inc.



Aquaplast PS™ Thermoplastic Nasal Splints

Levereras ej steril. Varje skena är avsedd för användning på en enda patient.

- Snabb och enkel kladdfri applicering
- Exceptionell formbarhet för exakt passform
- Perforerad för bättre ventilation
- Kosmetiskt anpassade färger

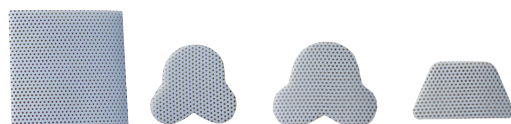

Val av färg/tjocklek	3 x 3-tums ämne för skenor	Små silverskenor	Stora silverskenor	Trapetsoida skenor
Elfenben – 1,6 mm tjock	PS-1688	PS-1690	PS-1693	PS-1675
Rosa – 1,6 mm tjock	PS-1300	PS-1302	PS-1304	PS-1309
Elfenben – 2,4 mm tjock	PS-1728	PS-1790	PS-1793	PS-1775



Tillverkad i USA av

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA
+1 610.268.0585 | Fax: 800.831.8174
www.NasalSplint.com | Sales@Qfix.com

EC REP

Advena Ltd.
Tower Business
Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar,
BKR 4013 Malta



2001988_SV_A
2023-04

Avsedd användning

Används som extern nasal stödskena för immobilisering och skydd av näsan efter operation.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

Patientmålgrupper

Patienter som genomgår plastikkirurgi eller andra procedurer som kräver en extern stödskena.

Avsedda användare

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.

Allvarliga incidenter

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

Denna bruksanvisning gäller följande artikelnummer:

Produkt-kod	Beskrivning	Antal per förpackning
PS-1300	Rosa, 1/16 tum, 3 x 3 tum nässkena, ämne	10
PS-1302	Rosa, 1/16 tum liten silverskena	10
PS-1304	Rosa, 1/16 tum stor silverskena	10
PS-1309	Rosa, 1/16 tum trapetsoid nässkena	10
PS-145BL	Rosa, 3/32 tum, 18 x 24 tum blad	1
PS-146BL	Rosa, 1/16 tum, 18 x 24 tum blad	1
PS-148BL	Rosa, 1/16 tum, 9 x 12 tum blad	1
PS-149BL	Rosa, 1/16 tum, 12 x 18 tum blad	1
PS-1671	Elfenben, 1/16 tum, 6 x 9 tum blad	8
PS-1675	Elfenben, 1/16 tum trapetsoid nässkena	10
PS-1678	Elfenbensvit, 1/16 tum Martin mandibulär stent	3
PS-1682	Elfenben, 1/16 tum, 18 x 24 tum blad	1
PS-1683	Elfenben, 1/16 tum, 12 x 18 tum blad	1
PS-1684	Elfenben, 1/16 tum, 9 x 12 tum blad	1
PS-1685	Nässplint med 1/16 tum elfenben 3 x 3 tum ämne	1
PS-1686	Elfenben, 1/16 tum, 6 x 18 tum blad	1
PS-1688	Elfenben, 1/16 tum, 3 x 3 tum nässkena, ämne	10
PS-1689	Elfenben, 1/16 tum, 3 x 3 tum nässkena, ämne	100
PS-1690	Elfenben, 1/16 tum liten silverskena	10
PS-1692	Sats för näsa med elfenbensvit 1/16 tum liten silverskena	1
PS-1693	Elfenben, 1/16 tum stor silverskena	10
PS-1695	Sats för näsa med elfenbensvit 1/16 tum stor silverskena	1
PS-1728	Elfenben, 3/32 tum, 3 x 3 tum nässkena, ämne	10
PS-1736	Elfenben, 3/32 tum liten, Dr. Silver's stentar med extra längd, silverstent	1
PS-1737	Elfenben, 3/32 tum, Dr. Silver's stora silverstentar	1
PS-1771	Elfenben, 3/32 tum, 6 x 9 tum blad	8
PS-1772	Elfenben, 3/32 tum, 9 x 12 tum blad	1
PS-1775	Elfenben, 3/32 tum trapetsoid nässkena	10
PS-1782	Elfenben, 3/32 tum, 18 x 24 tum blad	1
PS-1783	Elfenben, 3/32 tum, 12 x 18 tum blad	1
PS-1790	Elfenben, 3/32 tum liten silverskena	10
PS-1792	Sats för näsa med 3/32 tum elfenbensvit liten silverskena	1
PS-1793	Elfenben, 3/32 tum stor silverskena	10
PS-1795	Sats för nässkena med 3/32 tum elfenbensvit stor silverskena	1