

安装手册

更换 DoseMax™ 薄膜表层

所需工具/设备: 遮罩带和除胶剂

1. 从一边撕开当前薄膜。
2. 使用除胶剂清除所有残余的粘合剂, 准备好表面。
3. 将新薄膜对齐, 确保盖住上方的徽标 (图 1)。各边与装置外边沿的距离应约为 7.24 mm (0.285 英寸)。
4. 沿薄膜边沿贴上几段胶带, 将其固定在 DoseMax 的表面 (图 2)。

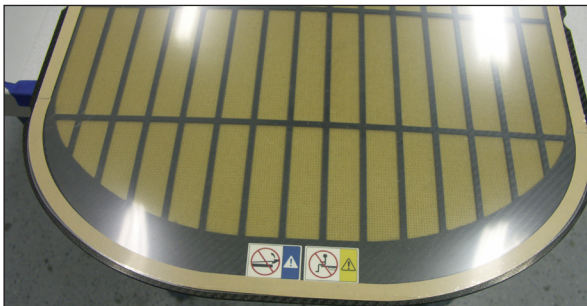


图 1

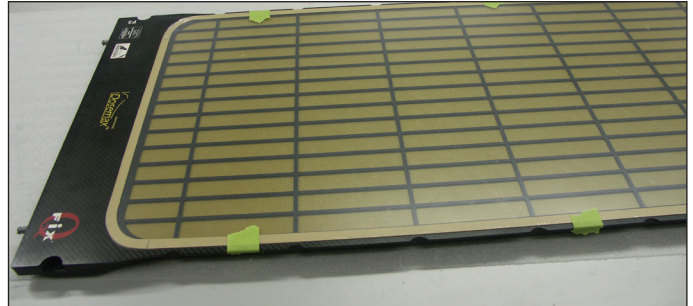


图 2

5. 从薄膜的上半部分去除遮罩带。从薄膜上拉起并撕去粘合底布。牢固地压在装置的表面上。
6. 从薄膜的前半部分去除胶带和剩余粘合底布。牢固地压在装置的表面上。
7. 从薄膜撕去保护性覆盖。

DoseMax 是 Qfix 的商标。

产品名称: 人体定位袋

医疗器械备案号: 20150038