

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4544KV ve RT-4544KV-10

kVue Access 360[™] ve

kVue Access 360[™] G2

Prone Breast Couch Top Insert'ler

Supraklaviküler Erişimli





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Access 360, kVue, ve OneTouch, Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Exact®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
EK UYARILAR	4
TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI.....	4
YÜK ANMA DEĞERİ.....	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	5
KULLANIM AMACI.....	7
ÖZELLİKLER.....	8
TANIM.....	8
GEREKLİ AKSESUARLAR	8
KVUE™ ACCESS 360™ BİLEŞENLER	9
KVUE™ ACCESS 360™ G2 BİLEŞENLER.....	10
BİLEŞENLER	11
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	13
KURULUM	13
BT PLATFORMLARININ VE BT ŞİMLERİNİN KAPLAMAYA MONTAJI	14
MONTAJ	16
HASTANIN KONUMLANDIRILMASI	20
BAKIM.....	22
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	22
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	22
SPEŞİFİKASYONLAR	23
ACCESS 360™	23
ACCESS 360™ G2.....	24
HASTA HAZIRLIĞI	25
KVUE™ ACCESS 360™ COUCH TOP İNSERT'LER.....	25
KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCH TOP İNSERT'LER	27
PARÇA LİSTESİ.....	29
KVUE™ ACCESS 360™ COUCH TOP İNSERT'LER.....	29
KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCH TOP İNSERT'LER.....	30

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKIPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! ONETOUCH HASSAS BİR MEKANİZMA OLUP, SADECE ONAYLANMIŞ QFIX KVUE CİHAZLARIYLA BERABER KULLANILMAK İÇİNDİR. QFIX TARAFINDAN DOĞRULANMAMIŞ OLAN QFIX DIŞI ONAYLANMAMIŞ CİHAZLARIN KULLANIMI GÜVENLİ OLMAYABİLİR VE KULLANILDIKLARI TAKDİRDE GARANTİYİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

! UYARI ! KVUE ACCESS 360™ VE KVUE ACCESS 360™ G2 ÖLÇEKLERİ YALNIZCA REFERANS AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

EK UYARILAR

- Çift El Kavramaları ve El Kavraması Kulpu hastanın ağırlığını desteklemek için tasarlanmamıştır: Hastayı konumlandırmak için kulpları KULLANMAYIN. Cihaza yatmak veya cihazdan kalkmak için kulpları KULLANMAYIN.
- Hastaların cihaza yatmak veya cihazdan kalkmak için yardıma ihtiyacı olabilir.
- Cihazın uzunluğu nedeniyle, montaj veya sökme işlemlerinin iki kişi tarafından yapılması önerilir.
- Bir seferinde 3'ten fazla istiflenmiş BT Şimi KULLANMAYIN. Aksi takdirde cihaz dengesini kaybedebilir.

TEDAVİ İŞİNİN ZAYIFLAMASI

kVue Access 360™ ve kVue Access 360™ G2 Couch Top Insert'in yapısal bölgeleri bir foton ışınını zayıflatacaktır. Kurulumu göre fiili zayıflama, kullandığınız ekipmanlara göre teyit edilmelidir. Herhangi bir cihaz içinden yapılacak tedavi, cihaz kompozit malzemelerden yapılmış olsa dahi, cildin maruz kaldığı dozda bir artışa yol açacaktır.

YÜK ANMA DEĞERİ


200 kg'lık eşit dağılımlı yükü veya yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

! NOT ! Orijinal donanım üreticisinin yatak tabanı ile birleştirildiğinde yük anma değeri, iki güvenli çalışma yükü arasında daha düşük olanıdır. kVue Couch Top üzerindeki yük, orijinal yatak tabanı üreticisinin spesifikasyonlarını AŞMAMALIDIR. Lütfen orijinal üretici tarafından temin edilen ürün bilgilerine başvurun.



GENEL ÖNLEMLER

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

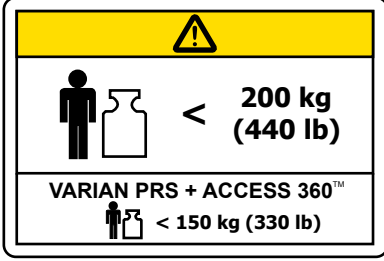

VEYA

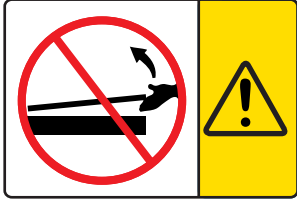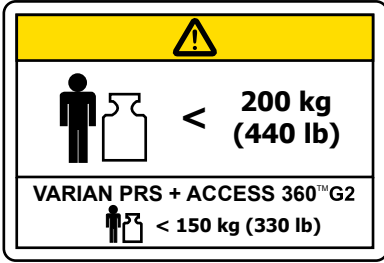

YÜK ANMA DEĞERİ

200 kg'lık eşit dağılımlı yükü veya kVue Insert cihazının ya da yatak tabanının azami çalışma yükünü (hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

Varian PRS ile birlikte kullanıldığında 150 kg eşit dağılımlı yükü AŞMAYIN.

KALDIRMAYIN

! UYARI ! ASLA COUCH TOP INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN.

Birleştirme pimleri eğilerek veya kırılarak Couch Top'u kullanılmaz hale getirebilir.


“NO STEP (SINIR)” ÇİZGİSİ

Göğüs oyuğunun ilerisindeki alan hasta gövdesinin üst kısmını desteklemek üzere tasarlanmış ve test edilmiş olup tüm hasta yükünü desteklemek için TASARLANMAMIŞTIR.

Couch Top Insert üzerinde göğüs oyuğundan daha ileride ayakta durmak veya oturmak Couch Top Insert'e hasar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir.


GENEL ÖNLEMLER

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

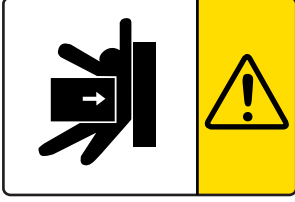

OLASI YARALANMA

Tedavi odasında Couch Top Insert ve diğer ekipmanlar arasında yaralanma olasılığı mevcuttur. Couch Top'u hareket ettirirken hastanın zarar görmesini önlemek için dikkatli olun.

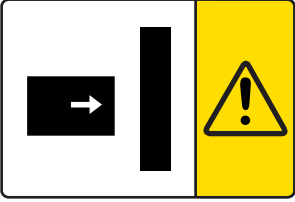

SEHPA İLE ÇARPIŞMA

Yatak tabanlarıyla birlikte temin edilebilecek çeşitli hareket kapasitelerinin mevcut olması, Couch Top Insert'in sehpa dahil diğer nesnelerle çarpışması için olasılıklar sunabilir. Yatağı veya sehpayı hareket ettirirken hastanın zarar görmesini veya ekipmanın hasara uğramasını önlemek için dikkatli olun.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsizleştirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

TANIM

kVue™ Access 360™ ve kVue Access 360™ G2 aralarında tam meme, kısmi meme ve hızlandırılmış meme tedavilerinin de bulunduğu sol ve sağ meme kanseri tedavisine olanak tanımak için tasarlanmıştır. Hastanın yüz üstü konuma yerleştirilmesi, göğüs ile risk altındaki kritik organlar arasındaki mesafenin artırılmasına yardım eder. Bu da kalp, akciğer ve çevredeki sağlıklı dokuların maruziyetinin en aza indirilebileceği ve aynı zamanda aşağıdakilere olasılık sağlanabileceği anlamına gelir:

- Daha eşit dağılımlı doz uygulaması
- Daha az cilt toksisitesi
- Daha düşük solunum hareketi

Cihazın düzgün ve sundurmalı tasarımı hem eşdüzlemli olmayan hem de oblik erişim temin ederek fraksiyon başına daha yüksek doz olasılığı sağlar. Işın yolunun öncelikle göğüs içinden geçip asgari düzeyde yatak üstü engeliyle karşılaşması nedeniyle, yapay görüntü ve saçılım en aza indirilebilir.

Access Prone G2 (RT-4544-01), Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) için BT/MR simülasyon cihazı olarak kullanılabilir.


! UYARI ! ACCESS 360 (RT-4544KV), KENDISI VEYA DİĞER ACCESS 360 (RT-4544KV) CİHAZLARI DIŞINDA HERHANGİ BİR ÜRÜN İÇİN SİMÜLASYON CİHAZI OLARAK KULLANILAMAZ.

GEREKLİ AKSESUARLAR

BT Platformları (Simülasyon için)


ÖZELLİKLER

KVUE™ ACCESS 360™ BİLEŞENLER

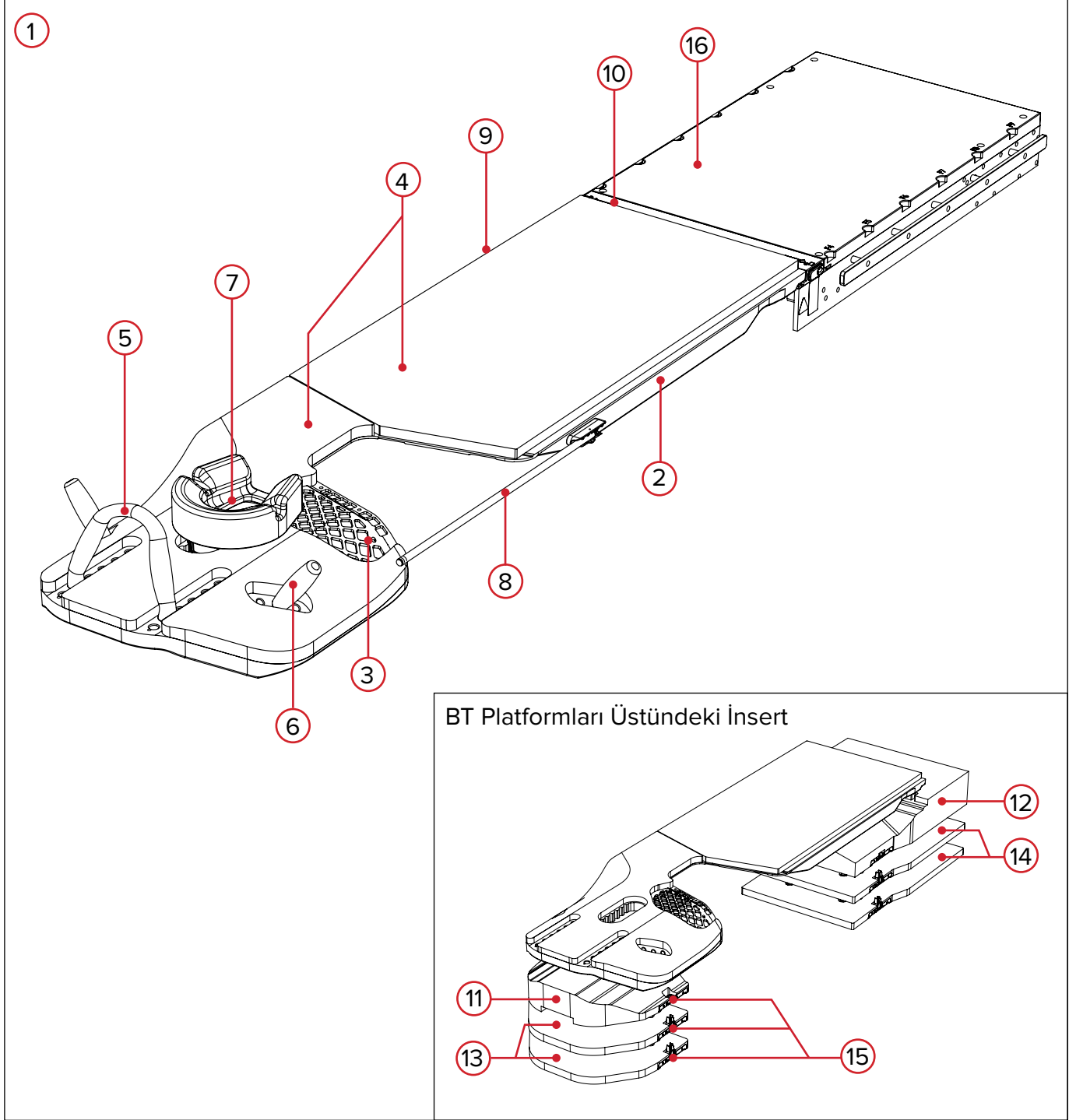

ÖZELLİKLER

KVUE™ ACCESS 360™ G2 BİLEŞENLER

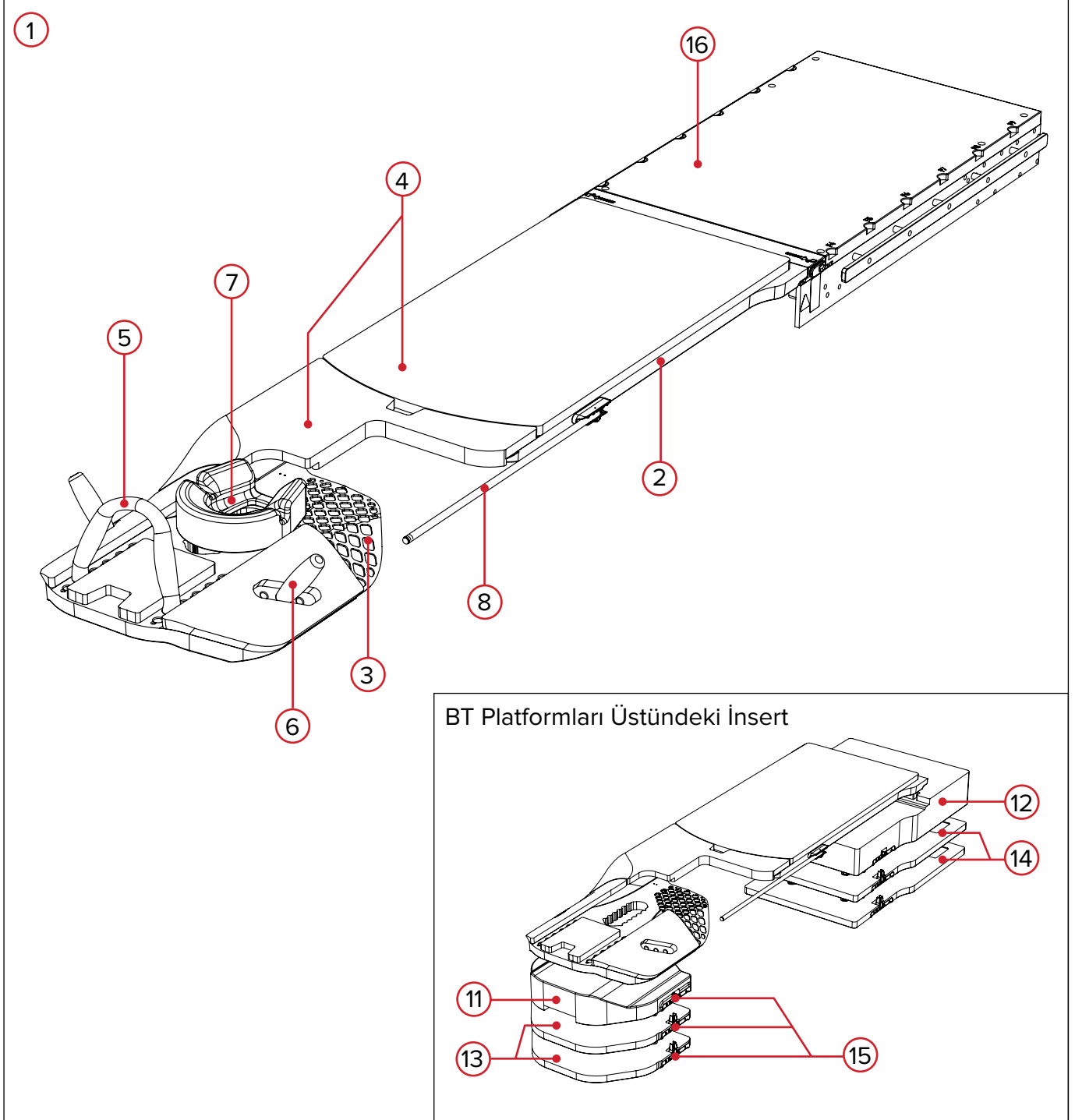

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

1. KVUE™ ACCESS 360™ VE KVUE™ ACCESS 360™ G2 GÖĞÜS İÇİN YÜZ ÜSTÜ COUCH TOP INSERT SİSTEMİ

Access 360™, ve Access 360™ G2 göğüs ve klaviküla bölgesinin yüz üstü konumda radyoterapisi için hastaların konumlandırma ve düzenleme işlemlerinde yardımcı olarak kullanılır.

2. KVUE™ ACCESS 360™ VE KVUE™ ACCESS 360™ G2 PRON MEME YATAK ÜSTÜ INSERT

kVue sistemi sağ ve sol Access 360™, Access 360 G2 ve diğer kVue Yatak Üstü Insertler arasında hızlı ve kolay geçişe olanak tanır. Insert, klaviküla bölgesinin tedavisi için bir kafes içerir.

3. SUPRAKLAVİKÜLER KAFES

Klaviküla kafesi, klaviküla bölgesinin düşük düzeyde zayıflama ile tedavisine olanak sağlar.

4. MİNDERLER

Hastanın konforu için sağlanan minderler istenirse çıkartılabilir ve vakumlu minderler kullanılabilir. Minderler ayrıca, hasta konumlandırma amacıyla ek grafik içerir.

5. Ç İFT EL KAVRAMASI

Çift El Kavraması, diğer cihazlarda kullanılan standart kulptan farklı olarak hastanın bileğindeki gerilmeyi azaltmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır.

6. EL KAVRAMASI KULPU

El Kavraması Kulpu, hareket kapasitesi sınırlı olan hastaların tutunacağı bir yer temin eder.

7. BAŞ DAYANAKLARI

Sistem, Yüz Üstü ve Konturlu Baş Dayanağı ile beraber gelir. Kurulum tercihinə göre bunlardan biri kullanılabilir. Baş dayanakları, hastanın boyuna bağlı olarak birden fazla noktada Inserte indekslenebilir.

8. İPSİLATERAL ÖLÇEK

İpsilateral Ölçek, kurulum için superior olarak döndürölüp takılabilir, tedavi ve depolama için ise inferior olarak geri döndürölülebilir. Ölçek, bir hizalama yardımcısı olarak kullanılabilir. Hassasiyeti ± 1 mm'dir.

9. KONTRALATERAL ÖLÇEK

Access 360: Insertin kontralateral tarafında bulunan Kontralateral Ölçek bir hizalama yardımcısı olarak kullanılabilir. Ölçeğin hassasiyeti ± 1 mm'dir. (Yalnızca Access 360 için)

Access 360 G2: Kontralateral tarafta kullanım için ek İpsilateral kefeler bulunmaktadır. (Yalnızca Access 360 G2)

10. İNFERİOR ÖLÇEK

Insert üstündeki Diz İşaretlerinin altında bulunan Inferior Ölçek bir hizalama yardımcısı olarak kullanılabilir. Ölçeğin hassasiyeti ± 1 mm'dir. (Yalnızca Access 360 için)

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

11. SUPERİOR BT PLATFORMU

Superior BT Platformu bir Yerleştirme Çubuğu kanalıyla BT Kaplamasına indekslenir. Bu platform, İnsertin superior tarafını 13 cm yükseltir ve simülasyon sırasında İnferior BT Platformu ile beraber kullanılır.

12. İNFERİOR BT PLATFORMU

İnferior BT Platformu bir Yerleştirme Çubuğu kanalıyla BT Kaplamasına indekslenir. Bu platform, İnsertin inferior tarafını 13 cm yükseltir ve simülasyon sırasında Superior BT Platformu ile beraber kullanılır.

13. SUPERİOR BT PLATFORM ŞİMİ

BT Platform Şimi bir Yerleştirme Çubuğuna indekslenir ve Superior BT Platformunu 2.5 cm'lik adımlarla yükseltir. Bu şim, Superior BT Platformuna veya başka bir Superior BT Platform Şimine takılabilir.

14. İNFERİOR BT PLATFORM ŞİMİ

BT Platform Şimi bir Yerleştirme Çubuğuna indekslenir ve İnferior BT Platformunu 2.5 cm'lik adımlarla yükseltir. Bu şim, başka bir İnferior BT Platform Şimine takılabildiği gibi, İnferior BT Platformuna da vidalanabilir.

15. İNDEKSLEME PLAKASI

BT Platformlarının içerdiği İndeksleme Plakaları, BT Platformlarını bir Yerleştirme Çubuğu kanalıyla Couch Top'a konumlandırır. BT Platformlarının üstündeki İndeksleme Plakaları, yükseklik ayarı için BT Şimlerinin üstündeki İndeksleme Plakalarına takılır.

16. KVUE™ COUCH TOP


kVue Couch Top, yatak tabanını oluşturan orijinal ekipman dışında komple bir hasta destek sistemidir. Bu sistem, Taban Çerçevesinden (destek kirişleri dahil), Arayüz Plakasından (gerekirse) ve uygun kVue Couch Top Insert'ten oluşur. (Daha fazla bilgi için kVue Montaj ve Kullanıcı El Kitabına başvurun).

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

YERLEŞTİRME ÇUBUĞU

Yerleştirme Çubuğu, çoğu standart konumlandırma aksesuarlarına uyan iki yerleştirme pimi içerir. Takmak için, Yerleştirme Çubuğunun uçlarından birini Varian Exact® ile uyumlu uygun indeks dişlerine yerleştirip yerine oturtun. Sökmek veya yeniden konumlandırmak için çubuğun herhangi bir ucundan yukarı kaldırın.

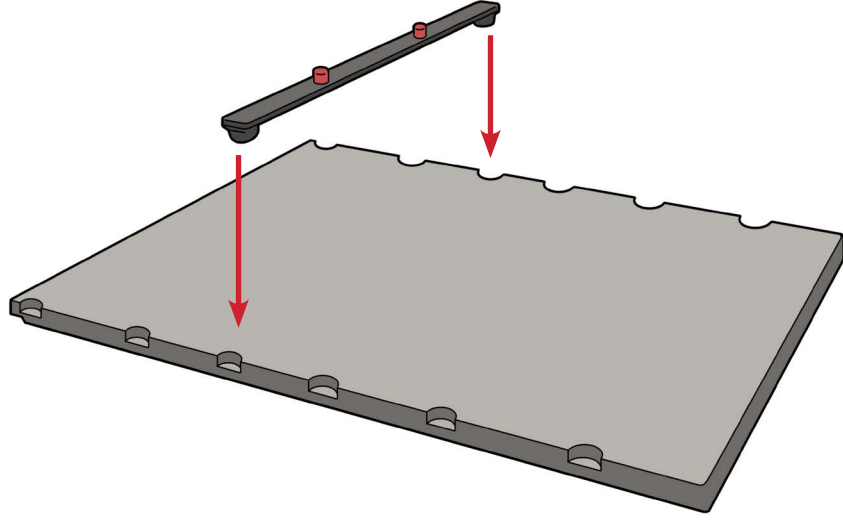


ÇALIŞTIRMA TALİMATI


! NOT ! Cihazın uzunluğu nedeniyle, montaj veya sökme işlemlerinin iki kişi tarafından yapılması önerilir.

BT PLATFORMLARININ VE BT ŞİMLERİNİN KAPLAMAYA MONTAJI

- 2 Konumlandırma Çubuğunu aralarında 1260 mm (tipik olarak 9 gösterge çentiği) olacak şekilde monte edin ve yerine oturtun (Şekil 1 ve 2).

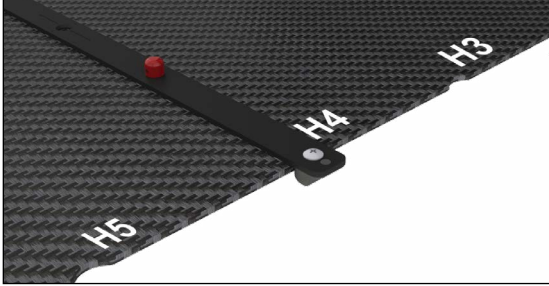


Şekil 1

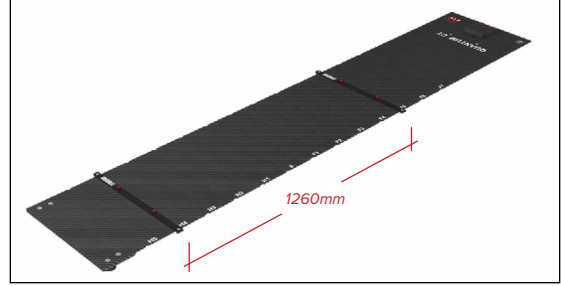


Şekil 2

- BT Platformlarını ve BT şimlerini arzu ettiğiniz kurulumu uygun olarak Konumlandırma Çubuklarının üzerine yerleştirin (Şekil 3 ve 4). BT Platformlarını ve BT Şimlerini hem Alt hem de Üst BT Platformu A, B, C veya D üzerindeki aynı konumları kullanarak indekslediğinizden emin olun (Şekil 5, 6 ve 7). Şimler her biri yüksekliği 2,5 cm artıracak şekilde birbirinin üzerine istiflenebilir.

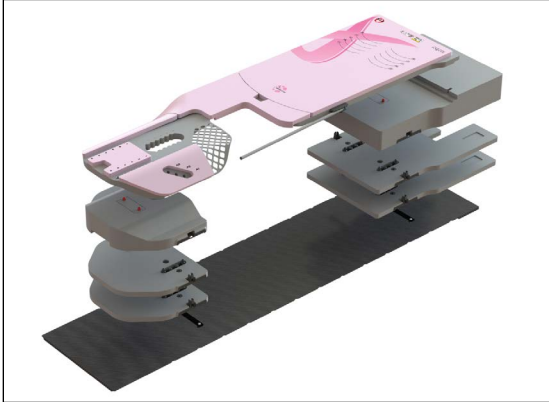


Şekil 3


VEYA

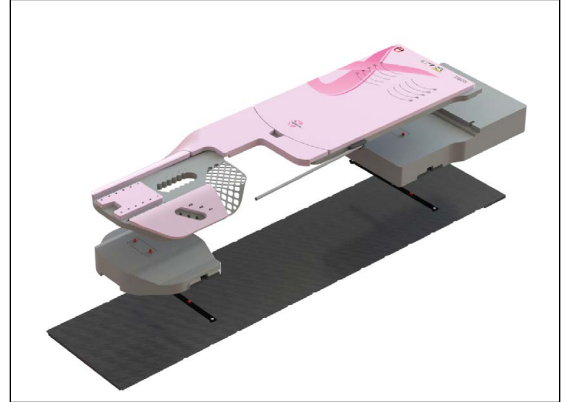


Şekil 4

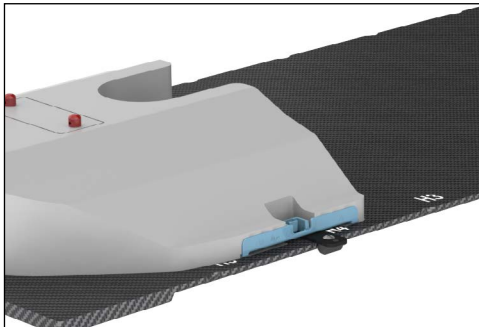

Şekil 5

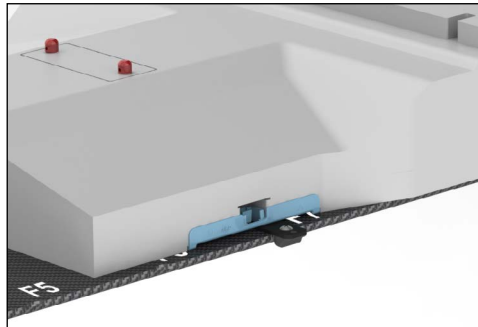


Şekil 6

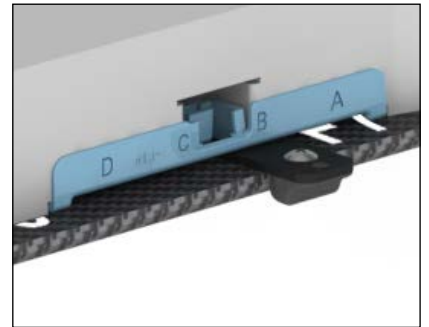

Şekil 7

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

3. Cihazın yüksekliğini azaltmak veya BT Platformlarını ve Şimleri çıkarmak için Access 360 veya Access 360 G2 cihazını çıkarın. İndeksleme plakasının her iki tarafındaki düğmeleri basılı tutarak BT Platformunu veya BT Şimini alttaki BT Şiminin üzerinden kaldırın ve çıkarın (Şekil 8).

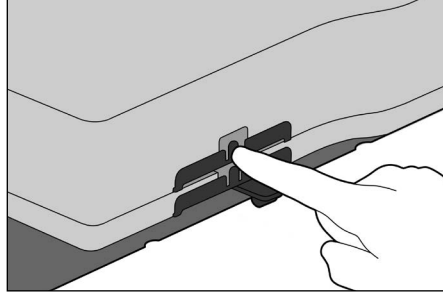

Şekil 8


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

MONTAJ

! NOT ! Cihazın uzunluğu nedeniyle, montaj veya sökme işlemlerinin iki kişi tarafından yapılması önerilir.

COUCH TOP INSERT'İN MONTAJI





1. Couch Top Insert'i destek kirişlerinin üstüne yerleştirin ve iki birleştirme pimini OneTouch Latch içinde bunlara karşılık gelen deliklerle hizalayın.
2. kVue Couch Top'un baş tarafından, Couch Top Insert'i karşılık gelen delikler içine doğrudan kaydırın. Couch Top Insert yerine kilitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız. Doğru montaj yapıldığında SADECE yeşil düğme yüzeyi görünür olacaktır.

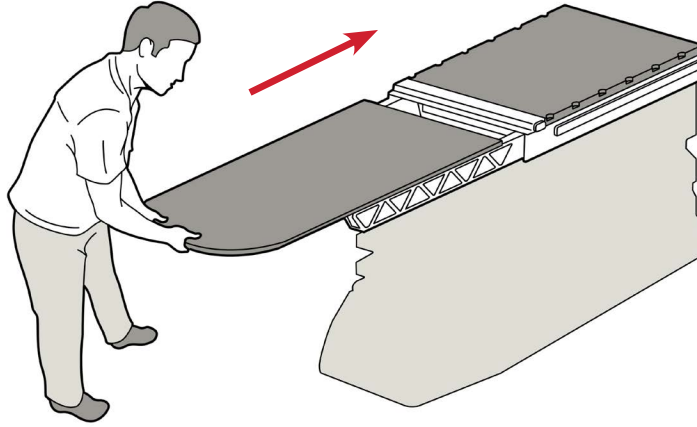

COUCH TOP INSERT'İN ÇIKARILMASI

! ASLA COUCH TOP INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN ! MEKANİZMA SAĞLAM OLMASINA RAĞMEN BİRLEŞTİRME PİMLERİ EĞİLEREK VEYA KIRILARAK COUCH TOP'U KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR.

1. Kolu saatin ters yönünde döndürün.
2. Couch Top Insert serbest kalana kadar, döndürülmüş Kolu Couch Top'un bir tarafından çekin. Bu işlem tek elle yapılabilir.
3. Couch Top Insert'i Couch Top'tan uzağa doğru kaydırın.

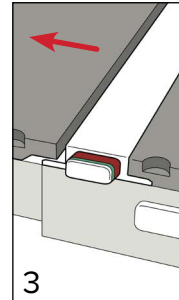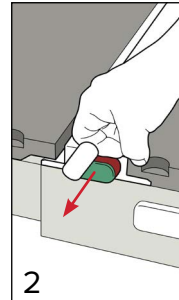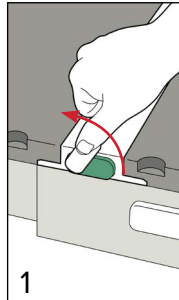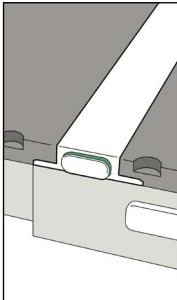


ÇALIŞTIRMA TALİMATI


KURULUM

BAŞ DAYANAĞI

1. Hasta için kullanmak üzere Yüz Üstü Baş Dayanağını veya Konturlu Baş Dayanağını seçin. (Pron Başlık aşağıda gösterilmiştir)
2. Plastik hizalama parçasını cihazın superior tarafındaki uygun yuvaya yerleştirin (A, B, C, D, E, F) (Şekil 9 ve 10).
3. Baş dayanağını çıkartmak veya yeniden konumlandırmak için insertten yukarı doğru çekin.

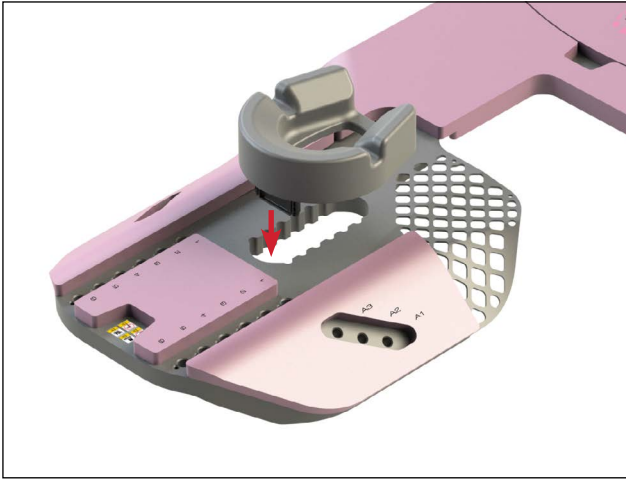

Şekil 9

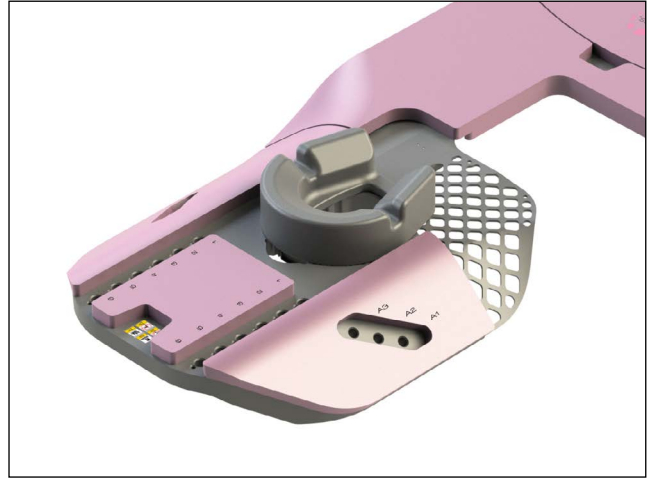

Şekil
10

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

ÇİFT EL KAVRAMASI

! DİKKAT ! ÇİFT EL KAVRAMASI VE EL KAVRAMASI KULPU HASTANIN AĞIRLIĞINI DESTEKLEMELİK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR:


- Hastayı konumlandırmak için kulpları **KULLANMAYIN**.
- Cihaza yatmak veya cihazdan kalkmak için kulpları **KULLANMAYIN**.

1. Çift El Kavraması uçlarını, İnsertin superior tarafında bunlara karşılık gelen deliklerle (1, 2, 3, 4, 5, 6) hizalayın.
2. Deliklere geçene kadar Çift El Kavramasını bastırın (Şekil 11 ve 12).


! NOT ! Çift El Kavraması, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi hastaya doğru eğimli olmalıdır (Şekil 10).

3. Çift El Kavramasını çıkartmak veya yeniden konumlandırmak için, deliklerden çıkana kadar yukarı doğru çekin (Şekil 11 ve 13).

! NOT ! Kulpları çıkartırken İnsertin yukarı KALKMAMASI için İnsertin üstüne basınç uygulanmalıdır; mekanizmanın çok sağlam olmasına rağmen birleştirme pimleri eğilerek veya kırılarak Couch Top'u kullanılmaz hale getirebilir.

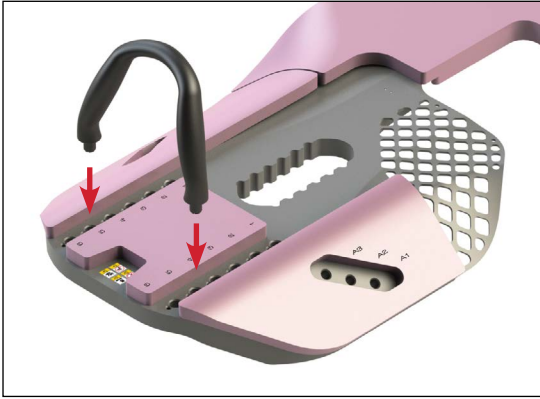

Şekil 11

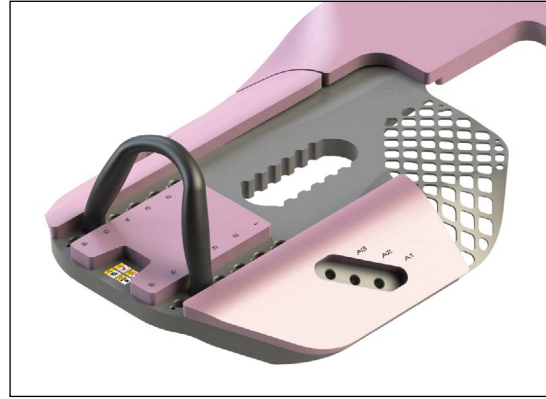

Şekil 12




Şekil 13

ÇALIŞTIRMA TALİMATI


KURULUM

EL KAVRAMASI KULPU

1. El Kavramasını Kulpunu, İnsertin superior tarafındaki uygun deliğe (A1, A2, A3) yerleştirin. (Şekil 14).
2. El Kavramasını Kulpunu, kulp delik içinde sıkıca yerine kilitlenene kadar sağa veya sola döndürün (Şekil 15).
3. El Kavramasını Kulpunu çıkartmak için, kulpu gevşeyene kadar montajın ters yönünde döndürün ve düz bir şekilde dışarı çekin (Şekil 14 ve 15).

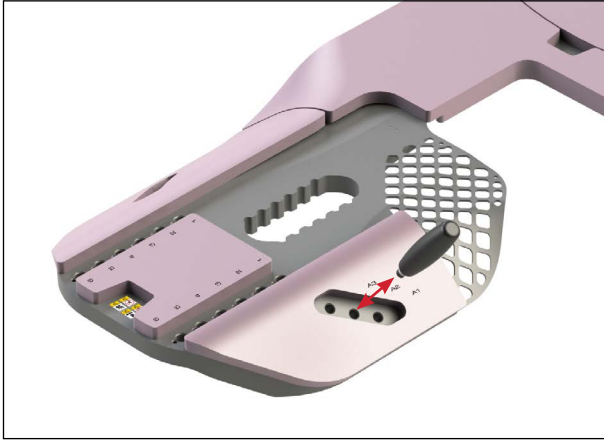

Şekil 14

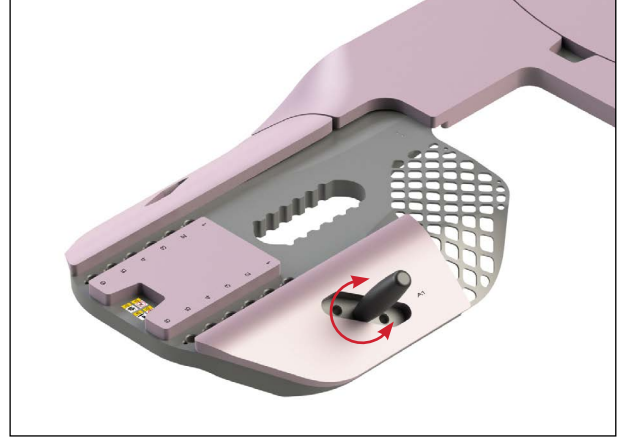

Şekil 15


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

HASTANIN KONUMLANDIRILMASI


! NOT ! Hastaların cihaza yatmak veya cihazdan kalkmak için yardıma ihtiyacı olabilir. Aşağıdaki talimat tarafımızca önerilen teknik olmakla birlikte her klinik için değişebilir.

ACCESS 360™'A YATMAK VE ACCESS 360™'TAN KALKMAK


1. Hastanın insert üstüne çıkmasına yardım etmek için yatağı alçaltın veya bir tabure merdiven kullanın.
2. Hasta insert üstüne çıktıktan sonra dizlerini kauçuk üstündeki doğru işaretlerle hizalayın.
3. Hastadan ellerini veya dirseklerini kullanarak belden yukarısını konumlandırmasını isteyin.
4. Hastadan vücudunu yavaşça gerekli konuma indirmesini isteyin.
5. Hasta istenen konuma geldiğinde, başını baş dayanağı içine yerleştirin ve uygun el kavramalarını tutmasını isteyin.
6. Insertten kalkmak için yukarıdaki adımları ters sırayla takip edin.

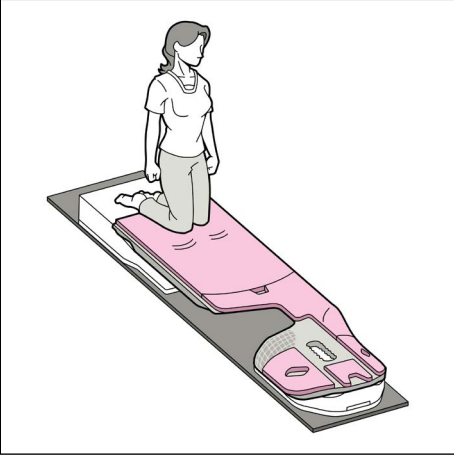

Şekil 16

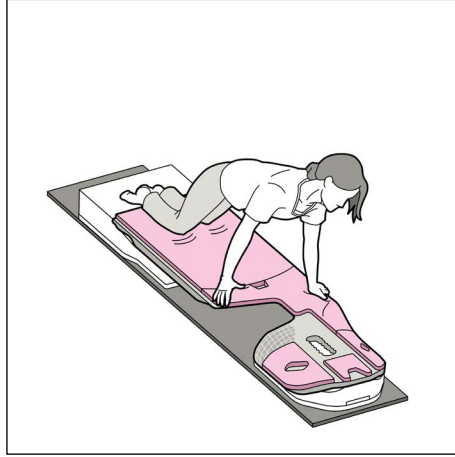

Şekil 17

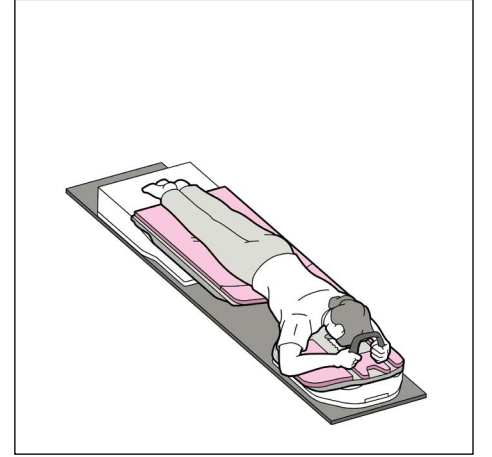

Şekil 18

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

İPSİLATERAL ÖLÇEK

! DİKKAT ! İPSİLATERAL ÖLÇEK HASTANIN AĞIRLIĞINI DESTEKLEMELİK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR.

1. Hasta yerine yerleştirildikten sonra İpsilateral Ölçeği yerine kilitlenene kadar superior yöne döndürün (Şekil 20).
2. Hastanın konumunu hizalayın.

! NOT! Ölçeklerin amacı hizalamaya yardım etmektir; hastanın konumunu teyit etmek sorumluluğu kullanıcıya aittir.

! NOT! Ölçeklerin ± 1 mm'ye kadar hassas oldukları test edilmiştir.

3. İpsilateral Ölçeği tedaviden önce veya depolamak için inferior yönde döndürüp muhafaza konumuna geri götürün (Şekil 19 ve 20).



Şekil 19: Muhafaza Konumu



Şekil 20

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz hafif, aşındırıcı olmayan temizlik ya da dezenfeksiyon solüsyonu ile temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin. Cihazı görsel olarak inceleyin, eğer temiz değilse temiz görüne kadar önceki temizleme adımlarını tekrarlayın. Herhangi bir temizlik maddesi kalıntısını gidermek üzere cihazı silmek için suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kurulamak için cihazı temiz, kuru bir bezle silin. Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve cihazın temizlenmesi için uygun bulunmuştur.

- Su
- Sabunlu su

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ

Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.

- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu


Doğrudan Couch Top veya Couch Top Insert üzerine SPREYLEMEYİN veya Taban Çerçevesi içine akmasına izin VERMEYİN.

Couch Top veya Couch Top Insert üstüne keskin nesneler KOYMAYIN.

SPESİFİKASYONLAR

ACCESS 360™


Ağırlık Sınırı: 200 kg eşit dağılımlı yük

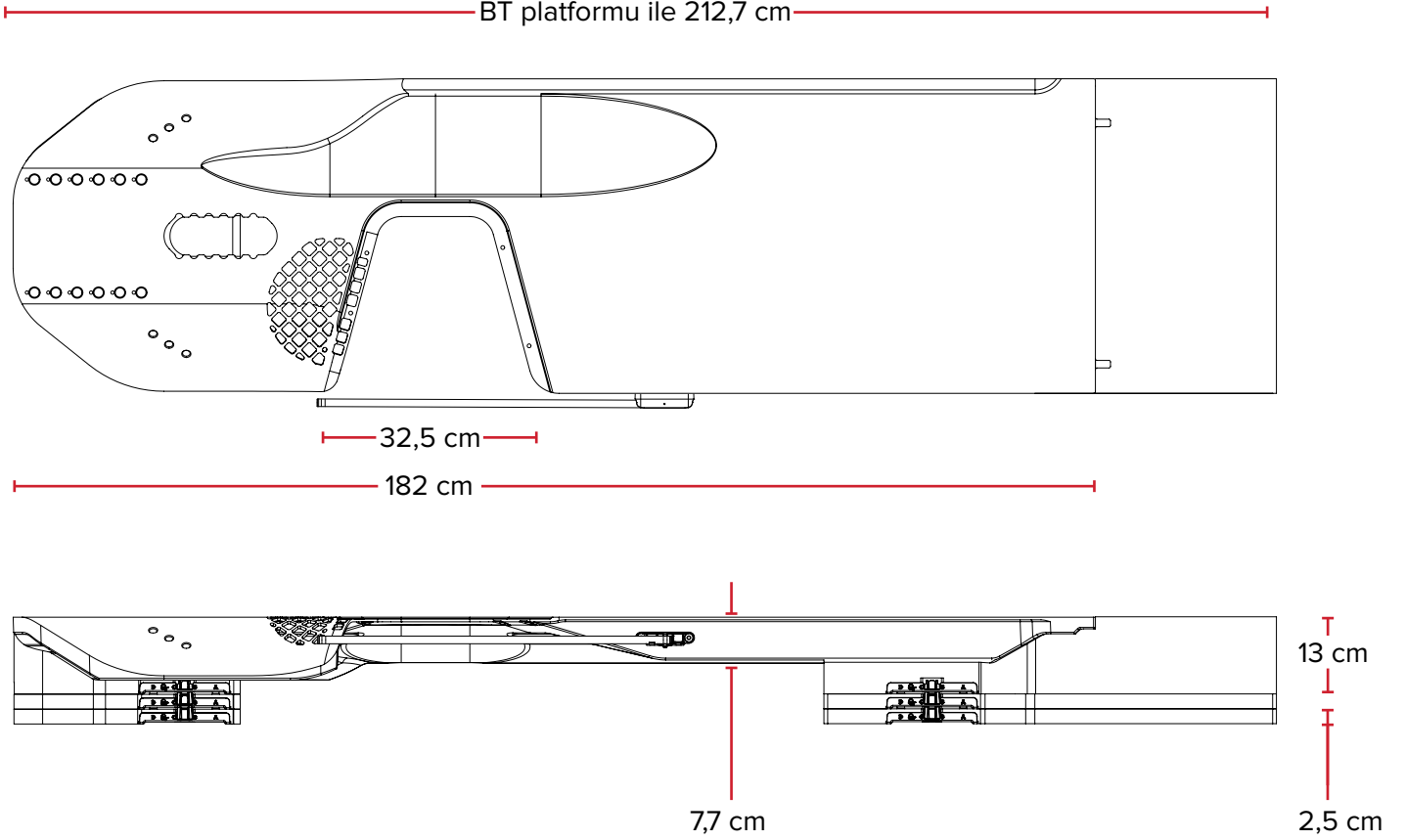

SPESİFİKASYONLAR

ACCESS 360™ G2

Ağırlık Sınırı: 200 kg eşit dağılımlı yük

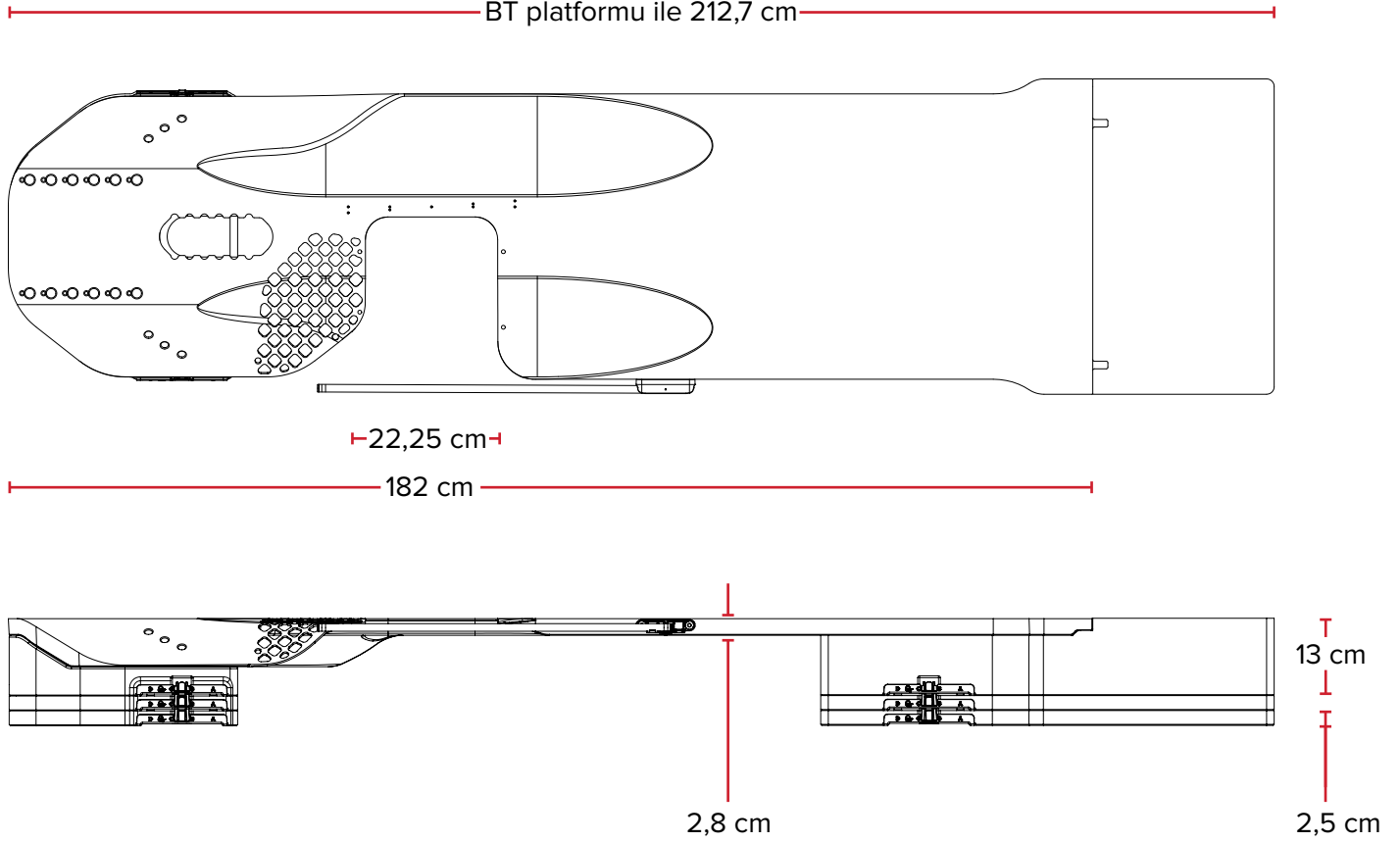

HASTA HAZIRLIĞI

KVUE™ ACCESS 360™ COUCH TOP INSERT'LER

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Tanılayıcı No.:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu Yapan:

Tarih:

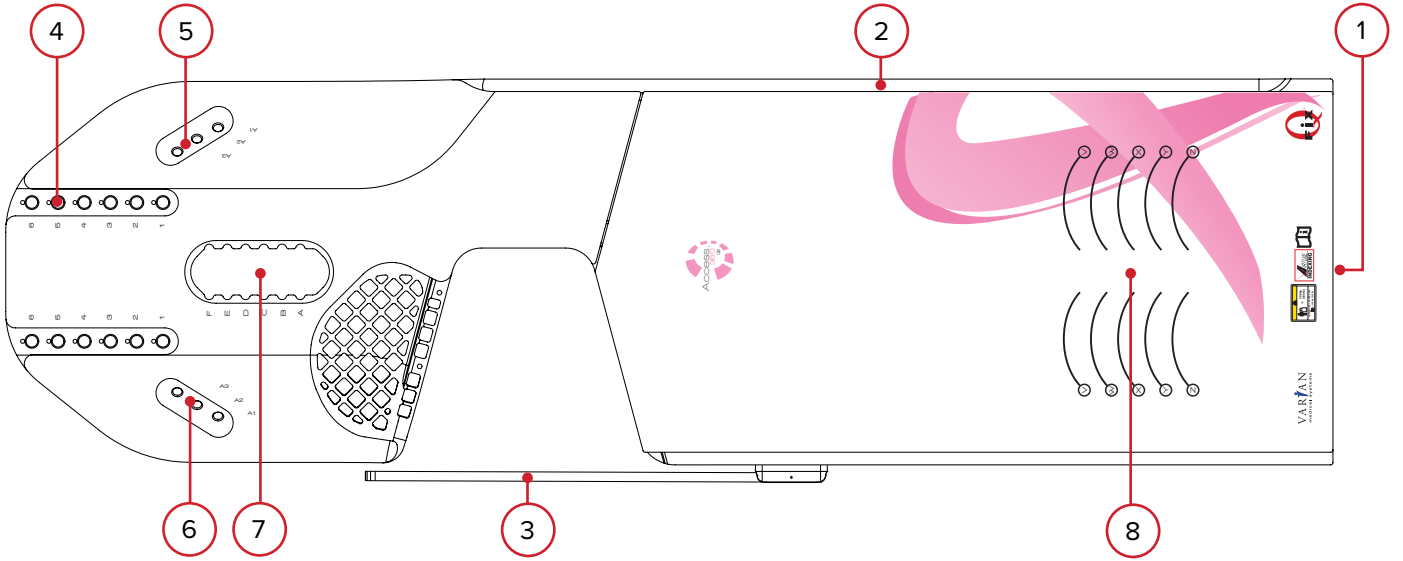

Sol Insert

Sağ Insert

! NOT ! Sol insert yukarıda gösterilmiştir.

1. Inferior Hizalama:

2. Kontralateral Ölçek:

3. İpsilateral Ölçek:

4. Çift El Kavramasının Yeri (bir tane seçin): 1 2 3 4 5 6 Yok

5. El Kavraması Kulpu, Hastanın Sağ (bir tane seçin): A1 A2 A3 Yok

6. El Kavraması Kulpu, Hastanın Solu (bir tane seçin): A1 A2 A3 Yok


7. Kullanılan baş dayanağı: Yok Yüz Üstü Konturlu Yeri (bir tane seçin): A B C D F

8. Diz Yeri (bir tane seçin): V W X Y Z

9. Ek Notlar:

HASTA HAZIRLIĞI

KVUE™ ACCESS 360™ COUCH TOP INSERT'LER (DEVAM)

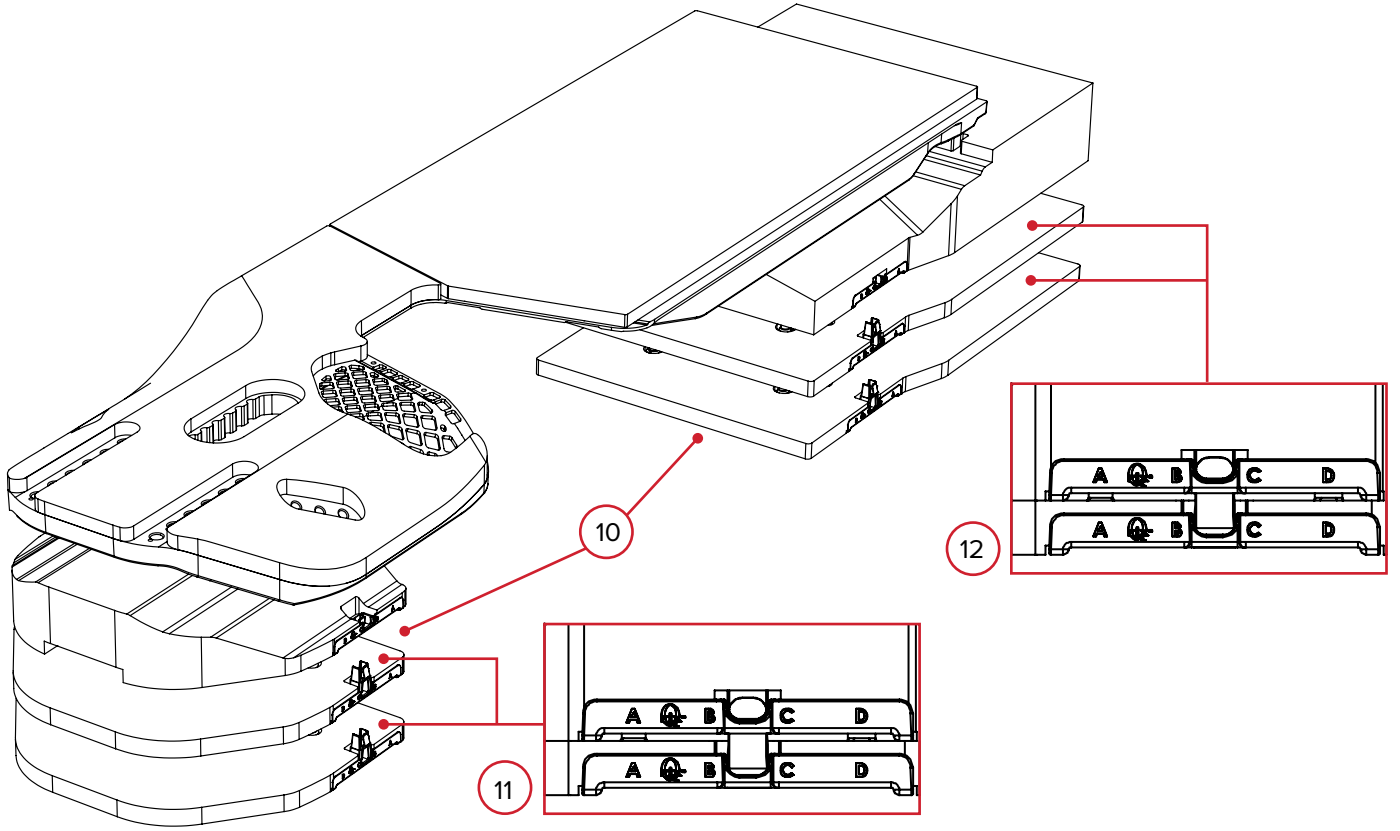

! NOT ! Sol insert yukarıda gösterilmiştir.

BT Platformları ve Şimleri

10. Kullanılan BT Platform Şimlerinin adedi (bir tane seçin): 0 1 2 3

11. Superior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Yeri (bir tane seçin): A B C D

11a) Yerleştirme Çubuğunun yatak üstü üzerindeki yeri:

12. Inferior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Yeri (bir tane seçin): A B C D

12a) Yerleştirme Çubuğunun yatak üstü üzerindeki yeri:

13. Ek Notlar:

HASTA HAZIRLIĞI

KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCH TOP İNSERT'LER

Hastanın Adı Soyadı:


Hasta Tanılayıcı No.:

Hekim:

Yorumlar:

Kurulumu Yapan:

Tarih:

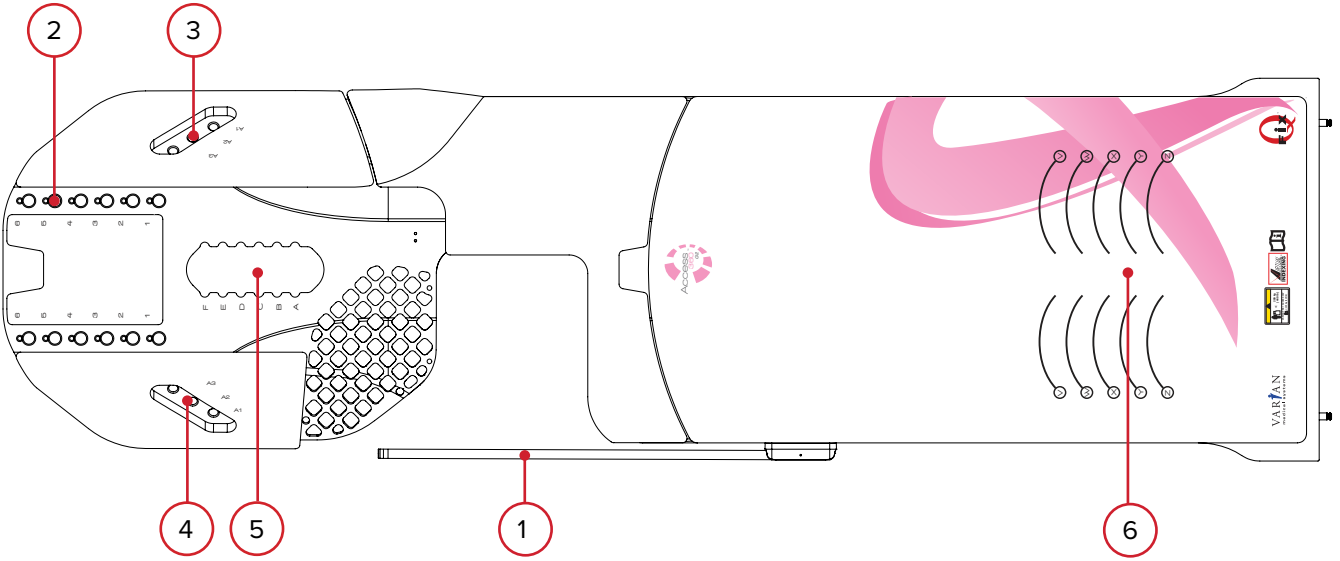

Sol Insert



Sağ Insert

! NOT ! Sol insert yukarıda gösterilmiştir.

1. İpsilateral Ölçek:

2. Çift El Kavramasının Yeri (bir tane seçin): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Yok**

3. El Kavraması Kulpu, Hastanın Sağı (bir tane seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**

4. El Kavraması Kulpu, Hastanın Solu (bir tane seçin): **A1** **A2** **A3** **Yok**


5. Kullanılan baş dayanağı: **Yok** **Yüz Üstü** **Konturlu** Yeri (bir tane seçin): **A** **B** **C** **D** **F**

6. Diz Yeri (bir tane seçin): **V** **W** **X** **Y** **Z**

7. Ek Notlar:

HASTA HAZIRLIĞI

KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCH TOP INSERT'LER (DEVAM)

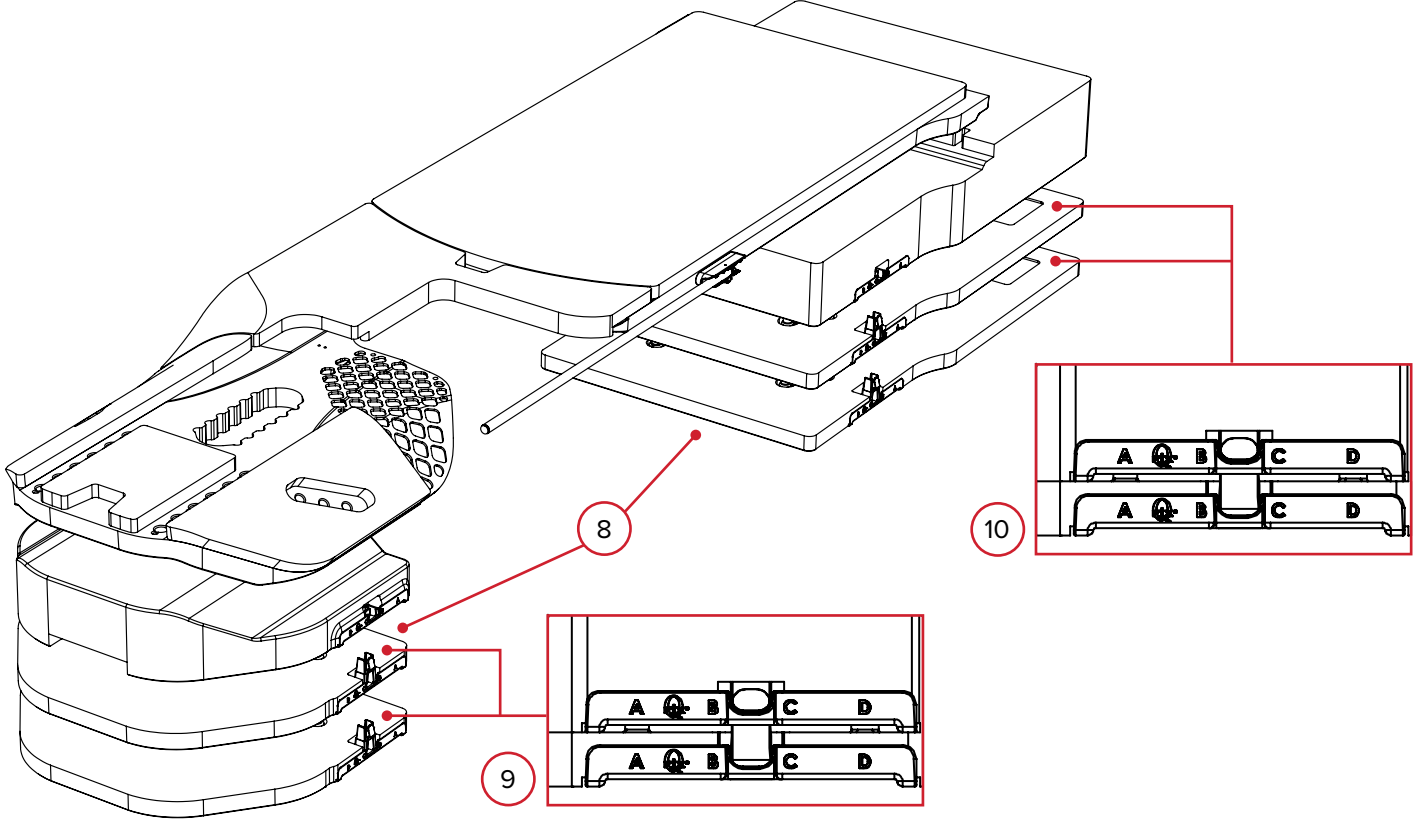

! NOT ! Sol insert yukarıda gösterilmiştir.

BT Platformları ve Şimleri

8. Kullanılan BT Platform Şimlerinin adedi (bir tane seçin): 0 1 2 3

9. Superior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Yeri (bir tane seçin): A B C D

9a) Yerleştirme Çubuğunun yatak üstü üzerindeki yeri:


10. Inferior BT Platformu - Yerleştirme Çubuğu üstündeki Yeri (bir tane seçin): A B C D

10a) Yerleştirme Çubuğunun yatak üstü üzerindeki yeri:


11. Ek Notlar:

PARA LİSTESİ

KVUE™ ACCESS 360™ COUCH TOP İNSERT'LER

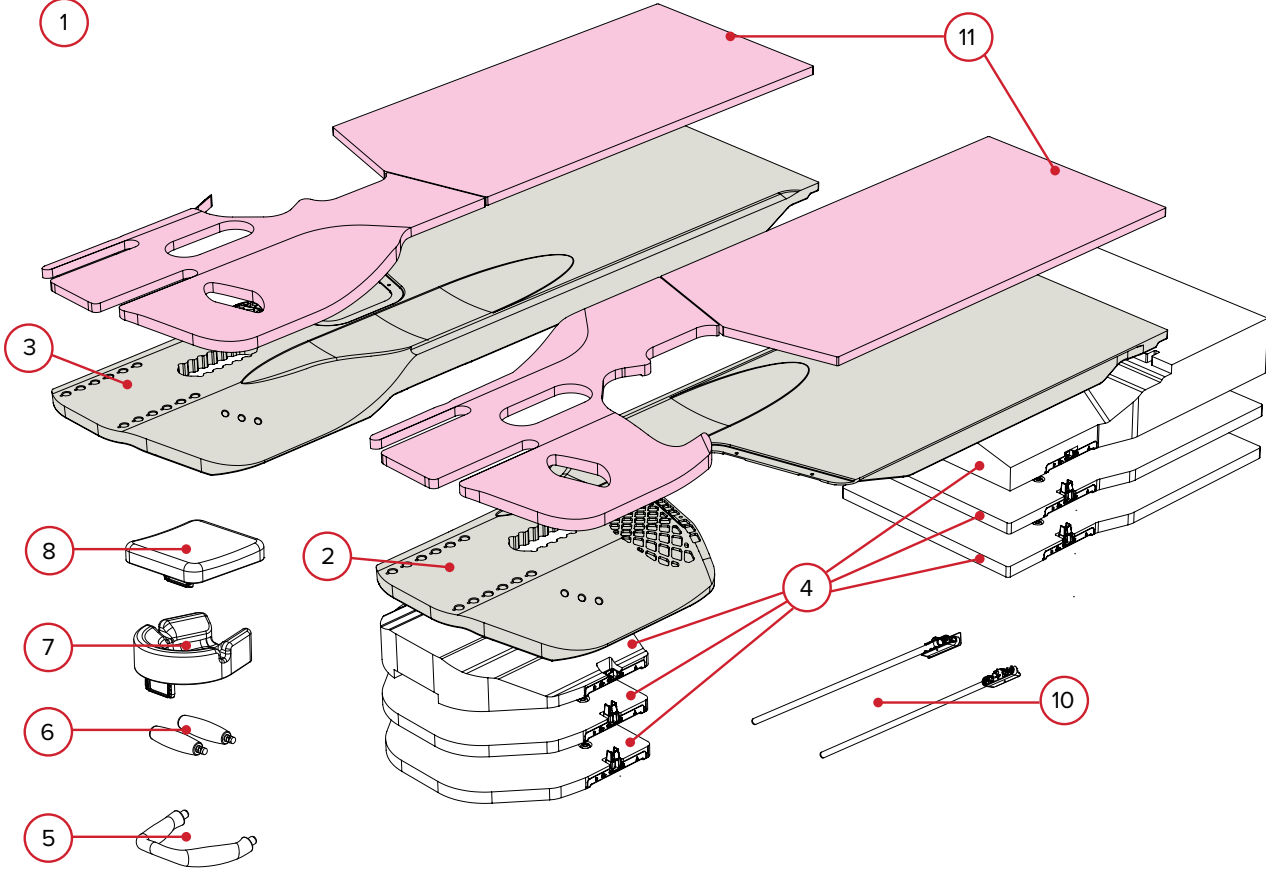

1. RT-4544KV – kVue Access 360 Paketi
2. RT-4544KV-01– kVue Access 360 Couch Top Insert, Sol Göğüs
3. RT-4544KV-02– kVue Access 360 Couch Top Insert, Sağ Göğüs
4. RT-4544KV-03 – kVue Access 360 BT Platform Seti
5. RT-4544KV-04 – Çift Kavramalı Kulp
6. RT-4544KV-05 – El Kavraması Kulpu
7. RT-4544KV-06 – Yüz Üstü Baş Dayanağı
8. RT-4544KV-07 – Konturlu Baş Dayanağı
9. RT-4551CART – Depolama Arabası (şemada gösterilmemiştir)
10. 8001846 – İpsilateral Ölçek
11. 8001946 – Access 360 Minder Seti

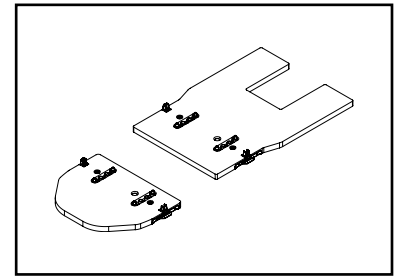


RT-4544KV-03A


kVue™ Access 360™ Şım Seti
(ayrı olarak satılır)

PARÇA LİSTESİ

KVUE™ ACCESS 360™ G2 COUCH TOP İNSERT'LER

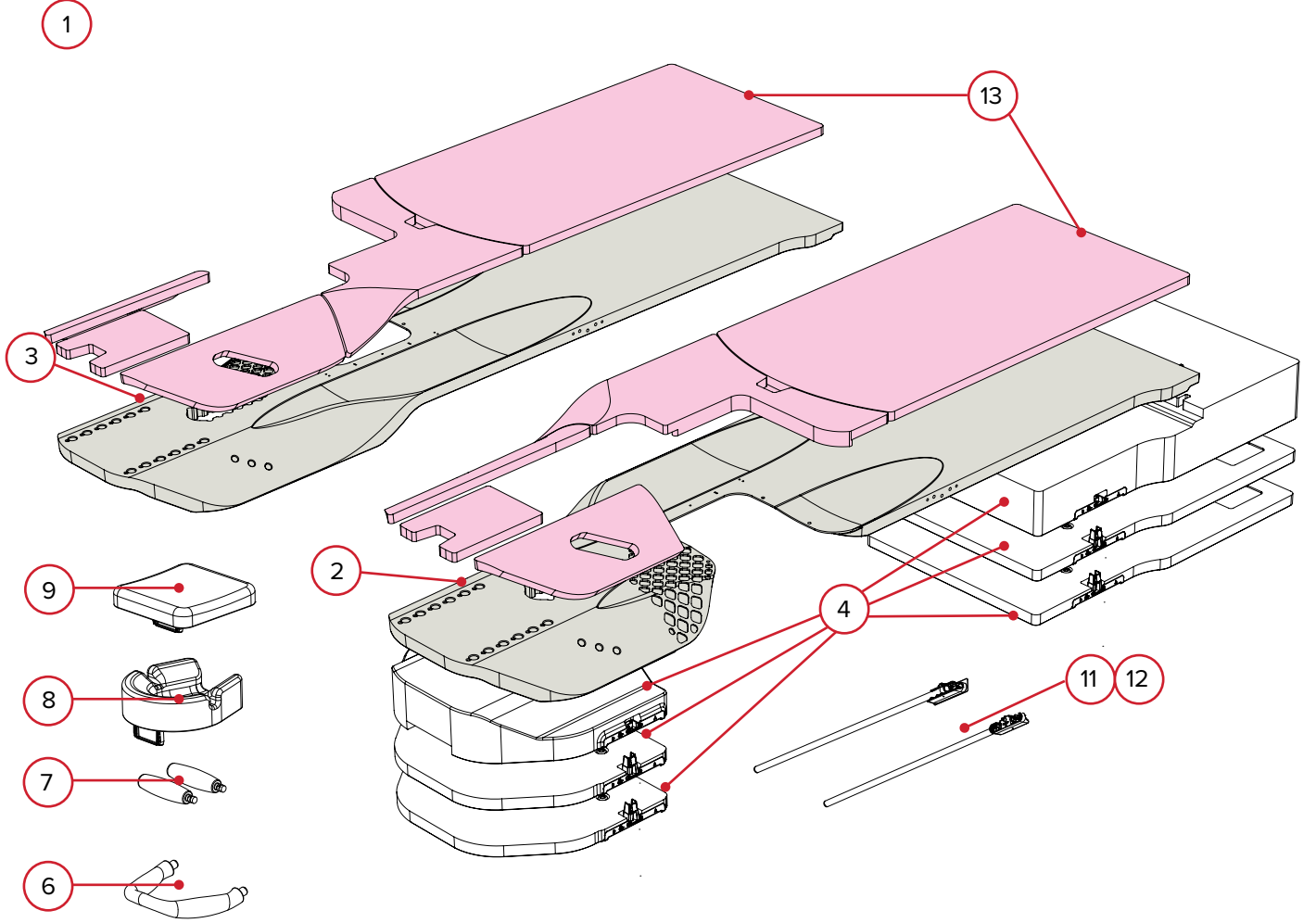

1. RT-4544KV-10 – kVue Access 360 G2 Paketi
2. RT-4544KV-11 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Sol Göğüs
3. RT-4544KV-12 – kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Sağ Göğüs
4. 8002581 – kVue Access 360 G2 BT Platform Seti
5. 8002579 – kVue Access 360 G2 Şim Seti
6. RT-4544KV-04 – Çift Kavramalı Kulp
7. RT-4544KV-05 – El Kavraması Kulpu
8. RT-4544KV-06 – Yüz Üstü Baş Dayanağı
9. RT-4544KV-07 – Konturlu Baş Dayanağı
10. RT-4551CART – Depolama Arabası (şemada gösterilmemiştir)
11. 8002601 – 40 cm İpsilateral Ölçek (Yedek)
12. 8002602 – 48 cm İpsilateral Ölçek (Aksesuar)
13. 8003038 – Access 360 G2 Minder Seti

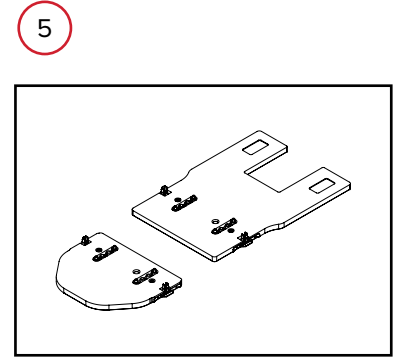

8002579

kVue™ Access 360™ G2 Şim Seti
(ayrı olarak satılır)



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2002686_TR_E
2021-07