

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4464-02

SofTouch Elite™ Karın Levhası





EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	--

Exact®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Cidex® ve Windex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

SofTouch Elite, Qfix şirketinin ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	4
KULLANIM AMACI.....	5
ÖZELLİKLER.....	6
BİLEŞENLER	6
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	8
SOFTOUCH ELITE CİHAZININ MONTAJI	8
ÇİFT EL KAVRAMASININ MONTAJI.....	8
SÖKME.....	8
BAKIM.....	9
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	9
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	9
SAKLAMA	9
PARÇA LİSTESİ.....	10
KURULUM SAYFASI	11
RT-4464-02 – SOFTOUCH ELITE KARIN LEVHASI.....	11

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! SOFTOUCH ELITE BELLYBOARD ÖLÇEKLERİ YALNIZCA REFERANS AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR.

! UYARI ! HASTANIN ÇİFT EL KAVRAMASINI KULLANARAK POZİSYONU AYARLAMASINA İZİN VERMEYİN.

! NOT ! SOFTOUCH ELİTE KARIN LEVHASI YATAK ÜSTÜ YÜZEYİ TARAFINDAN HER ZAMAN TAM OLARAK DESTEKLENMELİDİR.

! NOT ! SOFTOUCH ELİTE ÜSTÜNE KESKİN NESNELER KOYMAYIN.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.



MR GÜVENLİ

Herhangi bir MR ortamına maruz kalma nedeniyle bilinen tehlikeler oluşturmayan öğeyi belirtir. MR Güvenli öğeler elektriği iletmeyen, metalik olmayan ve manyetik özelliği bulunmayan malzemelerden oluşur.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsizleştirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI


Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

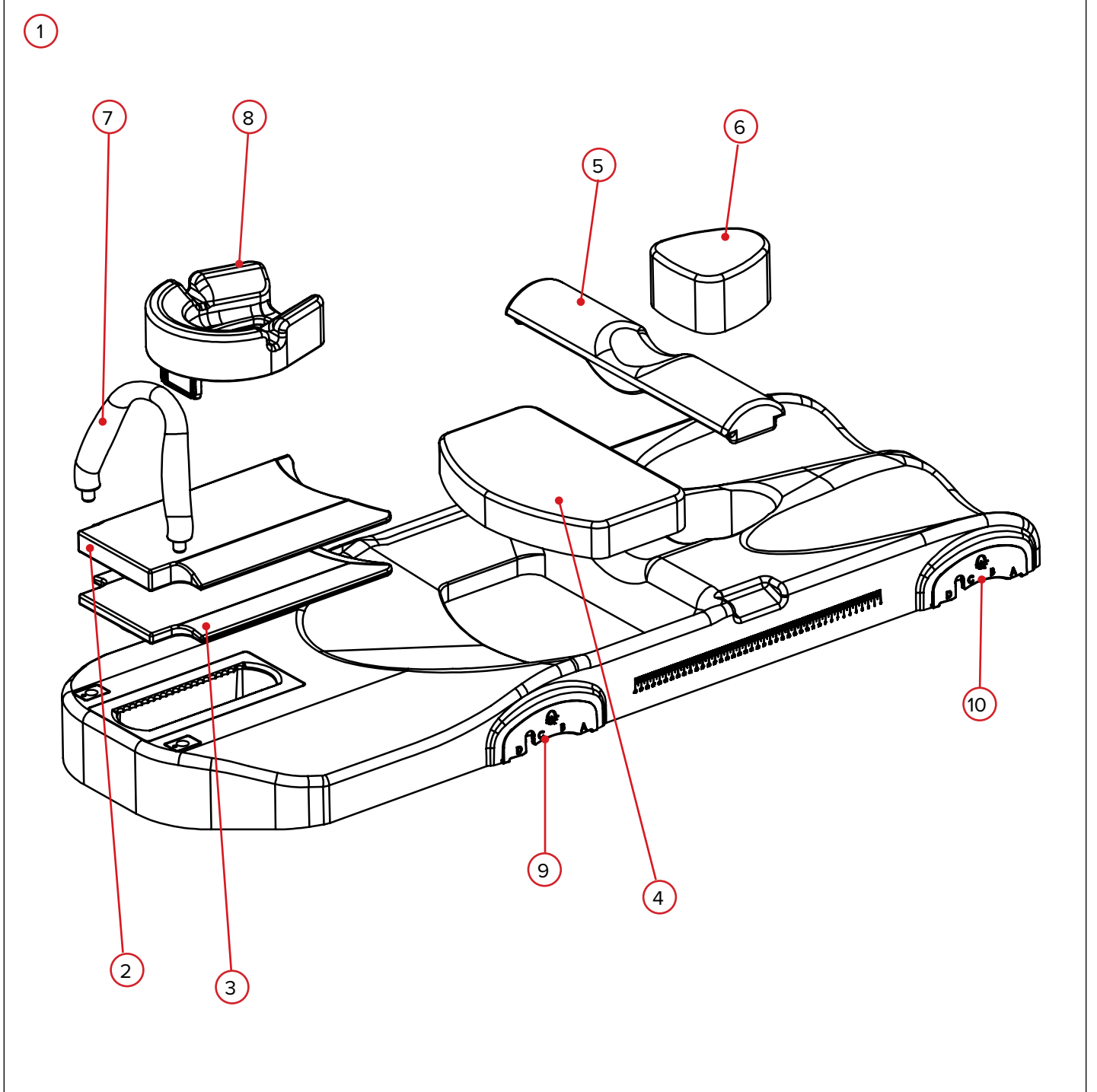

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

1. SOFTOUCH ELITE™ KARIN LEVHASI SİSTEMİ

SofTouch Elite Karın Levhası, pelvis bölgesine radyoterapi uygulanan hastaları konumlandırma ve kurulum işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılır. SofTouch Elite, radyasyon alanları içindeki ince barsak hacmini azaltarak hastalar için daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.

2. H30 MİNDER

30 mm'lik baş minder hastaya ek konfor temin etmek için kullanılır. Hastanın konfor düzeyine bağlı olarak 15 mm'lik bir baş minder de kullanılabilir.

3. H15 MİNDER

15 mm'lik baş minder hastaya ek konfor temin etmek için kullanılır. Hastanın konfor düzeyine bağlı olarak 30 mm'lik bir baş minder de kullanılabilir.

4. B50 MİNDER

50 mm'lik karın minder, ek rahatlık sağlamak amacıyla bazı hastaların batin bölgesini yükselterek konfor temin etmek için kullanılır. Bu minder öncelikle karın bölgesi daha küçük olan hastalarda kullanılır.

5. C30 MİNDER

30 mm'lik kaudal minder, pelvisi yükseltmek ve hastaya ek konfor temin etmek için kullanılır. Bu minder ayrıca, daha iyi tedavi sonuçları için bağırsakların ileriye doğru düşmesine olanak sağlar.

6. G80 MİNDER

80 mm'lik minder hastaya ek konfor temin eder.

7. ÇİFT EL KAVRAMASI

Çift El Kavraması, diğer cihazlarda kullanılan standart kulptan farklı olarak hastanın bileğindeki gerilmeyi azaltmak için ergonomik olarak tasarlanmıştır.

8. YÜZÜSTÜ BAŞ DAYANAĞI

SofTouch Elite, hastanın boyuna ve konfor düzeyine göre birden fazla noktada SofTouch Elite cihazına indekslenebilen bir yüz üstü baş dayanağı ile sunulur.

9. SUPERİOR İNDEKSLEME PLAKASI

SofTouch Elite, 2 Pimli Yerleştirme Çubuğu kullanılarak kVue cihazına yerleştirilen İndeksleme Plakaları içerir. Bu plaka SofTouch Elite cihazının superior tarafındadır.


10. İNFERİOR İNDEKSLEME PLAKASI

SofTouch Elite, 2 Pimli Yerleştirme Çubuğu kullanılarak kVue cihazına yerleştirilen İndeksleme Plakaları içerir. Bu plaka SofTouch Elite cihazının inferior tarafındadır.


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

SOFTOUCH ELİTE CİHAZININ MONTAJI

- İki (2) pimli Yerleştirme Çubuğunun uçlarını, BT Kaplaması veya kVue Insert üzerindeki Varian Exact® ile uyumlu indeks dişlerine 700 mm arayla yerleştirin ve Yerleştirme Çubuklarını yerlerine oturtun (Şekil 1 ve 2).

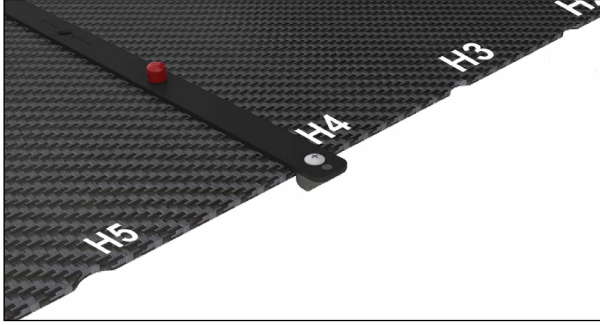


Şekil 1

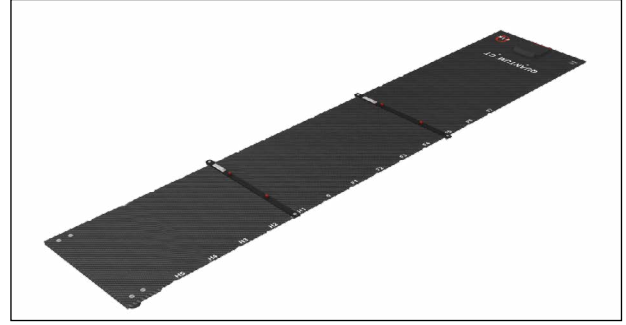

Şekil 2

- Pimli Yerleştirme Çubuklarına indekslenmiş İndeksleme Plakasını kullanarak SofTouch Elite cihazını BT Kaplaması üstüne yerleştirin. SofTouch Elite cihazını hem inferior hem de superior üzerinde aynı yerleri (A, B, C, D) kullanarak indekslediğinizden emin olun (Şekil 3).

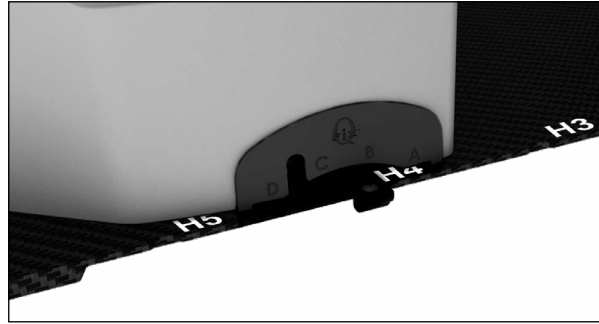

Şekil 3

ÇİFT EL KAVRAMASININ MONTAJI

- El Kavramasının uçlarını, SofTouch Elite cihazının superior tarafında karşılık gelen deliklerle hizalayın.
- Deliklere oturana kadar El Kavramasına bastırın.

! NOT ! EL KAVRAMASI HASTAYA DOĞRU EĞİMLİ OLMALIDIR.

SÖKME

El Kavramasını çıkartmak için deliklerden çıkana kadar yukarı doğru çekin.

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz hafif, aşındırıcı olmayan temizlik ya da dezenfeksiyon solüsyonu ile temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin. Cihazı görsel olarak inceleyin, eğer temiz değilse temiz görüne kadar önceki temizleme adımlarını tekrarlayın. Herhangi bir temizlik maddesi kalıntısını gidermek üzere cihazı silmek için suyla nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kurulamak için cihazı temiz, kuru bir bezle silin. Aşağıdaki temizlik malzemeleri test edilmiş ve cihazın temizlenmesi için uygun bulunmuştur.

- Su
- Sabunlu su

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ


Cihaz yüzeyinin dezenfekte edilmesi için temizlik maddesi üreticisinin özel talimatlarına başvurun.

- %10 Clorox® Marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® Marka %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu

SAKLAMA

Cihazı düz ve yatay bir yüzey üzerinde veya duvar askısına dikey asarak saklayın.


PARA LİSTESİ

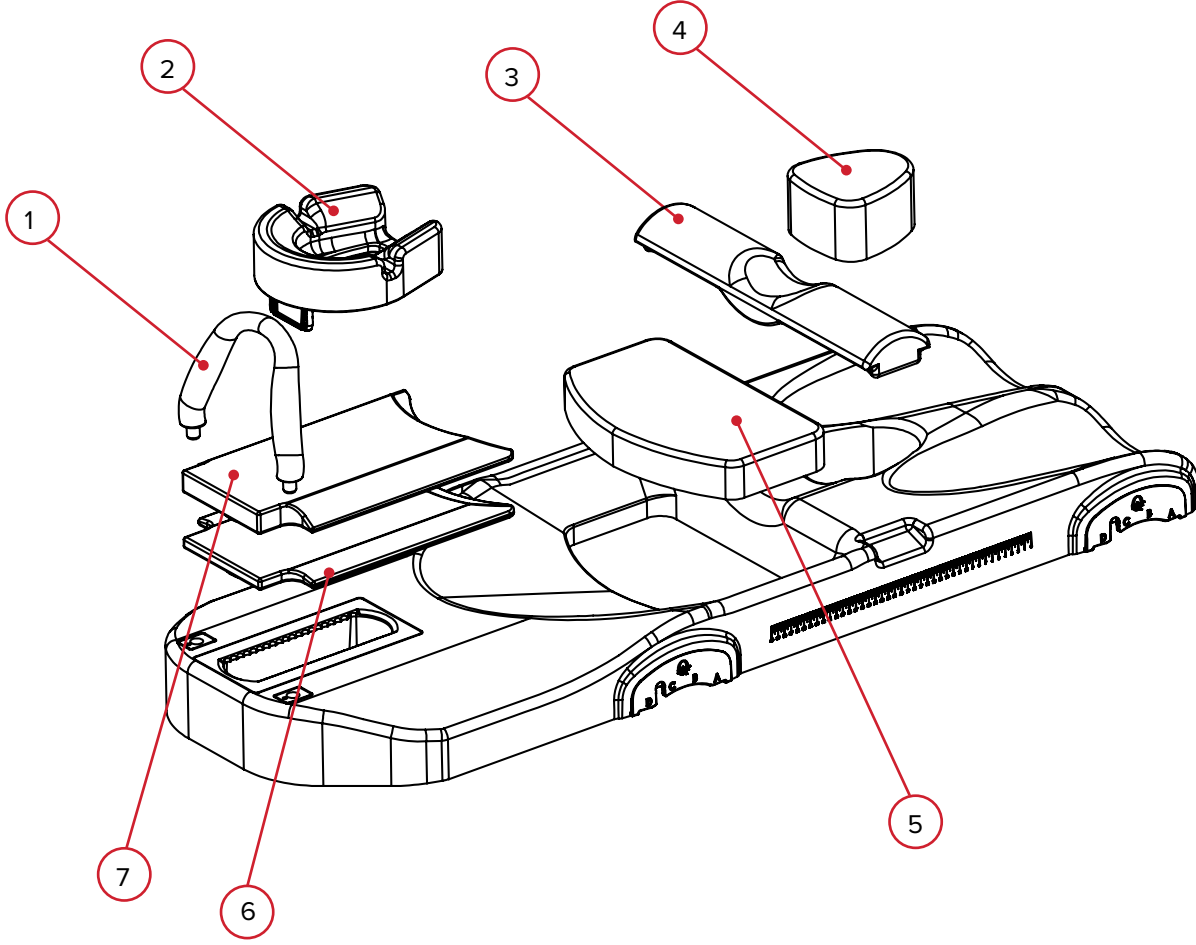

1. RT-4544KV-04 – ift El Kavraması
2. RT-4544KV-06 – Yüzüstü Bař Dayanađı
3. 2002825 – C30 Minder
4. 2002826 – G80 Minder
5. 2002824 – B50 Minder
6. 2002822 – H15 Minder
7. 2002823 – H30 Minder

RT-4464-02 – SOFTOUCH ELITE KARIN LEVHASI

Yorumlar:

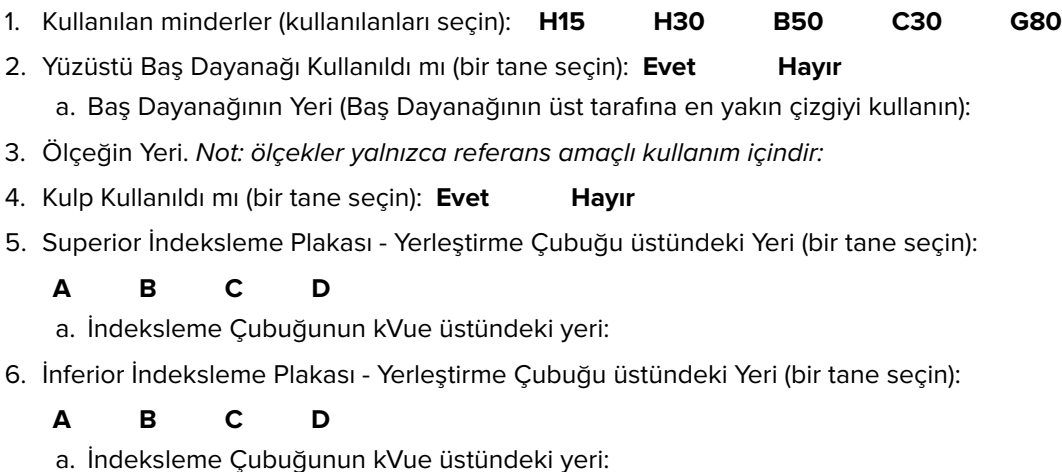



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com