

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4558CB01

Kompresný pás Stradivarius[™]

Dĺžka 150 cm a 115 cm





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Vyrobené v USA spoločnosťou Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Stradivarius je ochranná známka spoločnosti Qfix.

Cidex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Johnson and Johnson.

Virox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Virox Technologies Inc.

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA	4
ZÁVAŽNÉ UDALOSTI	4
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY	4
URČENÉ POUŽITIE	5
NÁVOD NA POUŽITIE	6
MONTÁŽ	6
NASTAVENIE	7
ÚDRŽBA	9
NASTAVOVACÍ HÁROK	10
KOMPRESNÝ PÁS STRADIVARIUS™ – RT-4558CB01	10

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti Qfix aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.

URČENÉ POUŽITIE

Toto zariadenie je určené na znehybnenie, polohovanie a premiestňovanie pacientov podstupujúcich rádioterapiu.

Kompresný pás Stradivarius je určený na použitie u pacientov, ktorí podstupujú SBRT ožarovanie pľúc.

Tento doplnok slúži iba na orientačné účely a nesmie sa používať v žiadnej inej aplikácii.

! POZNÁMKA ! V priebehu normálnej prevádzky je možné očakávať fluktuáciu na úrovni 15 až 20 mmHg, ako je zobrazené na manometri.

! POZNÁMKA ! Federálne zákony Spojených štátov obmedzujú predaj tohto zariadenia lekárovi alebo na jeho predpis.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

NÁVOD NA POUŽITIE

MONTÁŽ

PRVOTNÉ ZOSTAVENIE

1. Zasuňte konektor vzduchového mechu pevným zakrútením do hornej časti manometra. Pri správnom pripojení zostane viditeľných menej ako 1/16" hriadeľa konektora (obr. 1).



Obr. 1

2. Zarovnajte háčik a slučku, aby ste kompresnú dosku pripevnili k vzduchovému mechu. Po zarovnaní zatlačte kompresnú dosku na mech (obr. 2).



Obr. 2

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

ULOŽENIE NA PACIENTOVI

1. Jeden z koncov pásu vložte do jedného z otvorov tak, aby čísla smerovali nahor (obr. 3).



Obr. 3

2. Požiadajte pacienta, aby vstal alebo sa v sede vzpriamil, a omotajte opačný koniec pásu okolo chrbta pacienta a potom späť otvorom (obr. 4).



Obr. 4

3. Nastavte kompresný pás do požadovanej polohy a potom pevne potiahnite obe strany pásu smerom k chrbtu pacienta. Pás sa spojí pomocou háčika a slučky (obr. 5).



Obr. 5

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

NAPUSTENIE/VYPUSTENIE MECHU

4. Ak chcete mech nafúknuť, najskôr zatvorte ventil tak, že spúšť zatlačíte nahor, aby sa vysunula smerom von (obr. 6).



Obr. 6

5. Mech nafúknite rýchlym stláčaním balónika (obr. 7).

! POZNÁMKA ! Zapište hodnotu nameranú na manometri (obr. 8).



Obr. 7



Obr. 8

6. Ak chcete mech vypustiť, otvorte ventil stlačením spúšte (obr. 9).



Obr. 9

ÚDRŽBA

Kompresný pás sa dá čistiť štandardnými čistiacimi postupmi a bežnými nemocničnými čistiacimi prostriedkami na BÁZE VODY. Nasledujúce čistiace látky boli testované a uznané za vhodné:

- 2,4 % aktivovaný dezinfekčný roztok dialdehydu Cidex®
- 0,5 % roztok akcelerovaného peroxidu vodíka Virox®

Na čistenie príslušenstva NEPOUŽÍVAJTE alkohol ani iné rozpúšťadlá.

Sondu je potrebné vyčistiť mäkkou suchou handričkou.

NASTAVOVACÍ HÁROK

KOMPRESNÝ PÁS STRADIVARIUS™ – RT-4558CB01

Meno pacienta:

Č. identifikátora pacienta:

Nastavil(-a):

Lekár:

Dátum:

Komentáre:



Použitý pás: 150 cm 115 cm

1. Poloha na „A“:

2. Poloha na „B“:

3. Hodnota nameraná na manometri:
normálne)

mmHg (IBA NA ORIENTÁCIU) (kolísanie tlaku na úrovni 15 až 20 mmHg je

Poznámky:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com