



positioning
patients for life.®

TERMÉKÚTMUTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RT-4551BAR-01

Csúszó lokalizáló rúd





Az Exact® a Varian Medical Systems bejegyzett védjegye.

TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK	4
FIGYELMEZTETÉSEK	4
KOMOLY BALESETEK	4
PÁCIENS CÉLCSOPORTOK	4
CÉLFELHASZNÁLÓK	4
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSOK	4
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	5
BEÁLLÍTÁS	5
ELTÁVOLÍTÁS	7

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉSEK

! FIGYELEM ! AZ ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT. AMENNYIBEN AZ ESZKÖZ BÁRMELYIK RÉSZÉ TÚLSÁGOSAN NAGY TERHELÉST KAP, SÉRÜLTNEK TÚNIK VAGY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, AZONNAL HAGYJA ABBA AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁT, ÉS VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A QFIX MUNKATÁRSAIVAL A +1 484-720-6054 TELEFONSZÁMON, VAGY ÍRJON E-MAILT A TECHSUPPORT@QFIX.COM CÍMRE.

! FIGYELEM ! A CSÚSZÓ LOKALIZÁLÓ RÚD LEHETŐVÉ TESZI AZ ESZKÖZÖK OLDALIRÁNYBA ELTOLT POZÍCIÓBAN TÖRTÉNŐ FELERELÉSÉT. A TERVEZÉS ÉS A KEZELÉS ELVÉGZÉSE SORÁN FIGYELEMBE KELL VENNİ AZ ELTOLT POZÍCIÓT. AZ ESZKÖZNEK A CSÚSZÓ LOKALIZÁLÓ RÚDRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A PIROS CSAPOK TELJESEN ZÁRVA VANNAK.

KOMOLY BALESETEK

Kérjük, hogy minden súlyos balesetről (pl. az olyan eseményekről, amelyek halált vagy sérülést okoznak vagy okozhatnak) értesítse a Qfix munkatársait, és tegyen bejelentést az adott ország illetékes hatóságának.

PÁCIENS CÉLCSOPORT

Sugárterápiás kezelésben részesülő vagy képalkotó diagnosztikai eljárásban érintett páciensek.

CÉLFELHASZNÁLÓK

A termék célfelhasználója a szabályozó régió követelményeinek megfelelő képzésben részesült személy.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSOK

A szimbólumok és a definícióik listáját a Qfix.com oldalon találja.



A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS

A LOKALIZÁLÓ RÚD BEÜZEMELÉSE

A csúszó lokalizáló rúd két lokalizáló csappal rendelkezik, amelyek a legtöbb szabványos lokalizáló tartozékhoz megfelelően illeszkednek. A rögzítéshez helyezze a csúszó lokalizáló rúd mindkét végét a Varian Exact® megfelelő, kompatibilis jelzőhornaiba, és illessze be azokat a helyükre; a rúd megfelelő rögzítését egy kattánás jelzi.

Közelkép a pozicionáló jelölésről

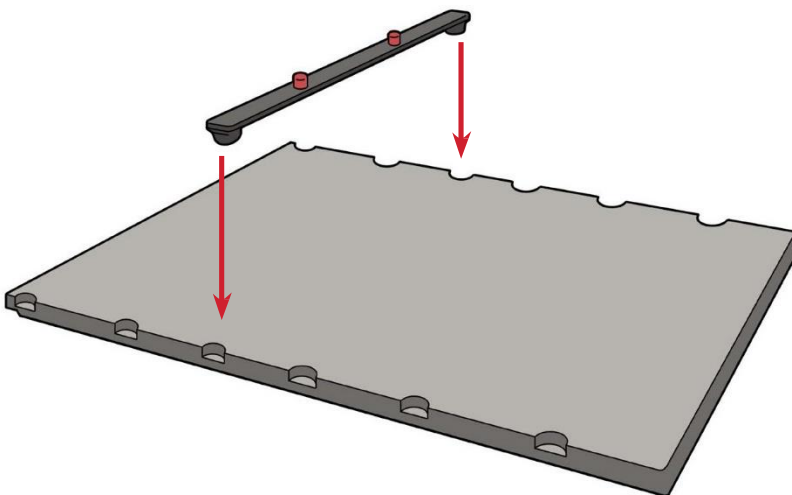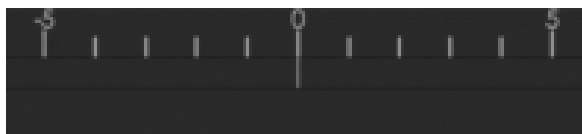

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS

A LOKALIZÁLÓ RÚD BEÜZEMELÉSE

1. Az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással lazítsa meg a piros csapokat (1. ábra).
2. Csúsztassa a csapokat a kívánt pozícióba (2. és 3. ábra).
3. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a csapokat (4. ábra).



A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ELTÁVOLÍTÁS

A LOKALIZÁLÓ RÚD ELTÁVOLÍTÁSA

Az eltávolításhoz húzza felfelé a lokalizáló rúd két végét.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com