



positioning  
patients for life.®

# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Подголовники Silverman

RT-4491R2, набор из 6 шт., A–F

RT-4491R2-A, размер A

RT-4491R2-B, размер B

RT-4491R2-C, размер C

RT-4491R2-D, размер D

RT-4491R2-E, размер E

RT-4491R2-F, размер F

RT-4491-Q1, Silverman Q1

RT-4491-Q2, Silverman Q2

RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3

RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4

RT-4491R-M, Silverman “M”



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.**

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ФОРМА ПОДГОЛОВНИКА SILVERMAN МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОДГОЛОВНИК SILVERMAN, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА.**

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Выберите подголовник Silverman, который удобен для пациента и обеспечивает нужное положение головы.
2. Закрепите подголовник Silverman, вставив штифты на устройстве, предназначенные для удержания подголовников, в отверстия для штифтов (рис. 1).
3. После правильного размещения подголовника Silverman на пациенте начните формировать термопластическую маску Moldcare®, следуя соответствующим инструкциям по применению.



Рис. 1

### СНЯТИЕ

Снимите подголовник Silverman со штифтов на устройстве (рис. 2).



Рис. 2

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОЧИСТКА

**! ПРИМЕЧАНИЕ ! Подголовник Silverman предназначен для многократного использования, и его можно очищать и повторно использовать после каждого курса лечения.**

Подголовник Silverman можно чистить мягким неабразивным чистящим или дезинфицирующим раствором. Нанесите раствор на чистую ткань и протрите поверхность.

### ДЕЗИНФЕКЦИЯ

В ходе испытаний следующие чистящие материалы были признаны подходящими для чистки подголовника Silverman. См. инструкции изготовителя применяемого чистящего средства.

- Вода
- 10%-ный раствор отбеливателя Clorox®
- Изопропиловый спирт
- 2,4%-ный раствор активированного диальдегида Cidex®
- Вода с мылом

Moldcare® является зарегистрированным товарным знаком компании ALCARE CO, LTD.

Cidex® является зарегистрированным товарным знаком компании Johnson & Johnson.

Clorox® является зарегистрированным товарным знаком компании The Clorox Company.

2004210\_RU\_A  
2023-07