

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

Opierky hlavy Silverman

RT-4491R2, balenie 6, A–F

RT-4491R2-A, veľkosť A

RT-4491R2-B, veľkosť B

RT-4491R2-C, veľkosť C

RT-4491R2-D, veľkosť D

RT-4491R2-E, veľkosť E

RT-4491R2-F, veľkosť F

RT-4491-Q1, Silverman Q1

RT-4491-Q2, Silverman Q2

RT-4491-Q3-2G, Silverman Q3

RT-4491-Q4-2G, Silverman Q4

RT-4491R-M, Silverman „M“



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO VÝROBKU NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ.

! VAROVANIE ! TVAR OPIERKY HLAVY SILVERMAN SA MÔŽE LÍŠIŤ. POČAS CELÉHO LIEČEBNÉHO CYKLU PACIENTA ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ ROVNAKÚ OPIERKU HLAVY SILVERMAN, AKÁ SA POUŽILA PRI SIMULÁCII.

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

1. Vyberte opierku hlavy Silverman, ktorá je pre pacienta pohodlná a dosahuje požadovanú polohu hlavy.
2. Opierku hlavy Silverman zaistíte tak, že otvory umiestnite nad kolíky v zariadení, ktoré sú navrhnuté na udržanie opierky hlavy (obr. 1).
3. Keď je pacient správne umiestnený na zariadení Silverman, začnite formovať Moldcare® a termoplastickú masku podľa príslušných pokynov na použitie.



Obrázok 1

ODSTRÁNENIE

Pri odstránení vyberte opierku hlavy Silverman z kolíkov na zariadení (obr. 2).



Obrázok 2

ÚDRŽBA

ČISTENIE

! POZNÁMKA ! Opierka hlavy Silverman je opakovane použiteľná a po každom ožarovaní sa dá vyčistiť a znova použiť.

Opierku hlavy Silverman môžete čistiť jemným, neabrazívnym čistiacim alebo dezinfekčným roztokom. Ak chcete zariadenie vyčistiť, na čistú tkaninu aplikujte roztok a utrite ňou povrch.

DEZINFEKCIA

Nasledujúce čistiace látky boli testované a uznané za vhodné na čistenie povrchov opierky hlavy Silverman. Prečítajte si konkrétne pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

- Voda
- 10 % bieliaci roztok Clorox®
- Izopropylalkohol
- 2,4 % aktivovaný roztok dialdehydu Cidex®
- Mydlo a voda

Moldcare® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ALCARE CO, LTD.

Cidex® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti The Clorox Company.

2004210_SK_A