



PŘÍRUČKA K PRODUKTU A NÁVOD PRO UŽIVATELE

RT-4543C & RT-4546C

ArmShuttle™ & ArmShuttle™ Elite





		Made in the USA by
EC	REP	Qfix
Advena Limited		440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA
Tower Business Centre, 2nd Flr		+1 712-737-8688 +1 800-842-8688
Tower Street, Swatar, BKR 4013		www.CQmedical.com
Malta		

Armshuttle, Quest a Access jsou ochranné známky společnosti Qfix.

Clorox® je registrovaná ochranná známka společnosti The Clorox Company.

Cidex® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson.

OBSAH

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	4
VAROVÁNÍ	4
ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY	4
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY	4
ÚČEL POUŽITÍ.....	5
PROVOZNÍ POKYNY	6
ÚDRŽBA.....	7
ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU	7
DEZINFEKCE SYSTÉMU	7
SEZNAM DÍLŮ	8

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

! VAROVÁNÍ ! NA TOMTO PROSTŘEDKU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. POKUD JE KTERÁKOLI ČÁST PROSTŘEDKU VYSTAVENA DEVASTUJÍCÍMU ZATÍŽENÍ, JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, IHED PŘESTAŇTE PROSTŘEDEK POUŽÍVAT A#160;KONTAKTUJTE SPOLEČNOST CQ MEDICAL NA ČÍSLE +1 712-737-8688 NEBO NA ADRESE INFO@CQMEDICAL.COM.

! VAROVÁNÍ ! NEDOVOLTE PACIENTOVI NASTAVOVAT POLOHU POMOCÍ RUKOJETÍ ARMSHUTTLE.

! VAROVÁNÍ ! NEPOUŽÍVEJTE RUKOJETI ARMSHUTTLE K NASTAVENÍ ÚHLU POVRCHU PACIENTA.

! VAROVÁNÍ ! PŘI PRVNÍM POLOHOVÁNÍ PACIENTA ZAPIŠTE VŠECHNY ÚPRAVY DO LISTU SESTAVY. LIST SESTAVY JE K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.CQMEDICAL.COM.

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Jakékoli závažné události (např. události, které mají nebo by mohly mít za následek smrt či vážné zranění) nahlase společnosti CQ Medical a příslušnému úřadu ve vaší zemi.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Na stránkách www.CQmedical.com najdete seznam symbolů a jejich definic.

ÚČEL POUŽITÍ

Tento prostředek je určený k imobilizaci, polohování a úpravě polohy pacientů podstupujících radioterapii.

! POZNÁMKA ! Podle federálního zákona USA je prodej tohoto prostředku omezen pouze na lékaře nebo na základě objednávky lékaře.

CÍLOVÉ SKUPINY PACIENTŮ

Pacienti podstupující radiační terapii nebo diagnostické zobrazovací postupy.

ZAMÝŠLENÍ UŽIVATELÉ

Zamýšleným uživatelem produktů je osoba kvalifikovaná v souladu s požadavky regulační oblasti.


PROVOZNÍ POKYNY



1



2

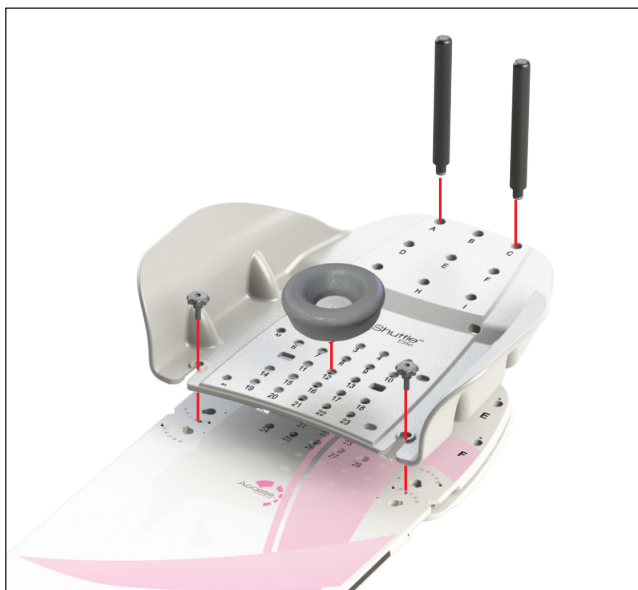

1



2

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

Zařízení lze čistit jemným roztokem neabrazivního čisticího nebo dezinfekčního prostředku. Při čištění naneste roztok na čistý hadřík a otřete jím povrch. Zařízení pohledem zkontrolujte, a pokud není čisté, opakujte výše uvedený postup čištění, dokud nebude viditelně čisté. K odstranění veškerých zbytků čisticího prostředku použijte čistou tkaninu navlhčenou vodou. K otření zařízení dosucha použijte čistou, suchou tkaninu. Následující čisticí materiály se testovaly a jsou vhodné k čištění tohoto prostředku:

- Voda
- Mýdlo a voda


DEZINFEKCE SYSTÉMU

Při dezinfekci povrchu zařízení dodržujte příslušné pokyny výrobce čisticího prostředku.

- 10% roztok bělidla Clorox®
- Izopropylalkohol
- 2,4% roztok aktivovaného dialdehydu Cidex®


SEZNAM DÍLŮ

RT-4546C

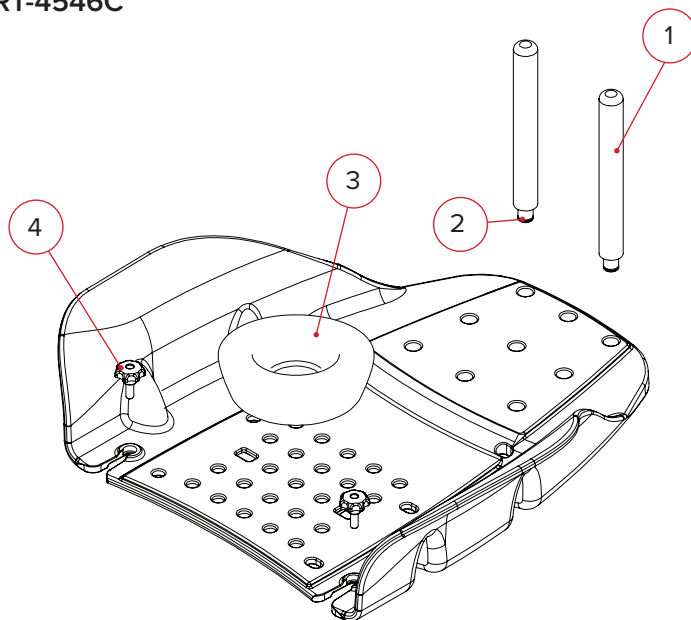

1. RT-4543PN (Držáky rukojeti)
2. 3001419 (O-kroužek)
3. RT-4546H (Pěnová opěrka hlavy)
4. 2004451 (Knoflík se závity)

RT-4543C

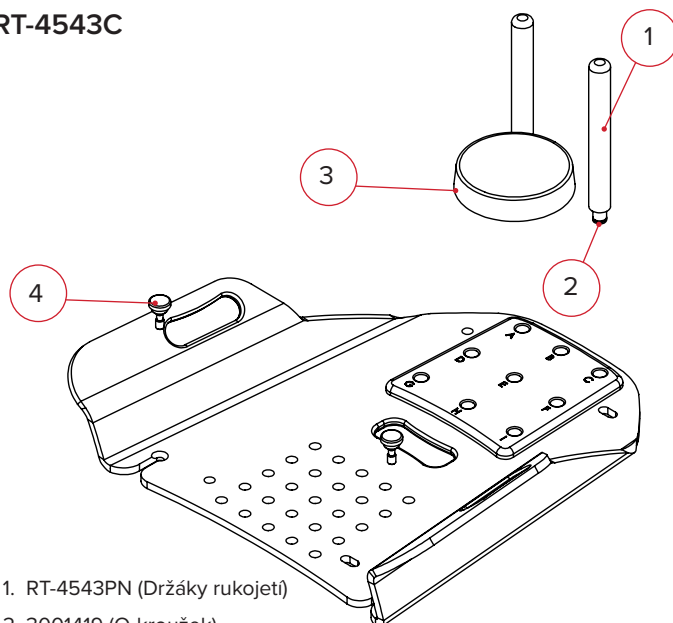

1. RT-4543PN (Držáky rukojeti)
2. 3001419 (O-kroužek)
3. 2000109 (Pěnová opěrka hlavy)
4. 2001643 (Knoflík)



440 Church Road
Avondale, Pennsylvania 19311 USA
www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com

2004227_CS_0
2025-08