

دليل المنتج ودليل المستخدم

٤٥٤٦-RT و ٤٥٤٦MRI-RT و ٤٥٤٦-RT-١ و ٤٥٤٦-RT-٢
جهاز Access™ Supine للثدي والرئة
جهاز Access™ Supine لتصوير الثدي والرئة بالرنين
المغناطيسي
جهاز Access™ Supine للثدي والرئة، من دون شبكة



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Varian Medical Systems.

ArmShuttle Elite و VacQfix و kVue و MR Secure و Access هي علامات تجارية مسجلة لشركة Qfix.

Cidex® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Johnson & Johnson.

Clorox® هي علامة تجارية مسجلة لشركة The Clorox Company.

! ملاحظة ! يشير مصطلح "Access Supine" في تعليمات الاستخدام هذه إلى جميع أجهزة Access™ Supine، بما في ذلك Access™ Supine للثدي والرئة، و Access Supine لتصوير الثدي والرئة بالرنين المغناطيسي و Access™ Supine للثدي ما لم يذكر خلاف ذلك.

الاحتياطات العامة

بيانات تحذيرية

! تحذير ! لا يُسمح بإجراء أي تعديلات على هذا الجهاز. إذا تعرض أي جزء من هذا الجهاز لحمل مدمر أو بدا تالفًا أو لا يعمل بشكل صحيح، فتوقف عن استخدامه فورًا وتواصل مع شركة CQ MEDICAL على الرقم +٨٠٠,٨٤٢,٨٦٨٨ | +٧١٢,٧٣٧,٨٦٨٨ أو عبر البريد الإلكتروني SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! تحذير ! تأكد من تثبيت مساند تعديل الزاوية في التجويف بمحاذاة المفصل قبل استخدام الجهاز. فقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى تضرر الجهاز أو حدوث إصابة.


! تحذير ! لا ترفع المساند أو تخفضها أبدًا أثناء وجود مريض على الجهاز.

! تحذير ! لا ترفع أو تحمل الجهاز أبدًا عبر الإمساك بدعامات الذراع أو المعصم.

! تحذير ! لا تسمح للمريض بتعديل الوضعية عبر استخدام مقابض نظام ARMSHUTTLE.

! تحذير ! لا تدع المريض يضبط وضعيته عبر استخدام دعائم الذراع والمعصم.

! تحذير ! لا تستخدم جهاز ARMSHUTTLE لتعديل زاوية السطح الخاص بالمريض.

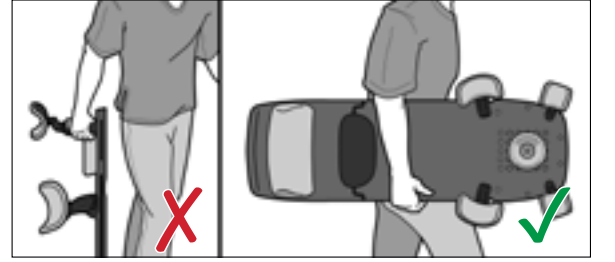

الحوادث الخطرة

يُرجى إبلاغ كل من شركة CQ Medical والجهة المختصة في بلدك بأي حوادث خطرة (على سبيل المثال الحوادث التي تؤدي أو يُحتمل أن تؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة).

مناطق انحشار

- قد تحدث مناطق الانحشار عند تعديل طول دعامة الذراع أو دعامة المعصم.
- قد تحدث مناطق الانحشار عند تعديل زاوية دعامة الذراع أو دعامة المعصم.
- قد تحدث مناطق انحشار داخل المفصل بين السطح الخاص بالمريض واللوح القاعدية.

توهين حزم العلاج الإشعاعي

صُمم جهاز The Access Supine بحيث يمكن وضع المريض في وضعية تسمح بتوجيه معظم مجالات العلاج الخلفي الأمامي (PA) مع الأشعة التي تمر عبر فتحات الرئة المدمجة في الجهاز. المناطق التركيبية لجهاز Access Supine لها مكافئ مائي يبلغ ٥ مم عند ٦ ميجا فولت. يزيد العلاج عن طريق طاولة العلاج من هذا التوهين. ويجب التحقق من التوهين الفعلي المستند إلى الإعداد باستخدام جهازك الخاص. سيؤدي العلاج عبر أي جهاز، حتى الأجهزة المصممة من مواد مركبة، إلى زيادة في جرعة الإشعاع على الجلد.

الاحتياطات العامة

معلومات السلامة في بيئة الرنين المغناطيسي

المساند الملحقة الاختيارية بزاوية ٢٠ درجة و ٢٥ درجة آمنة للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي. 

أظهرت الاختبارات غير السريرية أنه يمكن استخدام المساند الملحقة الاختيارية بزاوية ٢٠ درجة و ٢٥ درجة مع نظام التصوير بالرنين المغناطيسي وفق الشروط الآتية:

- يجب استخدام المساند مع الإصدار الآمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من Access Supine (RT - ٤٥٤٦MRI) والمميز بوضوح بالرمز الآتي قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي:



دعامات الذراع والمعصم متوافقة مع الاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي. 

أظهرت الاختبارات غير السريرية أنه يمكن استخدام دعامات الذراع والمعصم مع نظام التصوير بالرنين المغناطيسي وفق الشروط الآتية:

- يمكن وضع دعامات الذراع والمعصم داخل تجويف نظام التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يحتوي على مجال مغناطيسي ثابت قوته ١,٥ تسلا أو أقل.
- يجب استخدام دعامات الذراع والمعصم مع الإصدار الآمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من Access Supine (RT - ٤٥٤٦MRI) وفقاً للغرض من استخدامه قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.
- يتم تمييز الإصدار الآمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من جهاز Access Supine (RT - ٤٥٤٦MRI) بوضوح بالرمز الآتي:



مانع الانزلاق السفلي متوافق مع الاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي. 

أظهرت الاختبارات غير السريرية أنه يمكن استخدام مانع الانزلاق السفلي مع نظام التصوير بالرنين المغناطيسي وفق الشروط الآتية:

- يمكن وضع مانع الانزلاق السفلي داخل تجويف نظام التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يحتوي على مجال مغناطيسي ثابت قوته ١,٥ تسلا أو أقل.
- يجب استخدام مانع الانزلاق السفلي مع الإصدار الآمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من Access Supine (RT - ٤٥٤٦MRI) وفقاً للغرض من استخدامه قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.
- يتم تمييز الإصدار الآمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من جهاز Access Supine (RT - ٤٥٤٦MRI) بوضوح بالرمز الآتي:



الاحتياطات العامة


الملصقات التحذيرية ووصفها

راجع موقع CQmedical.com للاطلاع على قائمة بالرموز وتعريفاتها.



تقدير الجمل

لا تتجاوز ٢٤٩ كجم (٥٥٠ رطلاً) من الحمل الموزع بالتساوي أو أقصى حمل آمن لتشغيل ملحق kVue أو قاعدة سرير الاستلقاء، أيهما أقل.

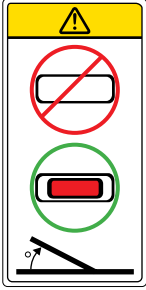

تحذير بخصوص المساند

عند استخدام Access Supine بزاوية، تأكد من تثبيت المسند في مكانه ومن ظهور أطراف المسند الحمراء من أعلى الجهاز.

إذا استُخدم جهاز Access Supine بزاوية من دون تثبيت المسند في مكانه، فقد يتضرر الجهاز أو يسبب حدوث إصابة.



آمن للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي

عنصر لا يشكل أي مخاطر معروفة ناتجة عن التعرض لأي بيئة رنين مغناطيسي. وتتكون العناصر الآمنة للاستخدام في بيئة الرنين المغناطيسي من مواد غير موصلة للكهرباء وغير معدنية وغير مغناطيسية.

! ملاحظة ! لمهايئ MRI-RT ٤٥٤٦ فقط.

الاستخدام المقصود

يهدف هذا الجهاز إلى تثبيت المرضى الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي وتحديد موضعهم وتغييره.
! ملاحظة ! يقصر القانون الفيدرالي للولايات المتحدة بيع هذا الجهاز على الأطباء أو بطلبٍ منهم.

مجموعات المرضى المستهدفة

المرضى الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي أو إجراءات التصوير التشخيصي.

المستخدمون المستهدفون

المستخدم المستهدف للمنتجات هو شخص مؤهل وفق متطلبات المنطقة التنظيمية.




الميزات

الوصف

ينبغي استخدام Access Supine مع قضيتي تحديد موضع مزودين بمسمارين (٢)، مثل ٤٥٥١BAR-RT، لتثبيته بأمان على السطح السريري الداعم الخاص بالمحاكاة أو العلاج. هذان القضيبان غير مدرجين مع جهاز Access Supine، ويجب شراؤهما بشكل منفصل من الشركة المصنعة للسطح السريري الداعم.

يستخدم جهاز Access Supine دعامات ذراع (١-٤٥٤٦AA-RT) ودعامات معصم (١-٤٥٤٦AW-RT) اختيارية لحمل الجزء العلوي من الذراعين والمعصمين في وضعية يمكن تكرار العلاج من خلالها. يمكن استخدام (٤٥٤٦C-ArmShuttle™ RT) اختياريًا بدلاً من دعامة الذراع والمعصم.

المكونات

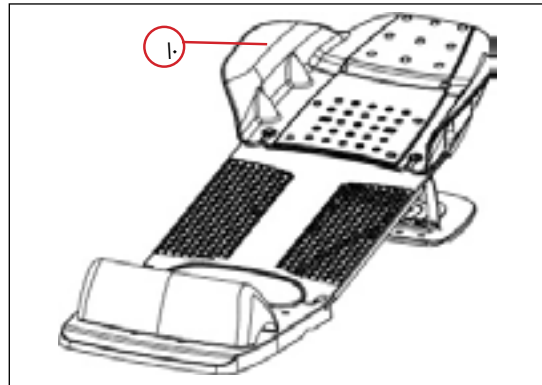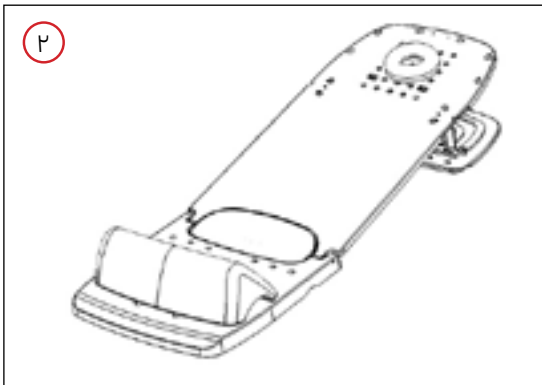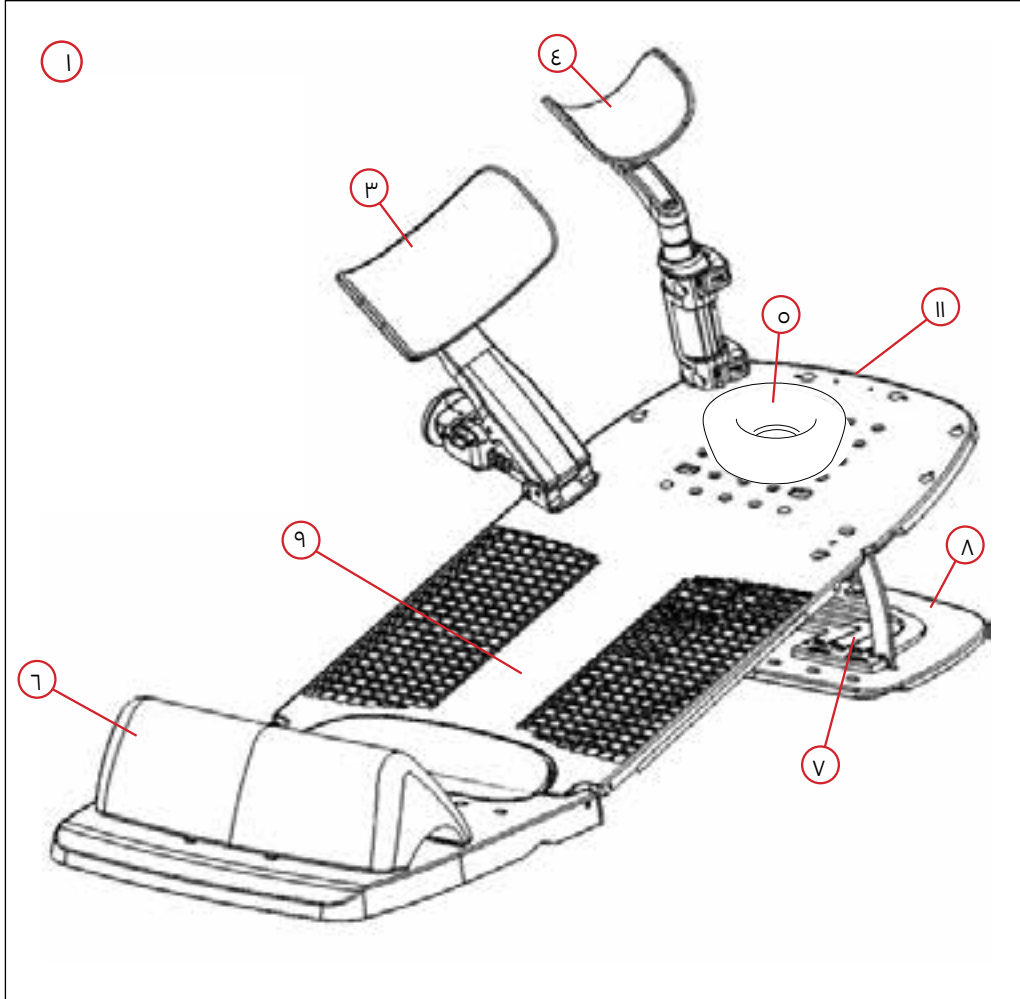

الميزات

المكونات

١. جهاز ACCESS SUPINE للثدي والرتة، وجهاز ACCESS SUPINE للثدي، وجهاز ACCESS SUPINE للثدي والرتة، من دون شبكة

يُستخدم جهاز Access Supine للمساعدة على ضبط وضعية المرضى ممن يخضعون للعلاج الإشعاعي للثدي والرتتين وإعدادهم.

٢. جهاز ACCESS SUPINE لتصوير الثدي والرتة بالرنين المغناطيسي

يعمل جهاز Access Supine للتصوير بالرنين المغناطيسي (أبيض اللون) بآلية عمل جهاز Access Supine نفسها، لكن قد يتم استخدامه مع التصوير بالرنين المغناطيسي.

٣. دعامة الذراع

تحتوي دعامات الذراع على نطاق تعديل كامل لوضع الجزء العلوي من ذراعي المريض بشكل صحيح خلال المحاكاة والعلاج.

٤. دعامة المعصم

دعامات المعصم قابلة للتعديل بحيث تدعم معصمي المريض خلال المحاكاة والعلاج.

٥. مسند الرأس

يمكن وضع مسند الرأس الذي يتضمنه الجهاز في مواضع مختلفة (مُسَمَّاة من ١ إلى ٢٨) على Access Supine. توجد مساند رأس اختيارية متاحة، تشمل مساند رأس من الهلام كبيرة وصغيرة ومسند رأس TIMO B.

٦. مانع الانزلاق السفلي

يحافظ مانع الانزلاق السفلي ذو فتحات التثبيت الذي يتضمنه الجهاز على ضبط وضعية المريض الصحيحة من خلال المساعدة على منع انزلاق المريض من Access Supine.

٧. مساند تعديل الزاوية

تتيح مساند تعديل الزاوية إمكانية تحريك رأس المريض وجذعه بزوايا عمودية تبلغ ٠ و ٧,٥ و ١٠ و ١٢,٥ و ١٥ درجة. يتيح المساندان الملحقان الاختياريان إمكانية تحريك رأس المريض وجذعه بزاوية عمودية تبلغ ٢٠ أو ٢٥ درجة.

٨. اللوحة القاعدية

توفر اللوحة القاعدية نقاط تثبيت لمساند تعديل الزاوية ومانع الانزلاق السفلي، وتتيح التثبيت الآمن على السطح السريري الداعم الخاص بالمحاكاة أو العلاج.

٩. السطح الخاص بالمريض

السطح الخاص بالمريض هو جزء الجهاز القابل للتعديل بزاوية ٠ إلى ١٥ درجة للعلاج.

١٠. جهاز ARMSHUTTLE ELITE

يمكن استخدام جهاز ArmShuttle Elite بدلاً من مساند الذراع لضبط وضعية ذراع المريض خلال المحاكاة والعلاج. يُستخدم هذا عادة مع وسادة VacQfix™.

١١. قفل التحرير

يثبت قفل التحرير السطح الخاص بالمريض في اللوحة القاعدية.

تعليمات التشغيل

التركيب


تركيب جهاز ACCESS SUPINE

١. أدخل أطراف قضبي تحديد الموضع في فتحات التثبيت المتوافقة مع Varian Exact® المناسبة الموجودة على السطح السريري الداعم أو الجهاز، بحيث تكون المسافة بينهما ٧٠٠ مم (عادةً ٥ فتحات)، وثبت قضبي تحديد الموضع في مكانهما. (الشكل ١)


٢. اضبط وضع جهاز Access Supine فوق قضيب تحديد الموقع بحيث تكون الفتحات في اللوحة القاعدية محاذية للمسمارين في قضبي تحديد الموضع. (الشكل ٢)

٣. اضغط على جهاز Access Supine إلى الأسفل إلى قضيب تحديد الموضع لتثبيته في مكانه. (الشكل ٣)


! ملاحظة ! يمكن إزاحة جهاز Access Supine إلى أحد الجانبين لضبط مسافة الورم بقرب مركز التساوي على النحو المرغوب فيه.

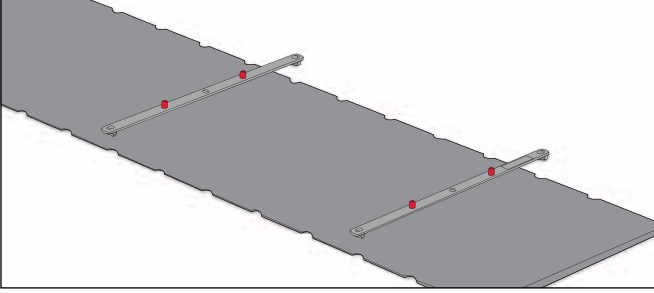

الشكل ١

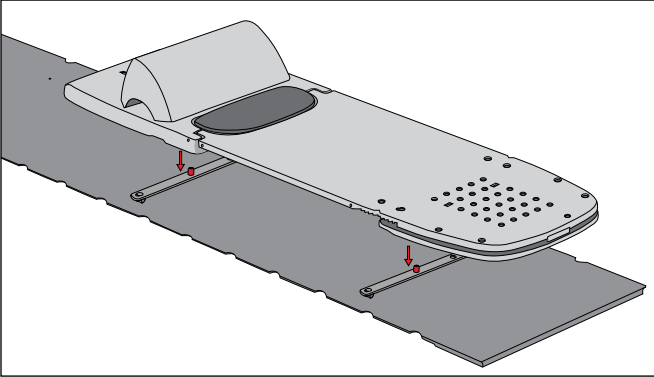

الشكل ٢

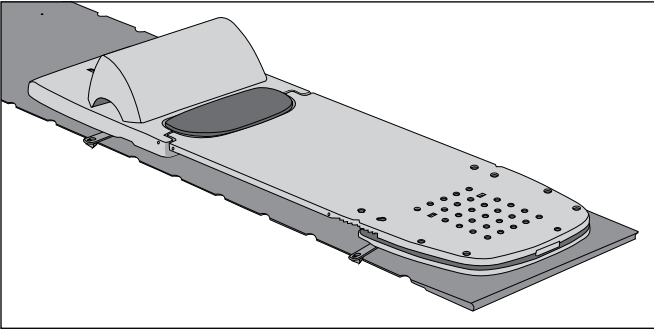

الشكل ٣

تعليمات التشغيل

الإعداد

زاوية المريض

! تنبيه ! عند استخدام ACCESS SUPINE بزاوية، تأكد من أن مساند تعديل الزاوية مثبتة في اللوحة العلوية، وأن الأطراف الحمراء ظاهرة من أعلى الجهاز. إذا لم تثبت مساند تعديل الزاوية بشكل صحيح، فقد تنجم عن ذلك إصابة المريض و/أو تضرر الجهاز.



الشكل ٤

١. اضغط على قفل التحرير لفتحه. (الشكل ٤)

٢. ارفع السطح الخاص بالمريض، وارفع مسند تعديل الزاوية في مكانه. (الشكلان ٥ و ٦)


٣. اخفض السطح الخاص بالمريض حتى يتم تثبيت مساند تعديل الزاوية في الفتحات. بمجرد تثبيتها، ستكون الأطراف الحمراء ظاهرة من السطح الخاص بالمريض. (الشكل ٧)



الشكل ٥



الشكل ٦

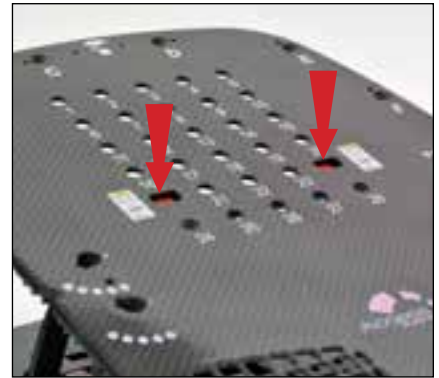

الشكل ٧


! ملاحظة ! لتركيب المسندين الملحقين الاختياريين بزاوية ٢٠ أو ٢٥ درجة، أدخل أحدهما في الفتحات في مفصل مسند تعديل الزاوية. (الشكل ٨)




الشكل ٨

مسند الرأس

رُكِّب مسند الرأس في أحد المواضع المتاحة (١-٢٨) في الطرف العلوي للسطح الخاص بالمريض. (الشكلان ٩ و ١٠)

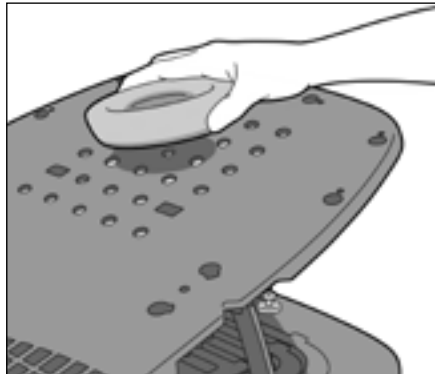

الشكل ٩

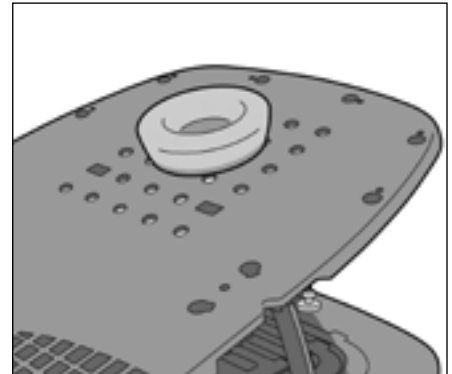

الشكل ١٠

تعليمات التشغيل

الإعداد

دعامة الذراع


١. لتثبيت دعامة الذراع، فك المقبض وأدخلها في أحد الموضعين (محددان بعلامة "X" و"Y"). اربط المقبض لتثبيت دعامة الذراع في السطح الخاص بالمريض. (الشكل ١١)

٢. لتعديل دوران دعامة الذراع، فك المقبض وأدر دعامة الذراع إلى الموقع المرغوب فيه وثبت المقبض. (الشكل ١٢)


! تنبيه ! لا تحكم الربط بشدة.

٣. لتعديل الارتفاع، اضغط على الزر الموجود في شريط تمرير الارتفاع وحركه بطول الذراع، وحرر الزر بمجرد الوصول إلى الموضع المطلوب. (الشكل ١٣)


٤. لتعديل طول الذراع، اضغط على الزر الموجود في شريط تمرير الطول وحركه بطول الذراع، وحرر الزر بمجرد الوصول إلى الموضع المطلوب. (الشكل ١٤)

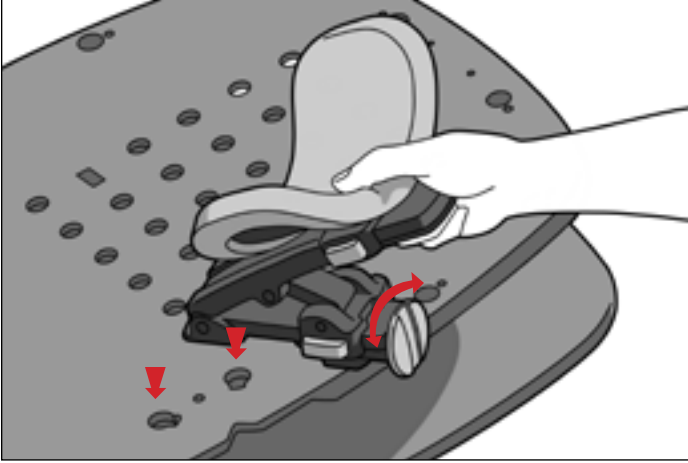


الشكل ١١

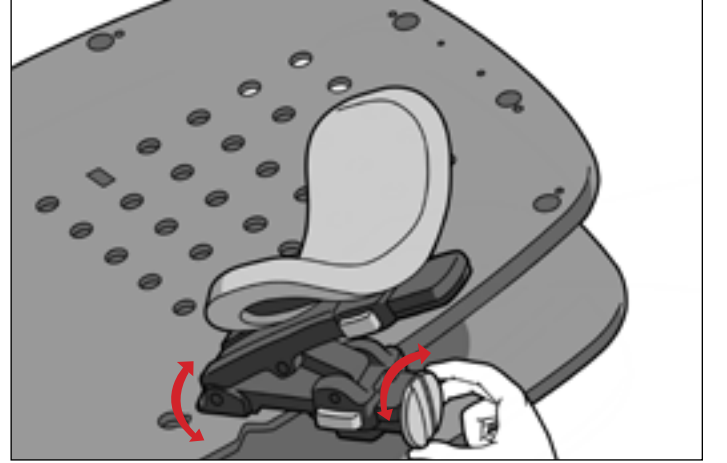

الشكل ١٢

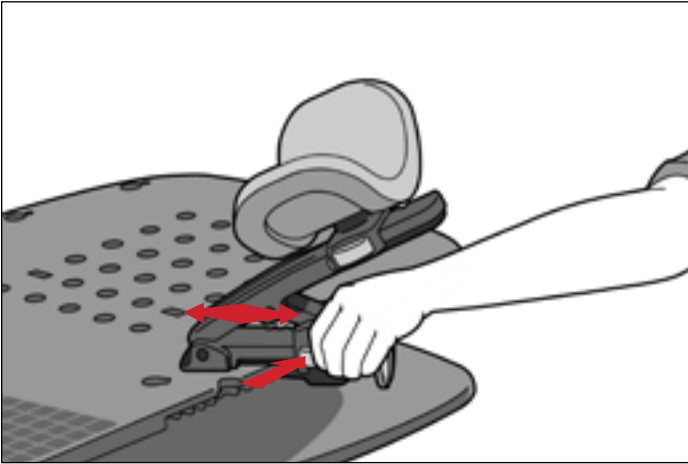

الشكل ١٣

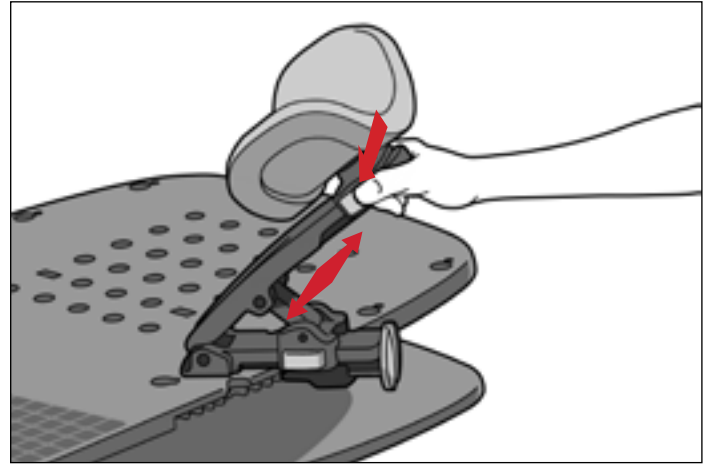

الشكل ١٤


تعليمات التشغيل

الإعداد دعامة المعصم


١. لتثبيت دعامة المعصم، قم بمحاذاة الوتدين في أسفل دعامة المعصم مع الثقوب المقابلة في السطح الخاص بالمريض. (الشكل ١٥)

٢. أغلق الذراع السفلي لتثبيته في مكانه. (الشكل ١٦)


٣. لرفع حاوية دعامة المعصم أو خفضها، افتح الذراع العلوي. ارفع الحاوية أو اخفضها أو أدبرها إلى الوضع المرغوب فيه وأغلق الذراع العلوي. (الشكل ١٧ والشكل ١٨)

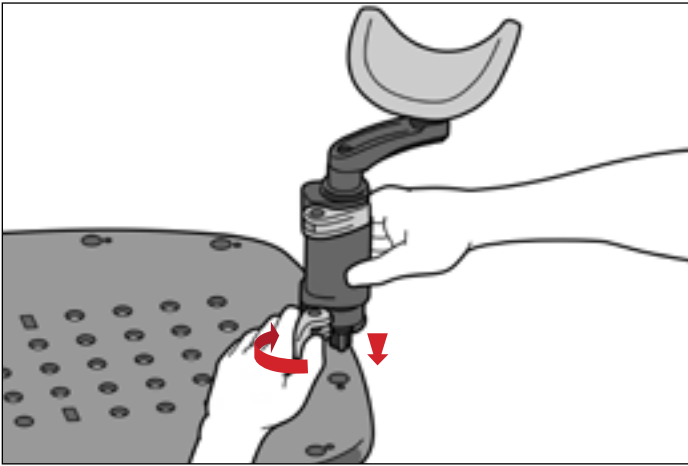


الشكل ١٥

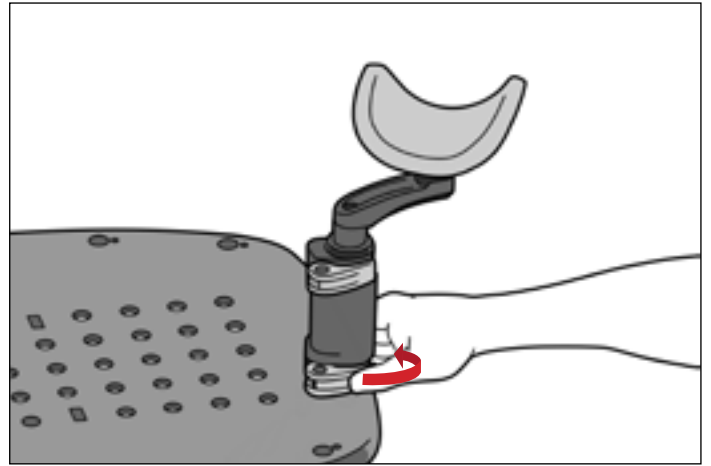

الشكل ١٦

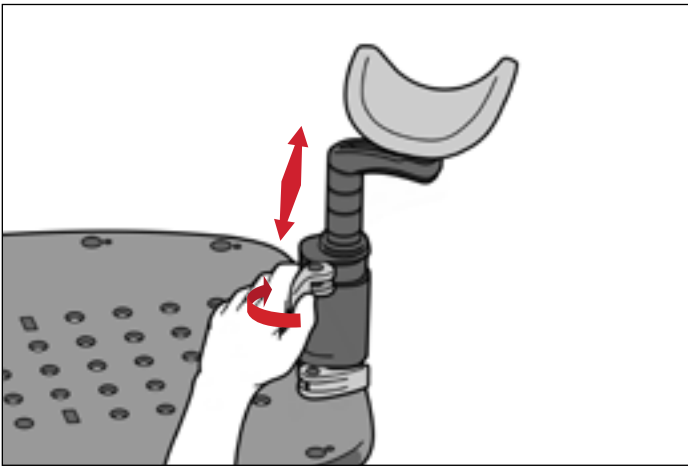

الشكل ١٧

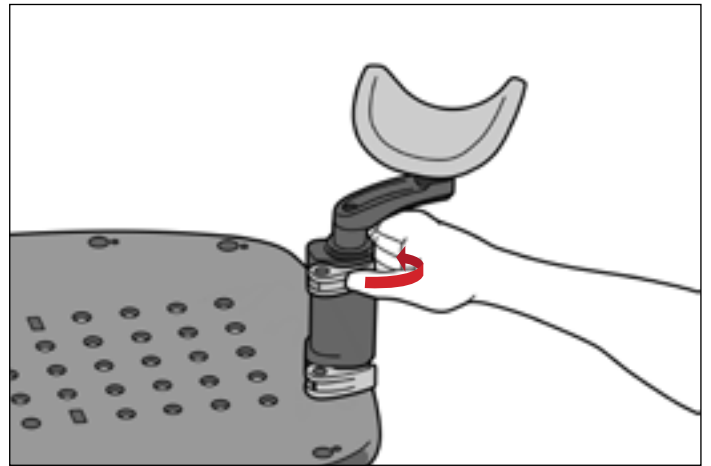

الشكل ١٨

تعليمات التشغيل

الإعداد

مانع الانزلاق السفلي

١. اضبط وضع مانع الانزلاق السفلي بحيث يواجه الجانب المنحني السطح الخاص بالمريض، ثم أدخله في الفتحة الموجودة أسفل الفتحات. (الشكل ١٩)
 ٢. بمجرد التثبيت في اللوحة القاعدية، يمكن ضبط وضع مانع الانزلاق السفلي عبر الضغط عليه إلى الأعلى (سيتحرك مانع الانزلاق السفلي في هذا الاتجاه). (الشكل ٢٠)
 ٣. لتحريك مانع الانزلاق السفلي نحو الأسفل، ارفعه قليلاً، ثم حركه إلى الخلف إلى الموضع المرغوب فيه. (الشكل ٢١)
- ! ملاحظة ! يوضح الشكل ٢٢ مواضع فتحات التثبيت لمانع الانزلاق السفلي وقضيب تحديد الموضع.




الشكل ١٩



الشكل ٢٠



الشكل ٢١

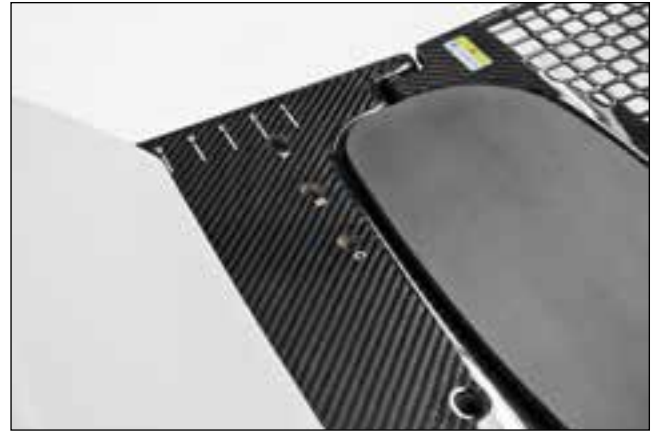

الشكل ٢٢

تعليمات التشغيل


الإعداد

جهاز ARMSHUTTLE ELITE


! ملاحظة ! جهاز ArmShuttle بديل لدعامات الذراع والمعصم. راجع دليل المنتج ودليل المستخدم لجهاز P/N Armshuttle (٢٠٠٤٢٢٧) للحصول على تعليمات التشغيل وميزات المنتج والمواصفات والتحذيرات والتنبيهات والاحتياطات العامة الأخرى المتعلقة باستخدام جهاز Armshuttle.

١. أزل دعامة (دعامات) الذراع عبر فك المقيض، وأدر دعامة الذراع حتى تكون محاذية لفتحات التثبيت في جانب السطح الخاص بالمريض ثم اسحب دعامة الذراع خارج ثقب السطح الخاص بالمريض. (الشكل ٢٣)
٢. أزل دعامة (دعامات) المعصم عبر فتح الرافعة السفلية واسحب دعامة المعصم خارج ثقب السطح الخاص بالمريض. (الشكل ٢٤)
٣. ضع ArmShuttle أعلى Access Supine، عبر محاذاة ثقب مقبض التثبيت مع الثقوب الملونة الموجودة بين مواضع دعامة الذراع في Access Supine. (الشكل ٢٥)
٤. ثبت ArmShuttle بمقابض التثبيت، عبر تدويرهما مع اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيتها بإحكام. (الشكل ٢٥)


! ملاحظة ! يوضح الشكل ٢٦ الإعداد المكتمل.

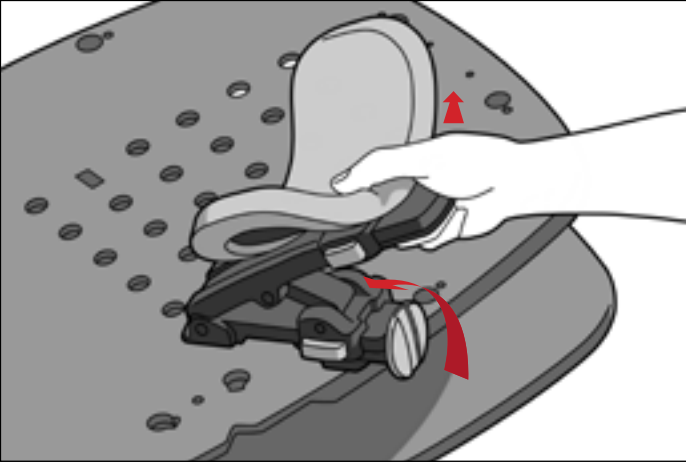

الشكل ٢٣

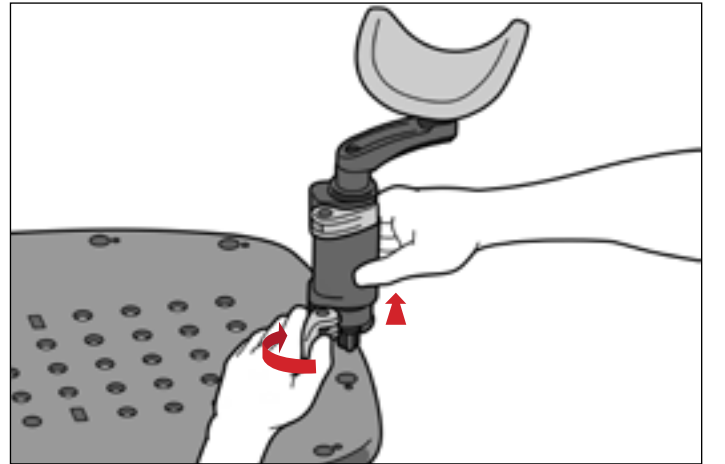

الشكل ٢٤

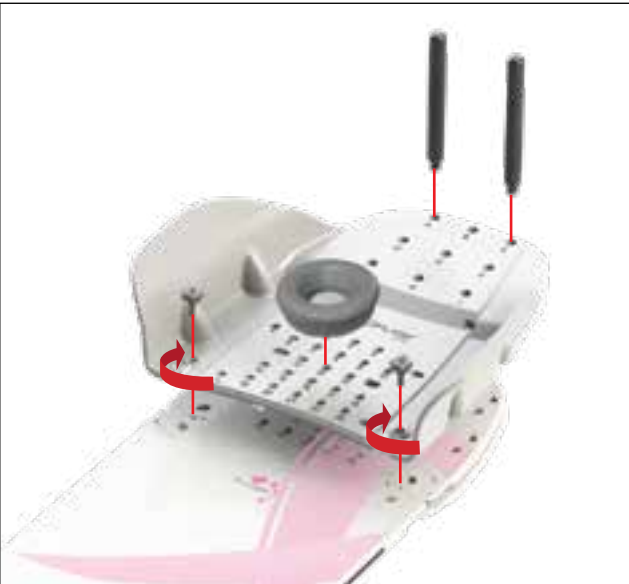

الشكل ٢٥



الشكل ٢٦

تعليمات التشغيل

الفك

جهاز ARMSHUTTLE ELITE

١. أزل المقابض التي تُثبت ArmShuttle عبر تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة.
٢. أعد الخطوة ١ في الجانب المقابل.
٣. ارفع ArmShuttle عن السطح الخاص بالمريض.

مانع الانزلاق السفلي

١. حرّك مانع الانزلاق السفلي نحو الأسفل عبر رفعه قليلاً، ثم تحريكه إلى الخلف إلى موضع الفك.
٢. ارفع مانع الانزلاق السفلي من اللوحة القاعدية.

دعامة الذراع

أرخ المقبض، قم بتدوير دعامة الذراع حتى تكون في محاذاة فتحات التثبيت في جانب السطح الخاص بالمريض ثم اسحب دعامة الذراع خارج ثقب السطح الخاص بالمريض.

دعامة المعصم

افتح الذراع السفلي واسحب دعامة المعصم خارج ثقب السطح الخاص بالمريض.

مسند الرأس

ارفع مسند الرأس حتى تتم إزالته من ثقب تحديد الموقع.

ACCESS SUPINE

١. ارفع السطح الخاص بالمريض، واخفض مسند تعديل الزاوية حتى يكون مستويًا على اللوحة القاعدية.
٢. اخفض السطح الخاص بالمريض حتى تسمع صوت تثبيته في اللوحة القاعدية.
٣. ارفع جهاز Access Supine عن قضبي تحديد الموقع.
٤. ارفع طرفي قضبي تحديد الموقع لإزالتها من السطح السريري الداعم.

الصيانة

تنظيف النظام

يمكن تنظيف الجهاز باستخدام محلول تنظيف أو تعقيم خفيف وغير كاشط. للتنظيف، ضع المحلول على قطعة قماش نظيفة وامسح السطح. افحص الجهاز بصرياً، وإذا لم يكن نظيفاً، فكرر خطوات التنظيف السابقة حتى يصبح نظيفاً. استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء لمسح الجهاز لإزالة أي بقايا من مادة التنظيف. لتجفيف الجهاز، امسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة. خضعت مادة التنظيف الآتية للاختبار وثبتت ملائمتها لتنظيف الجهاز.

- الماء
- الماء والصابون

تعقيم النظام

لتعقيم سطح الجهاز، يُرجى اتباع التعليمات الخاصة بالشركة المُصنعة لمادة التنظيف.


- محلول مبيض Clorox® بتركيز ١٠٪
- كحول الأيزوبروبيل
- محلول ثنائي ألدهيد نشط Cidex® بتركيز ٢,٤٪

افحص جميع أدوات التثبيت بشكل دوري للتأكد من إحكام ربطها.


الصيانة

استبدال العلامة الجانبية

١. أزل ملصق العلامات الجانبية الموجودة، بما في ذلك جميع بقايا المادة اللاصقة.
 ٢. قشّر الجزء الورقي من الملصق الجديد.
 ٣. قم بمحاذاة علامة المحاذاة في منتصف المقياس الجانبي مع علامة التسجيل الموجودة على السطح الخاص بالمريض، والحافة السفلية للملصق أعلى الحافة السفلية للسطح الخاص بالمريض مباشرة. يجب أن يكون العدد صفر في نهاية رأس الجهاز. (الشكلان ٢٧ و ٢٨)
 ٤. اضغط بقوة على الملصق بالكامل داخل جانب الجهاز.
 ٥. كرر الخطوات في الجانب الآخر، عند الحاجة.
- ! ملاحظة ! لا تضع الملصق في منطقة نصف قطر السطح الخاص بالمريض، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقشير الملصق.

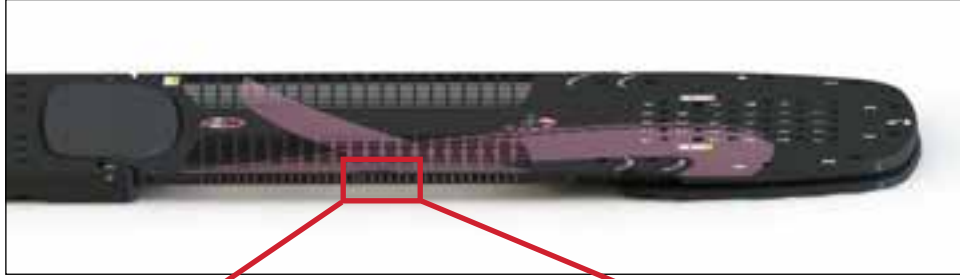

الشكل ٢٧

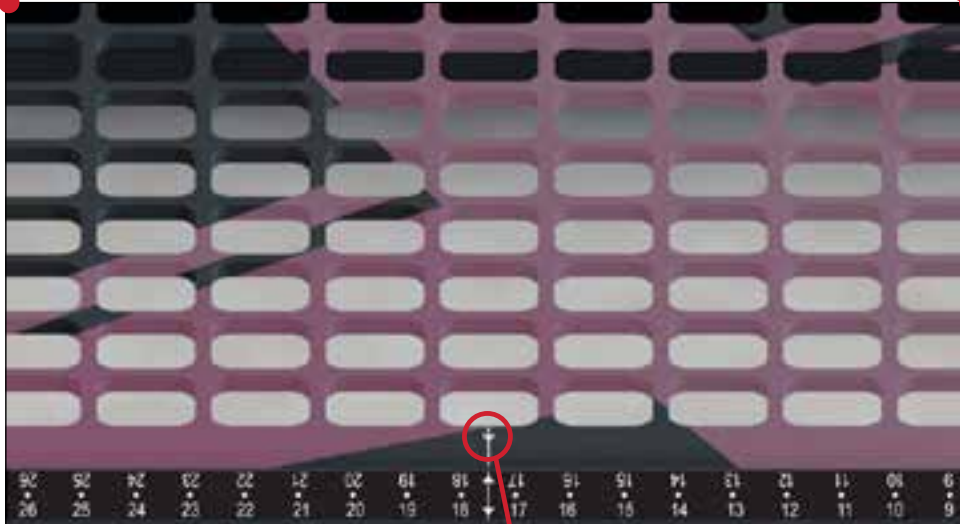

الشكل ٢٨

علامة التسجيل


المواصفات

الأبعاد


الطول (L): ١٣٧٤ مم

الحد الأقصى للوزن: ٢٤٩ كجم (٥٥٠ رطلاً) من الحمل الموزع بالتساوي

المكافئ المائي: ملاحظة: لا ينطبق إلا على ٤٥٤٦-RT Access™ Supine – للثدي والرئة:
٣ مم عند ٦ ميجا فولت في مناطق العلاج

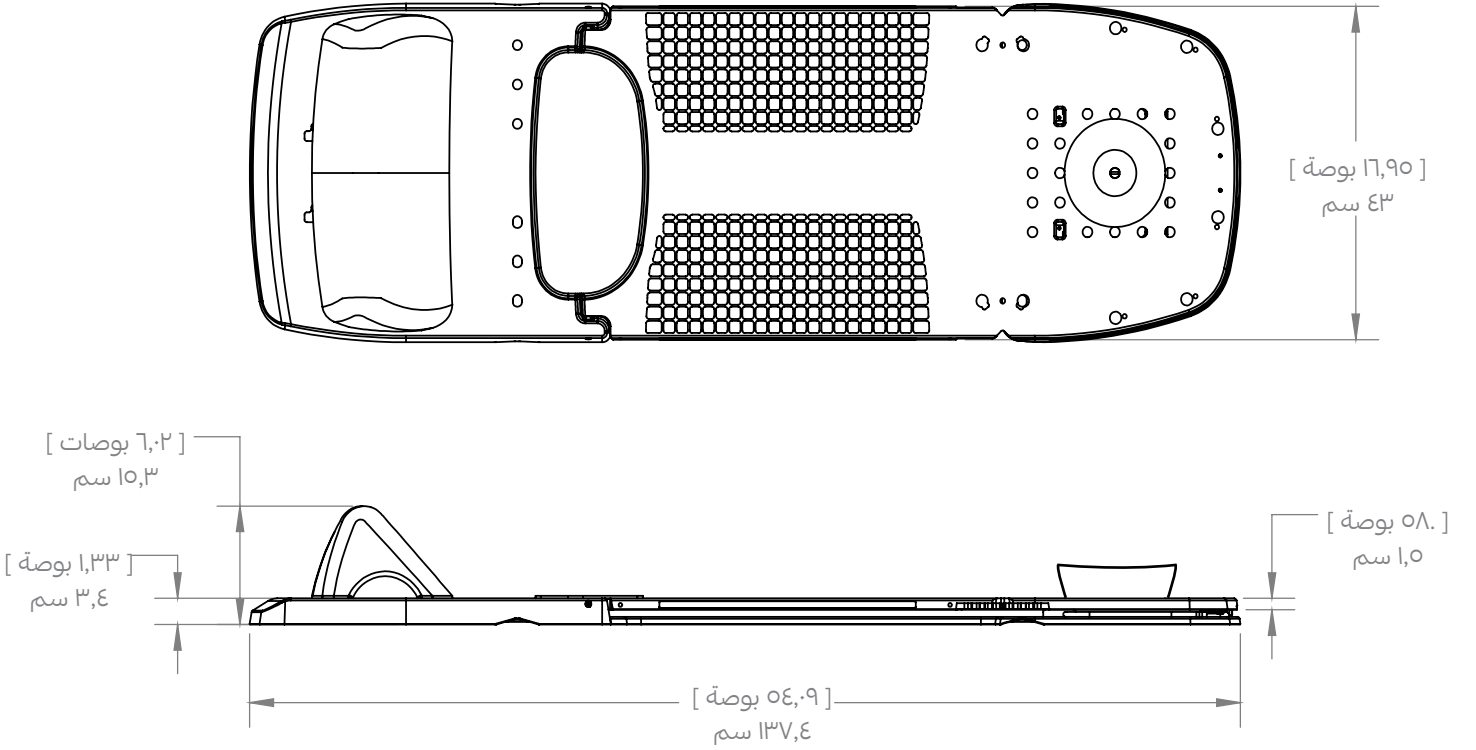

قائمة الأجزاء

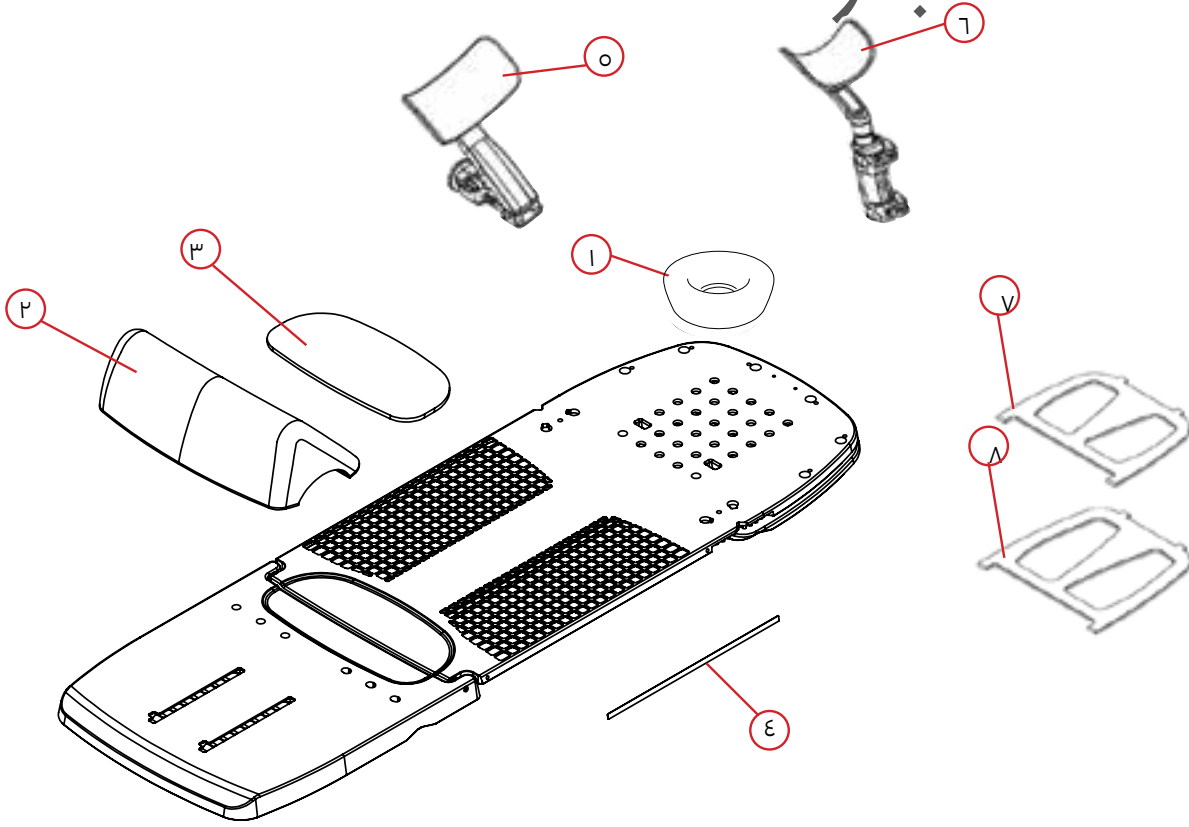

٢-٤٥٤٦-RT و ١-٤٥٤٦-RT و ٤٥٤٥MRI-RT و ٤٥٤٦-RT

١. ٤٥٤٦H-RT – مسند الرأس الإسفنجي
٢. ٢٠٠٤٠٣٤ – مجموعة مانع الانزلاق السفلي الإسفنجية
٣. ٢٠٠٤٠٤٧ – وسادة منطقة العصص
٤. ٢٠٠٤٣٩٢ – ملصق العلامة الجانبية (١ لكل جانب)

١-٤٥٤٦AA-RT

٥. ٢٠٠٥٣٥٣ – وسادة حاوية الذراع الإسفنجية، تُلف حول الذراع

١-٤٥٤٦AW-RT

٦. ٢٠٠٥٣٨٦ – وسادة حاوية المعصم الإسفنجية، تُلف حول الذراع

٤٥٤٦L-RT

٧. ٢٠٠٤١٢١ – مسند ملحوق، ٢٠ درجة
٨. ٢٠٠٤١٢٢ – مسند ملحوق، ٢٥ درجة

ورقة بيانات الإعداد

٤٥٤٦-RT: جهاز Access Supine للثدي والرئة، ٤٥٤٦MRI-RT: جهاز Access Supine لتصوير الثدي والرئة بالرنين المغناطيسي، ٤٥٤٦-RT: جهاز Access Supine للثدي أو ٢-٤٥٤٦-RT: جهاز Access Supine للثدي والرئة، من دون شبكة

اسم المريض:


الرقم التعريفي للمريض:

تم الإعداد بواسطة:

الطبيب:

التاريخ:

التعليقات:

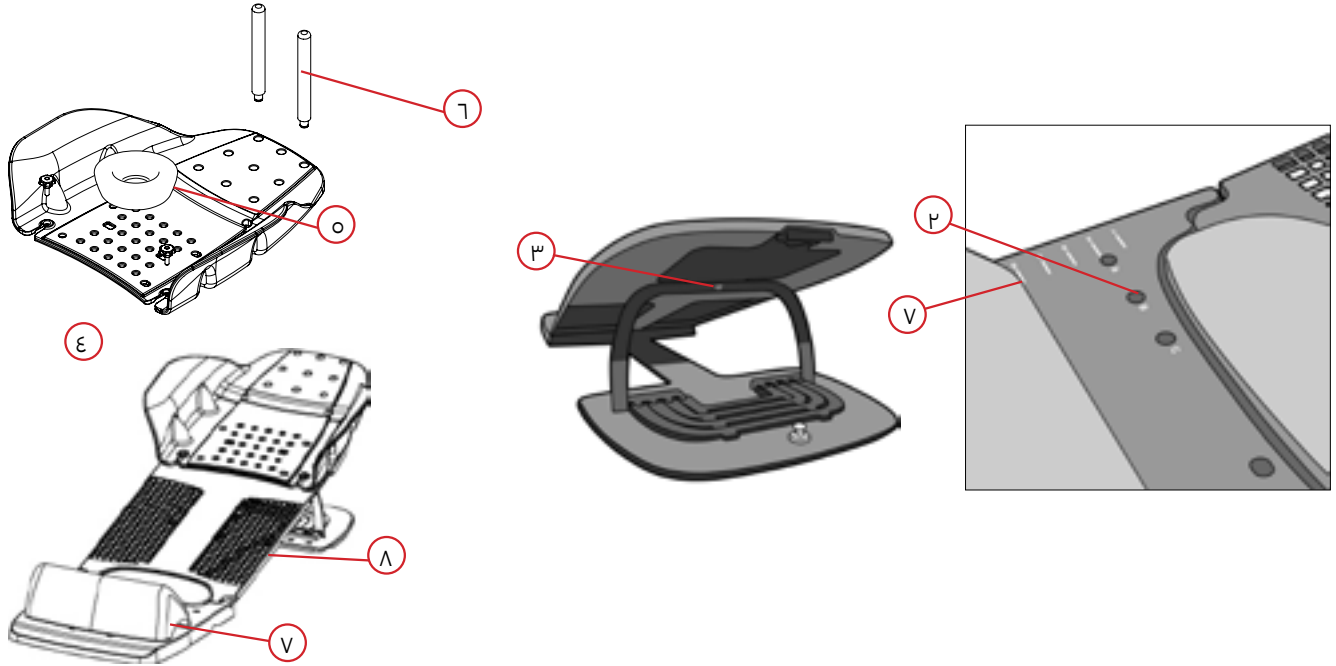

١. هل تم تثبيت في طاولة المحاكاة أو العلاج؟ **نعم** لا إذا كانت نعم، فإعداد فتحة التثبيت هو

٢. موضع مسمار قضيب تحديد الموضع (حدّد خيارًا واحدًا): **A B C**

٣. زاوية السطح الخاص بالمريض (حدّد خيارًا واحدًا): **٠ ٥ ١٠ ١٢,٥ ١٥ ٢٠ ٢٥**

٤. تم الاستخدام مع جهاز ArmShuttle: **نعم** لا

٥. موضع مسند الرأس (رقم ١-٣٨):

٦. موضع عمود (أعمدة) اليد (اختر الأعمدة المستخدمة)

٧. هل تم استخدام مانع الانزلاق السفلي؟ **نعم** لا **A B C D E F G H I**

لم يتم استخدام أي عمود إذا كانت الإجابة نعم، فما الإعداد؟ (رقم ١-٨)

٨. موضع علامة الليزر الجانبية:

ورقة بيانات الإعداد

٤٥٤٦-RT: جهاز Access Supine للثدي والرئة، ٤٥٤٦MRI-RT: جهاز Access Supine لتصوير الثدي والرئة بالرنين المغناطيسي، ٤٥٤٦-RT أو ٢-٤٥٤٦-RT: جهاز Access Supine للثدي والرئة، من دون شبكة

اسم المريض:

الرقم التعريفي للمريض:

تم الإعداد بواسطة:

الطبيب:

التاريخ:

التعليقات:



١. هل تم تثبيت في طاولة المحاكاة أو العلاج؟ نعم لا إذا كانت نعم، فإعداد فتحة التثبيت هو

٢. موضع مسمار قضيب تحديد الموضع (حدّد خيارًا واحدًا): A B C

٣. زاوية السطح الخاص بالمريض (حدّد خيارًا واحدًا): ٠ ٥ ٧,٥ ١٠ ١٢,٥ ١٥ ٢٠ ٢٥

٤. موضع وزاوية دعامات الذراع (حدّد خيارًا واحدًا) —

جهة المريض اليسرى: X Y ٣٠ ١٥ ٠ ١٥ ٣٠ ٣٠ ١٥ ٠

جهة المريض اليمنى: X Y ٣٠ ١٥ ٠ ١٥ ٣٠ ٣٠ ١٥ ٠

٥. ارتفاع دعامات الذراع (رقم ١-٨): جهة المريض اليسرى جهة المريض اليمنى

٦. طول دعامات الذراع (حدّد خيارًا واحدًا): جهة المريض اليسرى: A B C جهة المريض اليمنى: A B

٧. موضع دعامات المعصم (من الحرف A إلى H): جهة المريض اليسرى جهة المريض اليمنى

٨. زاوية دعامات المعصم:

جهة المريض اليسرى: ٠ ٤٥ ٩٠ ١٣٥ ١٨٠ ٢٢٥ ٢٧٠ ٣١٥

جهة المريض اليمنى: ٠ ٤٥ ٩٠ ١٣٥ ١٨٠ ٢٢٥ ٢٧٠ ٣١٥

٩. ارتفاع دعامات المعصم (من الحروف W إلى Z): جهة المريض اليسرى جهة المريض اليمنى



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com