



ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RT-4546, RT-4546MRI, RT-4546-01 и RT-4546-02

Access™ Supine Гърди и бял дроб

Access™ Supine MR Гърди и бял дроб

Access™ Supine Гърди

Access™ Supine Гърди и бял дроб, без решетка



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Exact® е регистрирана търговска марка на Varian Medical Systems.

Access, MR Secure, kVue, VacQfix и ArmShuttle Elite са търговски марки на Qfix.

Cidex® е регистрирана търговска марка на Johnson & Johnson.

Clorox® е регистрирана търговска марка на The Clorox Company.

! ЗАБЕЛЕЖКА! В тези инструкции за употреба „Access Supine“ се отнася за всички устройства Access™ Supine, включващи Access™ Supine Гърди и бял дроб, Access Supine MR Гърди и бял дроб и Access™ Supine Гърди, ако не е посочено друго.

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ СА РАЗРЕШЕНИ МОДИФИКАЦИИ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ. АКО НЯКОЯ ЧАСТ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ БЪДЕ ПОДЛОЖЕНА НА ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ, ИЗГЛЕЖДА ПОВРЕДЕНА ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО, ПРЕКРАТЕТЕ НЕЗАБАВНО УПОТРЕБАТА И СЕ СВЪРЖЕТЕ С CQ MEDICAL НА ТЕЛЕФОН +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ИЛИ НА SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НАКЛАНЯЩИТЕ СЕ ПОДПОРИ СА ЗАКРЕПЕНИ В ЖЛЕБА ПО ДЪЛЖИНАТА НА ШАРНИРА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО. АКО НЕ СА ЗАКРЕПЕНИ, УСТРОЙСТВОТО МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЕДИ ИЛИ ДА СТАНЕ ПРИЧИНА ЗА НАРАНЯВАНЕ.


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГА НЕ ВДИГАЙТЕ И НЕ СПУСКАЙТЕ ПОДПОРИТЕ, ДОКАТО ПАЦИЕНТЪТ Е ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГА НЕ ПОВДИГАЙТЕ И НЕ НОСЕТЕ УСТРОЙСТВОТО, КАТО ГО ДЪРЖИТЕ ЗА ОПОРИТЕ ЗА РЪКА И КИТКА.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ПАЦИЕНТА ДА РЕГУЛИРА ПОЗИЦИЯТА ЧРЕЗ ДРЪЖКИТЕ ARMSHUTTLE.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ПАЦИЕНТА ДА РЕГУЛИРА ПОЗИЦИЯТА ЧРЕЗ ОПОРИТЕ ЗА РЪКА И КИТКА.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ARMSHUTTLE ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ПАЦИЕНТА.

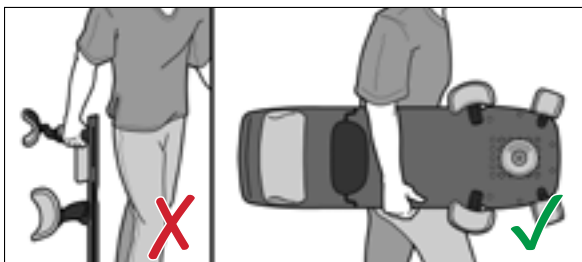

СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

Моля, докладвайте за сериозни инциденти (например инциденти, които могат или има вероятност да станат причина за смърт или сериозно нараняване) както на CQ Medical, така и на компетентния орган във Вашата държава.

ЗОНИ НА ЗАХВАЩАНЕ

- При регулиране на височината на опората за ръка или опората за китка може да се създадат зони на захващане.
- При регулиране на ъгъла на опората за ръка или опората за китка може да се създадат зони на захващане.
- Възможно е да се получат зони на захващане в шарнира между повърхността за пациента и основната планка.

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОТСЛАБВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛЪЧ

Access Supine е проектиран така, че пациентът да може да бъде позициониран по начин, по който повечето задно-предни (РА) полета за лечение да могат да бъдат подредени, като лъчът преминава през прорезите на устройството за бял дроб. Структурните участъци на Access Supine имат воден еквивалент 5 mm при 6 MV. Лечението през медицинската маса ще увеличи това отслабване. Трябва да се провери действителното отслабване въз основа на разположението при вашето конкретно оборудване. Лечението през каквото и да е устройство, дори изработено от композитен материал, ще доведе до повишена кожна доза.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЯМР

 Допълнителните подпори на 20 градуса и на 25 градуса са безопасни при МР.

Неклинично тестване е показало, че допълнителните подпори на 20 градуса и на 25 градуса могат да се използват в системата за МР, отговаряща на следните условия:

- Подпорите трябва да се използват с вариант на Access Supine (RT-4546MRI), който е безопасен при МР, ясно обозначен със следния символ преди МР сканиране:



 Опорите за ръка и китка са безопасни за МР при определени условия.

Неклинично тестване е показало, че опорите за ръка и китка могат да се използват в системата за МР, отговаряща на следните условия:

- Опорите за ръка и китка могат да се поставят в отвора на системата за МР със статично магнитно поле от 1,5 Т или по-малко.
- Опорите за ръка и китка трябва да се използват с безопасна при МР версия на Access Supine (RT-4546MRI) в съответствие с предназначението му преди сканиране.
- Версията за безопасност при МР на Access Supine (RT-4546MRI) е ясно обозначена със следния символ:



 Долният ограничител е безопасен за МР при определени условия.

Неклинично тестване е показало, че долният ограничител може да се използва в системата за МР, отговаряща на следните условия:


- Долният ограничител може да се постави в отвора на системата за МР със статично магнитно поле от 1,5 Т или по-малко.
- Долният ограничител трябва да се използва с безопасна при МР версия на Access Supine (RT-4546MRI) в съответствие с предназначението му преди сканиране.
- Версията за безопасност при МР на Access Supine (RT-4546MRI) е ясно обозначена със следния символ:



ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЕТИКЕТИ И ОПИСАНИЯ

Направете справка в CQmedical.com за списък със символите и техните дефиниции.

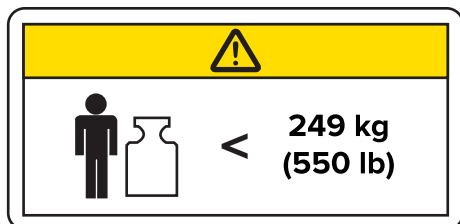

НОМИНАЛНО НАТОВАРВАНЕ

НЕ превишавайте 249 kg (550 lb) равномерно разпределен товар или максималното безопасно работно натоварване на вложката kVue или на основата на масата – което от двете е по-малко.

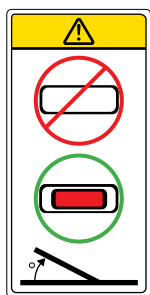

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОДПОРАТА

Когато използвате Access Supine под ъгъл, подпората трябва да е здраво заключена на място и червените краища на подпората трябва се виждат от горната част на устройството.

Използването на Access Supine под ъгъл без правилно закрепване на подпората на място може да повреди устройството или да причини нараняване.



БЕЗОПАСЕН ПРИ МР

Изделие, което не създава известни опасности, произтичащи от излагане на въздействието на МР среда. Изделията, безопасни при МР, са изработени от материали, които са немагнитни, не са метални и не провеждат електричество.

! ЗАБЕЛЕЖКА! САМО ЗА RT-4546MRI.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Това изделие е предназначено за обездвижване, позициониране и препозициониране на пациенти, които се подлагат на лъчетерапия.

! ЗАБЕЛЕЖКА! Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие да се извършва само от или по поръчка на лекар.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

Пациенти на лъчетерапия или такива, подложени на процедури по образна диагностика.

ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Целевият потребител на продуктите е лице, отговарящо на изискванията на регулаторния регион.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Access Supine трябва да се използва с 2 позиционни планки с два щифта, като RT-4551BAR, за сигурно закрепване към плота на масата за симулация или плота на медицинската маса. Тези позиционни плаки не се доставят с Access Supine и трябва да бъдат закупени отделно от производителя на масата.

Access Supine използва опционални опори за ръка (RT-4546AA-01) и опори за китка (RT-4546AW-01) за задържане на горната част на ръцете и китките в повторяема позиция. На мястото на опорите за ръка и китка може да се използва опционален ArmShuttle™ (RT-4546C).

КОМПОНЕНТИ

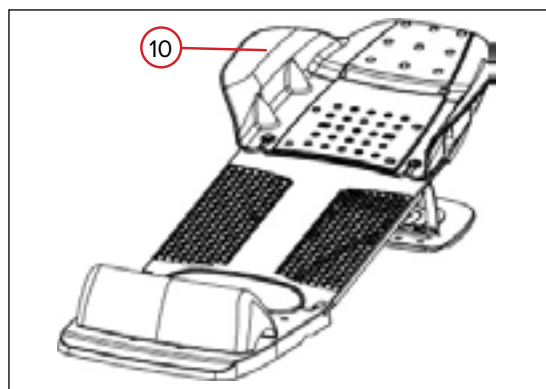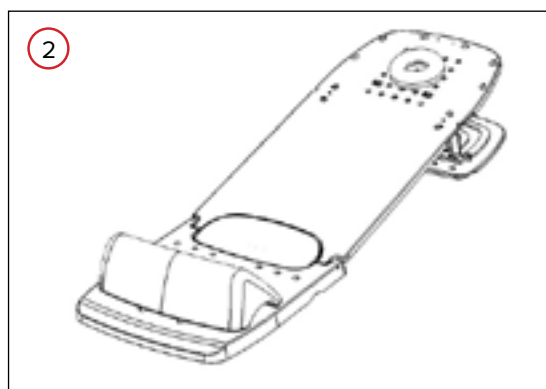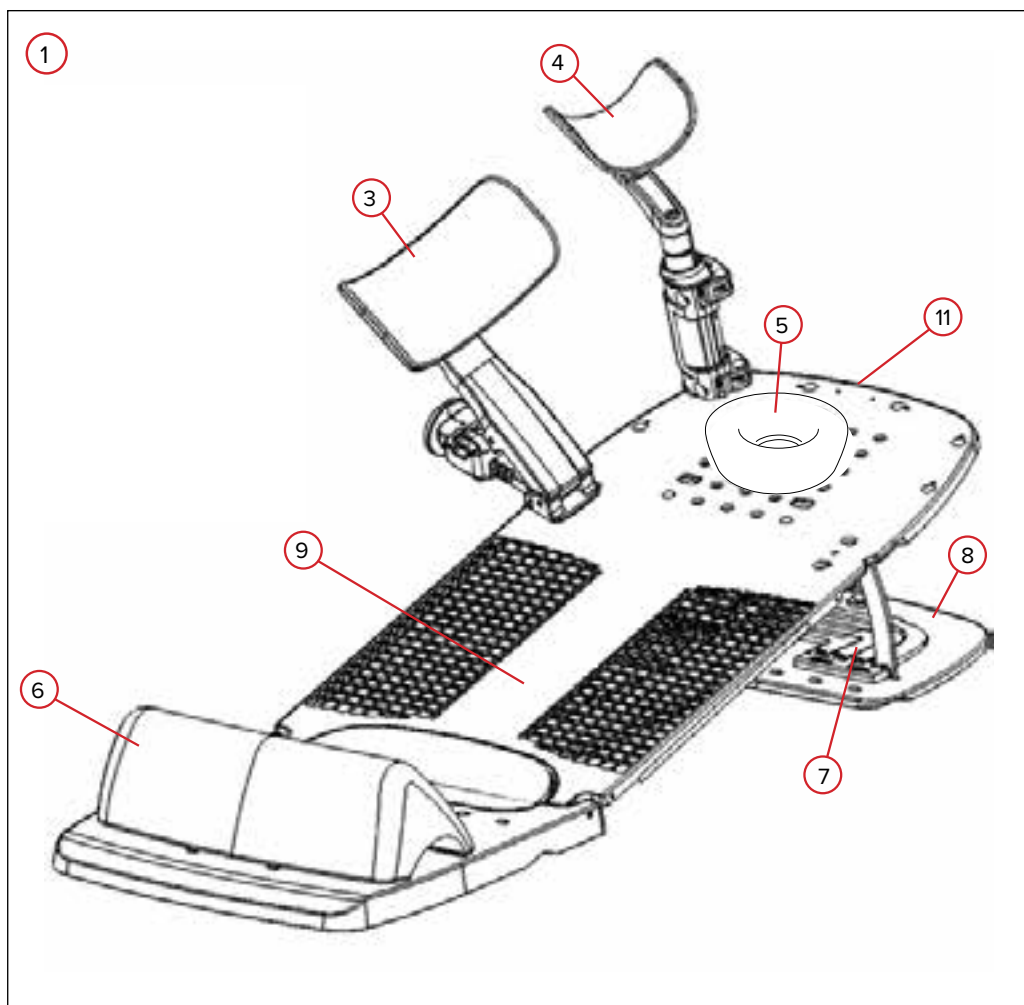

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНЕНТИ

1. ACCESS SUPINE ГЪРДИ И БЯЛ ДРОБ, ACCESS SUPINE ГЪРДИ И ACCESS SUPINE ГЪРДИ И БЯЛ ДРОБ БЕЗ РЕШЕТКА

Access Supine се използва като помощно средство при позиционирането и разполагането на пациенти, подложени на лъчетерапия в областта на гърдите и белия дроб.

2. ACCESS SUPINE MR ГЪРДИ И БЯЛ ДРОБ

Access Supine MR (боядисан в бяло) функционира като Access Supine, но може да се използва с ЯМР.

3. ОПОРА ЗА РЪКА

Опорите за ръка имат пълен набор от настройки за точно позициониране на горната част на ръцете на пациента по време на симулация и лечение.

4. ОПОРА ЗА КИТКА

Опорите за китка се регулират, за да поддържат китките на пациента по време на симулация и лечение.

5. ОПОРА ЗА ГЛАВА

Включената опора за глава може да бъде разположена на различни места (от 1 до 28) върху Access Supine. Предлагат се опционални опори за глава, включително големи и малки опори за глава от гел и опора за глава TIMO B.

6. ДОЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛ

Включеният долен ограничител, който може да бъде преместван, поддържа правилното позициониране на пациента, като помага да се предотврати плъзгането на пациента надолу по Access Supine.

7. НАКЛАНЯЩИ СЕ ПОДПОРИ

Накланящите се подпори позволяват главата и торса на пациента да бъдат разположени под наклон вертикално под ъгъл 0, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 градуса. Опционалните допълнителни подпори позволяват главата и торса на пациента да бъдат разположени под наклон вертикално под ъгъл 20 или 25 градуса.

8. ОСНОВНА ПЛАНКА

Основната планка осигурява точки за закрепване за накланящите се подпори и долния ограничител и позволява надеждно закрепване към масата за симулация или медицинската маса.

9. ПОВЪРХНОСТ ЗА ПАЦИЕНТА

Повърхността за пациента е частта от устройството, която се регулира между 0 до 15 градуса за целите на лечението.

10. ARMSHUTTLE ELITE

ArmShuttle Elite може да се използва вместо опорите за ръка за позициониране на ръката на пациента по време на симулация и лечение. Обикновено се използва заедно с възглавницата VacQfix™.

11. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ

Механизмът за отключване застопорява повърхността за пациента към основната планка.


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

МОНТАЖ


МОНТАЖ НА ACCESS SUPINE

1. Вкарайте краищата на позиционните планки в подходящите съвместими с Varian Exact® индексни прорези на плота на масата или устройството, на разстояние 700 mm (обикновено 5 прореза) една от друга, и щракнете позиционните планки на място. (фиг. 1)
2. Позиционирайте Access Supine върху позиционната планка така, че отворите в основната планка да са подравнени с двата щифта в позиционните планки. (фиг. 2)
3. Натиснете надолу Access Supine върху позиционната планка, за да се заключи Access Supine на място. (фиг. 3)


! ЗБЕЛЕЖКА! Access Supine може да бъде изместен на двете страни, както е необходимо, за да се позиционира тумора по-близо до изоцентъра.

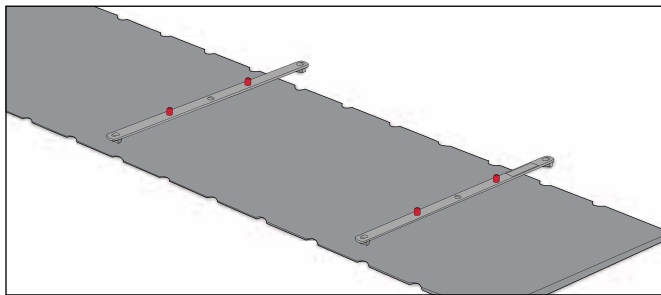

ФИГ. 1

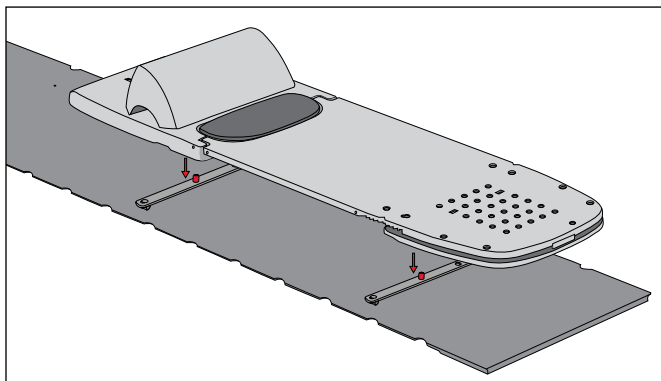

ФИГ. 2

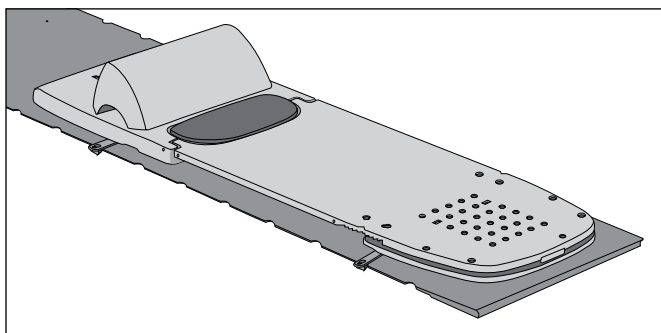

ФИГ. 3

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЪГЪЛ НА ПАЦИЕНТА

! ВНИМАНИЕ! КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ACCESS SUPINE AT ПОД ЪГЪЛ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ НАКЛАНЯЩИТЕ СЕ ПОДПОРИ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ ГОРНИЯ ПАНЕЛ И ЧЕ ЧЕРВЕНИТЕ КРАИЩА СЕ ВИЖДАТ ОТ ГОРНАТА СТРАНА НА УСТРОЙСТВОТО. АКО НАКЛАНЯЩИТЕ СЕ ПОДПОРИ НЕ СА ДОБРЕ ЗАКРЕПЕНИ, МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО НАРАНЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТА И/ИЛИ ПОВРЕДА НА УСТРОЙСТВОТО.

1. Натиснете механизма за отключване, за да отключите. (фиг. 4)
2. Повдигнете повърхността за пациента и повдигнете наклонящата се подпора на място. (фиг. 5 и 6)
3. Спуснете повърхността за пациента, докато наклонящата се подпора се заключи в слотовете. След като се заключи, червените краища на наклонящите се подпори ще се покажат и ще се виждат от повърхността за пациента. (фиг. 7)




ФИГ. 4



ФИГ. 5



ФИГ. 6

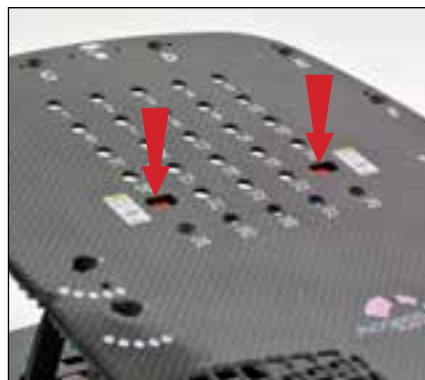

ФИГ. 7


! ЗАБЕЛЕЖКА! За да монтирате ОПЦИОНАЛНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ подпори за 20 или 25 градуса, вкарайте някоя от тях в отворените слотове на шарнира на наклонящата се опора. (фиг. 8)




ФИГ. 8

ОПОРА ЗА ГЛАВА

Монтирайте опората за глава в една от наличните позиции (1–28) в горния край на повърхността за пациента. (фиг. 9 и 10)

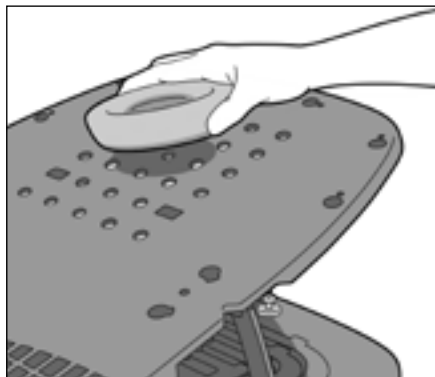

ФИГ. 9

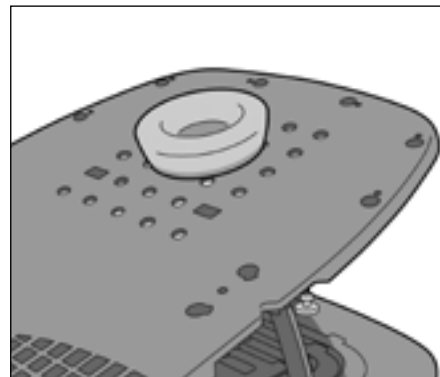

ФИГ. 10

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ОПОРА ЗА РЪКА


1. За да прикрепите опората за ръка, разхлабете копчето и я поставете в едно от двете места (маркирани с „X“ и „Y“). Затегнете копчето, за да заключите опората за ръка към повърхността за пациента. (фиг. 11)
2. За да регулирате завъртането на опората за ръка, разхлабете копчето и завъртете опората за ръка до желаното място и затегнете копчето. (фиг. 12)

! ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ.


3. За да регулирате височината, натиснете бутона, разположен върху плъзгача за височина, и плъзнете по протежение на ръката, като пуснете бутона, когато достигнете желаната позиция. (фиг. 13)
4. За да регулирате дължината на ръката, натиснете бутона, разположен върху плъзгача за дължина, и плъзнете по протежение на ръката, като пуснете бутона, когато достигнете желаната позиция. (фиг. 14)

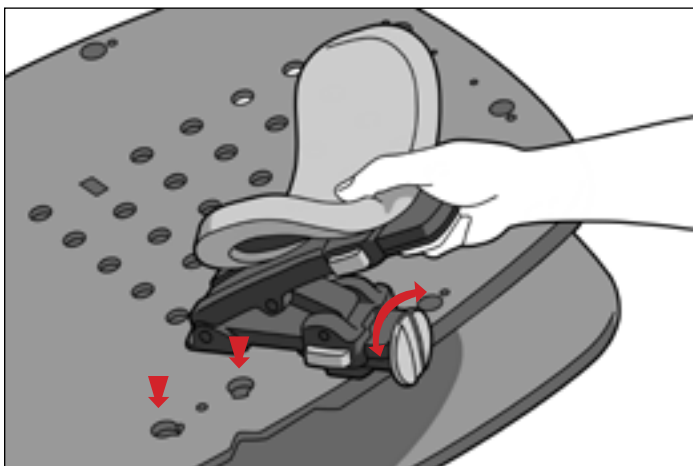


ФИГ. 11

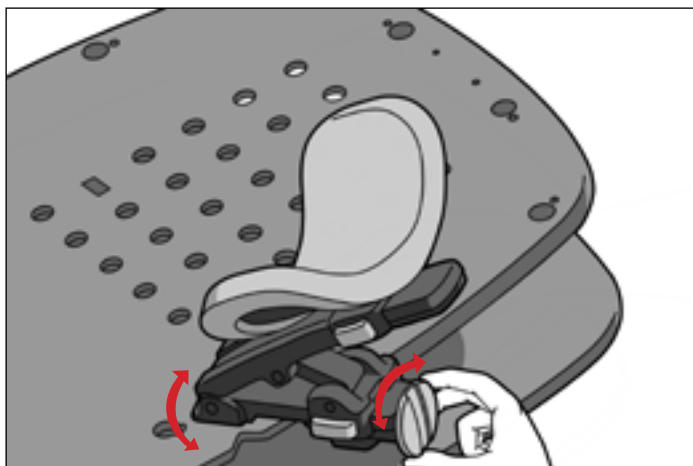

ФИГ. 12

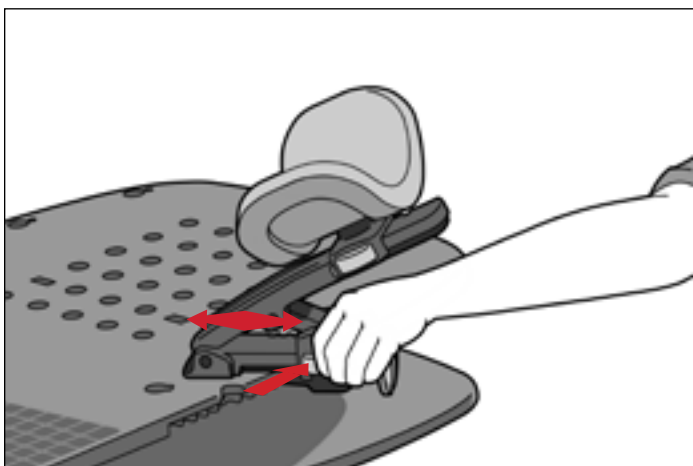

ФИГ. 13

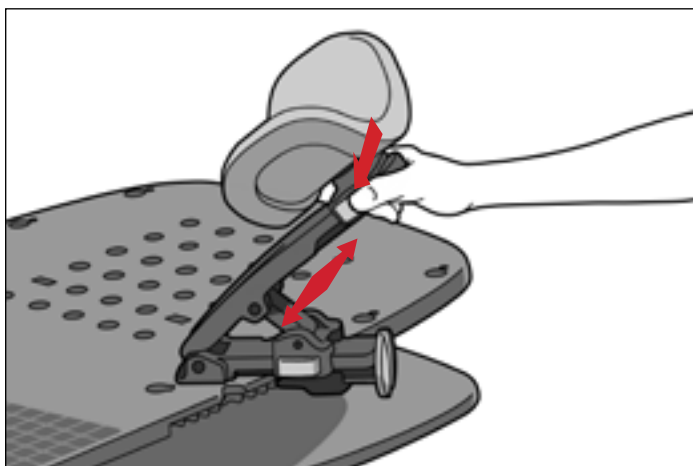


ФИГ. 14

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ОПОРА ЗА КИТКА


1. За да прикрепите опората за китка, подравнете двата щифта в долната част на опората за китка с двата съответни отвора в повърхността на пациента. (фиг. 15)
2. Затворете долното лостче, за да заключите на място. (фиг. 16)
3. За да повдигнете или снижите чашкообразния елемент на опората за китка, отворете горния лост. Повдигнете, спуснете или завъртете чашкообразния елемент в желаната позиция и затворете горния лост. (фиг. 17 и фиг. 18)

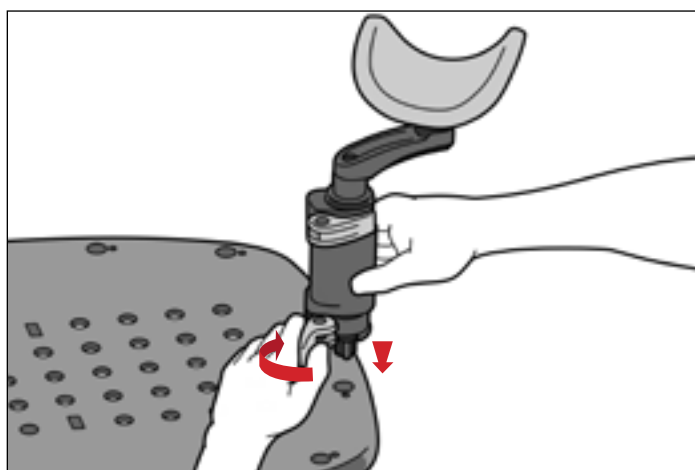


ФИГ. 15

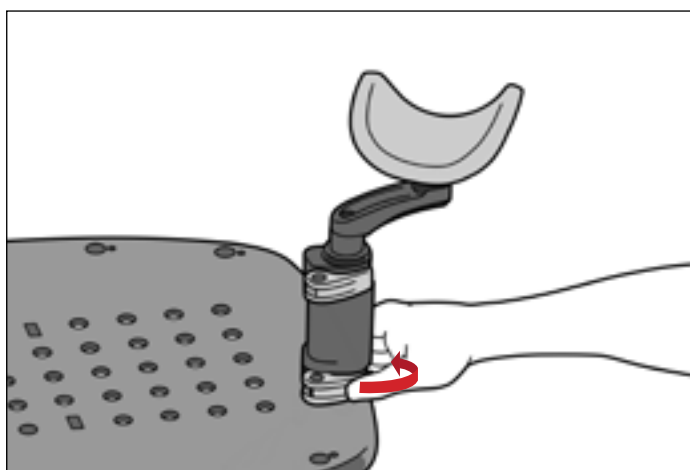

ФИГ. 16

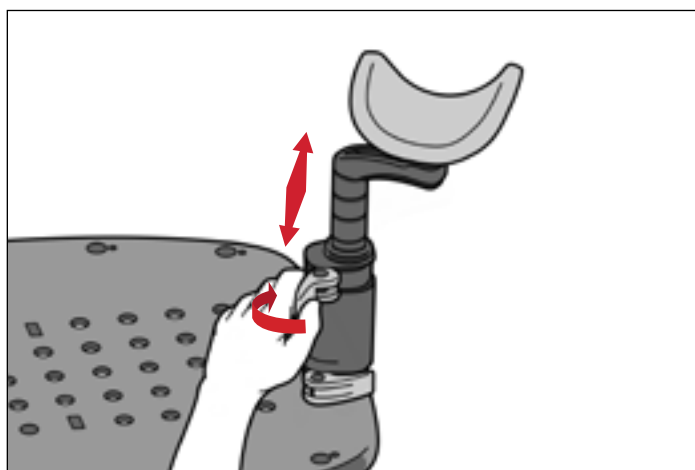

ФИГ. 17

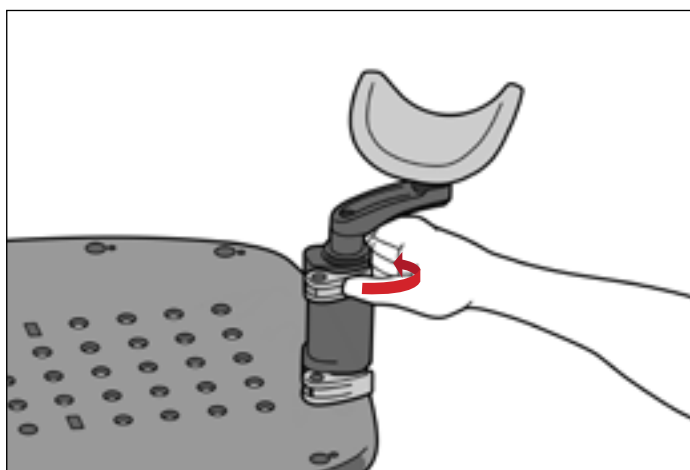

ФИГ. 18

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ДОЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛ

1. Позиционирайте долния ограничител така, че извитата страна да сочи към повърхността за пациента, и го вкарайте в отвора на долната част на слотовете. (фиг. 19)
2. Веднъж прикрепен към основната планка, долният ограничител може да се позиционира чрез натискане отгоре (долният ограничител ще се забиے в тази посока). (фиг. 20)
3. За да преместите долния ограничител надолу, повдигнете леко нагоре и плъзнете обратно до желаното място. (фиг. 21)

! ЗАБЕЛЕЖКА! На фигура 22 са показани местата за индексирание на долния ограничител и позиционната планка.




ФИГ. 19



ФИГ. 20



ФИГ. 21

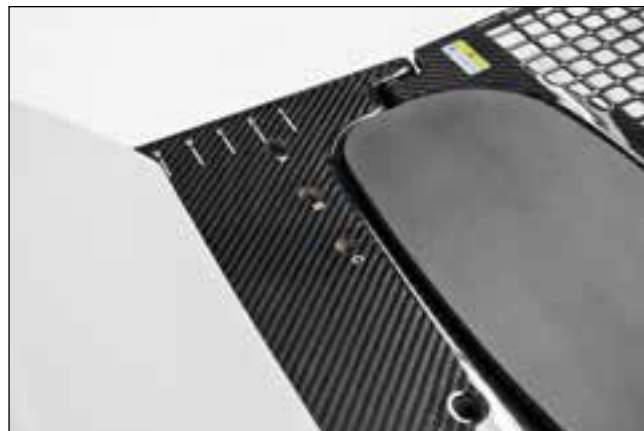

ФИГ. 22

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ARMSHUTTLE ELITE


! ЗАБЕЛЕЖКА! ArmShuttle е алтернатива на опорите за ръка и китка. Вижте продуктивния наръчник и ръководството за потребителя за Armshuttle (P/N 2004227) за инструкции за работа, характеристики на продукта, спецификации, предупреждения, сигнали за внимание, и други общи предпазни мерки, свързани с употребата на Armshuttle.

1. Свалете опората(ите) за ръка, като разхлабете копчето, завъртете опората за ръка така, че да се изравни с прореза от страни на повърхността за пациента и издърпайте опората за ръка от отворите в повърхността за пациента. (фиг. 23)
2. Отстранете опората(ите) за китка, като отворите долния лост и издърпайте опората(ите) за китка от отворите в повърхността за пациента. (фиг. 24)
3. Поставете ArmShuttle върху Access Supine, като подравните отворите на копчетата за закрепване с отворите с резба, разположени между местата за опора на ръка на Access Supine. (фиг. 25)
4. Закрепете ArmShuttle с копчетата за закрепване, като ги завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато се затегнат. (фиг. 25)


! ЗАБЕЛЕЖКА! На фигура 26 е показана завършено сглобено устройство.

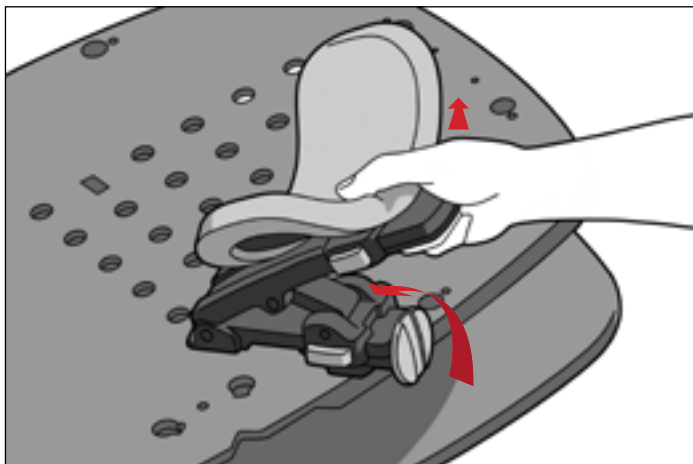

ФИГ. 23

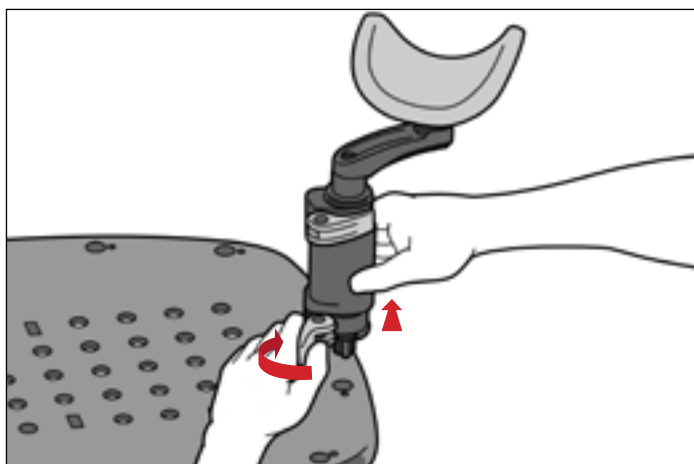

ФИГ. 24

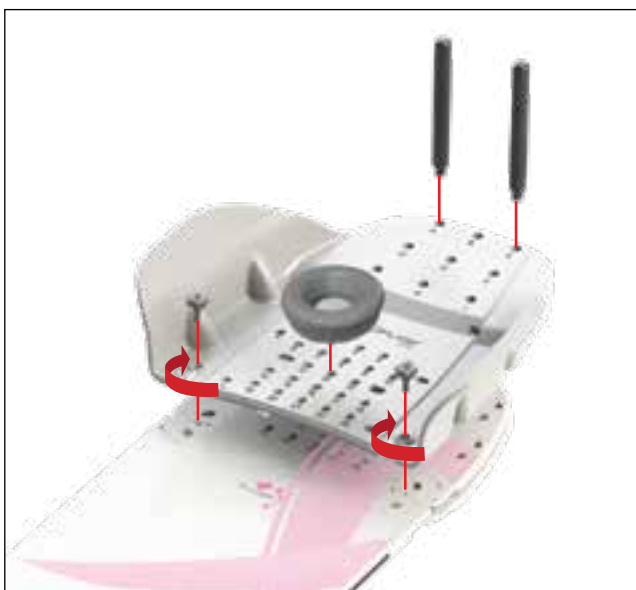

ФИГ. 25



ФИГ. 26

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ОТСТРАНЯВАНЕ

ARMSHUTTLE ELITE

1. Отстранете копчетата, които фиксират ArmShuttle, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка.
2. Повторете стъпка 1 за противоположната страна.
3. Повдигнете ArmShuttle от повърхността за пациента.

ДОЛЕН ОГРАНИЧИТЕЛ

1. Преместете долния ограничител надолу, като го повдигнете леко нагоре и плъзнете обратно към мястото за отстраняването му.
2. Повдигнете долния ограничител, за да го отделите от основната планка.

ОПОРА ЗА РЪКА

Развийте копчето, завъртете опората за ръка така, че да се изравни с прореza от страни на повърхността за пациента и издърпайте опората за ръка от отворите в повърхността за пациента.

ОПОРА ЗА КИТКА

Отворете долния лост и издърпайте опората за китка от отворите в повърхността за пациента.

ОПОРА ЗА ГЛАВА

Вдигнете опората за глава и я извадете от позициониращия отвор.

ACCESS SUPINE

1. Повдигнете повърхността за пациента и спуснете наклонящата се подпора, докато застане хоризонтално върху основната планка.
2. Спуснете повърхността за пациента, докато чуete щракване и тя се заключи в основната планка.
3. Повдигнете и извадете Access Supine от позиционните планки.
4. Повдигнете нагоре всеки край на позиционните планки, за да ги отстраните от плота на масата.

ПОДДРЪЖКА

ПОЧИСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Изделието може да бъде почиствано с мек, неабразивен разтвор за почистване или дезинфекция. За почистване нанесете разтвора върху чиста кърпа и избършете повърхността. Прегледайте изделието и ако не е чисто, повторете предишните стъпки за почистване, докато не стане видимо чисто. Използвайте чиста кърпа, навлажнена с вода, за да избършете изделието и да премахнете остатъците от почистващия препарат. За да подсушите, избършете изделието с чиста и суха кърпа. Следните материали за почистване са тествани и за тях е установено, че са подходящи за почистване на изделието.

- Вода
- Сапун и вода

ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

За дезинфекциране на повърхността на изделието направете справка с конкретните инструкции на производителя на почистващия препарат.

- 10% разтвор на белина Clorox®
- Изопропилов спирт
- 2,4% разтвор на активирани диалдехид Cidex®


Периодично проверявайте дали всички скрепителни елементи са затегнати.

ПОДДРЪЖКА


СМЯНА НА СТРАНИЧНАТА МАРКИРОВКА

1. Отстранете напълно залепения в момента стикер със странични маркировки, включително всички остатъци от лепило.
2. Обелете хартиената подложка от новия стикер.
3. Подравнете знака за подравняване в средата на страничната скала с регистрационния знак върху повърхността за пациента и долния ръб на стикера точно над долния ръб на повърхността за пациента. Нулата трябва да бъде позиционирана в края към главата на устройството. (фиг. 27 и 28)
4. Притиснете силно целия стикер отстрани на устройството.
5. Повторете на другата страна, ако е необходимо.

! ЗАБЕЛЕЖКА! НЕ поставяйте стикер върху извивката на повърхността за пациента, това може да доведе до отлепване на стикера.

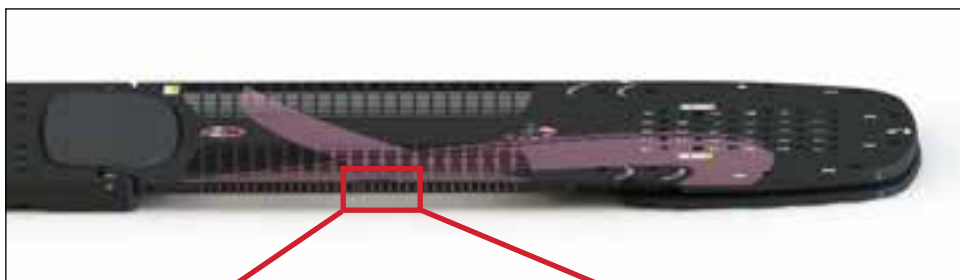

ФИГ. 27

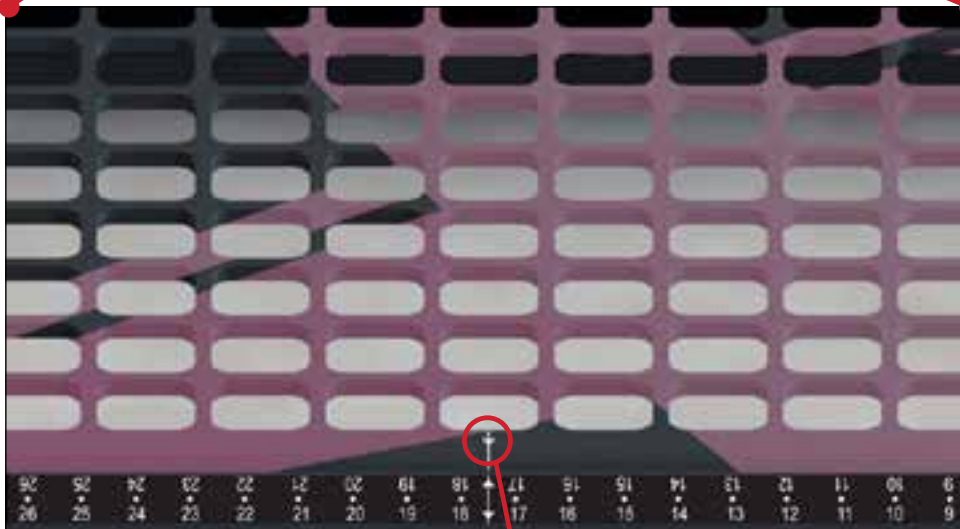

ФИГ. 28

регистрационен
знак


СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗМЕРИ


Дължина (L): 1374 mm

Ограничение за тегло: 249 kg (550 lb) равномерно разпределен товар

Воден еквивалент: *Забележка: Приложим само за RT-4546 – Access™ Supine Гърди и бял дроб:*
~ 3 mm @ 6 MV в облъчваните участъци

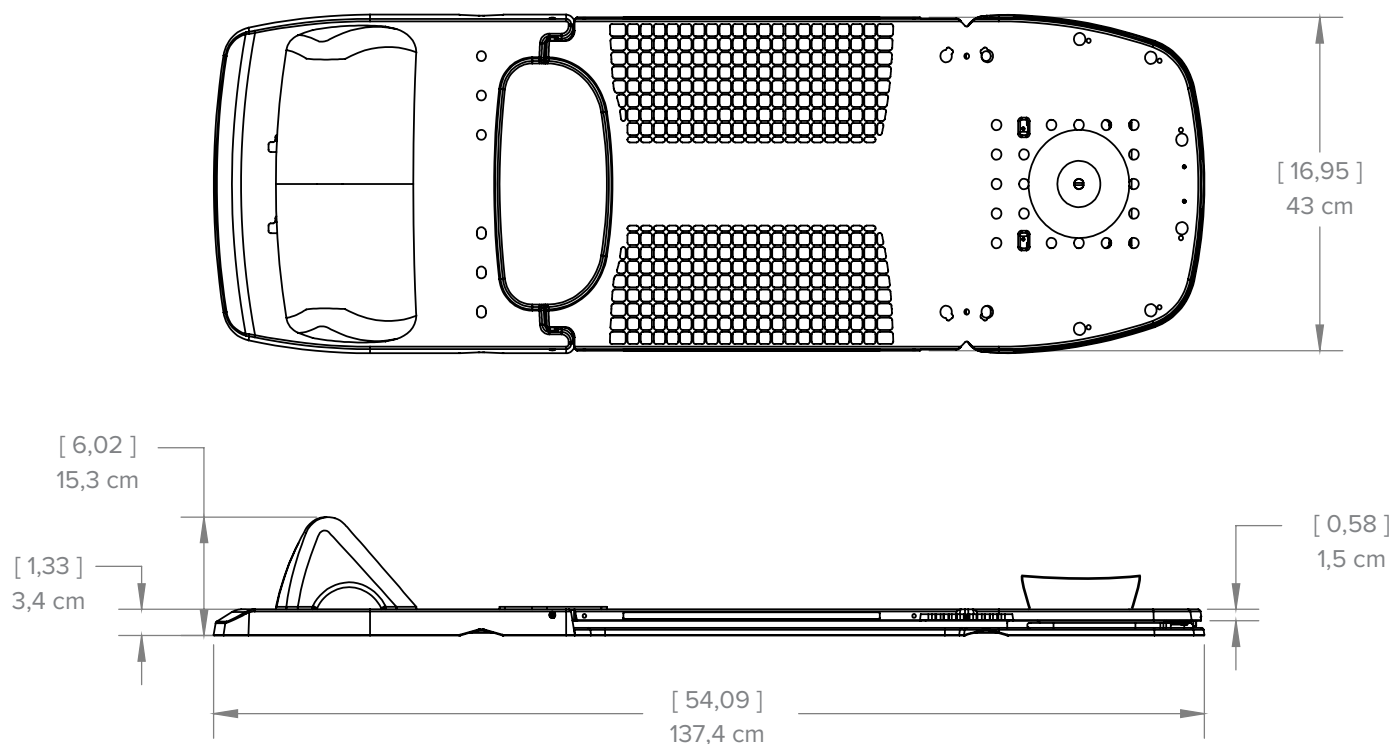

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

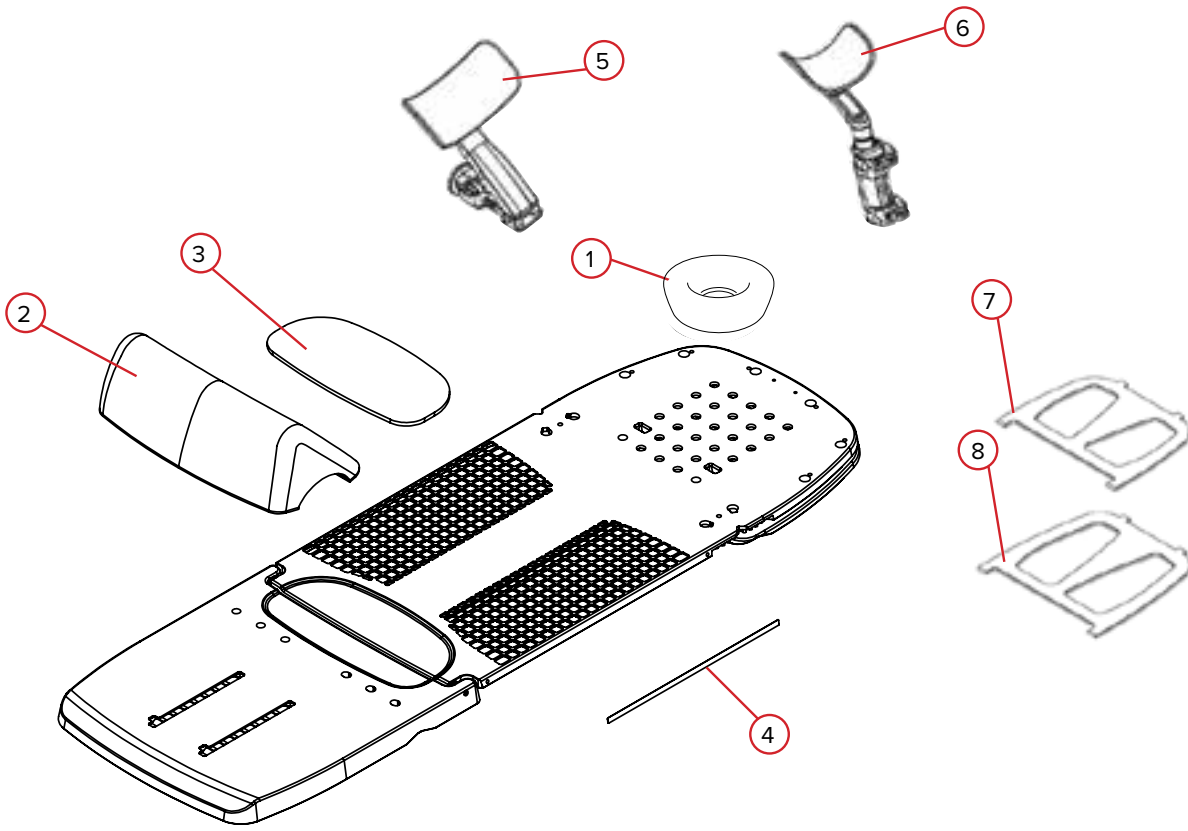

RT-4546, RT-4545MRI, RT-4546-01 и RT-4546-02

- 1. RT-4546H – Опора за глава от пенест материал
- 2. 2004034 – Долен ограничител от пенест материал
- 3. 2004047 – Подложка за опашната кост
- 4. 2004392 – Стикер със странична маркировка (1 всеки)

RT-4546AA-01

- 5. 2005353 – Чашкообразен елемент от пенест материал за ръка, с извити навътре ръбове

RT-4546AW-01

- 6. 2005386 – Чашкообразен елемент от пенест материал за китка, с извити навътре ръбове

RT-4546L

- 7. 2004121 – Допълнителна подпора, 20 градуса
- 8. 2004122 – Допълнителна подпора, 25 градуса

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

RT-4546: Access Supine Гърди и бял дроб, RT-4546MRI: Access Supine MR Гърди и бял дроб,
RT-4546-01: Access Supine Гърди или RT-4546-02: Access Supine Гърди и бял дроб без решетка

Имена на пациент:


ИД N° на пациент:

Разположено от:

Лекар:

Дата:

Коментари:

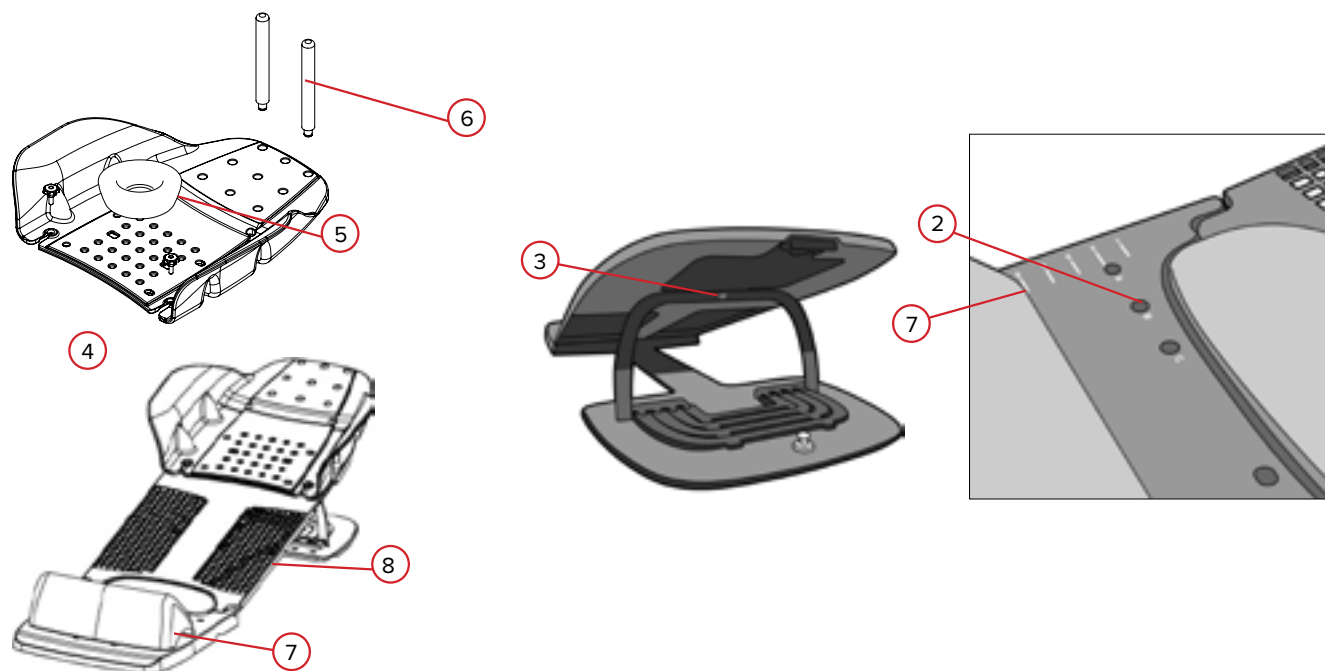

1. Индексиран за маса за симулация или за медицинска маса? **Да** **Не** Ако да, настройка на прореза за индексирание

2. Местоположение на щифта на позиционната планка (изберете едно): **A** **B** **C**

3. Ъгъл на повърхността за пациента (изберете едно): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**

4. Използва се с ArmShuttle: **Да** **Не**

5. Местоположение на опората за глава (номера 1–28):

6. Местоположение на стойките за ръка (изберете използваните)

A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА**

7. Използва ли се долен ограничител? **Да** **Не** Ако да, с каква настройка? (номер 1–8)

8. Местоположение на лазера за страничните маркировки:

СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

RT-4546: Access Supine Гърди и бял дроб, RT-4546MRI: Access Supine MR Гърди и бял дроб,
RT-4546-01: Access Supine Гърди или RT-4546-02: Access Supine Гърди и бял дроб без решетка

Имена пациент:

ИД N° на пациент:

Разположено от:

Лекар:

Дата:

Коментари:



- Индексиран за маса за симулация или за медицинска маса? **Да** **Не** Ако да, настройка на прореза за индексирание
- Местоположение на щифта на позиционната планка (изберете едно): **A** **B** **C**
- Ъгъл на повърхността за пациента (изберете едно): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°** **20°** **25°**
- Местоположение и ъгъл на опорите за ръка (изберете едно) –
Вляво на пациента: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Вдясно на пациента: **X** **Y** **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
- Височина на опорите за ръка (номер 1–8): Вляво на пациента Вдясно на пациента
- Дължина на опорите за ръка (изберете едно): Вляво на пациента: **A** **B** **C** Вдясно на пациента: **A** **B** **C**
- Местоположение на опорите за китки (буква от A до H): Вляво на пациента Вдясно на пациента
- Ъгъл на опорите за китка:
Вляво на пациента: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Вдясно на пациента: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
- Височина на опорите за китка (букви W–Z): Вляво на пациента Вдясно на пациента



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com