

PŘÍRUČKA K PRODUKTU A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

RT-4544-01 a RT-4544

Hrudní prostředky Access™ Prone G2
a Access™ Prone



	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com		Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Access, Access 360, kVue a OneTouch jsou ochranné známky společnosti Qfix.

Exact® je registrovaná ochranná známka společnosti Varian Medical Systems.

Cidex® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka společnosti The Clorox Company.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

!VAROVÁNÍ! NA TOMTO PROSTŘEDKU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. POKUD JE KTERÁKOLI ČÁST TOHOTO ZAŘÍZENÍ VYSTAVENA DEVASTUJÍCÍMU ZATÍŽENÍ, JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ NEBO NEFUNKUJE SPRÁVNĚ, IHED JE PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST CQ MEDICAL NA ČÍSLE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 NEBO NA ADRESE SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! VAROVÁNÍ ! STUPNICE NA HRUDNÍCH PROSTŘEDCÍCH ACCESS PRONE A ACCESS PRONE G2 JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.

DALŠÍ VAROVÁNÍ

- Dvojité rukojeti a ipsilaterální rukojeti nejsou určeny k tomu, aby nesly váhu pacienta.
 - Rukojeti NEPOUŽÍVEJTE k polohování pacienta.
 - Rukojeti NEPOUŽÍVEJTE k ulehnutí na prostředek nebo slézání z něj.
- Pacienti mohou potřebovat pomoc při uléhání na prostředek a slézání z něj.
- Vzhledem k délce prostředku se doporučuje, aby s prostředkem během instalace a odstranění manipulovaly dvě osoby.
- NEPOUŽÍVEJTE najednou více než 3 na sebe naskládané podložky CT. Pokud tak učiníte, může být prostředek nestabilní.
- NENECHTE prostředek přechýlívat.
- Existuje možnost zranění mezi vložkou lehátka a jiným vybavením v ošetrovně. Při přemísťování lehátka si počínejte opatrně, aby nedošlo ke zranění.

ÚTLUM LÉČEBNÉHO PAPRSKU

Strukturální oblasti lehátka kVue Access™ Prone způsobí útlum fotonového paprsku. Skutečný útlum na základě nastavení je nutné ověřit při použití konkrétního zařízení. Léčba prováděná prostřednictvím jakéhokoli prostředku vyrobeného z kompozitních materiálů povede ke zvýšení dávky aplikované na kůži.

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Nahlaste prosím jakékoli závažné události (např. události, které mají nebo by mohly mít za následek smrt či vážné zranění) společnosti CQ Medical i příslušnému úřadu své země.

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ

NEPŘEKRAČUJTE rovnoměrně rozložené zatížení 225 kg (500 liber) nebo maximální bezpečné provozní zatížení základny lehátka, podle toho, která hodnota je nižší.

! POZNÁMKA ! Při kombinaci se základnou lehátka OEM představuje jmenovité zatížení nižší z obou hodnot bezpečného provozního zatížení. Zatížení lehátka kVue NESMÍ překročit specifikace původního výrobce základny. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k výrobku od původního výrobce.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Na stránkách CQmedical.com najdete seznam symbolů a jejich definic.



JMENOVIÉ ZATÍŽENÍ

NEPŘEKRAČUJTE rovnoměrně rozložené zatížení 225 kg (500 liber) nebo maximální bezpečné provozní zatížení vložky lehátka nebo základny lehátka, podle toho, která hodnota je nižší.

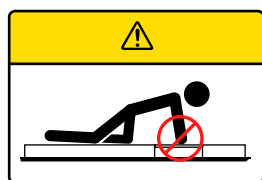

NEBO




ZATÍŽENÍ VLOŽKY

NEDOVOLTE pacientovi používat vložku pro podporu při uléhání na prostředek a slézání z něj. Může to způsobit poranění pacienta.



BEZPEČNÉ V PROSTŘEDÍ MR

Součást se nepojí se žádnými známými riziky plynoucími z expozice jakémukoli prostředí MR. Součásti, jež jsou bezpečné v prostředí MR, jsou tvořené elektricky nevodivými, nekovovými a nemagnetickými materiály.

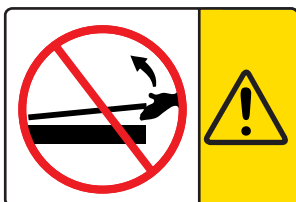

NEZVEDEJTE

! NIKDY NEZVEDEJTE KONEC VLOŽKY LEHÁTKA !

Dosedací čepy se mohou ohnout nebo zlomit, čímž se lehátko stane nepoužitelným.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY



NESEDEJTE SI


Oblast za výřezem pro prsa byla navržena a testována pro uložení horní části trupu pacienta; NENÍ určena k tomu, aby nesla celou hmotnost pacienta.

Stání nebo sezení na prostředku Access Prone G2 nebo Access Prone za výřezem pro prsa může vést k poškození prostředku nebo zranění.

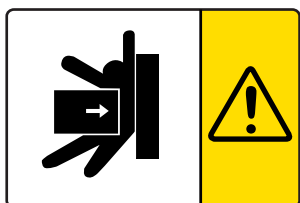

MOŽNOST ZRANĚNÍ

Existuje možnost zranění mezi prostředkem Access Prone G2 nebo Access Prone a jiným vybavením v ošetrovně. Při přemísťování prostředku Access Prone si počínejte opatrně, aby nedošlo ke zranění.

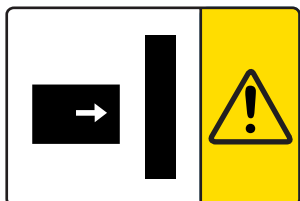

KOLIZE S GANTRY

Různé pohyby, které lze u základů a léčebných přístrojů provádět, mohou vést k situacím, kdy může dojít ke kolizi vložky lehátka s jinými předměty včetně gantry. Při pohybu lehátka nebo gantry dávejte pozor, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k poranění pacienta.

ÚČEL POUŽITÍ

Tento prostředek je určen k imobilizaci, polohování a úpravě polohy pacientů podstupujících radioterapii.

! POZNÁMKA ! Podle federálního zákona USA je prodej tohoto prostředku omezen pouze na lékaře nebo na základě objednávky lékaře.

CÍLOVÉ SKUPINY PACIENTŮ

Pacienti podstupující radiační terapii nebo diagnostické zobrazovací postupy.

ZAMÝŠLENÍ UŽIVATELE

Zamýšleným uživatelem produktů je osoba kvalifikovaná v souladu s požadavky regulační oblasti.

FUNKCE

POPIS


Access Prone G2 a Access Prone jsou navrženy tak, aby umožnily léčbu karcinomu prsu na levém i pravém prsu. Umístění pacienta do polohy na břiše pomáhá zvýšit oddělení prsu od ohrožených kritických orgánů.

Access Prone G2 (RT-4544-01) lze použít jako simulační prostředek pro CT/MR pro prostředek Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10).

! UPOZORNĚNÍ ! PROSTŘEDEK ACCESS PRONE (RT-4544) NELZE POUŽÍT JAKO SIMULAČNÍ PROSTŘEDEK PRO JAKÝKOLI JINÝ PRODUKT, NEŽ JE SAMOTNÝ TENTO PROSTŘEDEK NEBO JINÉ PROSTŘEDKY ACCESS PRONE (RT-4544).


FUNKCE

SOUČÁSTI PROSTŘEDKU ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

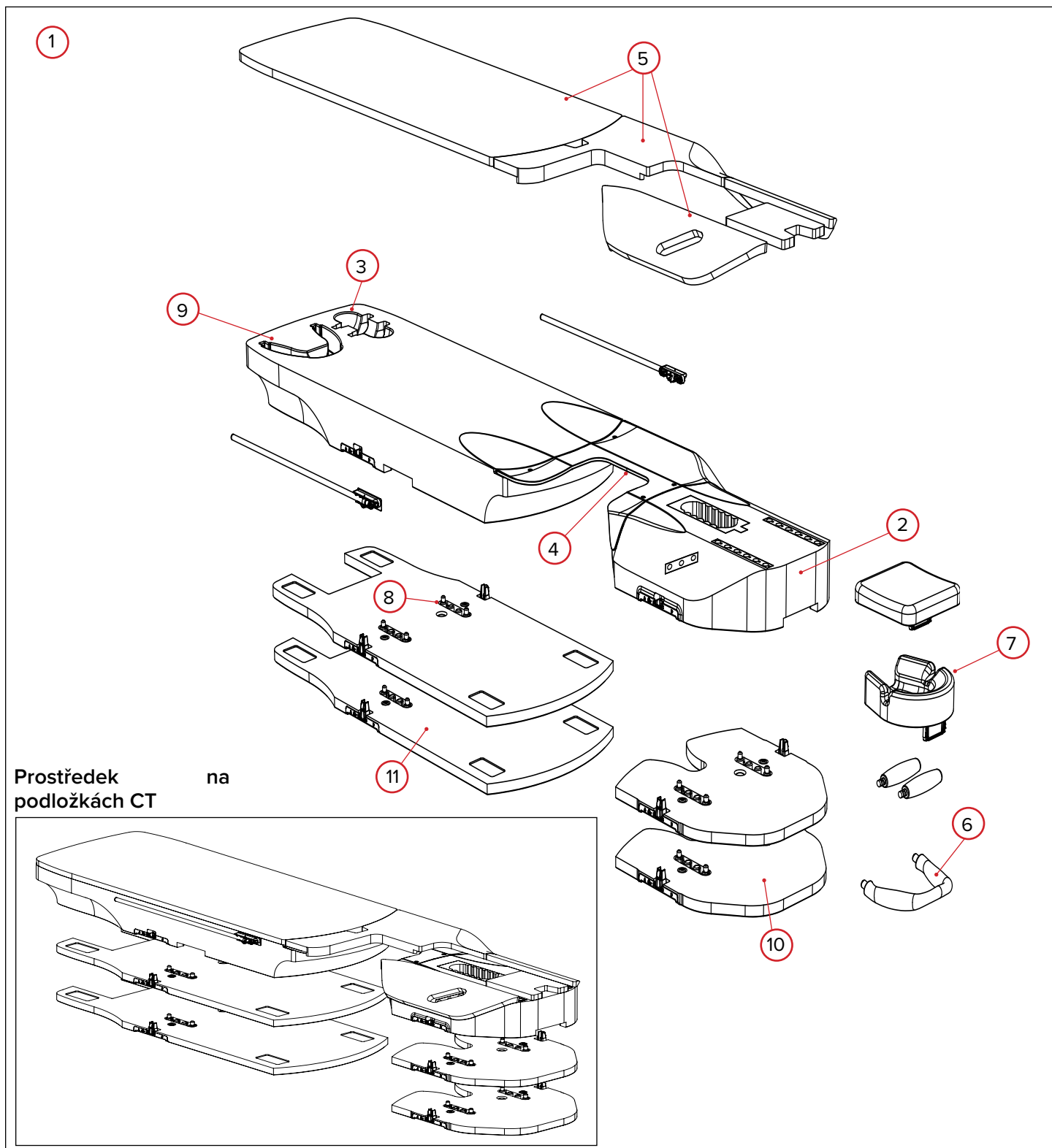

FUNKCE

SOUČÁSTI PROSTŘEDKU ACCESS PRONE (RT-4544)

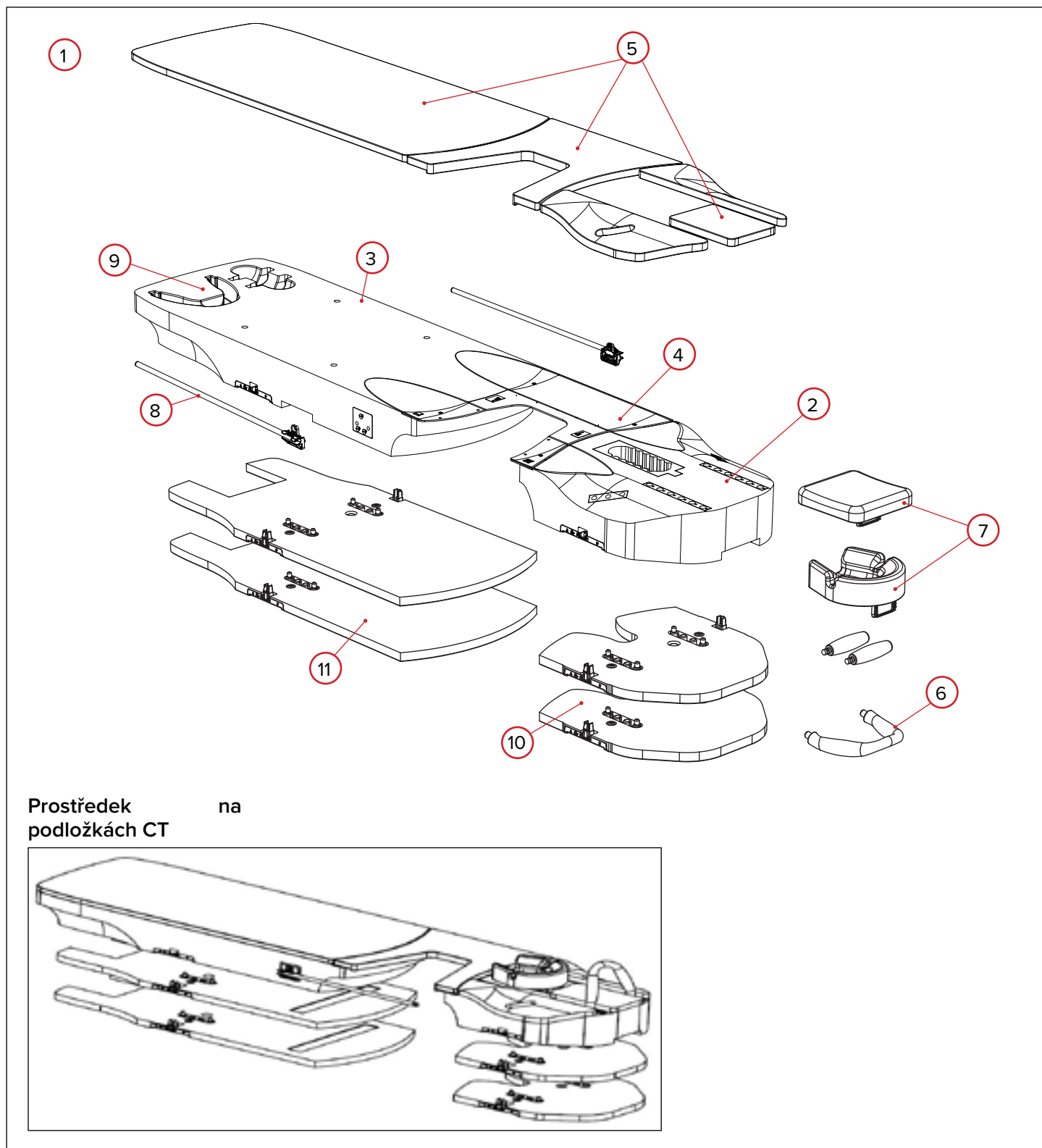

FUNKCE

SOUČÁSTI

1. HRUDNÍ PROSTŘEDKY ACCESS PRONE G2 A ACCESS PRONE

Prostředky Access Prone G2 a Access Prone se používají jako pomůcka při polohování a nastavení pacientů podstupujících radioterapii prsu a oblasti klíční kosti v poloze na břiše.

2. SOUČÁST PRO PAŽE A HLAVU

3. SOUČÁST PRO NOHY

4. VLOŽKA

Reverzibilní vložka ve střední části umožňuje rychle nakonfigurovat prostředek pro léčbu levého nebo pravého prsu.

5. PODLOŽKY

Podložky slouží k zajištění pohodlí pacienta, lze je však vyjmout a použít vakuové polštáře. Tyto podložky také poskytují další grafické prvky pro polohování pacienta.

6. DVOJITÁ RUKOJEŤ

Dvojitá rukojeť je ergonomicky navržena tak, aby na rozdíl od standardního držáku, který se používá u jiných prostředků, snížila namáhání zápěstí pacienta.

7. OPĚRKY HLAVY

Systém se dodává s opěrkou hlavy pro polohu na břiše a tvarovanou opěrkou hlavy. Lze použít kteroukoli z nich v závislosti na preferovaném nastavení. V závislosti na výšce pacienta je lze indexovat na prostředek Access Prone na více místech.

8. IPSILATERÁLNÍ STUPNICE

Ipsilaterální stupnice se pro nastavení mění a zaklapne na místě nahoře a pro léčbu a skladování se sklopí zpět dolů. Stupnici lze použít jako pomůcku pro zarovnání. Její přesnost je ± 1 mm. Stupnice je k dispozici na obou stranách prostředku pro léčbu levého nebo pravého prsu.

9. SKLADOVÁNÍ

Vnitřní přihrádky pro příslušenství rukojetí umožňují pohodlné skladování.

10. PODLOŽKA CT PRO SOUČÁST PRO PAŽE A HLAVU

Podložka CT se indexuje na polohovací tyč a zvedá součást pro paže a hlavu v krocích po 2,5 mm. Tuto podložku přichytit k jiné podložce CT pro součást pro paže a hlavu.

11. PODLOŽKA CT PRO SOUČÁSTI PRO NOHY


Podložka CT se indexuje na polohovací tyč a zvedá součást pro nohy v krocích po 2,5 mm. Tuto podložku přichytit k jiné podložce CT pro součást pro nohy.

PROVOZNÍ POKYNY

INSTALACE

POLOHOVACÍ TYČ

1. Polohovací tyč obsahuje dva polohovací čepy, které jsou vhodné pro většinu standardních polohovacích příslušenství. Oba konce polohovací tyče umístěte do příslušných indexovacích drážek lehátka Varian Exact® a zacvakněte tyč na místo. Při odstraňování nebo přemísťování vytáhněte kterýkoli konec tyče nahoru.

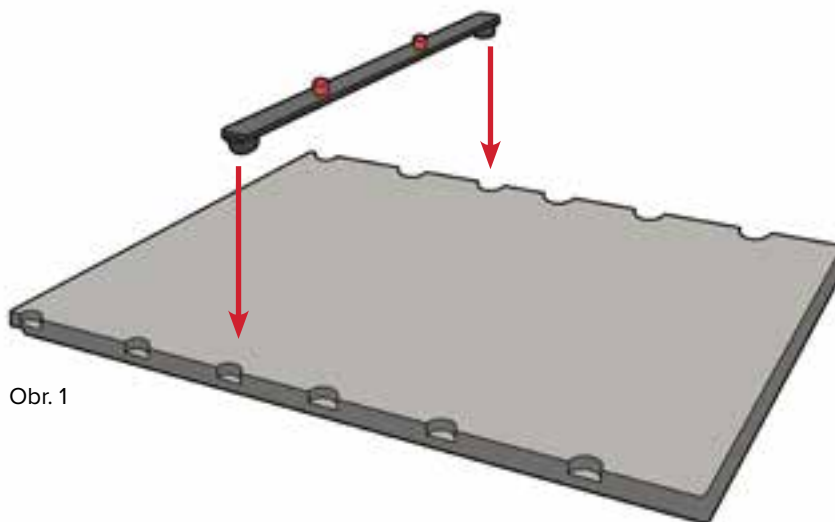


Obr. 1

PROVOZNÍ POKYNY


INSTALACE

POLOHOVACÍ TYČ

2. Vložte konce 2 polohovacích tyčí do indexovacích drážek kompatibilních se systémem Varian Exact® na CT překryvu v rozestupu 1260 mm (obvykle 9 indexovacích drážek) a zaklapněte polohovací tyče na místo. (Obr. 2 a 3)

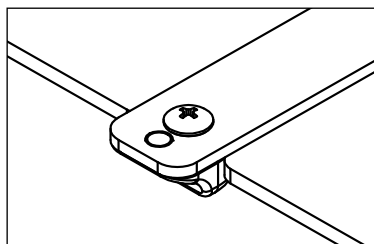

Obr. 2

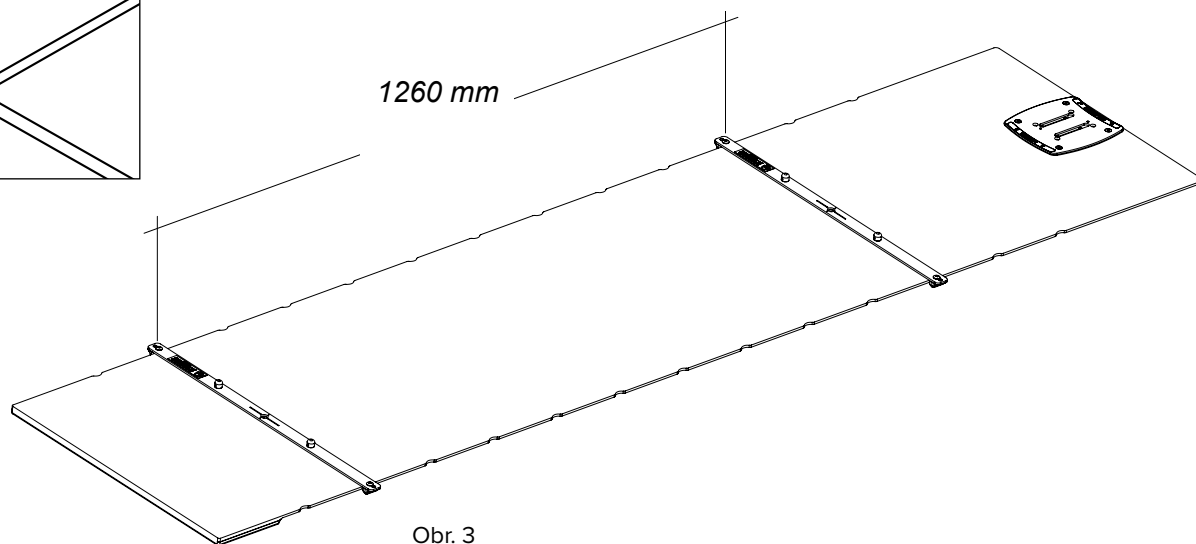

Obr. 3

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

PŘIPEVNĚNÍ SOUČÁSTI PRO PAŽE A HLAVU A PRO NOHY K PŘEKRYVU

Umístěte součásti pro paže a hlavu a pro nohy Access Prone G2 a Access Prone na CT překryv, a indexujte je na polohovací tyče. Ujistěte se, že součásti prostředku Access Prone G2 a Access Prone indexujete za použití stejných míst na součásti pro hlavu i na součásti pro nohy. (Obr. 4, 5 a 6)



Obr. 4



Obr. 5

PŘIPEVNĚNÍ VLOŽKY SOUČÁSTI PRO PAŽE A HLAVU A PRO NOHY

Připevněte vložku k součástem pro paže a hlavu a pro nohy pomocí polohovacích čepů na spodní straně vložky. (Obr. 6) Tuto vložku lze otočit tak, aby bylo možné ošetřit obě strany.




Obr. 6

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAROVNÁNÍ

Vizuálně zkontrolujte, zda jsou součásti Access™ Prone na překryvu správně vycentrovány. (Obr. 7)

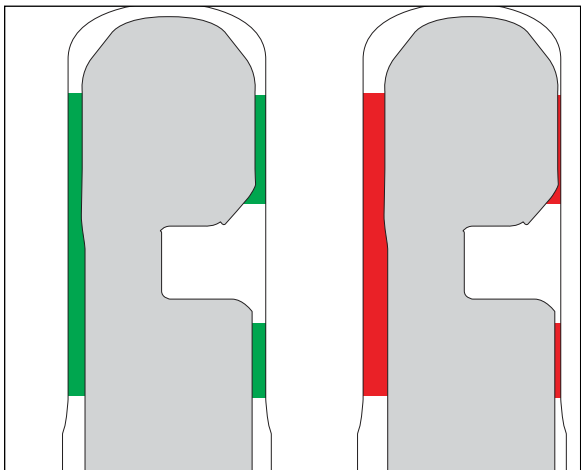

Obr. 7

PODLOŽKY CT

1. Chcete-li nainstalovat podložky CT, nejprve odstraňte prostředek Access Prone.
2. Umístěte podložky CT do stejného indexovacího místa jako součásti pro nohy a pro hlavu. Podložky CT lze skládat na sebe, a zvyšovat tak výšku v krocích po 2,5 cm. (Obr. 8)



Obr. 8

! UPOZORNĚNÍ ! NEPOUŽÍVEJTE NAJEDNOU VÍCE NEŽ 3 NA SEBE NASKLÁDANÉ PODLOŽKY CT. POKUD TAK UČINÍTE, MŮŽE BÝT PROSTŘEDEK NESTABILNÍ.

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

PODLOŽKY CT, pokračování

3. Umístěte prostředek Access Prone G2 nebo Access Prone na podložky CT. (Obr. 9)



Obr. 9

4. Chcete-li snížit výšku prostředku, hrudní prostředek Access Prone G2 nebo Access Prone odstraňte. Stiskněte uvolňovací tlačítko na každé straně indexovací desky. (Obr. 10)



Obr. 10

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

OPĚRKA HLAVY

1. Zvolte buď opěrku hlavy pro polohu na břiše, nebo tvarovanou opěrku hlavy, kterou chcete použít pro pacienta.
2. Vložte plastový zarovnávací díl do příslušné štěrbině na horním konci prostředku. (Obr. 11)

! POZNÁMKA ! Opěrky hlavy lze nainstalovat předtím, než pacient ulehne na prostředek, ale po ulehnutí pacienta může být nutné jejich přemístění.



Obr. 11

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

POLOHOVÁNÍ PACIENTA


! POZNÁMKA ! Pacienti mohou potřebovat pomoc při uléhání na prostředek a slézání z něj. Níže uvedené pokyny představují námi navrhovaný postup, který se však může na jednotlivých klinických pracovištích lišit.

JAK ULEHNOUT NA PROSTŘEDEK ACCESS PRONE G2 NEBO ACCESS PRONE A SLÉZT Z NĚJ


1. Spusťte lehátko nebo použijte stupátko, abyste pacientovi pomohli při přesunu na vložku.
2. Jakmile se pacient nachází na vložce, srovnejte jeho kolena se správnými značkami na pěnové podložce. (Obr. 12)
3. Požádejte pacienta, aby pomocí rukou nebo loktů posunul horní část těla do správné polohy. (Obr. 13)
4. Požádejte pacienta, aby se pomalu spustil do správné polohy.
5. Jakmile je pacient ve správné poloze, umístěte jeho hlavu do opěrky hlavy a požádejte ho, aby uchopil příslušné rukojeti. (Obr. 14)

! UPOZORNĚNÍ ! DVOJITÁ RUKOJEŤ A IPSILATERÁLNÍ RUKOJEŤ NEJSOU URČENY K TOMU, ABY NESLY VÁHU PACIENTA:

- Rukojeti **NEPOUŽÍVEJTE** k polohování pacienta.
- Rukojeti **NEPOUŽÍVEJTE** k ulehnutí na zařízení a slézání z něj.

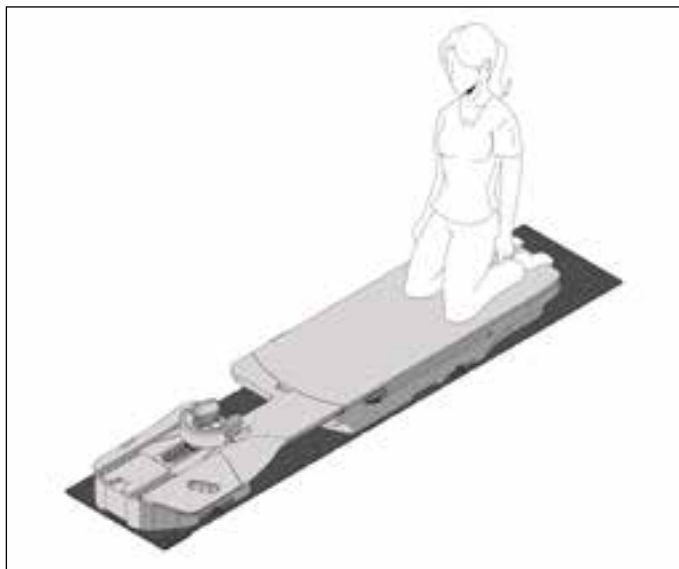

Obr. 12

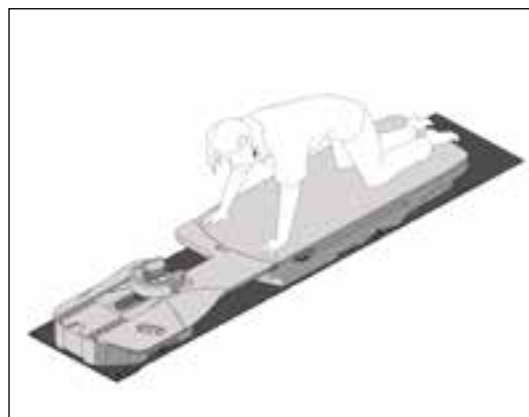

Obr. 13



Obr. 14

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ


DVOJITÁ RUKOJEŤ

! UPOZORNĚNÍ ! DVOJITÁ RUKOJEŤ A IPSILATERÁLNÍ RUKOJEŤ NEJSOU URČENY K TOMU, ABY NESLY VÁHU PACIENTA:

- Rukojeti **NEPOUŽÍVEJTE** k polohování pacienta.
- Rukojeti **NEPOUŽÍVEJTE** k ulehnutí na zařízení a slézání z něj.

1. Zarovnejte konce rukojeti s odpovídajícími otvory na horní straně vložky.
2. Zatlačte na rukojeť, dokud nezaklapne do otvorů. (Obr. 15)

! POZNÁMKA ! Rukojeť by měla být vyklenutá dozadu směrem k pacientovi, jak je znázorněno na obrázku níže. (Obr. 16)

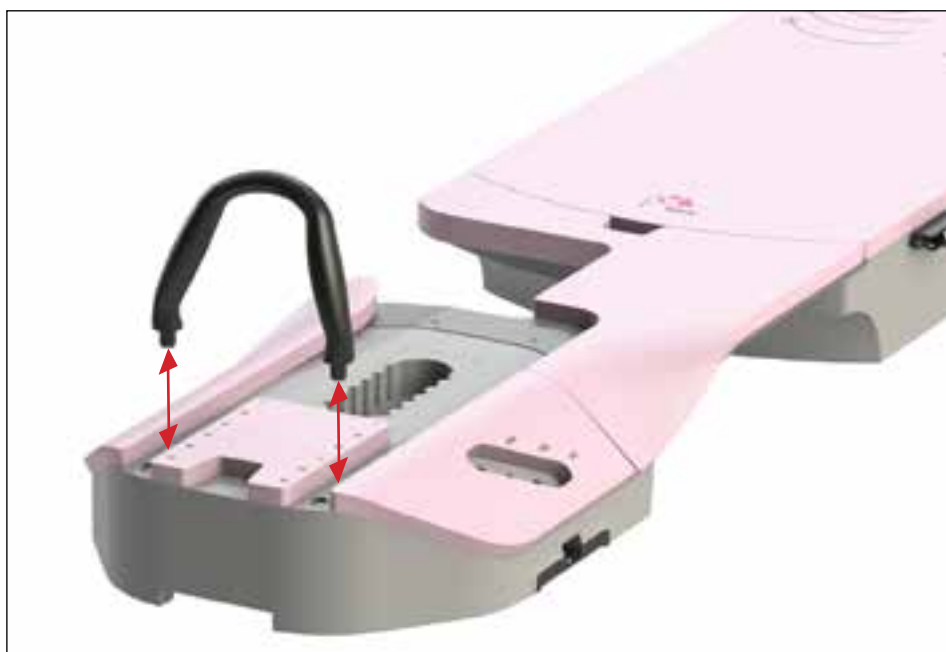

Obr. 15



Obr. 16

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

IPSILATERÁLNÍ RUKOJEŤ

1. Vložte rukojeť do příslušného otvoru na horní straně vložky. (Obr. 17)
2. Otáčejte ruční rukojeť v libovolném směru, dokud se rukojeť v otvoru neutáhne a nezajistí na místě. (Obr. 17)



Obr. 17

SKLADOVÁNÍ

Dvojitou ruční rukojeť a ipsilaterální rukojeť lze uložit do úložného prostoru umístěného v nožním konci součásti nohy. (Obr. 18)



Obr. 18

PROVOZNÍ POKYNY

NASTAVENÍ

IPSILATERÁLNÍ STUPNICE

! UPOZORNĚNÍ ! IPSILATERÁLNÍ STUPNICE NENÍ URČENA K TOMU, ABY NESLA VÁHU PACIENTŮ.

! UPOZORNĚNÍ ! RUKOJETI NEPOUŽÍVEJTE K ULEHNUTÍ NA ZAŘÍZENÍ A SLÉZÁNÍ Z NĚJ.

1. Zarovnejte pacienta.
2. Jakmile je pacient na místě, vyklopte ipsilaterální stupnici směrem nahoru, dokud se nezajistí na svém místě. (Obr. 19)

! POZNÁMKA ! Stupnice jsou přítomny jako pomůcka pro zarovnání; za ověření polohy pacienta je odpovědný uživatel.

! POZNÁMKA ! Přesnost stupnic je testována s přesností ± 1 mm

3. Před léčbou a /nebo uskladněním otočte ipsilaterální stupnici směrem dolů, do skladovací polohy. (Obr. 19)

Obr. 19



PROVOZNÍ POKYNY

DEMONTÁŽ

IPSILATERÁLNÍ RUKOJEŤ

Otáčejte v opačném směru než při instalaci, dokud se rukojeť neuvolní, a poté ji vytáhněte rovně ven. Ipsilaterální rukojeť lze uložit do základny součásti pro nohy pod polštářem.

DVOJITÁ RUKOJEŤ

Vytahujte směrem nahoru, dokud se neuvolní z otvorů. Dvojitou rukojeť lze uložit do základny součásti pro nohy pod polštářem.

PACIENT

Postupujte podle pokynů pro polohování v opačném pořadí.

! POZNÁMKA ! Pacienti mohou potřebovat pomoc při uléhání na prostředek a slézání z něj.

HRUDNÍ VLOŽKA

Vytáhněte prsní vložku směrem nahoru ze součástí pro hlavu a pro nohy.

OPĚRKA HLAVY

Vytáhněte opěrku hlavy směrem nahoru z vložky.

SOUČÁST PRO PAŽE A HLAVU A PRO NOHY

Zvedněte součást pro paže a hlavu a součást pro nohy směrem nahoru z překryvu. V případě potřeby lze podložky demontovat ze součástí paže a hlavu a pro nohy zatlačením na uvolňovací tlačítka na každé straně modrých indexovacích desek.

DEMONTÁŽ POLOHOVACÍ TYČE

Zatáhněte za jeden z konců polohovací tyče.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

Zařízení lze čistit jemným roztokem neabrazivního čisticího nebo dezinfekčního prostředku. Na povrch nestříkejte ani nelijte žádné tekutiny, protože by mohly proniknout do západky OneTouch™ nebo mechanismů v prostředku. Při čištění naneste roztok na čistý hadřík a otřete jím povrch.

DEZINFEKCE SYSTÉMU

Následující čisticí prostředky byly testováním ověřeny jako vhodné k čištění povrchů prostředků Access Prone G2, Access Prone a vložky lehátka. Při dezinfekci povrchu lehátka dodržujte příslušné pokyny výrobce čisticího prostředku.

- Voda
- 10% roztok bělidla Clorox®
- Izopropylalkohol
- 2,4 % aktivovaný roztok dialdehydu Cidex®
- Mýdlo a voda


NESTŘÍKEJTE prostředek přímo na prostředek Access Prone G2, Access Prone nebo vložku lehátka a zabraňte jeho vniknutí do základnového rámu.

NEPOKLÁDEJTE na prostředek Access Prone G2, Access Prone nebo vložku lehátka ostré předměty.

SPECIFIKACE

ACCESS PRONE G2

Nosnost: 225 kg (500 lb) rovnoměrně rozloženého zatížení

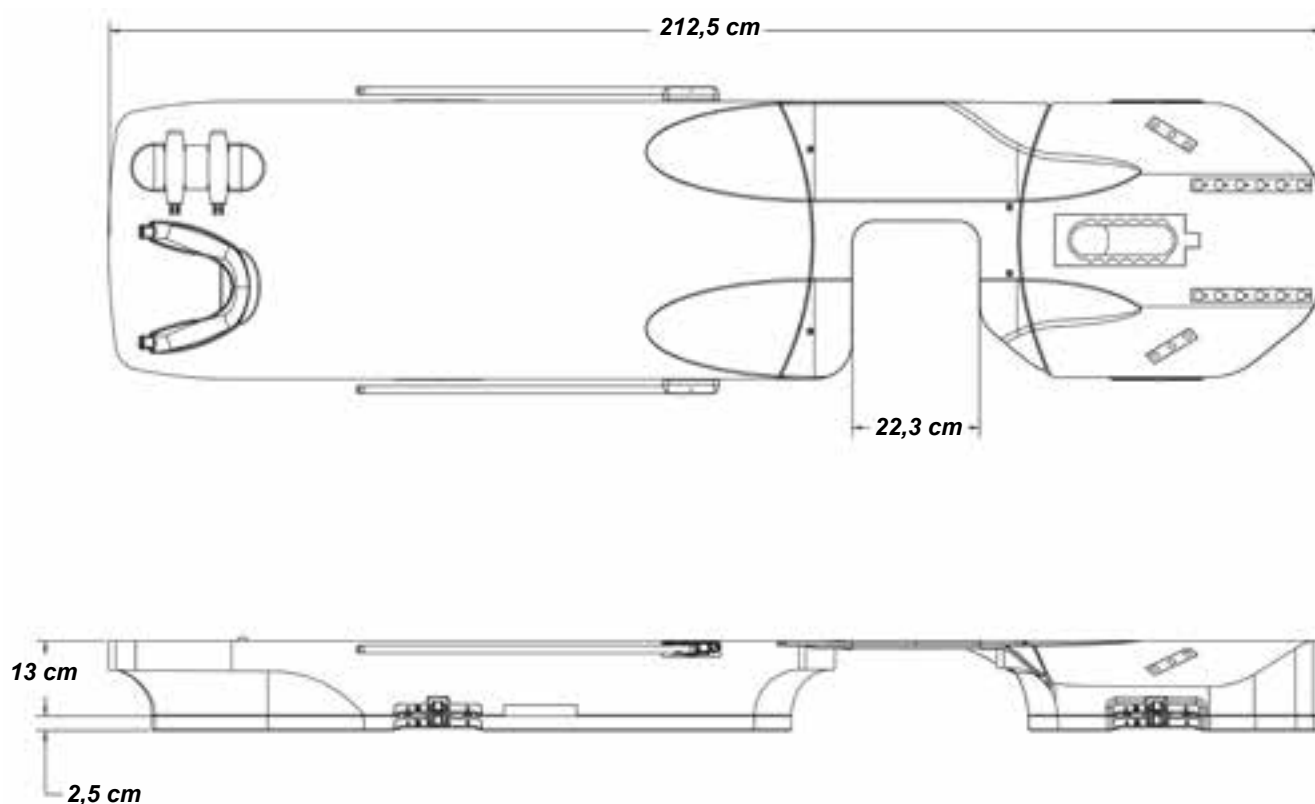

PACIENTSKÉ NASTAVENÍ

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) – PRAVÝ A LEVÝ PRS

Jméno pacienta:


Č. ID pacienta:

Nastavil/a:

Lékař:

Datum:

Komentáře:

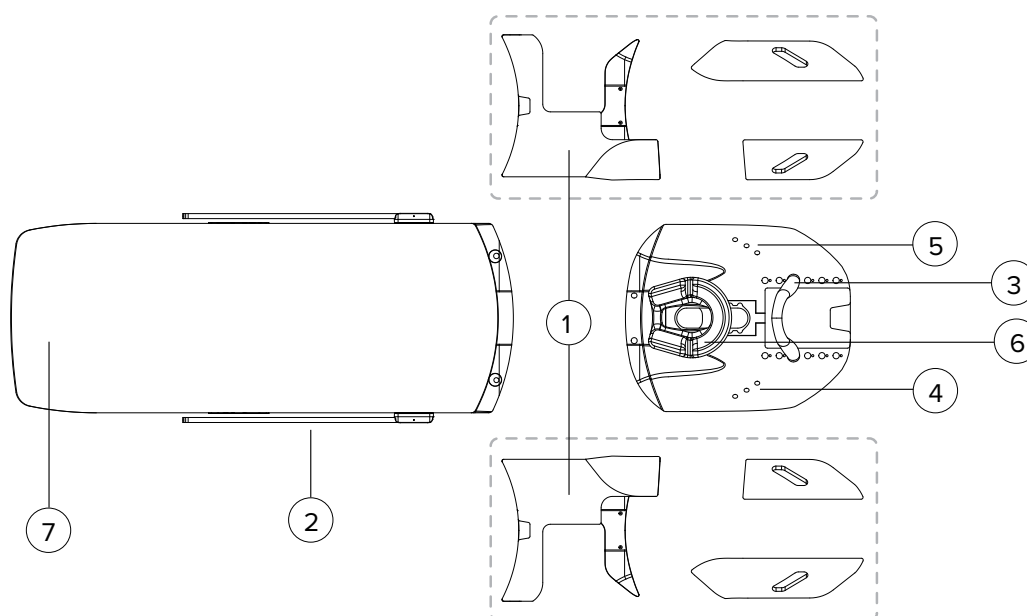


1. Vložka: **Levá** **Pravá**
2. Ipsilaterální stupnice:
3. Umístění dvojité rukojeti (vyberte jedno): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Neuplatňuje se**
4. Rukojeť, *pravá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuplatňuje se**
5. Rukojeť, *levá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuplatňuje se**
6. Použitá opěrka hlavy: **Žádná** **Poloha na bříše** **Tvarovaná**
Umístění (vyberte jedno): **A** **B** **C** **D** **E** **F**
7. Umístění kolen (vyberte jedno): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Poznámky:

(Pokračování na zadní straně)

PACIENTSKÉ NASTAVENÍ

ACCESS PRONE G2 (RT4544-01) (POKRAČOVÁNÍ)

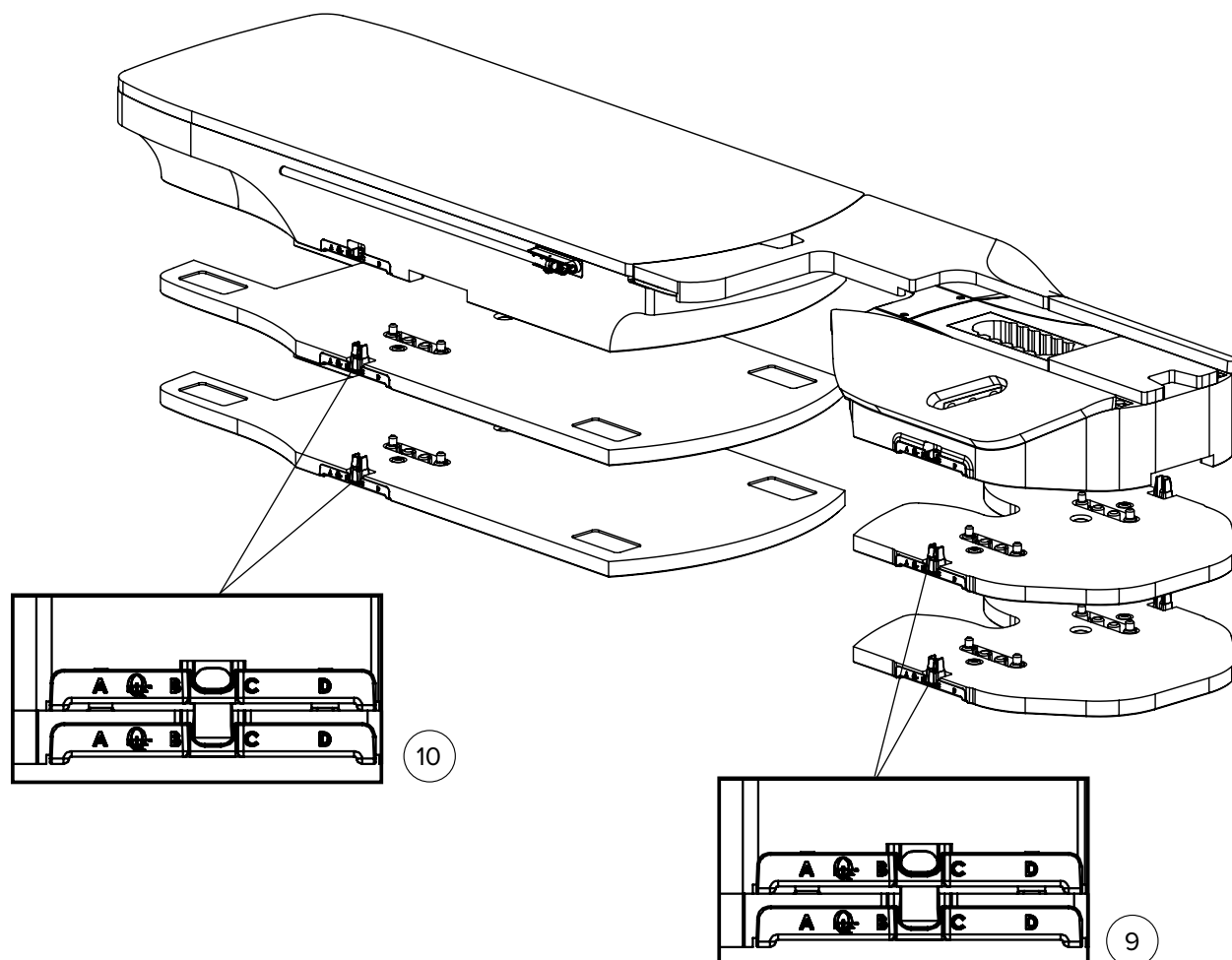

Nástavce a podložky CT

8. Kolik sad zvedacích podložek CT se použije (vyberte jednu možnost): **0** **1** **2**

9. Horní zvedací podložka CT – umístění na polohovací tyči **A** **B** **C** **D**

- Umístění polohovací tyče na lehátku:

10. Dolní zvedací podložka CT – umístění na polohovací tyči **A** **B** **C** **D**

- Umístění polohovací tyče na lehátku:

Poznámky:

PACIENTSKÉ NASTAVENÍ

ACCESS PRONE (RT-4544) – PRAVÝ A LEVÝ PRS

Jméno pacienta:


Č. ID pacienta:

Nastavil/a:

Lékař:

Datum:

Komentáře:

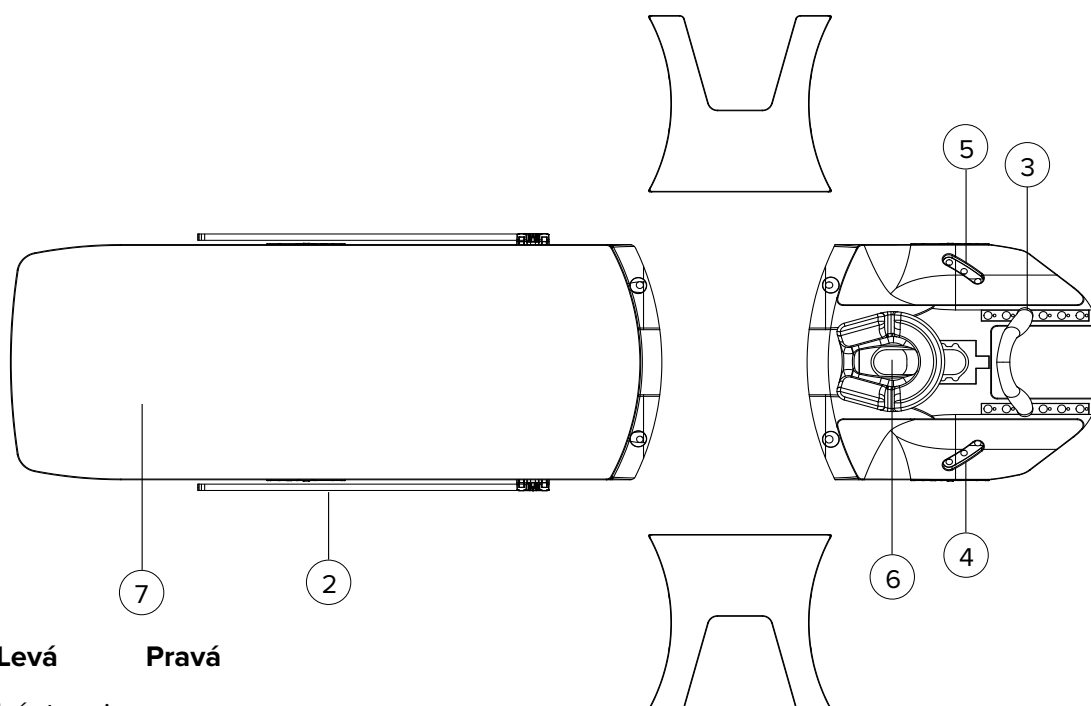

1. Vložka: **Levá** **Pravá**

2. Ipsilaterální stupnice:

3. Umístění dvojité rukojeti (vyberte jedno): **1** **2** **3** **4** **5** **6** **Neuplatňuje se**

4. Rukojeť, *pravá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuplatňuje se**

5. Rukojeť, *levá strana pacienta* (vyberte jednu): **A1** **A2** **A3** **Neuplatňuje se**

6. Použitá opěrka hlavy: **Žádná** **Poloha na břiše** **Tvarovaná**
Umístění (vyberte jedno): **A** **B** **C** **D** **E** **F**


7. Umístění kolen (vyberte jedno): **V** **W** **X** **Y** **Z**

Poznámky:

(Pokračování na zadní straně)

PACIENTSKÉ NASTAVENÍ

ACCESS PRONE (RT-4544) (POKRAČOVÁNÍ)

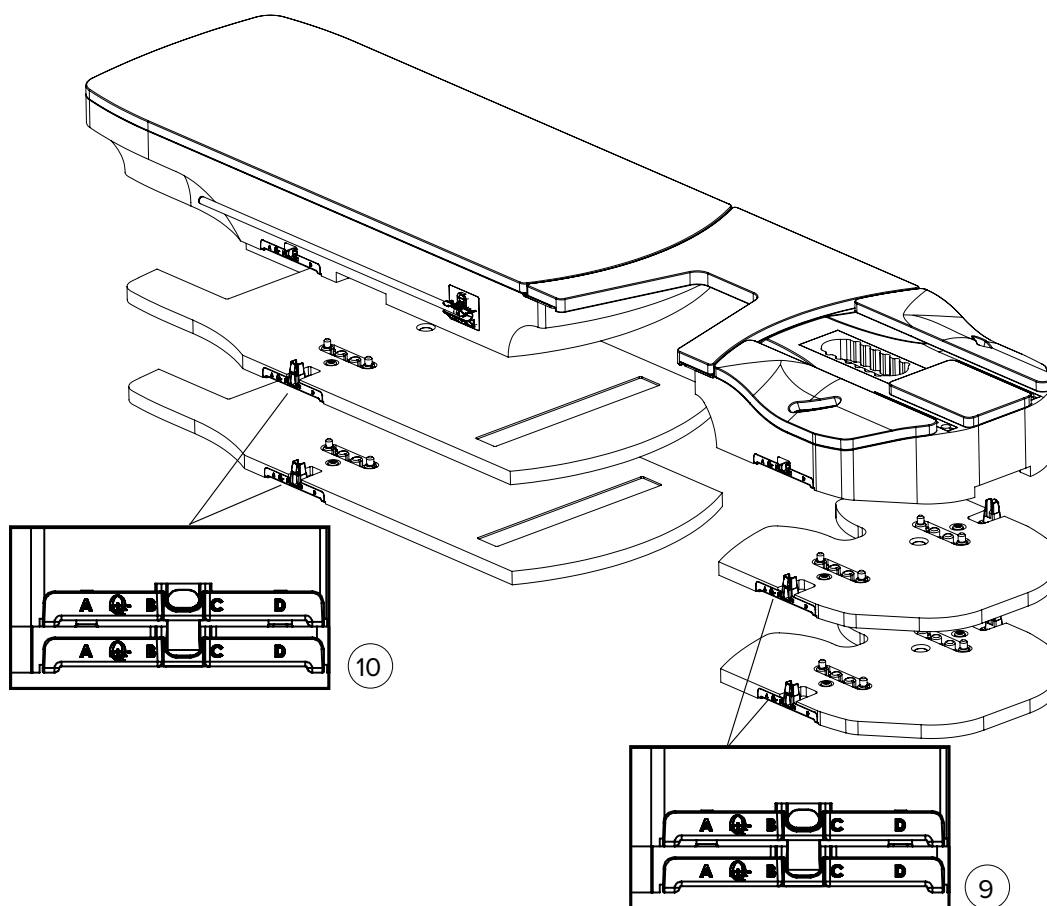

Nástavce a podložky CT

8. Kolik sad zvedacích podložek CT se použije (vyberte jednu možnost): **0** **1** **2**

9. Horní zvedací podložka CT – umístění na polohovací tyči **A** **B** **C** **D**

- Umístění polohovací tyče na lehátku:


10. Dolní zvedací podložka CT – umístění na polohovací tyči **A** **B** **C** **D**

- Umístění polohovací tyče na lehátku:

Poznámky:

SEZNAM SOUČÁSTÍ


ACCESS PRONE G2 (RT-4544-01)

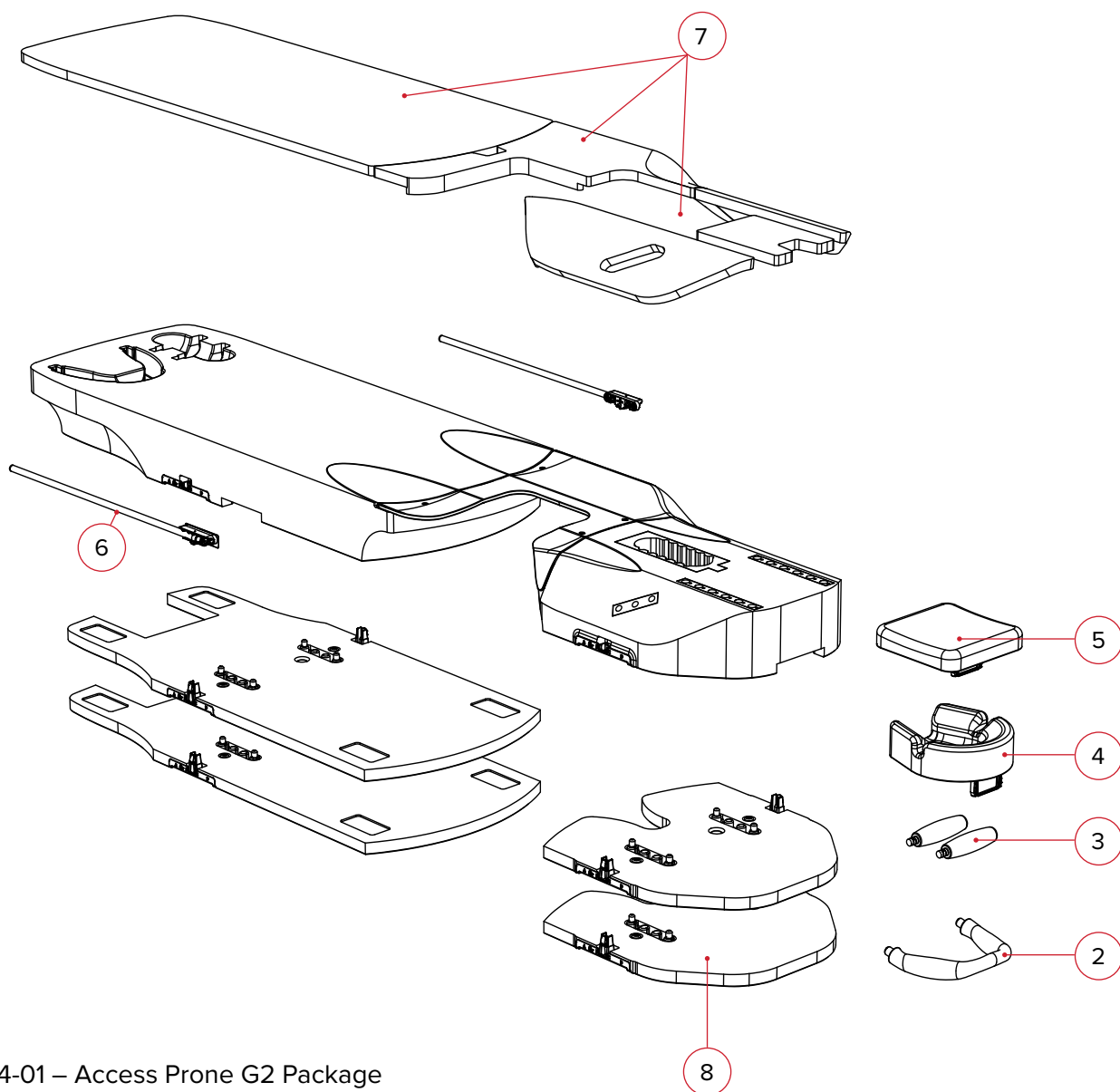

1. RT-4544-01 – Access Prone G2 Package
 - 2005408 Access Prone G2 Right Insert Assembly
 - 2005424 Access Prone G2 Left Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. Ipsilateral Scale, Low Profile
 - 8002601 – 40 cm (Replacement Scale)
 - 8002602 – 48 cm (Accessory Scale)
7. 2006813 – AP-2 Pad Set
8. 8002580 – AP-2 Shim Set

SEZNAM DÍLŮ

ACCESS PRONE (RT-4544)

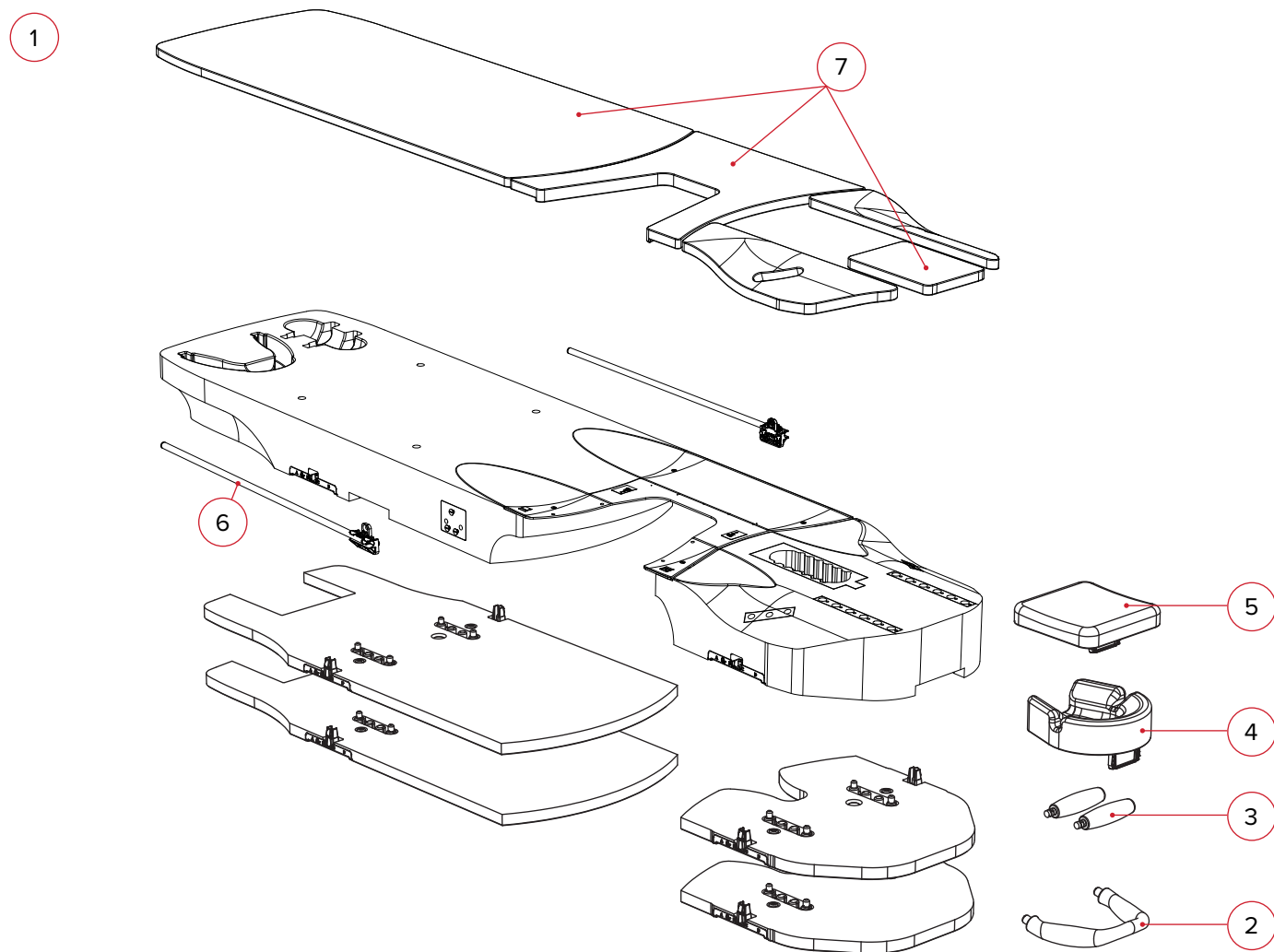

1. RT-4544 – Access™ Prone Package
 - 2004257 Access Prone G1 Breast Insert Assembly
2. RT-4544KV-04 – Dual Grip Handle
3. RT-4544KV-05 – Hand Grip Post
4. RT-4544KV-06 – Prone Headrest
5. RT-4544KV-07 – Contour Headrest
6. 8001846 – Ipsilateral Scale
7. 8002215 – Access™ Prone Pad Set



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com