


TERMÉKÚTMUTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

8002048 és 8002049

DSA-2Q és DSA-2T fejtartó
(Head Holder)

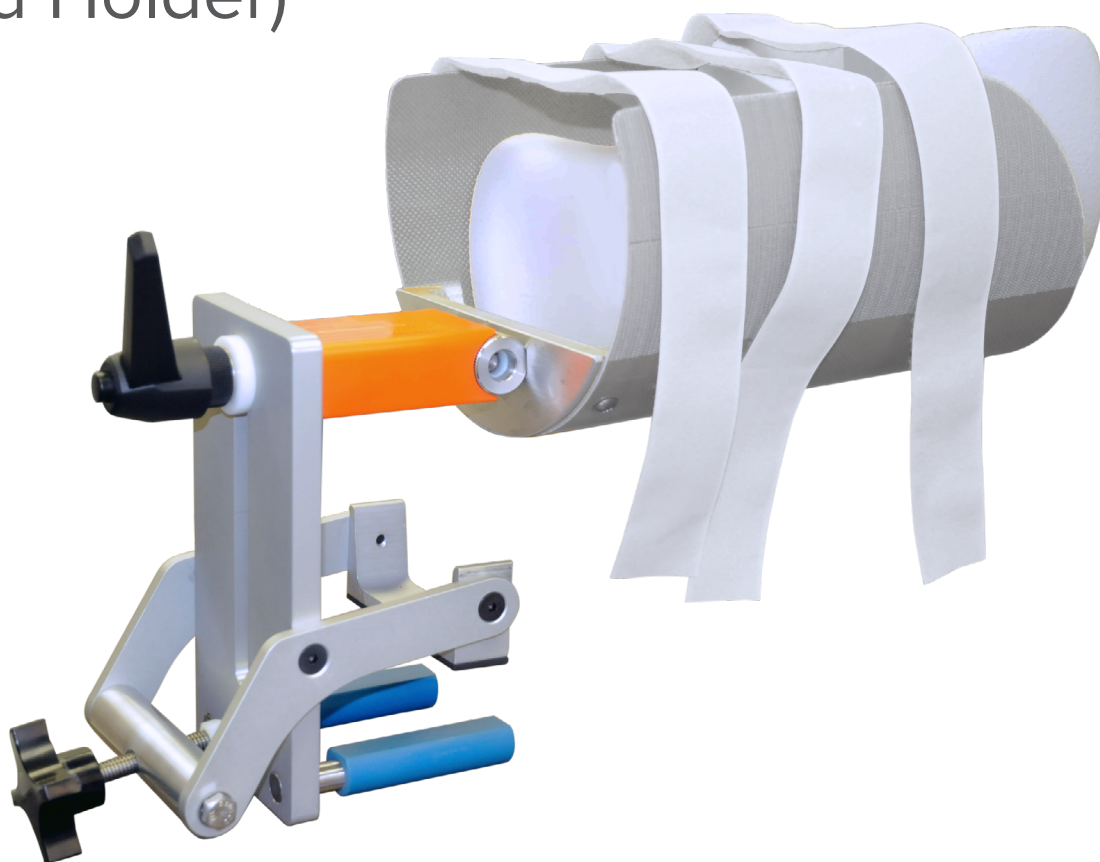



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Készült az Egyesült Államokban. Készítette: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Az Cidex® a Johnson & Johnson bejegyzett védjegye.

Az Clorox® a The Clorox Company bejegyzett védjegye.

TARTALOM

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK.....	4
SÚLYOS ESEMÉNYEK	4
TERHELHETŐSÉG.....	4
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSOK.....	4
RENDELTETÉS.....	5
JELLEMZŐK	6
LEÍRÁS.....	6
KARBANTARTÁS.....	7
A RENDSZER TISZTÍTÁSA	7
A RENDSZER FERTŐTLENÍTÉSE	7
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	8
FELSZERELÉS	8
BEÁLLÍTÁS	9
ELTÁVOLÍTÁS	10

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

! FIGYELEM ! AZ ESZKÖZ SEMMIFÉLE MÓDOSÍTÁSA NEM ENGEDÉLYEZETT. HA AZ ESZKÖZ BÁRMELY RÉSE KATASZTROFÁLIS TERHELÉST KAP, SÉRÜLTNEK TŰNIK VAGY NEM MEGFELELŐEN MŰKÖDIK, AZONNAL FÜGGESSZE FEL A HASZNÁLATOT, ÉS FORDULJON A QFIX VÁLLALATHOZ A +1 484-720-6054 TELEFONSZÁMON VAGY A TECHSUPPORT@QFIX.COM E-MAIL CÍMEN.

SÚLYOS ESEMÉNYEK

Kérjük, jelentsen minden súlyos eseményt (pl. olyan események, melyek potenciálisan halált vagy súlyos sérülést eredményeznek) a Qfix vállalatnak és az országában illetékes hatóságnak is.

TERHELHETŐSÉG

NE lépje túl a 10 kg (22 font) egyenletesen megoszló terhelést.

! JEGYZET ! A beteg elhelyezkedése után további finombeállításokra lehet szükség.

! JEGYZET ! A beteg pozicionálásakor ügyeljen arra, hogy a beteg le legyen túl magasan a fejtartóban. A túl magasan történő elhelyezkedés kényelmetlen lesz, és műtermékeket eredményezhet.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSOK

A szimbólumokat és jelentéseiket lásd a Qfix.com oldalon.

RENDELTETÉS

A fejtartó (Head Holder) a fej pozicionálására és mozdulatlanul tartására szolgál. Az eszköz elsősorban intervenciós neuroradiológiai eljárásokhoz szolgál. Ezenkívül bármilyen intervenciós eljáráshoz használható a beteg fejmozgásának minimalizálása céljából.

A fejtartó klinikai környezetben, képzett technikusok és klinikai szakemberek általi használatra szolgál.

! JEGYZET ! Az Egyesült Államok szövetségi törvénye korlátozza ezt az eszközt az orvos rendelésén vagy annak megadásával.

CÉLBETEGCSOPORTOK

Diagnosztikai képalkotást igénylő általános orvosi vagy sebészeti eljárásokon áteső betegek.

CÉLFELHASZNÁLÓK

A termék célfelhasználói azok, akik a területi szabályozások követelményei szerint képzettnek minősülnek.

JELLEMZŐK

LEÍRÁS

A termék úgy lett kialakítva, hogy javítsa a cardiovascularis röntgen berendezések képminőségét, teljesítőképességét és termelékenységét. A termék megtámasztja a beteg fejét, ezáltal csökkenti a szubtrakciós kép félrecsúszását, és élesebbé teszi a 3D képeket. A termék egyszerű kialakítása megkönnyíti a felszerelést, a beállítást és az eltávolítást, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a beteg igényeire összpontosítson.

KARBANTARTÁS

A RENDSZER TISZTÍTÁSA

Az eszköz kímélő, nem csiszoló hatású tisztító- vagy fertőtlenítőoldattal tisztítható. Ne permetezzen és ne öntsön folyadékot az eszközre. A tisztításhoz nedvesítsen meg az oldattal egy tiszta törlőruhát, és törölje át az eszköz felületét.

A RENDSZER FERTŐTLENÍTÉSE

Az alábbi tisztítóanyagok a tesztelések során megfelelőnek bizonyultak az eszköz felületének tisztításához. A felület fertőtlenítéséhez kövesse a tisztítószer gyártójának konkrét utasításait.

- Víz
- 10%-os Clorox® fehérítőszer-oldat
- Izopropil-alkohol
- Cidex® 2,4%-os aktivált dialdehyd oldat
- Szappan és víz

NE permetezzen folyadékot közvetlenül a fejtartóra.

NE hagyja a fejtartót vízben éjszakára.

NE használjon klórt a fejtartó tisztításához.

Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőelemet, hogy szorosan meg vannak-e húzva.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FELSZERELÉS



1




2




3




4

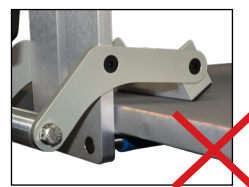

5

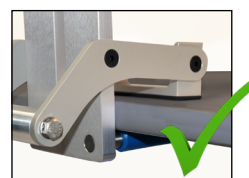


6

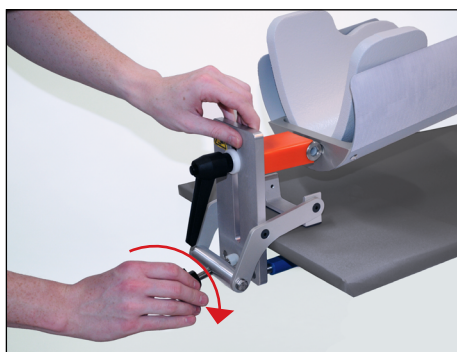


7

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


BEÁLLÍTÁS

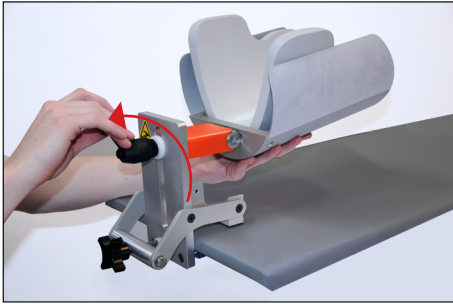


8

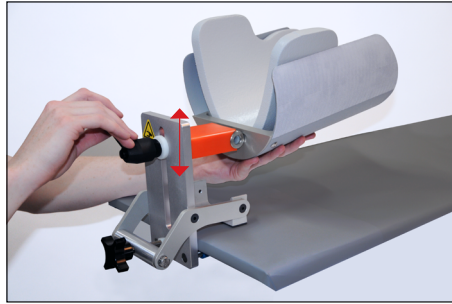

9

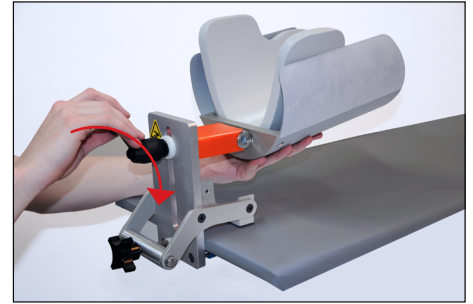


10

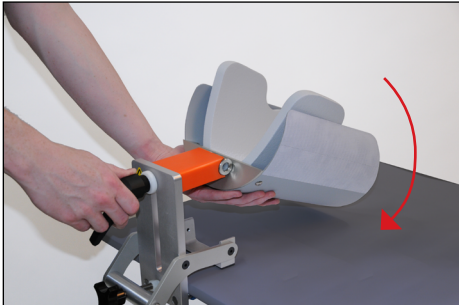

11




12

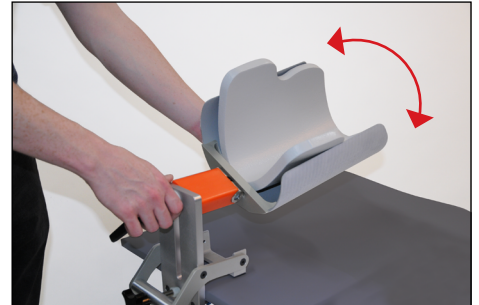


13




14

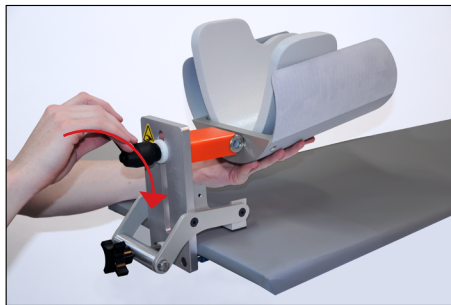


15

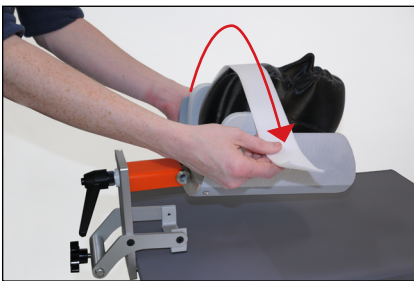

16

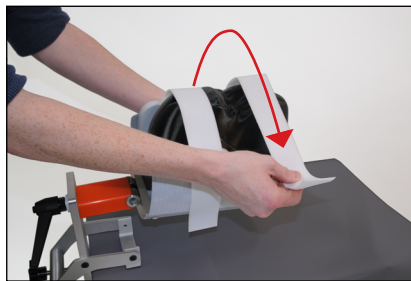


17

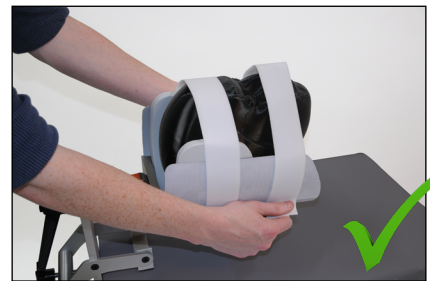

18




19

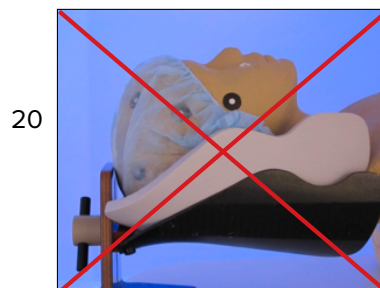


20

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


ELTÁVOLÍTÁS

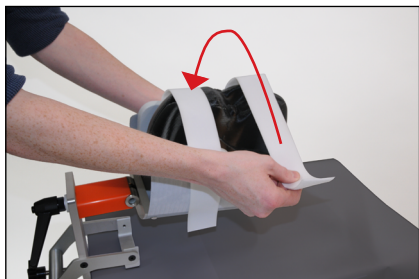


21

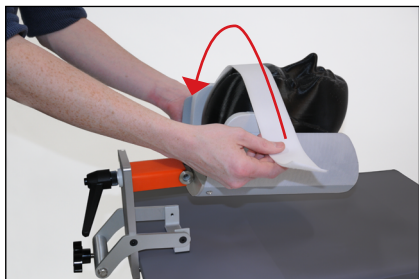

22

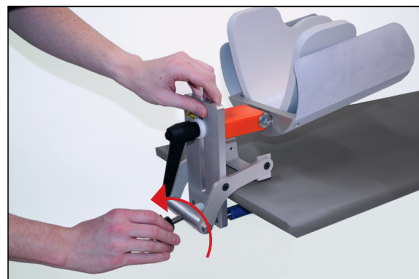

23

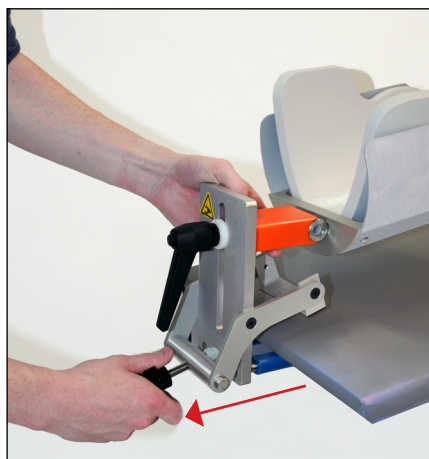

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610-268-0585 / 800-526-5247

🖨 +1 610-268-0588 / 800-831-8174

✉ sales@Qfix.com

2004685_HU_E
2020-07