




ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

8002048 және 8002049

DSA-2Q және DSA-2T бас тірегі

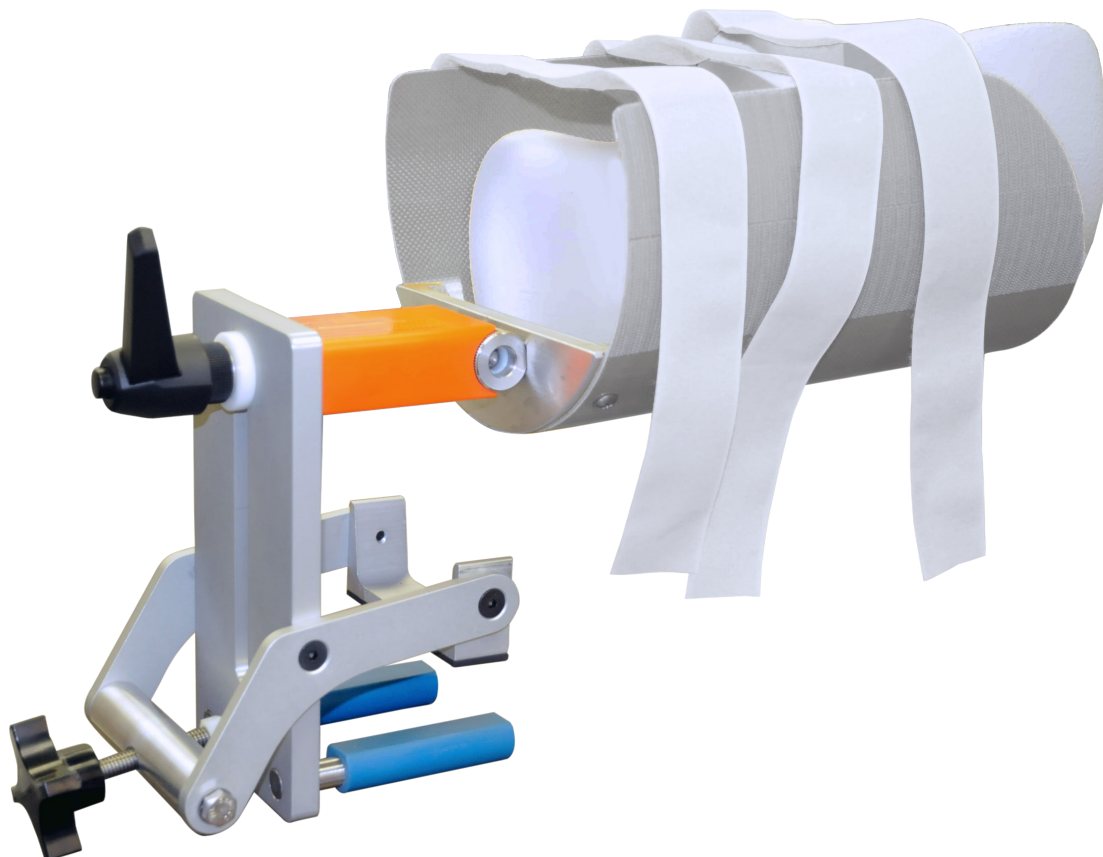



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		АҚШ-та жасаған өндіруші Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8668 www.CQmedical.com
----	-----	---	--	---

Cidex® — Johnson & Johnson компаниясының тіркелген сауда белгісі
Clorox® — The Clorox Company компаниясының тіркелген сауда белгісі.

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ	4
ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР	4
НОМИНАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ	4
ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	4
ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ	5
ФУНКЦИЯЛАР	6
СИПАТТАМАСЫ	6
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	7
ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ	7
ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАҢДЫРУ	7
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	8
ОРНАТУ	8
БАПТАУ	9
ШЫҒАРЫП АЛУ	10

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 712-737-8668 НӨМІРІ НЕМЕСЕ INFO@CQMEDICAL.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША CQ MEDICAL КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

ЕЛЕУЛІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР

Елеулі оқыс оқиғалар (мысалы, өлімге немесе ауыр жарақаттарға әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін оқиғалар) туралы CQ Medical компаниясына да, еліңіздің құзыретті органына да хабарлаңыз.

НОМИНАЛДЫ ЖҮКТЕМЕ

10 кг (22 фунт) біркелкі үлестірілген жүктемеден асыруға БОЛМАЙДЫ.

! ЕСКЕРТПЕ ! Емделушіні орнына орналастырғаннан кейін қосымша соңғы түзетулерді енгізу қажет болуы мүмкін.

! ЕСКЕРТПЕ ! Емделушіні орналастыру кезінде оны бас тірегінде тым жоғары қоймағаныңызға көңіл бөліңіз. Бұл қолайсыз болып, артефактілерді тудыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын www.CQmedical.com сайтынан қараңыз.

ПАЙДАЛАНУ МАҚСАТЫ

Бас тірегі басты орналастырып, қозғалтпай ұстап тұруға арналған. Бұл құрылғы интервенциялық нейрорадиологиялық процедураларға арналған. Бұл сонымен қоса емделушінің басы барынша қимылсыз тұруы қажет интервенциялық процедураға арналған.

Бас тірегін арнайы білімі бар техникалық мамандар немесе медициналық қызметкерлер клиникалық жағдайда қолдануы керек.

! ЕСКЕРТПЕ ! АҚШ федералдық заңына сәйкес, бұл құрылғыны тек дәрігерге немесе оның тапсырысы бойынша сатуға рұқсат етіледі.

МАҚСАТТЫ ЕМДЕЛУШІ ТОПТАРЫ

Диагностикалық визуализацияны қамтитын жалпы медициналық немесе хирургиялық ем-шаралардан өтетін емделушілер.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Осы өнімдердің мақсатты пайдаланушысы — реттеуші аймақ талаптарына сай білікті тұлға.

ФУНКЦИЯЛАР

СИПАТТАМАСЫ

Өнім кардиоваскулярлық рентген жабдығының кескін сапасын толықтыруға, жақсартуға және кардиоваскулярлық рентген жабдығының өнімділігін, нәтижелілігін және кескін сапасын жақсартуға арналған. Өнім емделушінің басын тірейді, шегерілген кескінмен тураланбауын азайтады және 3-D кескіндерді жақсартады. Өнімнің қарапайым дизайны орнатуды, реттеуді және алуды жеңілдетеді және сөйтіп пайдаланушы емделуші қажеттіліктеріне көңіл бөле алады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ЖҮЙЕНІ ТАЗАЛАУ

Құрылғыны жұмсақ, сызат түсірмейтін тазалау немесе зарарсыздандыру ерітіндісімен тазалау керек. Тазалау үшін ерітіндіні таза шүберекке жағып, бетін сүртіңіз.

ЖҮЙЕНІ ЗАРАРСЫЗДАНДЫРУ

Төмендегі тазалау материалдарына сынақ жүргізіліп, құрылғы бетін тазалауға жарамды деп танылды. Құрылғының бетін зарарсыздандыру үшін тазалағыш ерітінді өндірушісі ұсынған арнайы нұсқауларды қараңыз.

- Су
- 10% Clorox® ағартқыш ерітіндісі
- Изопропил спирті
- Cidex® 2,4% белсендірілген диальдегид ерітіндісі
- Сабын мен су

Тікелей бас тірегіне бүркуге БОЛМАЙДЫ.

Бас тірегін түні бойы суда ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.

Бас тірегін тазалау үшін хлорды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.


Бекіткіштердің барлығы мықтап қатайтылғанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ



1

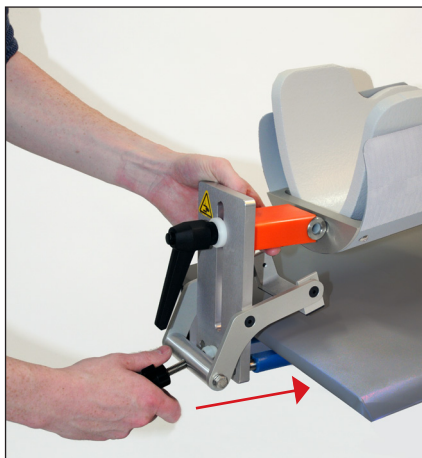


2




3




4

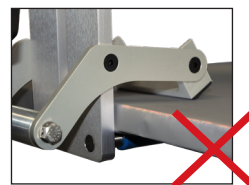

5

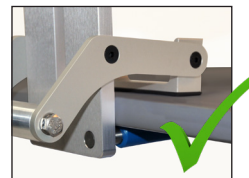


6

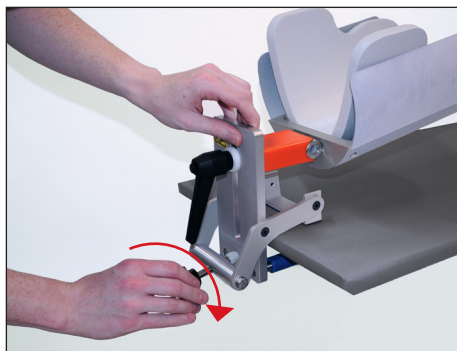


7

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ


БАПТАУ

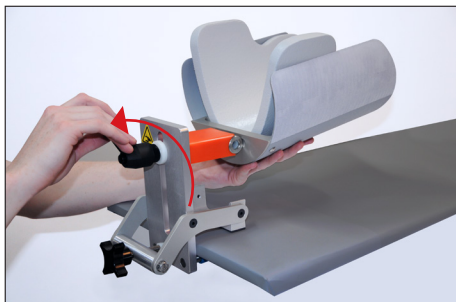

8

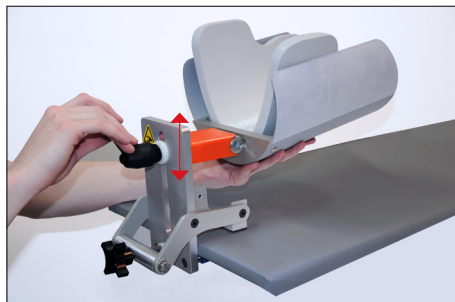

9

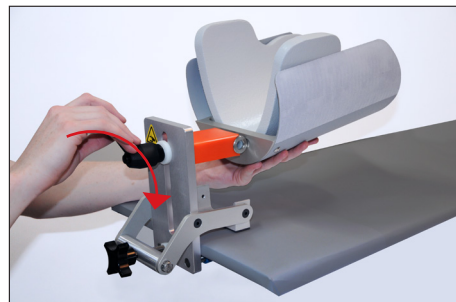

10



11




12




13




14

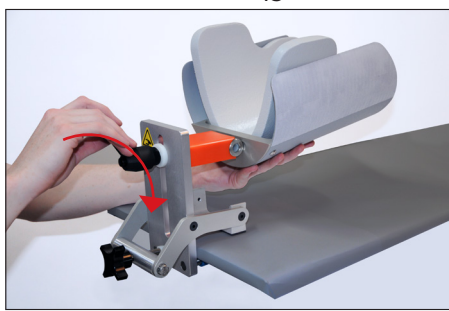


15

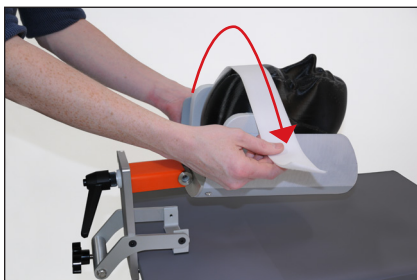

16

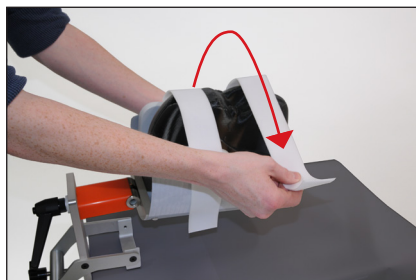

17

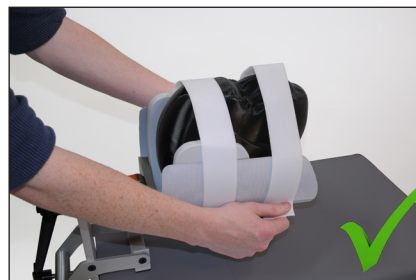

18




19




20

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ


ШЫҒАРЫП АЛУ

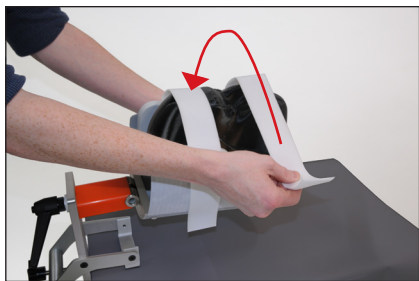


21

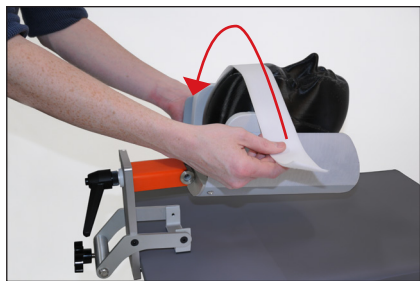

22

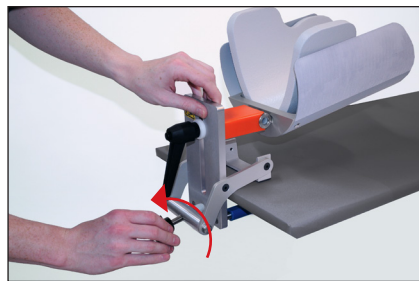

23

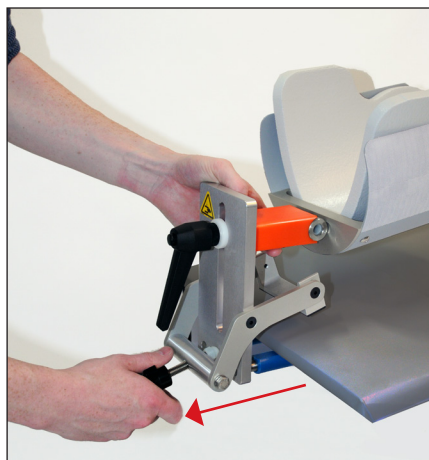

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQmedical.com

☎ +1 712.737.8668 / 800.842.8688
✉ info@CQmedical.com

2004685_KK_0
2024-12