




positioning
patients for life.®

GAMINIO INSTRUKCIJA IR NAUDOTOJO VADOVAS

8002048 ir 8002049

DSA-2Q ir DSA-2T galvos laikiklis
(„Head Holder“)

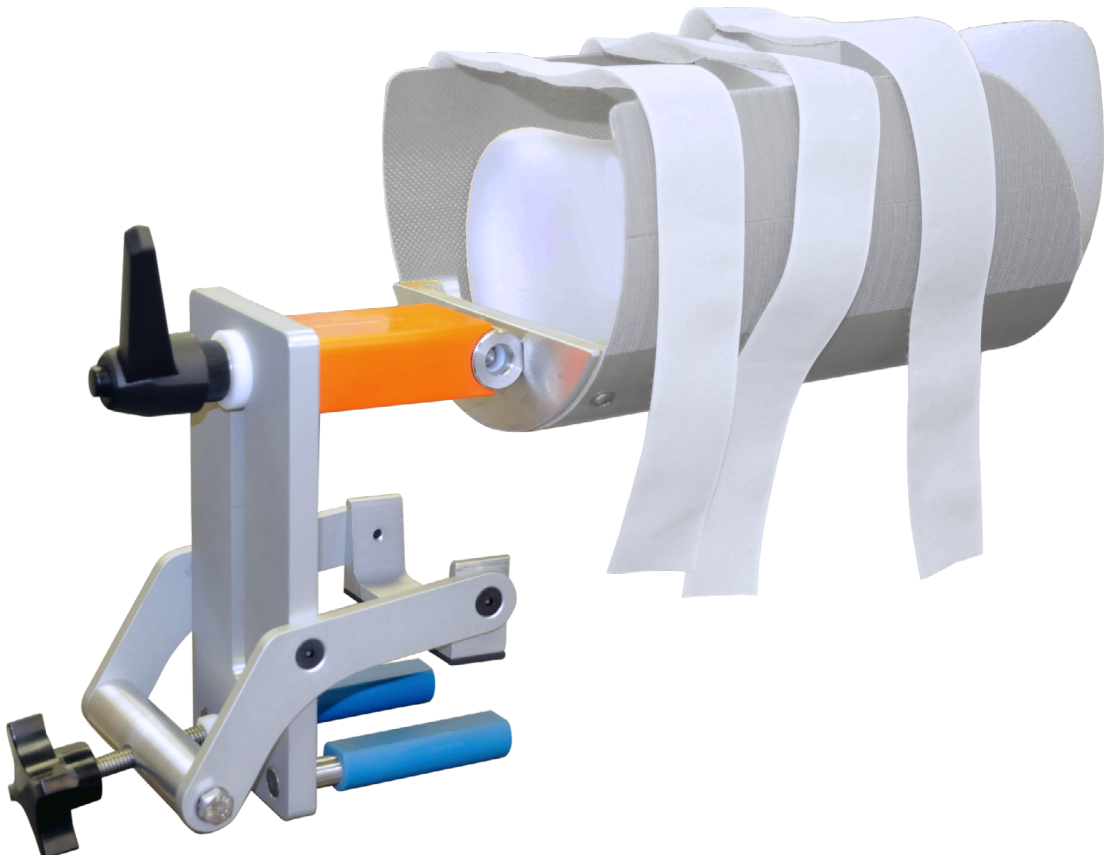



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Pagaminta JAV, gamintojas: Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

„Cidex®“ yra „Johnson & Johnson“ registruotas prekių ženklas.

„Clorox®“ yra „The Clorox Company“ registruotas prekių ženklas.

PAKUOTĖS SUDĖTIS

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS.....	4
ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA	4
RIMTI INCIDENTAI.....	4
VARDINĖ APKROVA	4
ĮSPĖJAMIEJI UŽRAŠAI IR APRAŠYMUOSE	4
NUMATYTOJI PASKIRTIS	5
FUNKCINIAI YPATUMAI	6
APRAŠYMAS	6
PRIEŽIŪRA.....	7
NAUDOJIMO NURODYMAI	8
MONTAVIMAS.....	8
PARUOŠIMAS NAUDOTI.....	9
NUĖMIMAS	10

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ĮSPĖJAMOJI INFORMACIJA

!ĮSPĖJIMAS!ŠIOSĮRANGOSMODIFIKUOTINEGALIMA.BETKURIAŠIOĮTAISODALĮPAVEIKUSKATASTROFINIO MASTO APKROVAI, ATsirADUS PAŽEIDIMO POŽYMIŲ AR VEIKIMO SUTRIKIMŲ, IŠKART NUSTOKITE NAUDOTI IR KREIPKITĖS Į „QFIX“ TEL. +1 484-720-6054 ARBA EL. PAŠTU: TECHSUPPORT@QFIX.COM.

RIMTI INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus (pvz., incidentus, kurių metu ištinka arba gali ištikti mirtis, taip pat patiriama arba galima patirti rimtų sužalojimų) praneškite tiek „Qfix“, tiek kompetentingai savo šalies institucijai.

VARDINĖ APKROVA

NEGALIMA viršyti 10 kg (22 svar.) tolygiai paskirstytos apkrovos.

! PASTABA ! Pacientui atsigulus į vietą, gali reikėti pareguliuoti tiksliau.

! PASTABA ! Svarbu pacientą paguldyti į tokią padėtį, kad galva neatsidurtų per aukštai galvos laikiklyje. Tokia padėtis būtų nepatogi ir galėtų sukelti vaizdo artefaktus.

ĮSPĖJAMIEJI UŽRAŠAI IR APRAŠYMUOSE

Qfix.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašus.

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Galvos laikiklis („Head Holder“) yra skirtas galvos padėčiai nustatyti ir galvai imobilizuoti. Pagrindinė šio įtaiso taikymo sritis – intervencinės neuroradiologijos procedūros. Jį taip pat galima taikyti atliekant bet kokią intervencinę procedūrą, kai reikia kiek įmanoma sumažinti paciento galvos judrumą.

Galvos laikiklis yra skirtas naudoti tinkamos kvalifikacijos laborantams ir kitiems medicinos specialistams klinikinėje aplinkoje.

! PASTABA ! JAV Federalinis įstatymas apriboja šį prietaiso pardavimą ar gydytojui tvarka.

TIKSLINĖS PACIENTŲ GRUPĖS

Pacientai, kuriems atliekamos bendrosios medicininės arba chirurginės procedūros, įskaitant diagnostinio vaizdavimo tyrimus.

NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

Numatytieji šių gaminių naudotojai – asmenys, turintys atitinkamo regiono norminius reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją.

FUNKCINIAI YPATUMAI

APRAŠYMAS

Gaminys yra skirtas sustiprinti ir pagerinti širdies ir kraujagyslių rentgeno aparatūros vaizdo, veikimo ir produktyvumo kokybę. Gaminys suteikia atramą paciento galvai, todėl sumažėja subtrakcinio vaizdo sinchronizacijos netolygumai ir pagerėja trimačio vaizdo kokybė. Gaminio konstrukcija paprasta, todėl jį lengva sumontuoti, reguliuoti ir nuimti, o naudotojas gali sutelkti dėmesį paciento poreikiams.

PRIEŽIŪRA

Įtaisą galima valyti švelniu, neabrazyviniu valymo ar dezinfekciniu tirpalu. Negalima skysčio purkšti ar pilti tiesiai ant įtaiso. Kai reikia valyti, nušluostykite paviršių tirpalu suvilgyta švaria šluoste.

Įtaiso paviršiams valyti tinka šios išbandytos valymo medžiagos. Norėdami paviršių dezinfekuoti, vadovaukitės specifiniais valiklio gamintojo nurodymais.

- Vanduo
- 10% „Clorox®“ baliklio tirpalas
- Izopropilo alkoholis
- „Cidex®“ 2,4% aktyvintojo dialdehido tirpalas
- Muilas ir vanduo

NEGALIMA purkšti tiesiai ant galvos laikiklio.

NEGALIMA galvos laikiklio vandenyje mirkyti per naktį.

NEGALIMA galvos laikiklio valyti chloru.

Reguliariai tikrinkite visų tvirtinimo detalių priveržimo tvirtumą.

NAUDOJIMO NURODYMAI

MONTAVIMAS



1




2




3




4

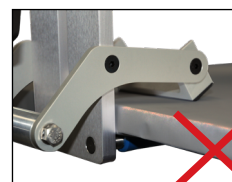

5

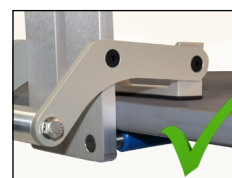


6

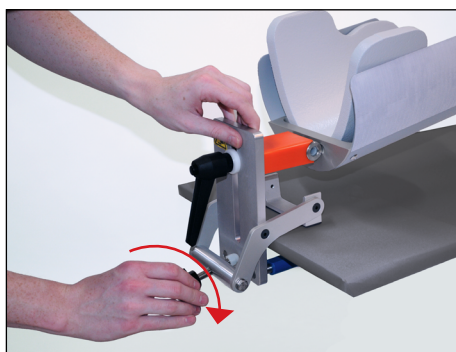


7

NAUDOJIMO NURODYMAI


PARUOŠIMAS NAUDOTI

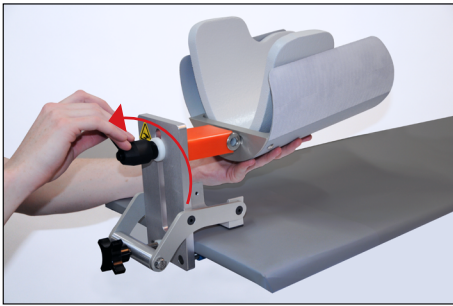

8

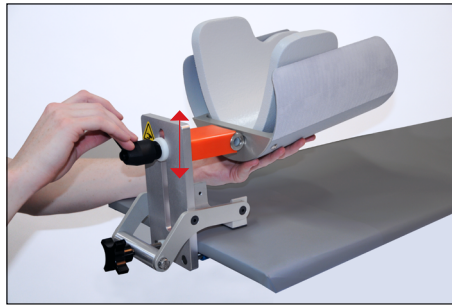

9

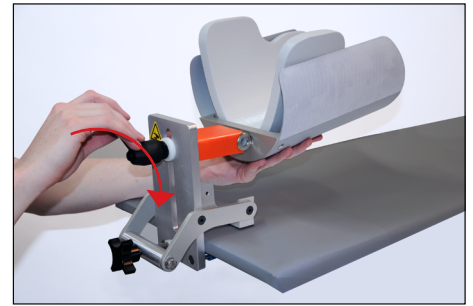


10



11




12

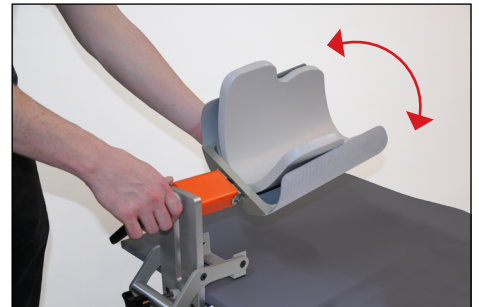


13




14

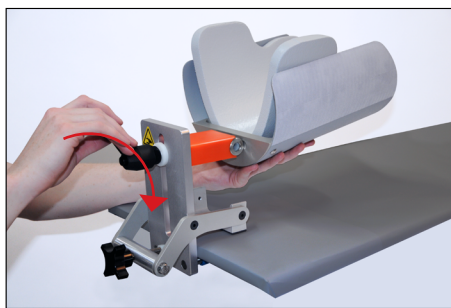


15

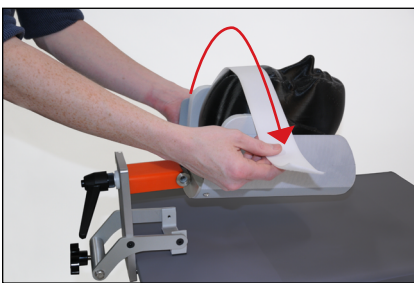

16

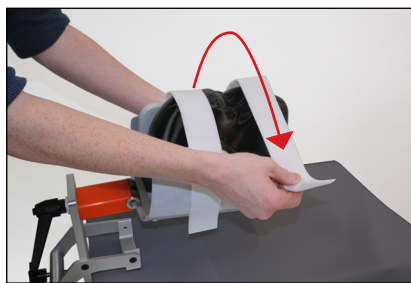

17

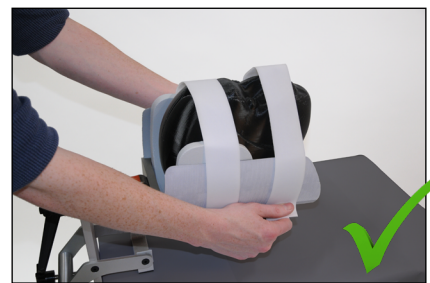

18




19




20

NAUDOJIMO NURODYMAI


NUĖMIMAS

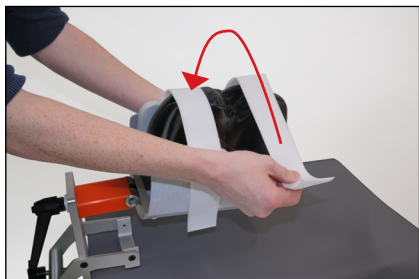


21

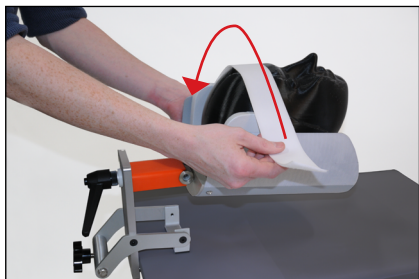

22

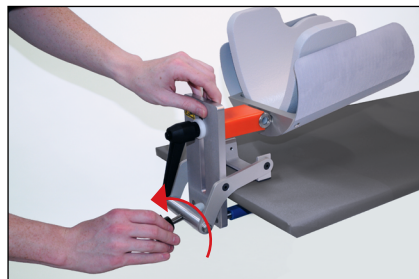

23

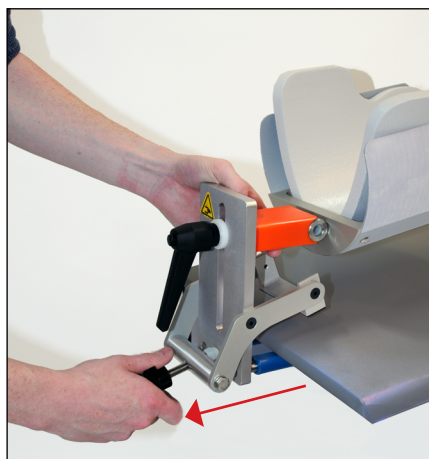

24



25



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com