



PRŮVODCE VÝROBKEM A PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

8002041

8002066

8002067

Držák pro paži X-Trans® (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Vyrobeno v USA společností Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

X-Trans® je registrovaná ochranná známka společnosti Qfix.

Cidex® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson.

Clorox® je registrovaná ochranná známka společnosti The Clorox Company.

OBSAH

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ	4
VÝSTRAŽNÉ INFORMACE	4
ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI	4
JMENOVITÁ ZÁTĚŽ	4
VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY	4
URČENÉ POUŽITÍ	5
ÚDRŽBA	6
ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU	6
DEZINFEKCE SYSTÉMU	6
SEZNAM ČÁSTÍ	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	8
INSTALACE	8
ODSTRANĚNÍ	10

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAŽNÉ INFORMACE

! VÝSTRAHA ! NEJSOU DOVOLENY ŽÁDNÉ MODIFIKACE ZAŘÍZENÍ. POKUD BYLA JAKÁKOLIV ČÁST TOHOTO ZAŘÍZENÍ PODROBENA KATASTROFICKÉ ZÁTĚŽI, JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, OKAMŽITĚ ZAŘÍZENÍ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 NEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ZÁVAŽNÉ UDÁLOSTI

Nahlaste prosím jakékoli závažné události (např. události, které mají nebo by mohly mít za následek smrt či vážné zranění) společnosti Qfix i příslušnému úřadu své země.

JMENOVITÁ ZÁTĚŽ

8002041—NEPŘESAHOJTE rovnoměrně rozloženou zátěž 249 kg (550 lb)

8002066—NEPŘESAHOJTE rovnoměrně rozloženou zátěž 226 kg (500 lb)

8002067—NEPŘESAHOJTE rovnoměrně rozloženou zátěž 226 kg (500 lb)

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Seznam symbolů a jejich vysvětlení najdete na stránkách Qfix.com.

URČENÉ POUŽITÍ

Tato skupina výrobků je konstruována jako rentgenopropustná zařízení používaná pro injekce a/nebo jako opěry pro paže. Výrobky jsou určeny k použití s plochými angiografickými a snímkovacími stoly.

! POZNÁMKA ! Federální zákon Spojených států omezuje toto zařízení na prodej lékařem nebo na jeho příkaz.

CÍLOVÉ SKUPINY PACIENTŮ

Pacienti podstupující běžné lékařské nebo chirurgické výkony zahrnující diagnostické zobrazování.

ZAMÝŠLENÍ UŽIVATELE

Zamýšleným uživatelem produktů je osoba kvalifikovaná v souladu s požadavky regulační oblasti.

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

Držák pro paži (Armboard) lze čistit jemným neabrazivním čisticím nebo dezinfekčním roztokem. Při čištění navlhčete roztokem čistý hadřík a otřete povrch.

DEZINFEKCE SYSTÉMU


Následující čisticí prostředky byly testovány a bylo zjištěno, že jsou vhodné k čištění povrchu držáku pro paži. Před dezinfekcí povrchu držáku pro paži si přečtěte specifické pokyny výrobce čisticího prostředku.

- voda
- 10 % roztok bělidla Clorox®
- isopropyl alkohol
- 2,4 % aktivovaného dialdehydového roztoku Cidex®
- roztok mýdla ve vodě


Pravidelně kontrolujte, zda upevňovací prvky dobře drží.

SEZNAM ČÁSTÍ

8002065 (A)

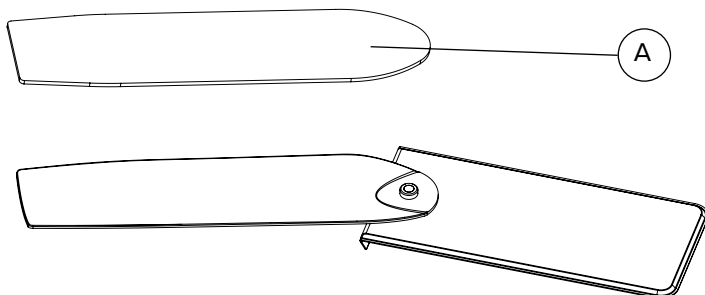


8002068 (B)

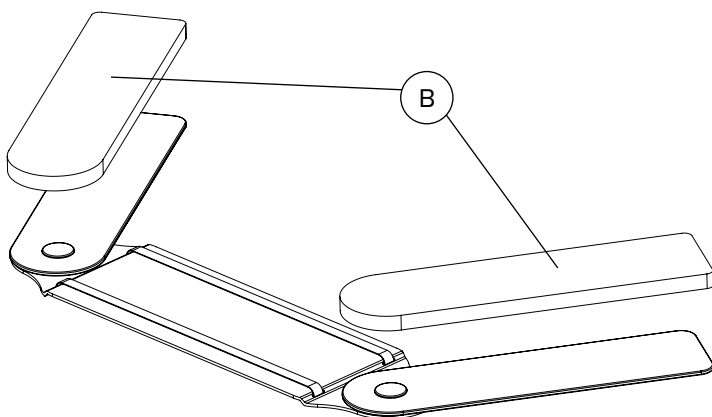


POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE

8002041

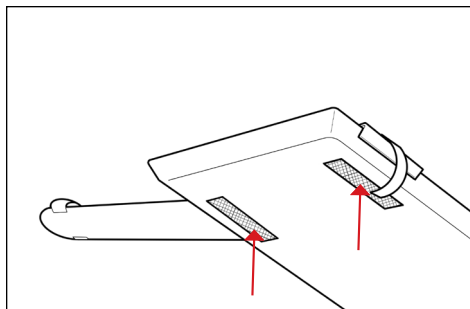

1

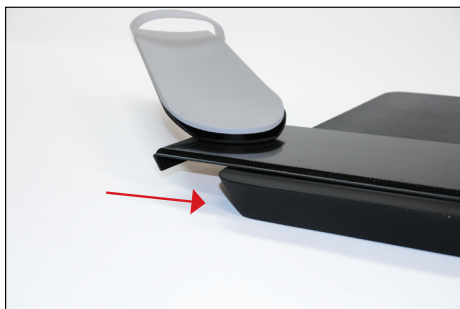


2




3



4

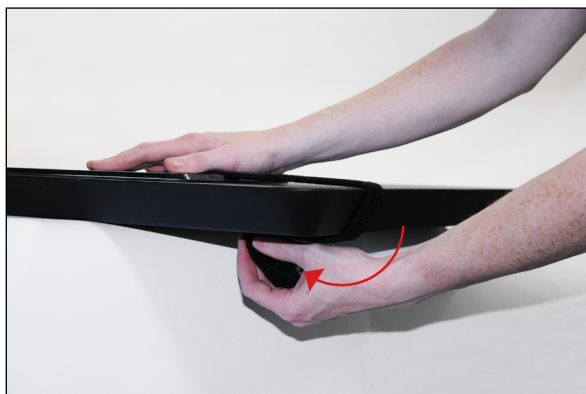

5

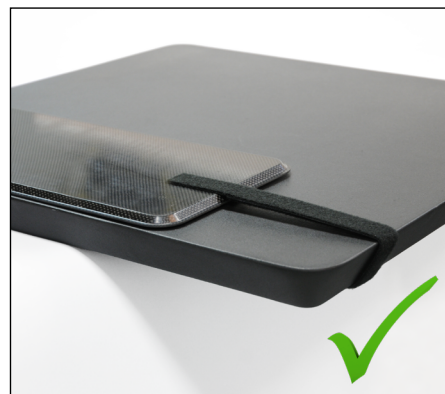

6



7

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

INSTALACE


8002066 a 8002067



8



9

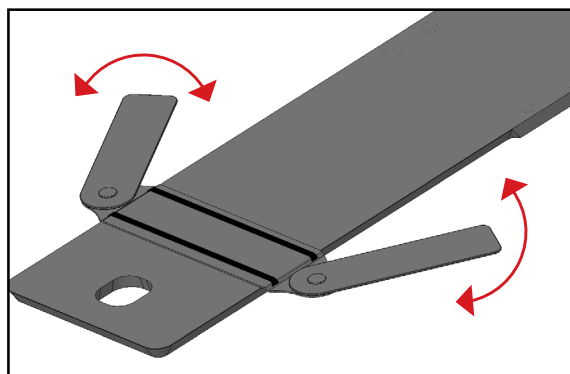


10


POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ


8002041

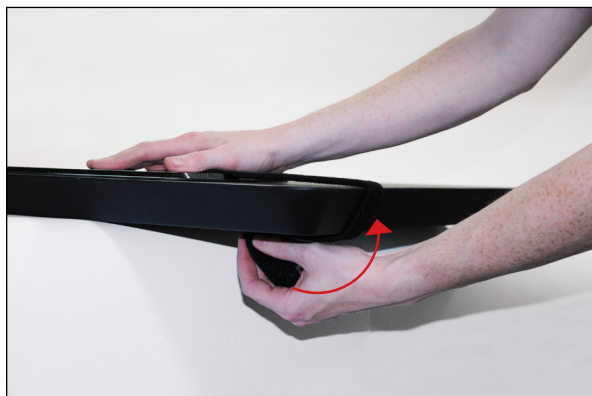

11

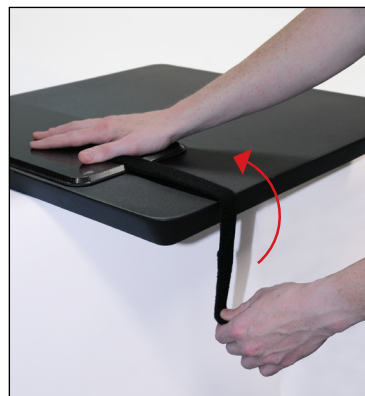

12

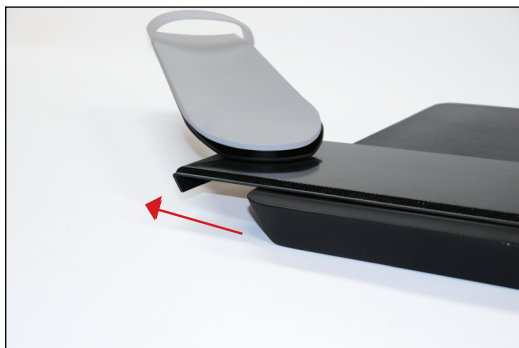

13

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

ODSTRANĚNÍ

8002066 a 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com