



ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

8002041

8002066

8002067

X-Trans® Kol desteği (Armboard)



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

X-Trans®, Qfix şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER.....	4
UYARI İFADELERİ.....	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
YÜK DERECELENDİRME	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	4
KULLANIM AMACI.....	5
BAKIM.....	6
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	6
SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ	6
PARÇA LİSTESİ.....	7
8002065 (A)	7
8002068 (B)	7
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	8
KURULUM	8
ÇIKARMA.....	10

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKIPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.

YÜK DERECELENDİRME

8002041—249 kg (550 lb) homojen dağıtılmış yük üzerine ÇIKMAYIN.

8002066—226 kg (500 lb) homojen dağıtılmış yük üzerine ÇIKMAYIN.

8002067—226 kg (500 lb) homojen dağıtılmış yük üzerine ÇIKMAYIN.

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

KULLANIM AMACI

Bu ürün serisi enjeksiyonlar ve/veya kol destekleri için kullanılan radyolüsen cihazlar olarak tasarlanmıştır. Ürünler yassı üst kısmılı Anjiyografi yatakları ve yassı üst kısmılı görüntüleme yataklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Diyagnostik görüntülemeyi içeren genel tıbbi veya cerrahi prosedürler uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

SİSTEMİN DEZENFEKTE EDİLMESİ


Aşağıdaki temizlik materyalleri test edilmiş ve cihazların yüzeylerini temizlemek için uygun olduğu tespit edilmiştir. Yüzeyi dezenfekte etmek için temizlik ajanı üreticisinin spesifik talimatına başvurun.

- Su
- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu su


Tüm tutturucuları sıklık açısından düzenli olarak kontrol edin.

PARA LİSTESİ

8002065 (A)

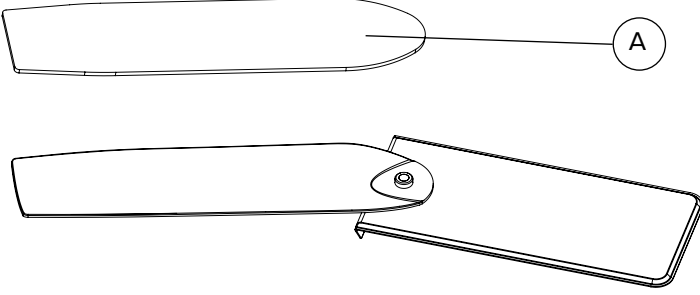


8002068 (B)

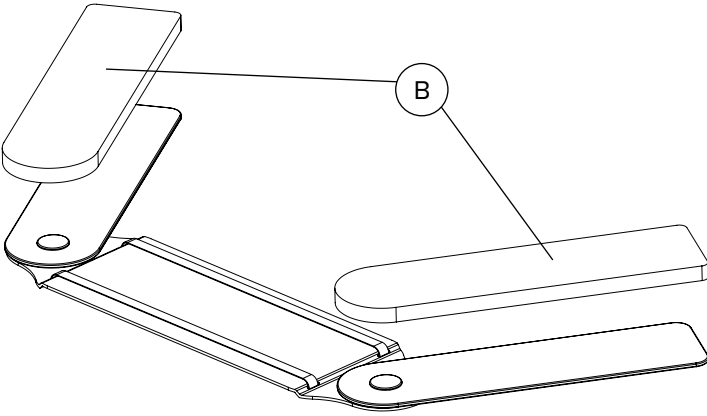


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

8002041

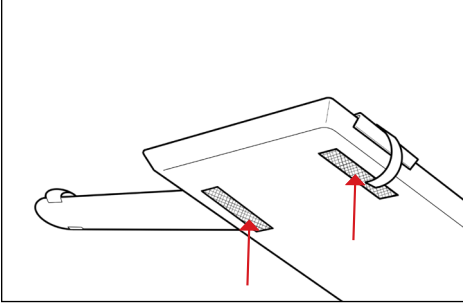

1

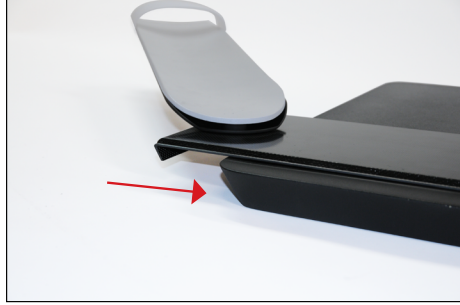


2




3



4

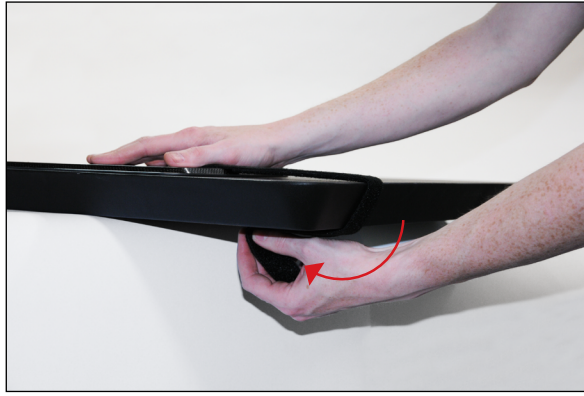

5

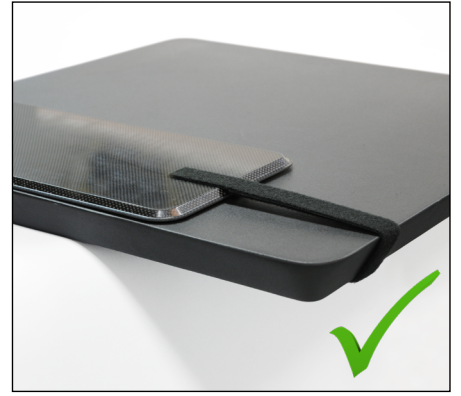

6



7

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM


8002066 ve 8002067



8



9

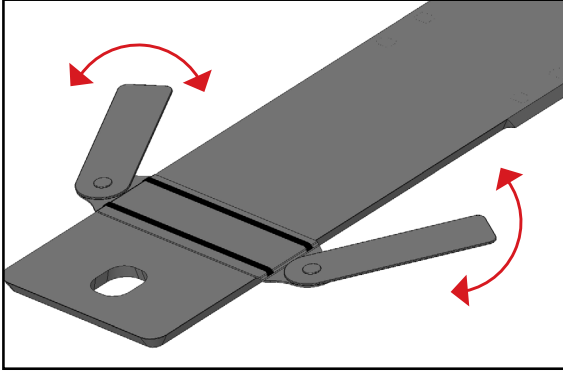


10


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA


8002041

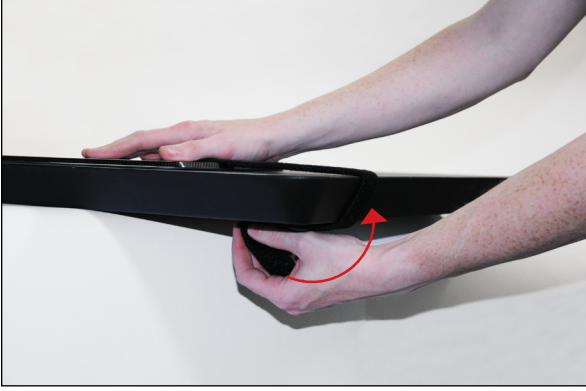

11

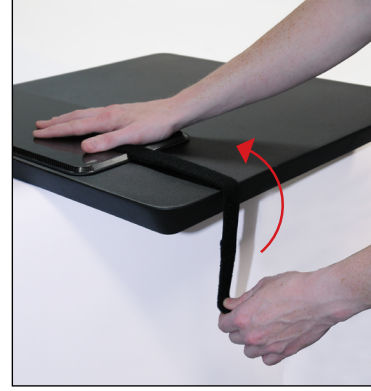

12

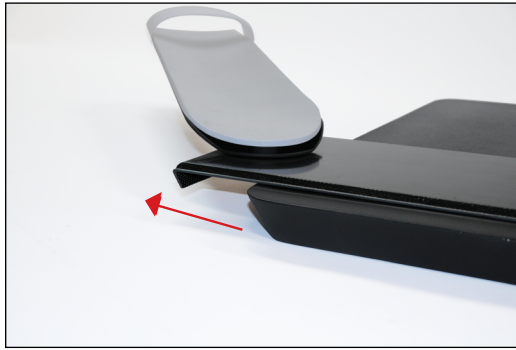

13

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA

8002066 ve 8002067



14



15



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004706_TR_E
2020-07