

PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4488-01, RT-4488-02, RT-4488-03,
RT-4488-04, RT-4488-05 og RT-4488-06
SofTouch™ lejepude



GENERELLE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS NOGEN DEL AF UDSTYRET UDSÆTTES FOR EN EKSTREMT STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Gå til Qfix.com for at se en liste over symboler og deres definitioner.



SE BRUGSANVISNINGEN

SofTouch™ lejepuden kan dække vigtige advarselsmærkater, forholdsregler og mærkning. Se brugsanvisningen til det udstyr, lejepuden anvendes på, vedrørende disse advarsler, forholdsregler og yderligere mærkning.

VEDLIGEHOJDELSE

Udstyret kan rengøres med et mildt, ikke-slibende rengørings- eller desinfektionsmiddel. Rengør udstyret ved at påføre midlet på en ren klud og tørre overfladen af.

Følgende rengøringsmaterialer er blevet testet og fundet at være egnede til rengøring af overfladen. Se de specifikke anvisninger fra producenten af rengøringsmidlet vedrørende desinfektion af overfladen.

- Vand
- 10 % Clorox® blegemiddelopløsning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydopløsning
- Sæbe og vand

Sprøjt IKKE direkte på lejepuden.

Anbring IKKE skarpe genstande på lejepuden.



Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta



Fremstillet i USA af

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA
+1 610-268-0585 www.Qfix.com

SofTouch er et varemærke, der tilhører Qfix.

Cidex® er et registreret varemærke, der tilhører Johnson & Johnson.

Clorox® er et registreret varemærke, der tilhører The Clorox Company.

2004784_DA_A