




positioning
patients for life.®

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4551KVE kVue™ EDGE™ Couch Top

RT-4551KVCL-V kVue™ Calypso® Couch Top

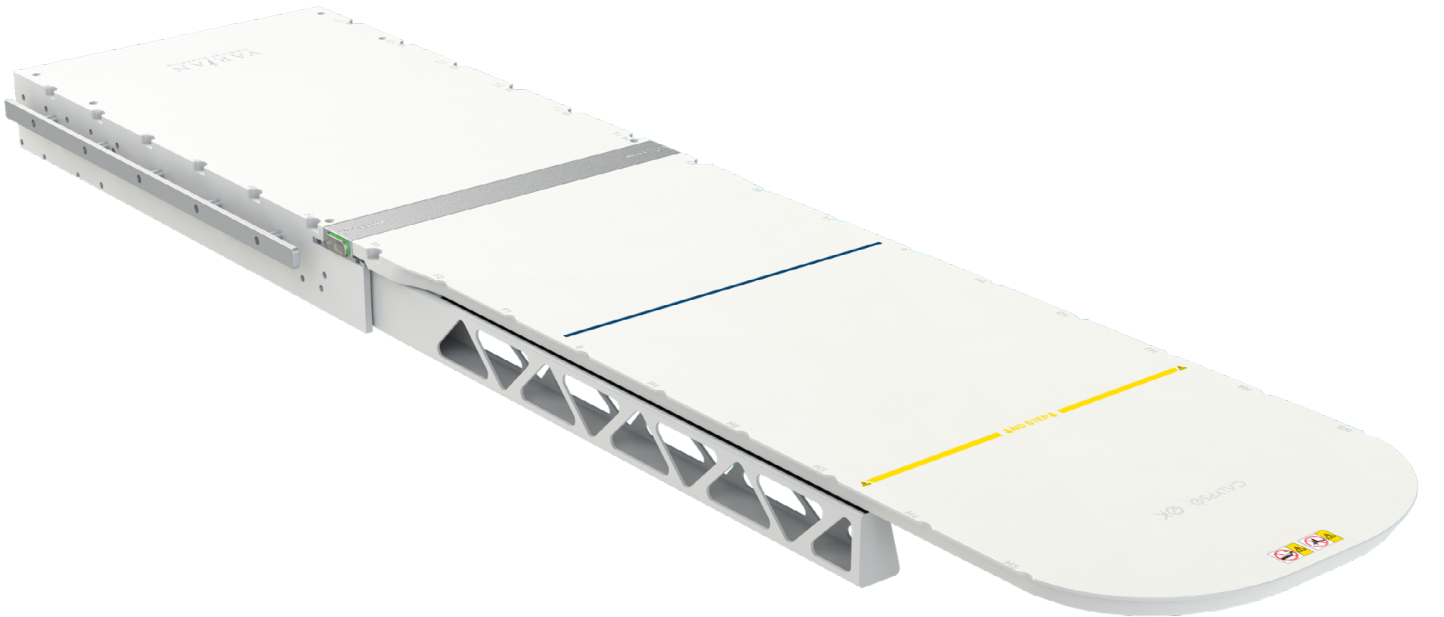



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 A.B.D.'de üreten Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

kVue ve OneTouch, Qfix şirketinin ticari markalarıdır.

Exact®, ETR®, Calypso® ve Beacon®, Varian Medical Systems şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

TrueBeam ve EDGE, Varian Medical Systems şirketinin ticari markalarıdır.

Precise®, Elekta AB şirketinin tescilli ticari markasıdır.

ZXT ve TXT, Siemens AG şirketinin ticari markalarıdır.

Cidex®, Johnson & Johnson şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Clorox®, The Clorox Company'nin tescilli ticari markasıdır.

! NOT ! Bu kılavuz boyunca “kVue Couch Top” terimi, kVue Calypso®, kVue EDGE™, ve kVue Couch Top dahil olmak üzere tüm kVue Couch Top'lar anlamına gelir.

İÇİNDEKİLER

GENEL ÖNLEMLER	4
UYARI İFADELERİ	4
CİDDİ OLAYLAR.....	4
ÇARPIŞMA TEHLİKELERİ	4
UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI	5
KULLANIM AMACI.....	7
ÖZELLİKLER.....	8
TANIM.....	8
CALYPSO® İLE UYUMLU SİSTEM	8
GEREKLİ AKSESUARLAR	8
BİLEŞENLER	9
ÇALIŞTIRMA TALİMATI	12
MONTAJ	12
KURULUM	13
ÇIKARMA.....	14
BAKIM.....	15
SİSTEMİN TEMİZLENMESİ	15
ONETOUCH LATCH İÇİN TEMİZLEME VE YAĞLAMA PROSEDÜRÜ.....	16
SPESİFİKASYONLAR	17
STANDARD INSERT İLE KVUE EDGE™, CALYPSO® COUCH TOP	17
PERFORMANS	18
PARÇA LİSTESİ.....	19
KVUE CALYPSO® COUCH TOP	19
KVUE EDGE™ COUCH TOP	19

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKIPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

! UYARI ! ONETOUCH HASSAS BİR MEKANİZMA OLUP, SADECE ONAYLANMIŞ QFIX KVUE CİHAZLARIYLA BERABER KULLANILMAK İÇİNDİR. QFIX TARAFINDAN DOĞRULANMAMIŞ OLAN QFIX DIŞI ONAYLANMAMIŞ CİHAZLARIN KULLANIMI GÜVENLİ OLMAYABİLİR VE KULLANILDIKLARI TAKDİRDE GARANTİYİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

CİDDİ OLAYLAR

Ciddi olayları lütfen (ör. ölüm ya da ciddi yaralanmaya yol açan veya yol açma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix firmasına hem de ülkenizde yetkili makama bildirin.


ÇARPIŞMA TEHLİKELERİ

kVue Couch Top'u veya sehpayı taşıırken hastanın zarar görmesini veya ekipmanın hasara uğramasını önlemek için dikkatli olun. Yatak tabanlarıyla ve tedavi başlarıyla elde edilebilecek çeşitli hareket kapasitesinin mevcut olması, kVue Insert'in diğer nesnelerle çarpışma olasılığını sunabilir. Ekipman hasarı oluşabilir.

GENEL ÖNLEMLER

UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.

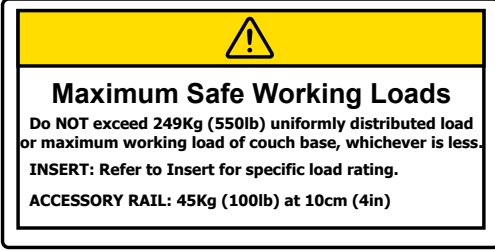


YÜK ANMA DEĞERİ

249 kg'lık eşit dağılımlı yükü ya da yatak tabanının azami güvenli çalışma yükünü (bunlardan hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

Her kVue Insert'in yük anma değeri kVue Insert kullanım talimatında belirtilmiştir.


Aksesuar rayının yük anma değeri 10 cm'de 45 kg'dır.

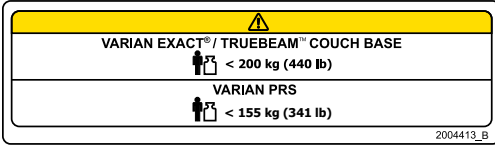

YÜK ANMA DEĞERİ

Varian Exact® veya TrueBeam™ Yatak Tabanı ile birlikte kullanırken 200 kg'lık eşit dağılımlı yükü ya da yatak tabanının azami güvenli çalışma yükünü (bunlardan hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

Varian PRS ile birlikte kullanırken 155 kg'lık eşit dağılımlı yükü ya da yatak tabanının azami güvenli çalışma yükünü (bunlardan hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

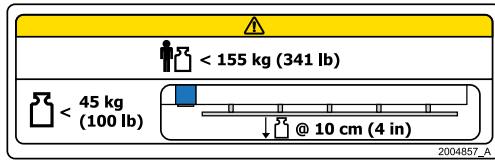

YÜK ANMA DEĞERİ (SADECE RT-4551KVE İÇİN)

155 kg'lık eşit dağılımlı yükü ya da yatak tabanının azami güvenli çalışma yükünü (bunlardan hangisi daha düşükse) AŞMAYIN.

Her kVue Insert'in yük anma değeri kVue Insert kullanım talimatında belirtilmiştir.

Aksesuar rayının yük anma değeri 10 cm'de 45 kg'dır.



CALYPSO® SİSTEMİYLE UYUMLU

kVue Calypso® veya kVue EDGE™ ile kullanıldığında Calypso® ile uyumlu olduğunu belirtir.

GENEL ÖNLEMLER


UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI




SIKIŞMA NOKTALARI

kVue Couch Top'u taşıırken hastanın zarar görmesini önlemek için dikkatli olun. kVue Couch Top ile ilgili sıkışma noktalarını ve diğer tehlikeleri asgariye indirmek için son derece özen gösterilmiştir. Olağan sıkışma noktaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

- kVue Insert ile One-Touch Latch arasında
- kVue Insert ile destek kirişlerinin arasında
- kVue Couch Top ile, tedavi odasındaki diğer ekipmanların arasında (Linac tedavi başı dahil)

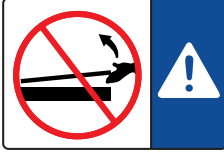

VEYA

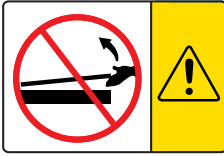

KVUE INSERT'İN MONTAJI VE SÖKÜLMESİ

! UYARI ! ASLA KVUE INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN.

Birleştirme pimleri eğilerek veya kırılarak kVue Couch Top cihazını kullanılmaz hale getirebilir.

Montaj ve sökme talimatı için kVue Couch Top Montaj El Kitabına başvurun.

↓ NO STEP ↓


VEYA



“NO STEP (SINIR)” ÇİZGİSİ

kVue Insert üzerindeki sarı çizgi, destek kirişlerinin sonunu temsil eder. Çizginin ötesindeki alan, hasta gövdesinin üst kısmını veya vücudunun alt kısmını destekleyecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir (yük anma değerini aşmıyorsa).

kVue Insert üzerinde “No Step (Sınır)” çizgisinden daha ileride ayakta durmak veya oturmak kVue Insert'e hasar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir.

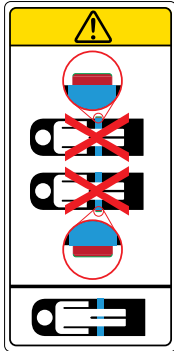

ONETOUCH™ LATCH

Hastayı kVue Couch Top üstüne SADECE mandal düğmesinin kırmızı bileziği görülmediği zaman yerleştirin. OneTouch Latch, doğru bağlantıyı teyit eden yerleşik bir gösterge içerir. Mandal düğmesinin kırmızı bileziği görülüyorsa, kilitleme mekanizması uygulanmamış demektir.

KULLANIM AMACI

Bu cihazın kullanım amacı, radyasyon tedavisi olan hastaları hareketsizleştirmek, konumlandırmak ve yeniden konumlandırmaktır.

! NOT ! Bu cihazın satışı, ABD federal yasalarına göre sadece hekimler tarafından veya onların siparişi üzerine yapılabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI

Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik görüntüleme prosedürleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR

Ürünlerin hedef kullanıcısı, düzenleyici bölgedeki gerekliliklere uygun şekilde vasıflı kişidir.

ÖZELLİKLER

TANIM

kVue Couch Top, teknolojidaki en yeni gelişmeler için optimize edilmiş modern bir radyoterapi yatak üstü olup Calypso® Sistemi ile uyumlu olmak üzere tasarlanmıştır. Milimetrenin altında hassasiyet temin eden kesin ve tekrarlanabilir hasta konumlandırması sağlamak üzere üretilmiştir. kVue Calypso® ve kVue EDGE™, kVue ürün dizisinin versiyonlarıdır. Hiç metal içermeyen yüksek mukavemetli ve gelişmiş lif kompozitlerinden yapılmış olan bu cihazlar iletken olmadığından Calypso® Sistemiyle birlikte kullanılabilir. Bu cihazlar, standart indeksli konumlandırma cihazlarının çoğunun kullanılmasına olanak tanıyarak tedavi odanızın kullanılabilirliğini önemli derecede artırır.

Konik ışınli BT gibi kilovoltajlı görüntüleme ile kullanıldığında üstün performans sağlamak için tasarlanmış olan kVue Couch Top, aynı zamanda yatağın içinden geçen tedavilerde cilt dozunu da azaltır. Bu özelliğine, Calypso® ile uyumlu Insert'leri çeşitli kVue Insert'ler ile değiştirme olanağı katıldığında, kVue Couch Top cihazı IMRT ve IGRT hasta konumlandırması için en gelişmiş çözümlerden birini sunmaktadır.

CALYPSO® İLE UYUMLU SİSTEM

Calypso® sistemi radyoterapi sırasında, implante edilmiş Beacon® elektromanyetik alıcı-vericilerin konumunu saptamak ve tedavinin hedef pozisyonunu lokalize etmek için elektromanyetik sinyaller kullanır. Lokalizasyon sırasında Beacon alıcı-vericilerinin yakınında bulunan iletken malzemeler sistemin doğruluğunu etkileyebilir.


kVue Calypso®, kVue EDGE™ ve Calypso® ile uyumlu etiket taşıyan tüm aksesuarların kVue Couch Top ile uyumluluğunu sağlamak amacıyla geniş kapsamlı testler yapılmıştır. Calypso® sistemi kullanılırken sadece Calypso® sistemiyle uyumlu aksesuarlar kullanılmalıdır. Uyumlu aksesuarların listesi için Varian ile temas kurun.

GEREKLİ AKSESUARLAR

kVue Insert (Calypso® sistemiyle beraber kullanmak için Calypso® ile uyumlu Insert gereklidir).

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

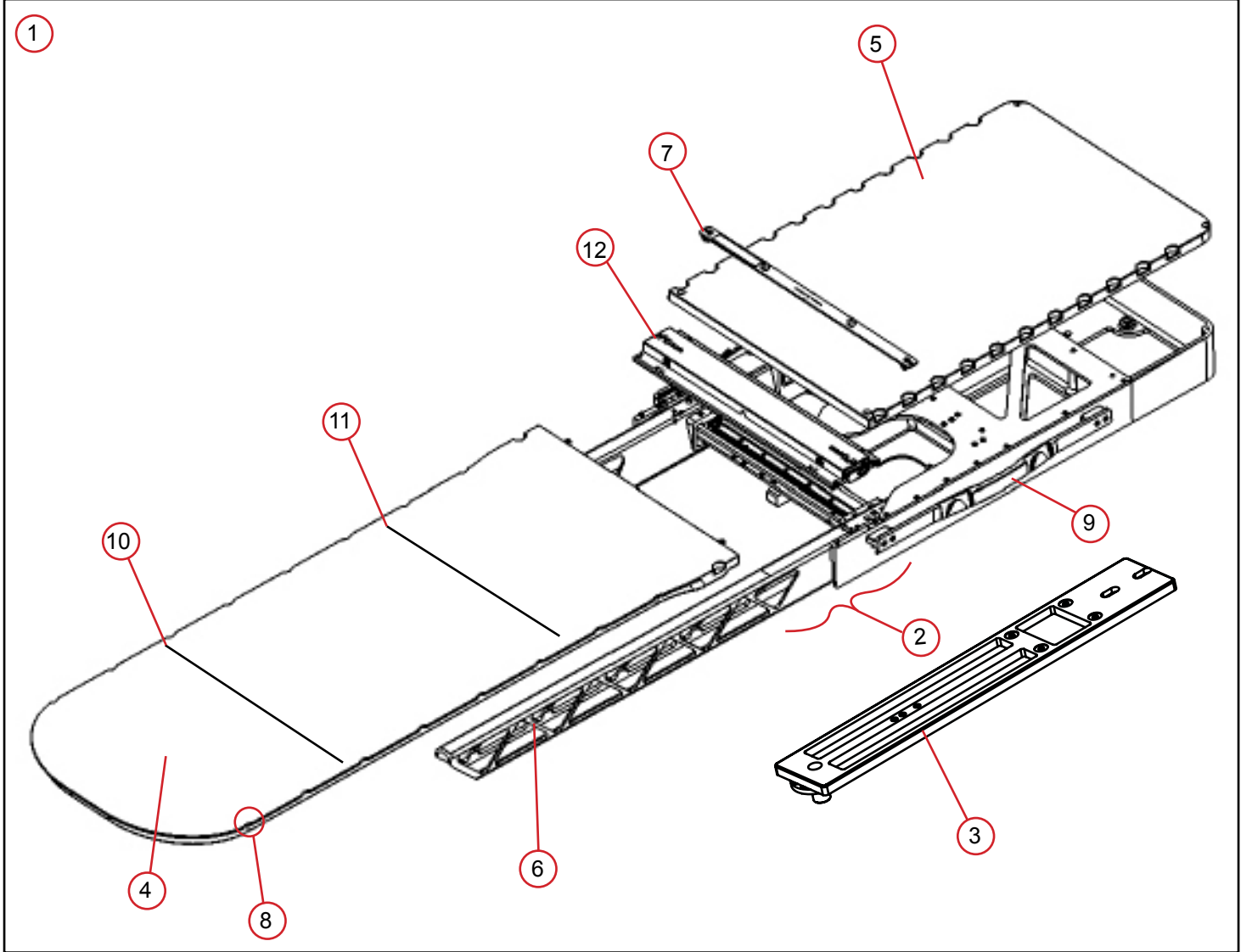

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

(1) kVUE™ COUCH TOP

kVue Couch Top, yatak tabanını oluşturan orijinal ekipman dışında komple bir hasta destek sistemidir. Bu sistem; Taban Çerçevesinden (destek kirişleri dahil), Arayüz Plakasından (gerekirse) ve uygun kVue Insert'ten oluşur.

(2) TABAN ÇERÇEVESİ

Taban Çerçevesi, kVue Couch Top cihazının Hareketli Ray destek kirişlerini ve Arka Panelini içeren kısımdır. Taban Çerçevesi ayrıca, OneTouch Latch giriş deliklerini ve aksesuar rayını içerir.

(3) ARAYÜZ PLAKASI

Arayüz Plakası, doğrusal hızlandırıcı üreticisinin yatak tabanı ile kVue Couch Top arasındaki arayüzdür. kVue cihazını Varian EDGE™, TrueBeam™ veya Exact® yatak tabanına monte ederken Arayüz Plakası gerekmez.

(4) kVUE INSERT

kVue Insert, hasta destek yüzeyinin tedavi alanını oluşturan kısımdır. Düşük yoğunluklu kompozit malzemelerden yapılmış olan kVue Insert, 6 MV değerinde bir foton ışınına AP/PA tedavilerde yaklaşık %1 oranında zayıflatacaktır. Herhangi bir cihaz içinden yapılacak tedavi daha yüksek bir cilt dozuna yol açacak olup, bu durum tedavi planlaması sırasında hesaba alınmalıdır. Calypso® sistemiyle beraber kullanmak için Calypso® ile uyumlu Insert gereklidir.


(5) ARKA PANEL

Arka Panel, yatak tabanı üstüne yerleştirilen hasta destek yüzeyidir.

(6) HAREKETLİ RAY DESTEK KİRİŞLERİ

Hareketli Ray destek kirişleri, kVue Insert üzerindeki tam hasta yükünü asgari miktarda bel verme ile destekleyen son derece rijit kompozit yapılardır. Destek kirişlerinin açık makaslı tasarımı, malzeme mukavemetini azamiye çıkarırken ışın zayıflamasını da asgariye indirir. Destek kirişleri, hasta kVue Couch Top üstünde olduğu veya olmadığı zaman lateral yönde hareket ettirilebilir.

Destek kirişleri içinden yapılacak tedavi daha yüksek bir cilt dozuna yol açacak olup, bu durum tedavi planlaması sırasında hesaba alınmalıdır. Mümkün olduğu zaman, destek kirişleri tedavi ışını yolunda olmayacak bir şekilde konumlandırılmalıdır.

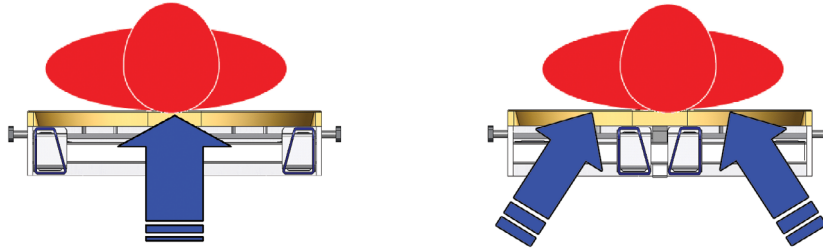

ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

(7) YERLEŞTİRME ÇUBUĞU

Aralarında 23 cm mesafe bulunan 13 mm çapında iki adet yerleştirme pimi içeren Yerleştirme Çubuğu, sektör standartlarına uyan standart konumlandırma cihazlarının doğru ve tekrarlanabilir bir şekilde kVue Couch Top üzerine yerleştirilmesini sağlayan aksesuarlara uymak üzere tasarlanmıştır. Calypso® Sistemi kullanılırken sadece Calypso ile uyumlu aksesuarlar kullanılmalıdır.

(8) EXACT® İNDEKS DİŞLERİ

Varian Exact® ile uyumlu indeks dişleri, kVue Couch Top cihazının uzunluğu boyunca 14 cm aralıklarla yerleştirilmiştir; bu dişler Yerleştirme Çubuğunu ve diğer aksesuarları doğru şekilde konumlandırmak için kullanılabilir. Simülasyon konumlandırma verilerinin doğrudan kVue Couch Top sistemine aktarılmasına olanak sağlamak için dişlerin numaralama sistemi Varian Exact® indeksleme sisteminin aynısıdır. (0, koordinat ekseninin sıfır noktasını belirtir. H1, H2 vb. kVue Couch Top cihazının baş tarafına doğru ilerlemeyi, F1, F2 vb. ise ayak tarafına doğru ilerlemeyi gösterir.)

(9) AKSESUAR RAYI

Aksesuar rayı; üzengileri, IV sehpalarını ve diğer standart cihazları piyasada mevcut klempler vasıtasıyla bağlamak için kullanılabilir.

(10) “NO STEP (SINIR)” ÇİZGİSİ

Çoğu kVue Insert’ler, destek kirişlerinin sonunu temsil eden bir sarı çizgiyle işaretlenmiştir. Standard Insert “No Step” sınır çizgisinin ötesinde, yük anma değerini aşmamak koşuluyla sadece hasta gövdesinin üst kısmını veya vücudunun alt kısmını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. kVue Insert üzerinde “No Step (Sınır)” çizgisinden daha ileride ayakta durmak veya oturmak kVue Insert’e hasar verebilir veya yaralanmaya neden olabilir.


(11) INFERİOR İZOMERKEZ ÇİZGİSİ (sadece kVue EDGE ve kVue Calypso Couch Top için)

kVue Calypso® Insert, Calypso® Sistemi kullanılırken izomerkez için en uzaktaki proksimal yeri temsil eden mavi bir çizgiyle işaretlenmiştir. Bu çizginin önemi hakkında daha özel bilgi için Varian Medical Systems Temsilcinizle temas kurun veya Calypso® Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.


(12) ONETOUCH LATCH

OneTouch Latch, kVue Insert’lerin alet kullanılmadan anında takılmasına ve çıkartılmasına olanak sağlayan mandaldır. Mandal, kVue Insert’in milimetre altında hassasiyet ile yeniden konumlandırılmasını temin ederken, aynı zamanda kilidin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığına ilişkin görsel bir işaret sağlar. Kilitlenmemiş durumda, yeşil mandal düğmesinin etrafında kırmızı bir bilezik görülür.

Kilitlenmiş Konum

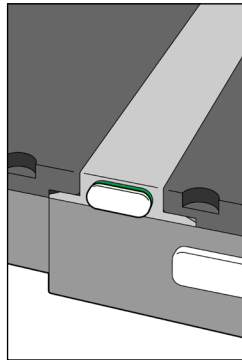

Kilitlenmemiş Konum

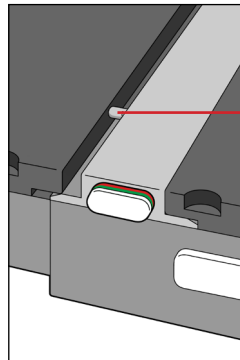

Birleştirme Pimi

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

MONTAJ

KVUE COUCH TOP MONTAJI


kVue Couch Top, bütün belli başlı radyoterapi tedavi sistemlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemin hızlı montajı, doğrusal hızlandırıcının çalışmama süresini asgariye indirir. Özel montaj bilgileri için kVue Couch Top Montaj El Kitabına başvurun.

! NOT ! kVue Couch Top Montaj El Kitabında detaylı olarak belirtildiği gibi, kVue yüzeyinin son yüksekliği orijinal sistemden farklı olabilir. İlk kullanımdan önce sistemin sıfır noktasını yeniden kurmak için orijinal sistem talimatına başvurun.

KVUE INSERT MONTAJI

1. kVue Insert'i destek kirişlerinin üstüne yerleştirin ve iki birleştirme pimini OneTouch Latch içinde bunlara karşılık gelen deliklerle hizalayın.
2. kVue'nün baş tarafından, kVue Insert'i karşılık gelen delikler içine doğrudan kaydırın.

kVue Insert yerine kilitlendiğinde bir tık sesi duyacaksınız. Doğru montaj yapıldığında SADECE yeşil düğme yüzeyi görünür olacaktır.

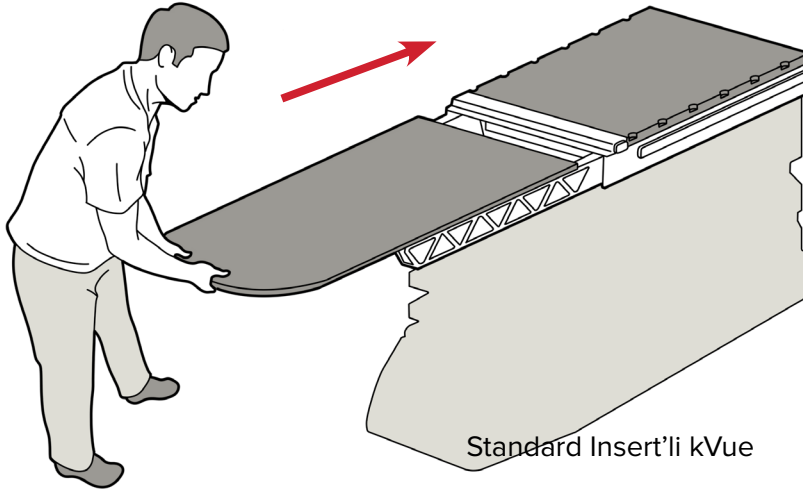


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

YERLEŞTİRME ÇUBUĞUNUN MONTAJI

Yerleştirme Çubuğu, çoğu standart konumlandırma aksesuarlarına uyan iki yerleştirme pimi içerir. Takmak için, Yerleştirme Çubuğunun uçlarından birini Varian Exact® ile uyumlu uygun indeks dişlerine yerleştirip yerine oturtun. Calypso® Sistemi kullanılırken sadece Calypso ile uyumlu aksesuarlar kullanılmalıdır.

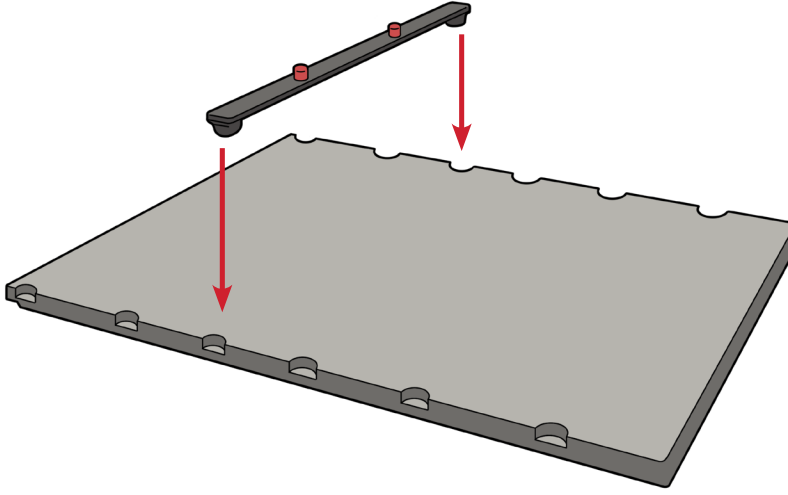

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA

YERLEŞTİRME ÇUBUĞUNUN ÇIKARILMASI





Yerleştirme Çubuğunun herhangi bir ucundan yukarı kaldırın.

KVUE INSERT'İN ÇIKARILMASI

! UYARI ! ASLA KVUE INSERT'İ UCUNDAN KALDIRMAYIN ! MEKANIZMA SAĞLAM OLMASINA RAĞMEN BİRLEŞTİRME PİMLERİ EĞİLEREK VEYA KIRILARAK KVUE CİHAZINI KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR.

1. Kolu saatin ters yönünde döndürün.
2. kVue Insert serbest kalana kadar, döndürülmüş Kolu kVue'nün bir tarafından çekin.
3. kVue Insert'i kVue'dan öteye doğru kaydırın.

! NOT ! Aşağıda gösterilen resimler standart kVue Couch Top içindir. kVue Insert'in çıkarılması, kVue'nün bütün versiyonları için aynıdır.

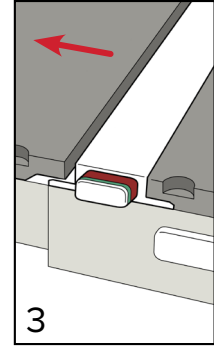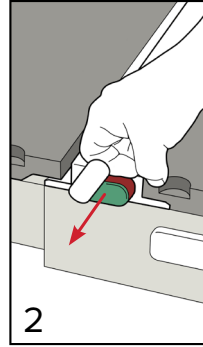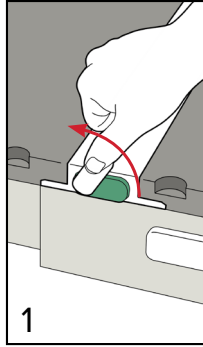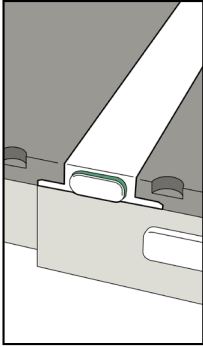

BAKIM

SİSTEMİN TEMİZLENMESİ

Cihaz yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici veya dezenfektan solüsyonla temizlenebilir. kVue Couch Top yüzeyine sıvı spreylemeyin veya dökmeyin; aksi takdirde sıvı OneTouch Latch veya yatak tabanı dahilindeki mekanizmaların içine akabilir. Temizlemek için solüsyonu temiz bir beze uygulayın ve yüzeyi bezle silin.

Aşağıdaki temizlik materyalleri test edilmiş ve kVue Couch Top yüzeyini temizlemek için uygun oldukları tespit edilmiştir. kVue Couch Top yüzeyini dezenfekte etmek için temizlik ajanı üreticisinin özel talimatına başvurun.

- Su
- %10 Clorox® marka çamaşır suyu solüsyonu
- İzopropil Alkol
- Cidex® marka %2.4 Aktive Dialdehid Solüsyonu
- Sabunlu su

Doğrudan kVue Couch Top üzerine SPREYLEMEYİN veya Taban Çerçevesi içine akmasına izin VERMEYİN.

kVue Couch Top üstüne keskin nesneler KOYMAYIN.

Taban Çerçevesine vücut sıvıları girerse, Arka Paneli bağlayan vidaları sökün ve uygun şekilde temizleyin. Doğrusal rulman rayı üzerinde su bazlı temizleyiciler kullanmayın. Temizledikten sonra, doğrusal rulman rayını floropolimer (PTFE) kuru film yağlama maddesiyle yağlayın.

OneTouch Latch'ın düzenli aralıklarla yağlanması gerekir; OneTouch Latch'ın doğru şekilde yağlanması ve temizlenmesi hakkındaki özel talimata başvurun.

OneTouch Latch'ın sökülmesi kVue Couch Top garantisini geçersiz kılacaktır.

Tüm tutturucuları sıklıkla bakım açısından düzenli olarak kontrol edin.

BAKIM


ONETOUCH LATCH İÇİN TEMİZLEME VE YAĞLAMA PROSEDÜRÜ

Bu prosedürün ayda bir yapılması önerilir.


Malzeme Listesi: Floropolimer (PTFE) kuru film yağlama maddesi, pamuklu çubuklar ve kuru bezler veya kağıt havlular

! NOT ! Aşağıda gösterilen resimler standart kVue Couch Top içindir. Bakım işlemleri her kVue Couch Top için aynıdır.


1. kVue Insert'i çıkarın. (Şekil 1)
2. Mandalın dışında tiftik veya diğer yabancı madde varsa silin. (Şekil 2)
3. Kuru pamuklu çubuklar kullanarak giriş deliklerinin içini temizleyin. (Şekil 3)
4. Giriş deliklerine yağlama maddesi spreyleyin. (Şekil 4)
5. Tiftik veya yabancı madde varsa kuru pamuklu çubukla temizleyin. (Şekil 3)
6. Giriş deliklerine tekrar yağlama maddesi spreyleyin. (Şekil 4)
7. İç parçaları yağlamak için düğmenin üst kısmı ile mandal mahfazası arasındaki boşluğa yağlama maddesi spreyleyin. (Şekil 5)
8. kVue Insert'i tekrar yerleştirin ve mandalı karşı taraftan çekerek dışarı çıkmasını sağlayın. Yağlama prosedürünün 7. adımını tekrarlayın.
9. kVue Insert montaj ve çıkarma işlemlerini 3-4 kere yapın ve eğer Insert serbestçe çıkmazsa yağlama işlemlerini tekrarlayın.
10. OneTouch Latch'ın dışında fazladan yağlama maddesi varsa silin.

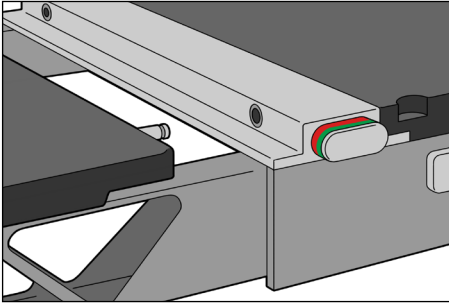


Şekil 1

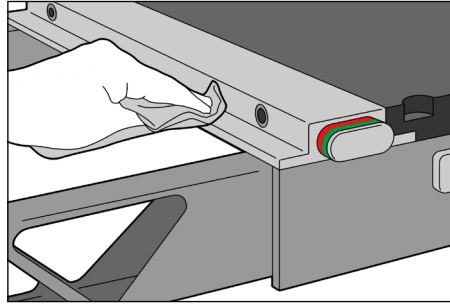


Şekil 2

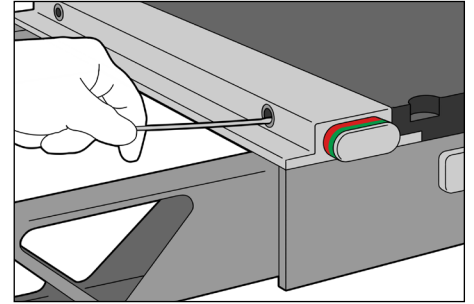

Şekil 3

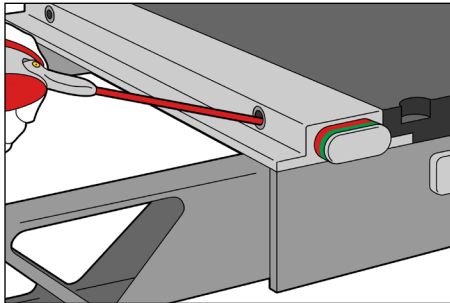


Şekil 4

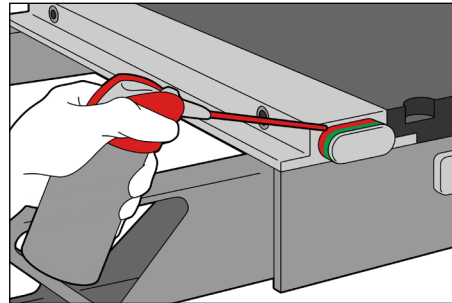

Şekil 5

SPESİFİKASYONLAR

STANDARD INSERT İLE KVUE EDGE™, CALYPSO® COUCH TOP

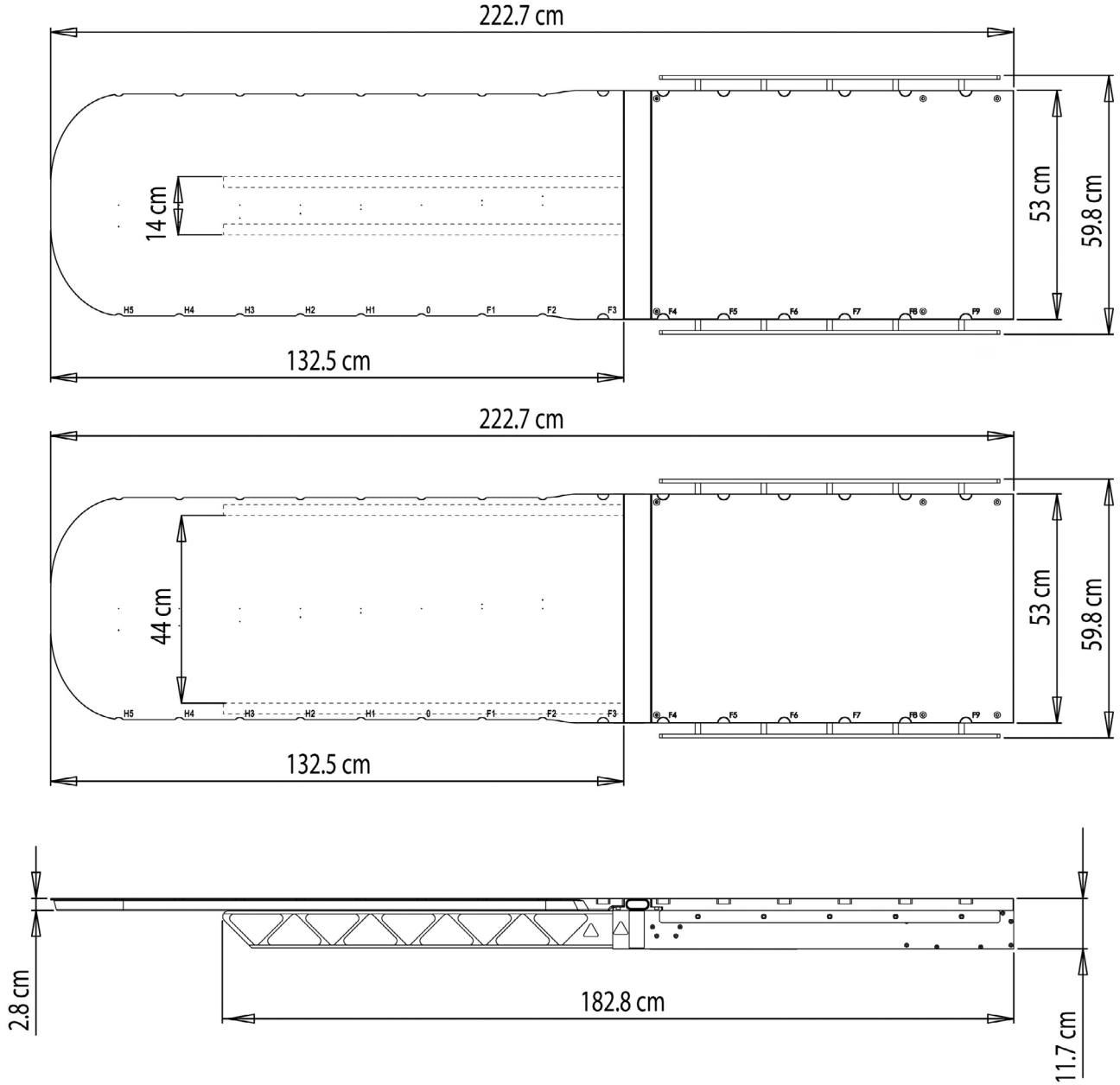

! NOT ! Farklı kVue Insert'lerin spesifikasyonları için ilgili kVue Insert Kullanım Talimatına başvurun.

SPESİFİKASYONLAR

PERFORMANS

BEL VERME

kVue Couch Top, IEC 60976 [2007] Kısım 16.5.2.2 bel verme spesifikasyonunu karşılar. kVue Couch Top'un geri çekilmiş olarak 1 m'si üzerinde dağıtılmış 30 kg'lık bir yük ile olan yüksekliği ile kVue Couch Top'un uzatılmış olarak uzunluğunun 2 m'si üzerinde dağıtılmış 135 kg'lık bir yük ile olan yüksekliği arasındaki fark 5 mm dahilindedir.

YÜK ANMA DEĞERİ VE KAPASİTESİ


kVue Couch Top, IEC 60601-2-8 Madde 28'in yük anma değeri şartlarını, ayrı kVue Insert talimatında belirtilen güvenli çalışma yükü ile karşılar.

kVue Couch Top'un kapasitesi, orijinal yatak tabanı üreticisinin spesifikasyonlarını hiçbir surette aşmamalıdır.

Bazı kVue Insert'lerin yük anma değeri 249 kg'dan düşüktür. Ürüne özgü yük anma değerleri için kVue Insert Kullanım Talimatına veya kVue Insert ürün etiketine başvurun.


PARÇA LİSTESİ

KVUE CALYPSO® COUCH TOP

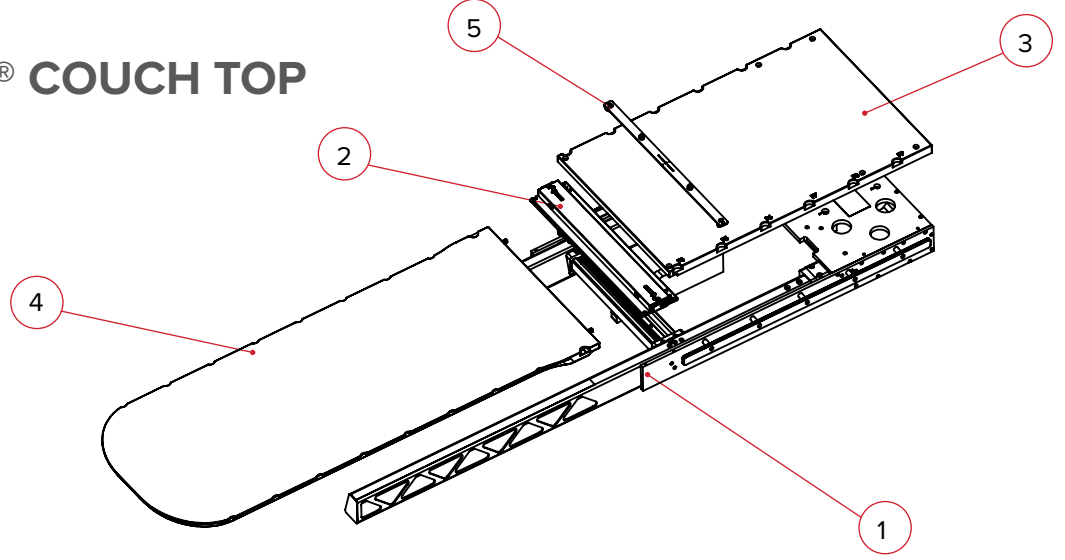

1. RT-4551KVCL-V – kVue Calypso® Taban Çerçevesi ile Varian Exact® İndeksleme
2. RT-4551KV-OTM – kVue OneTouch™ Latch Tertibatı
3. RT-4551KV0CL-V – kVue Calypso® Arka Panel ile Varian Exact® İndeksleme
4. RT-4551KV11 – kVue Calypso® Insert, Varian Uyumlu
5. RT-4551BAR-02 – Calypso® Uyumlu Yerleştirme Çubuğu, Varian Exact® İndeksleme
6. RT-4551BAR-02 -01 – Varian Bağlantı Donanım Kiti (şekilde gösterilmemiştir)
7. RT-4551KVPP – kVue Sıkışma Noktası Kapak Kiti (şekilde gösterilmemiştir)
8. 8002064 – kVue Calypso® Yedek Kiriş Seti

KVUE EDGE™ COUCH TOP

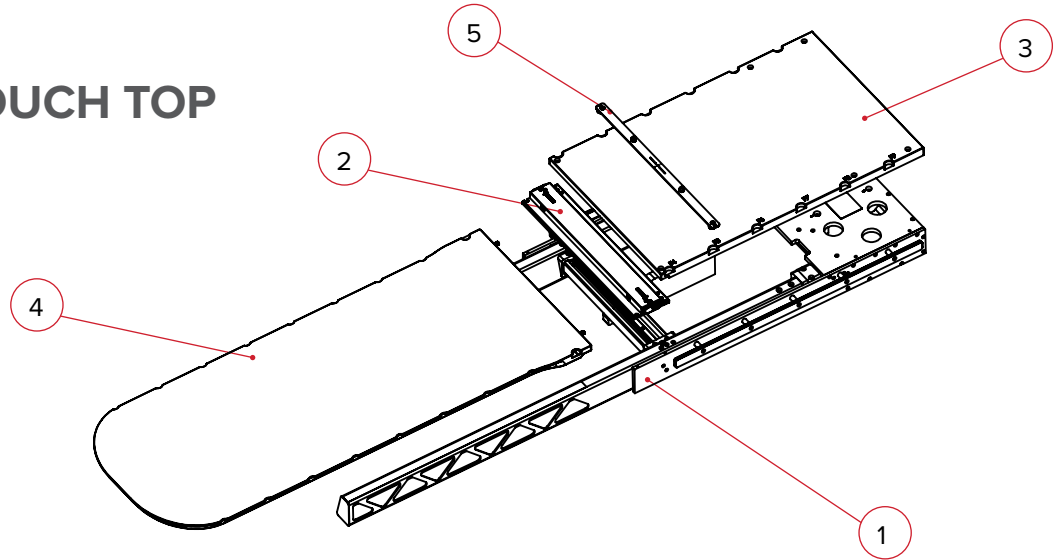

1. RT-4551KVE – kVue EDGE™ Taban Çerçevesi
2. RT-4551KV-OTM – kVue OneTouch™ Latch Tertibatı
3. RT-4551KV0-E – kVue EDGE™ Arka Panel
4. RT-4551KV12 – kVue EDGE™ Insert
5. RT-4551BAR-02 – Calypso® Uyumlu Yerleştirme Çubuğu, Varian Exact® İndeksleme
6. RT-4551BAR-02-01 – Varian Bağlantı Donanım Kiti (şekilde gösterilmemiştir)
7. RT-4551KVPP – kVue Sıkışma Noktası Kapak Kiti (şekilde gösterilmemiştir)
8. RT-4551KV-PRS01 – kVue Hizalama Cihazı, Varian PRS
9. 8002110 – kVue EDGE Yedek Kiriş Seti



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004858_TR_C
2020-06