

指导指南

Access™ Supine 开孔

目标

该视频演示如何使用提供的套件在 Access™ Supine 上开两个孔。



包括的物件

- 开孔导引器
- 丝锥
- 螺丝刀
- 丝锥手柄




组装丝锥手柄

要组装丝锥手柄，松开丝锥手柄的套环，将丝锥的底端插入手柄套环并拧紧手柄。

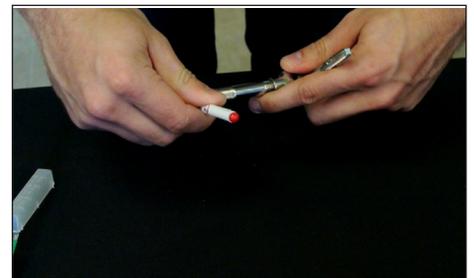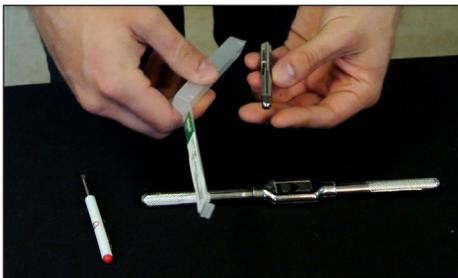


安装开孔导引器

通过将两个底座纹钉插入位于待开的孔上部和下部的两个臂架孔中，安装开孔导引器。确保开孔导引器与装置平齐。

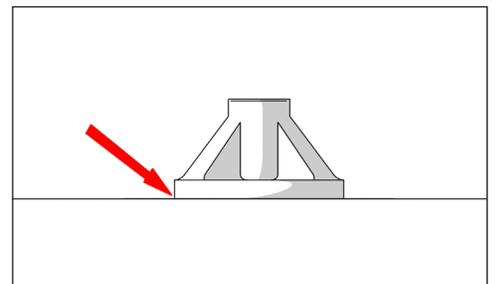


对装置进行开孔

要开始开孔, 将 M8 x 1.25 丝锥插入导引器中, 然后缓慢开始逆时针旋转以找到螺纹。接合后, 顺时针转动丝锥两整圈, 然后回转半圈。重复此过程, 直至丝锥受阻于开孔导引器。在丝锥抵至导引器后请务必停止转动丝锥, 继续转动手柄会损坏螺纹。

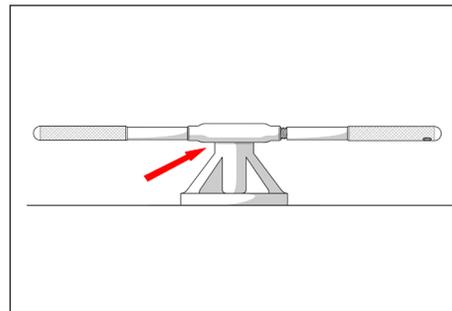

退出丝锥

对部件完成开孔后, 将丝锥退出部件并取下开孔导引器。开孔后, 确保将任何余留的碎屑从孔中清除。

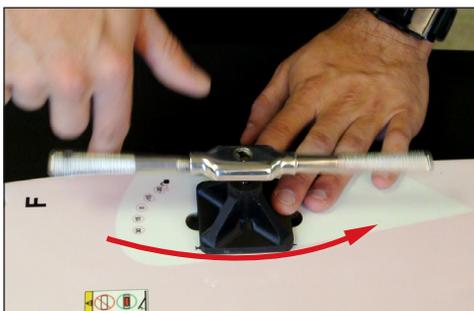

重复操作

装置一侧开孔后, 对 Access™ Supine 胸部装置的另一侧重复此过程。

检测拟合度

使用提供的翼形螺钉, 检测新开的孔。如果螺钉难以转动, 则重复此过程以重新开孔。



产品名称: 人体定位袋

医疗器械备案号: 20150038

2005097_ZH_A

指导指南 – 2005097_Access Supine Tapping_ZH

科辅适 Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 美国 | ☎ +1 610-268-0585 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com