



positioning
patients for life.®

追加事項

RT-4600-02

Encompass™独立型デバイス

HexaPOD™ evo RTシステムに対応




取扱説明

取り付け



1. ダイレクトインデックスアダプターの設置および取扱説明書 (M034) を参照して、Encompassデバイスにダイレクトインデックスアダプターを取り付けます。
2. Elekta iBEAM® evoカウチトップにEncompassデバイスを取り付け、デバイスの両側のカットアウトを通してインデックス位置Bにアクセスできることを確認します。

！ 注記！ Encompassデバイスは、位置BのElekta HexaPOD™リファレンスフレームにのみ対応しています。

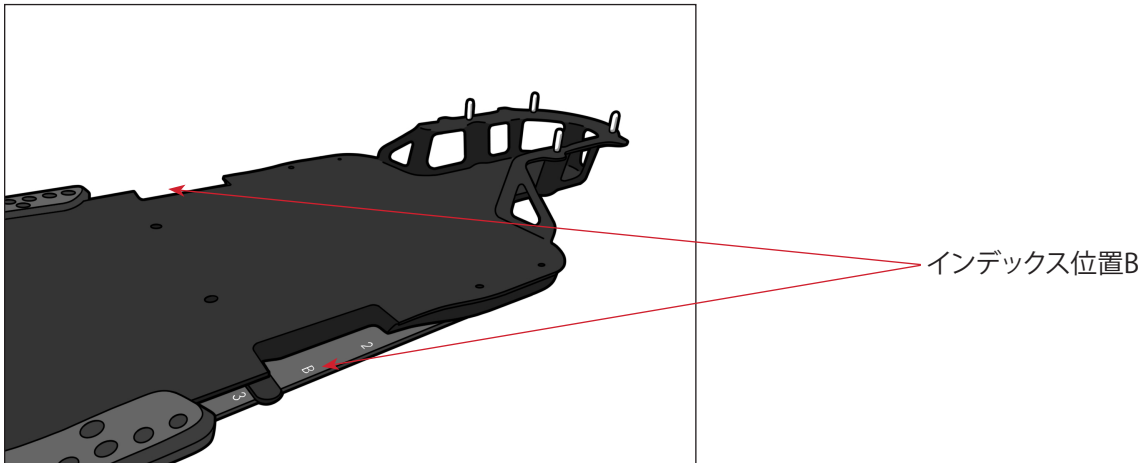

3. Elekta iBEAM® evoカウチトップのインデックス位置Bに、Elekta HexaPODリファレンスフレームを、メーカーの指示に従って取り付けます。

！ 注記！ リファレンスフレームとEncompassデバイスの間に障害物がないことを確認してください。

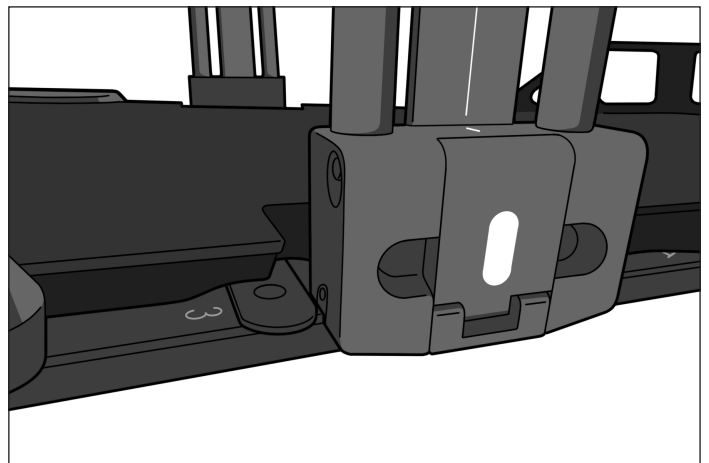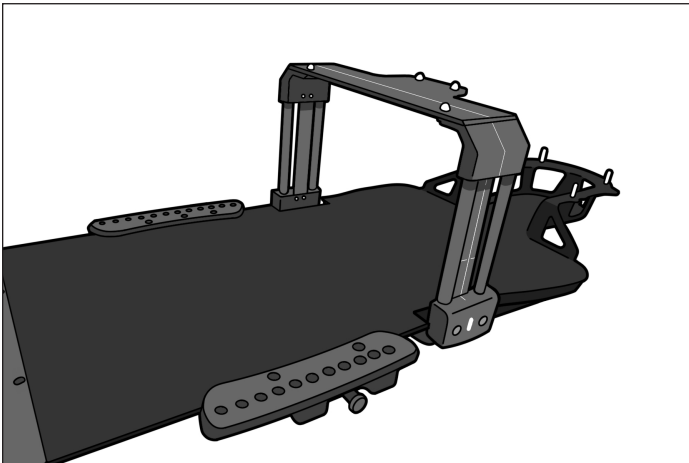

4. Encompass™ SRSイモビライゼーションシステムの操作方法、製品機能、仕様、警告、注意、その他使用に関する一般的な注意事項については、Encompassデバイスの製品ガイドおよび取扱説明書 (M158) を参照してください。


仕様

ENCOMPASS™独立型デバイス RT-4600-02

長さ: 1358 mm

重量制限: 249 kg (550ポンド) (デバイスに表示されている最大延長位置での等分布荷重)。

対応重量: 5 kg (11ポンド)

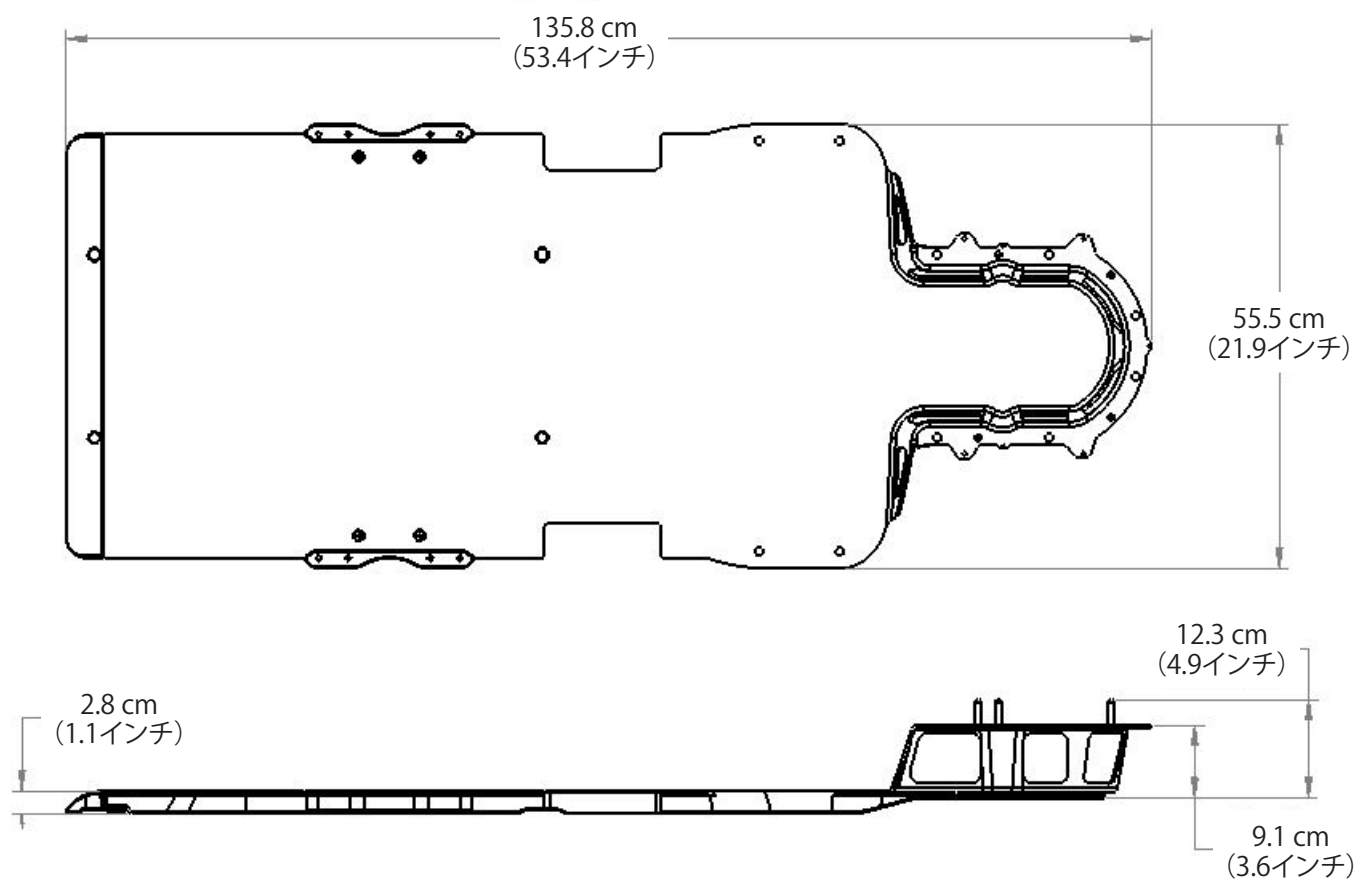

EncompassはQfixの商標です。
HexaPODはElektaの商標です。
iBEAM®はElektaの登録商標です。



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007719_JA_A
2023-04