

ANEXĂ

RT-4600-02

Dispozitiv autonom Encompass[™]

Compatibil cu sistemul HexaPOD[™] evo RT




INSTRUCȚIUNI

MONTARE

1. Instalați adaptoarele de indexare directă pe dispozitivul Encompass, consultând Manualul de instalare și utilizare pentru adaptoarele de indexare directă (M034).
2. Instalați dispozitivul Encompass pe blatul mesei Elekta iBEAM® evo asigurându-vă că poziția de indexare B este accesibilă prin decupajele de pe fiecare parte a dispozitivului.



! NOTĂ ! Dispozitivul Encompass este compatibil numai cu cadrul de referință Elekta HexaPOD™ în poziția B.

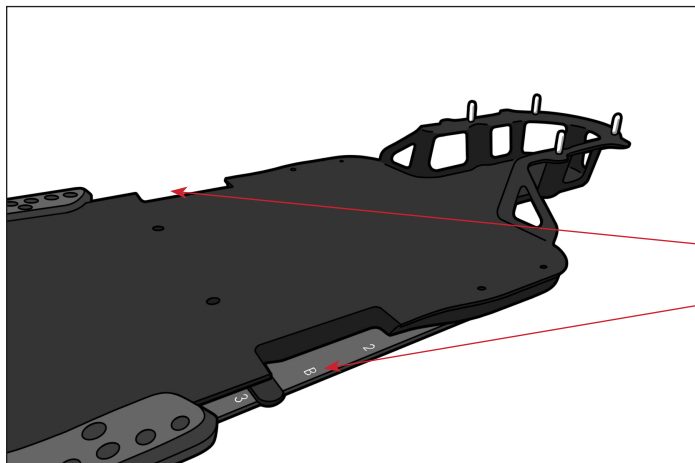

Poziția de indexare B

3. Instalați cadrul de referință Elekta HexaPOD în poziția de indexare B pe tăblia mesei Elekta iBEAM® evo consultând instrucțiunile producătorului.

! NOTĂ ! Asigurați-vă că nu există interferențe între cadrul de referință și dispozitivul Encompass.

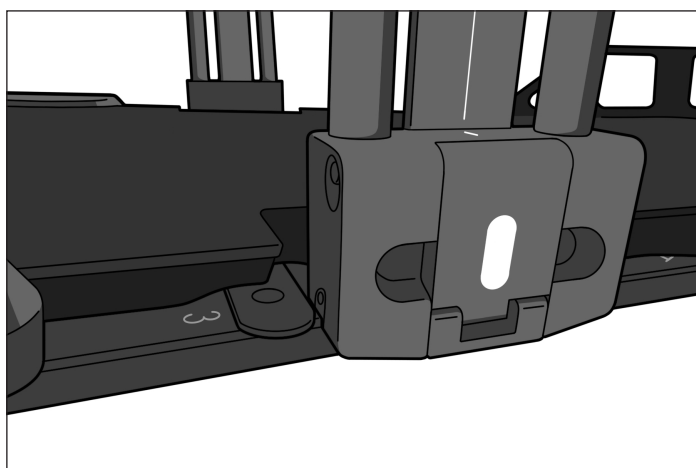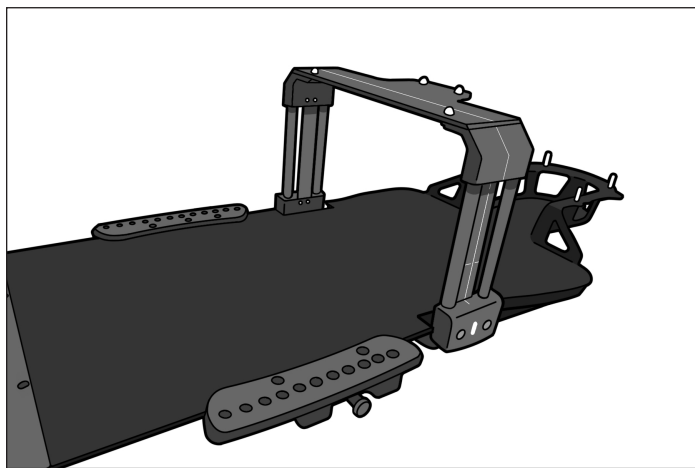

4. Consultați Ghidul produsului și manualul de utilizare pentru dispozitivele Encompass (M158) pentru instrucțiuni de utilizare, caracteristicile produsului, specificații, avertismente, atenționări și alte măsuri de precauție generale legate de utilizarea sistemului de imobilizare Encompass™ SRS.


SPECIFICAȚII

DISPOZITIV AUTONOM ENCOMPASS™ RT-4600-02

Lungime: 1358 mm

Limită de greutate: Sarcină distribuită uniform de 249 kg (550 lbs) în poziția în consolă maximă indicată pe dispozitiv.

Greutate de manipulare: 5 kg (11 lb)

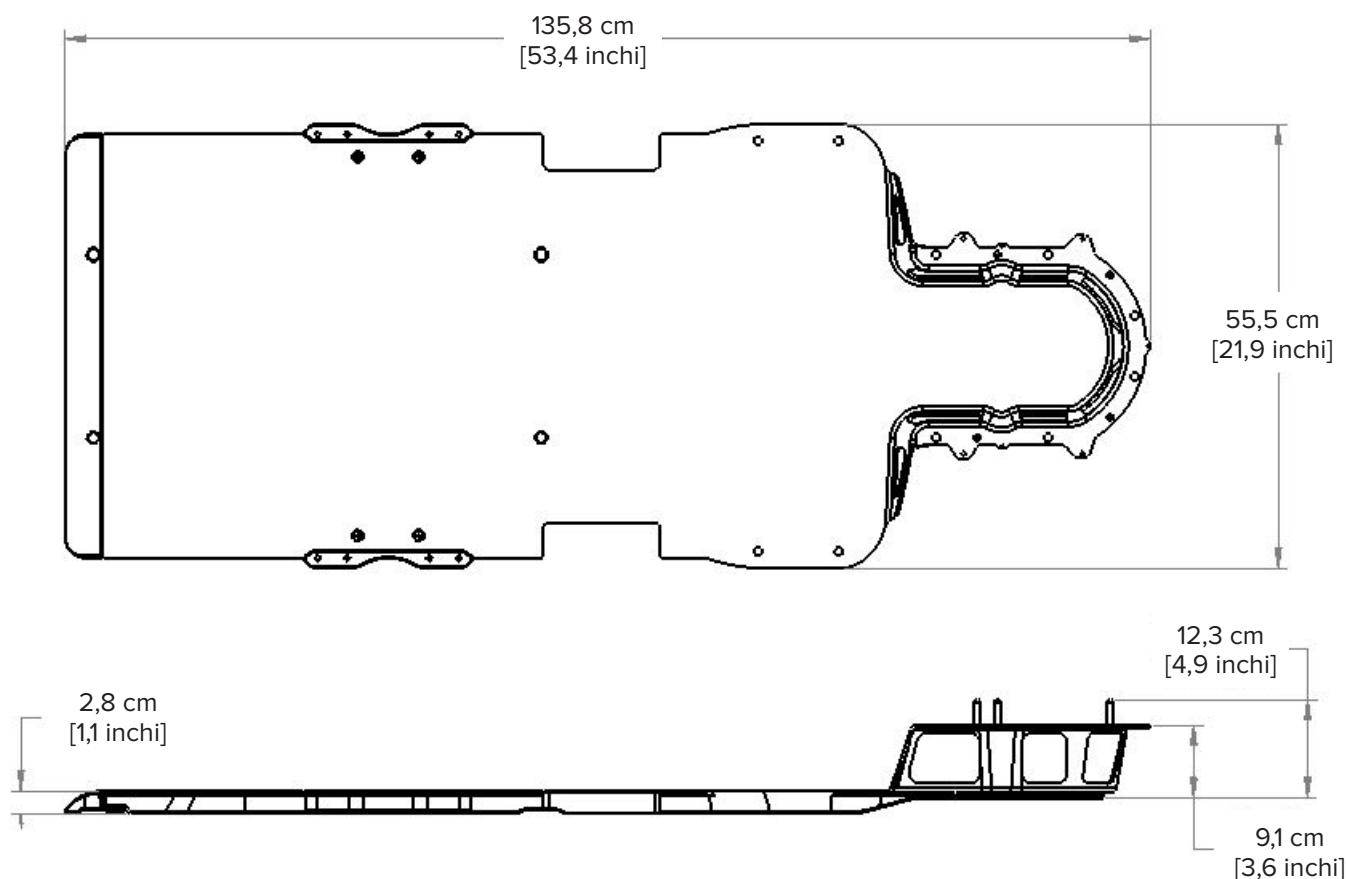

Encompass este o marcă a Qfix.

HexaPOD este o marcă a Elekta.

iBEAM® este o marcă înregistrată a Elekta.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2007719_RO_A
2023-04