



ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μονάδα προέκτασης απεικόνισης Operon®
OZ 7520175: Προέκταση 91,4 cm (36") χωρίς
ράβδο στήριξης

OZ 7521275: Προέκταση 111,8 cm (44") με ράβδο
στήριξης

Παρελκόμενο παιδιατρικού τραπεζιού Operon®
OZ 7520304 και OZ 7520375

για τραπέζια D-Series



 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">EC REP</div> Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8688 www.CQmedical.com	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">CH REP</div>	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Η επωνυμία Operon® είναι σήμα κατατεθέν της Stryker.

Η επωνυμία Cidex® είναι σήμα κατατεθέν της Johnson & Johnson.

Η επωνυμία Clorox® είναι σήμα κατατεθέν της The Clorox Company.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	4
ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.....	4
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	4
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ	5
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ	6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.....	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 111,8 CM (44") ΚΑΙ 91,4 CM (36")	7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ.....	11
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Ή ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ CQMEDICAL ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ +1 712-737-8688 Ή ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ή ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΑΤΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ΜΗ χρησιμοποιείτε προέκταση 111,8 cm (44") χωρίς ράβδο στήριξης.
- Για να αποτρέψετε τυχόν πτώση του παρελκομένου και τραυματισμό του ασθενούς, βεβαιωθείτε ότι οι πράσινες κουκκίδες είναι ορατές στο πλάι μετά την εγκατάσταση, υποδεικνύοντας ότι το παρελκόμενο έχει εγκατασταθεί και εμπλακεί σταθερά.

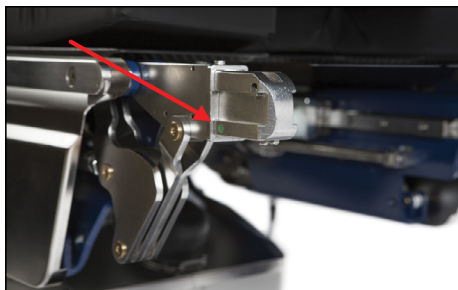

- Η σωστή εγκατάσταση της προέκτασης απεικόνισης Operon® απαιτεί τη χρήση του τροχήλατου παρελκομένου από δύο άτομα.
- Η σωστή εγκατάσταση του παιδιατρικού τραπέζιου Operon απαιτεί δύο άτομα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη μονάδα προέκτασης απεικόνισης Operon ή το παιδιατρικό τραπέζι Operon με οποιοδήποτε άλλο τραπέζι εκτός από το χειρουργικό τραπέζι Operon D-Series.

ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Αναφέρετε τυχόν σοβαρά συμβάντα (π.χ. συμβάντα που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή οβαρό τραυματισμό) τόσο στην CQ Medical όσο και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

- ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 181 kg (400 lb) με επέκταση 36" σε κανονικό ή ανάστροφο προσανατολισμό.
- ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 340 kg (750 lb) με την προέκταση των 111,8 cm (44") με ράβδο στήριξης σε κανονικό ή ανάστροφο προσανατολισμό.
- ΜΗΝ υπερβαίνετε τα 34 kg (75 lb) με το παρελκόμενο παιδιατρικού τραπέζιου σε κανονικό ή ανάστροφο προσανατολισμό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ


Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα CQmedical.com για μια παράθεση των συμβόλων και των ορισμών τους.

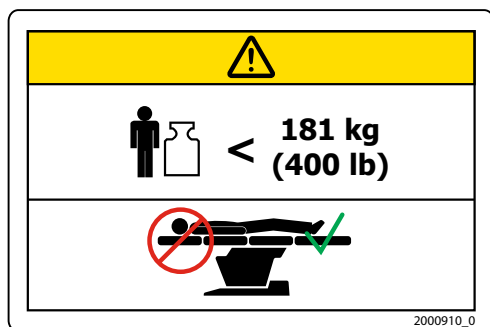

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ—ΟΖ 7520175 [ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 91,4 CM (36")]

Προσαρτήστε ΜΟΝΟ στο κεντρικό τμήμα. Μην προσαρτάτε στο πίσω τμήμα της τράπεζας.


ΜΗΝ υπερβαίνετε το φορτίο των 181 kg (400 lb), ομοιόμορφα κατανομημένο.

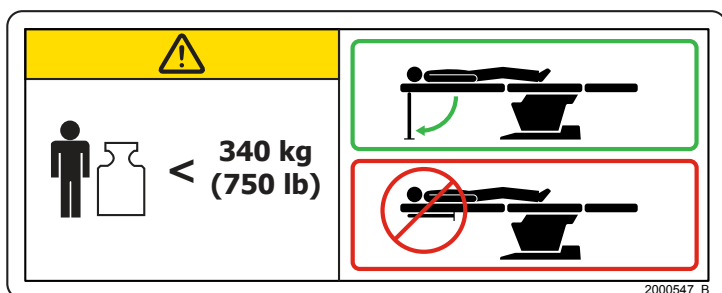

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ—ΟΖ 7521275 [ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 111,8 CM (44")]

ΜΗΝ υπερβαίνετε το φορτίο των 340 kg (750 lb), ομοιόμορφα κατανομημένο.

Εφαρμόστε τη ράβδο στήριξης πριν από τη χρήση.

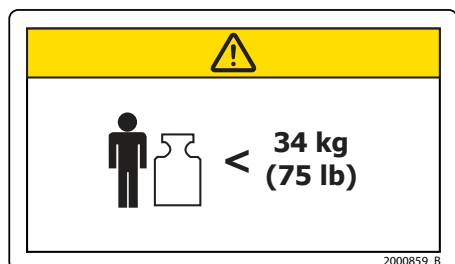

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ— ΟΖ 7520304 ΚΑΙ ΟΖ 7520375 (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ)

ΜΗΝ υπερβαίνετε το φορτίο των 34 kg (75 lb), ομοιόμορφα κατανομημένο.

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Οι προεκτάσεις απεικόνισης 91,4 cm (36") και 111.8 cm (44») προορίζονται για την υποστήριξη ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια ακτινολογικών διαδικασιών και χειρουργικών επεμβάσεων, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα χειρουργικά τραπέζια Operon® D-Series (Μοντέλα D 750, D 752, D 760, D 770, D 820, D 830, D 850 και D 860).

Οι παιδιατρικές προεκτάσεις προορίζονται για την υποστήριξη και την τοποθέτηση ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα χειρουργικά τραπέζια Operon D-Series (Μοντέλα D 750, D 752, D 760, D 770, D 820, D 830, D 850 και D 860).

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Στοχευόμενες ομάδες ασθενών

Ασθενείς που υποβάλλονται σε γενικές ιατρικές ή χειρουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν διαγνωστική απεικόνιση.

Προβλεπόμενοι χρήστες

Ο προβλεπόμενος χρήστης των προϊόντων είναι το καταρτισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κανονιστικής περιοχής άτομο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ 111,8 CM (44") ΚΑΙ 91,4 CM (36")

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρμοστεί οι ασφάλειες δαπέδου του τραπέζιού. (Βλ. εικ. 1)
- Επιθεωρήστε το τραπέζι και το παρελκόμενο για τυχόν φθορά ή ζημιά πριν από την εγκατάσταση.



Εικόνα 1

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Η ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.


Εγκατάσταση του τμήματος καθίσματος (προσαρτώντας το στις ράγες των ποδιών)

1. ΣΥΡΕΤΕ το τραπέζι προς το τμήμα των ΠΟΔΙΩΝ.
2. Αφαιρέστε το τμήμα των ποδιών από το τραπέζι. (Βλ. εικ. 2)
3. Ευθυγραμμίστε τις ράγες των ποδιών, πατώντας το κουμπί ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ στο χειριστήριο του τραπέζιού.



Εικόνα 2

4. Προσαρτήστε την προέκταση απεικόνισης στις ράγες των ποδιών. Θα κουμπώσει στη θέση της. Όταν η προέκταση προσαρτηθεί στις ράγες των ποδιών, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στην προέκταση και στο τμήμα του καθίσματος του τραπέζιού. (Βλ. εικ. 3)

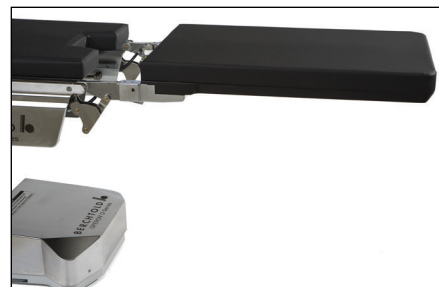

Εικόνα 3

5. Αφαιρέστε το μαξιλάρι του καθίσματος για να εγκαταστήσετε την πλάκα πλήρωσης της προέκτασης απεικόνισης (OZ 7522675). (Βλ. εικ. 4)



Εικόνα 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

6. Επαναπροσαρτήστε το μαξιλάρι του καθίσματος στο τραπέζι.
(Βλ. εικ. 5)



Εικόνα 5

7. Προσαρτήστε το μαξιλάρι πλήρωσης της προέκτασης απεικόνισης για να πληρώσετε το κενό. (Βλ. εικ. 6)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την πλάκα πλήρωσης της προέκτασης απεικόνισης με μαξιλάρι. Δεν αποτελεί μέρος της κανονικής συσκευασίας.

8. Αφαιρέστε το τμήμα κεφαλής ή πλάτης της τράπεζας, όπως χρειάζεται για την τοποθέτηση του ασθενούς.




Εικόνα 6

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Τοποθέτηση στη θέση του τμήματος κεφαλής και πλάτης για επέκταση 91,4 cm (36") και 111,8 cm (44").. (Βλ. εικ. 7)

1. ΣΥΡΕΤΕ το τραπέζι πλήρως προς την κεφαλή.
2. Ευθυγραμμίστε τις ράγες της ράχης, πατώντας το κουμπί ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ στο χειριστήριο του τραπεζιού.
3. Αποσπάστε το τμήμα της κεφαλής και της ράχης.
4. Επανατοποθετήστε το τμήμα της ράχης με την προέκταση απεικόνισης 91,4 cm (36") ή 111,8 cm (44").

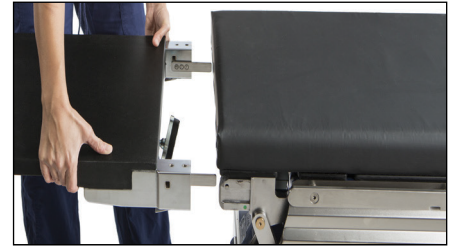


Εικόνα 7

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Όταν η προέκταση προσαρτηθεί στις ράγες των ποδιών, παραμένει ένα κενό στο τμήμα του καθίσματος. (Βλ εικ. 8)
Μια πλάκα πλήρωσης περινέου με μαξιλάρι (OZ 7519975) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του κενού.

5. Για να εγκαταστήσετε την πλάκα πλήρωσης περινέου, αφαιρέστε το τμήμα του καθίσματος και προσαρτήστε την πλάκα πλήρωσης περινέου με μαξιλάρι. (Βλ. εικ. 9)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η πλάκα πλήρωσης περινέου δεν αποτελεί μέρος της κανονικής συσκευασίας και θα πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά.

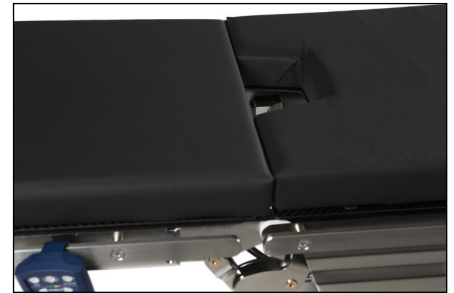


Εικόνα 8

6. Επαναπροσαρτήστε το μαξιλάρι του καθίσματος στο τραπέζι. (Βλ. εικ. 10)



Εικόνα 9

7. Αφαιρέστε το τμήμα ποδιών όπως χρειάζεται για την τοποθέτηση του ασθενούς.

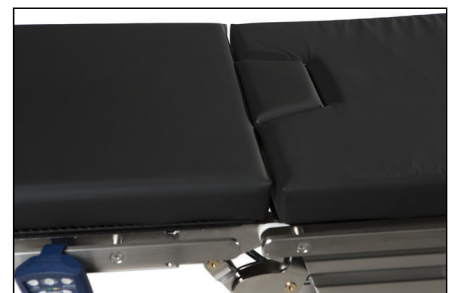


Εικόνα 10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

8. Βεβαιωθείτε ότι οι πράσινες κουκκίδες είναι ορατές για την ασφαλή προσάρτηση της προέκτασης 91,4 cm (36") ή 111,8 cm (44"). (Βλ. εικ. 11)

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.

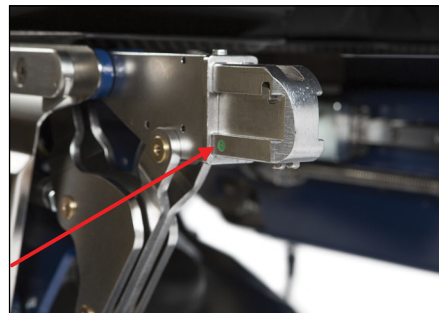

Εικόνα 11

Προσαρμογή και ρύθμιση ράβδου στήριξης της προέκτασης 111,8 cm (44")

1. Τραβήξτε το μάνταλο που φαίνεται στην εικόνα, κρατώντας ταυτόχρονα τη ράβδο για να την απελευθερώσετε. (Βλ. εικ. 12)
2. Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, κάθετα προς το δάπεδο και ακουμπώντας σε αυτό, για να υποστηρίξει το βάρος της προέκτασης και κατόπιν ασφαλίστε την περιστρεφόμενη λαβή, όπως φαίνεται στην εικόνα.



Εικόνα 12

Αφαίρεση της μονάδας προέκτασης απεικόνισης από το τραπέζι

1. Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα από τις προεκτάσεις απεικόνισης, εάν υπάρχουν.
2. Τραβήξτε το μάνταλο στη ράβδο στήριξης για να απελευθερώσετε τη ράβδο. (Βλ. εικ. 13)
3. Φέρτε τη ράβδο τελείως κάτω από την προέκταση και ξεσφίξτε την περιστρεφόμενη λαβή. Προεκτείνετε πλήρως τη ράβδο έως το άκρο της προέκτασης και ασφαλίστε την περιστρεφόμενη λαβή. (Βλ. εικ. 13)
4. Με τη βοήθεια δεύτερου μέλους του προσωπικού, απελευθερώστε τα μάνταλα κάτω από την προέκταση και αφαιρέστε προσεκτικά το παρελκόμενο. (Βλ. εικ. 14)



Εικόνα 13

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ.



Εικόνα 14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρμοστεί οι ασφάλειες δαπέδου του τραπέζιού. (Βλ. εικ. 15)
- Επιθεωρήστε το τραπέζι και το παρελκόμενο για τυχόν φθορά ή ζημιά πριν από την εγκατάσταση.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Η ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΟΡΕΡΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ.



Εικόνα 15

Εγκατάσταση του τμήματος καθίσματος (προσαρτώντας το στις ράγες των ποδιών), κανονικός προσανατολισμός

1. ΣΥΡΕΤΕ το τραπέζι προς το τμήμα των ΠΟΔΙΩΝ.
2. Αφαιρέστε το τμήμα των ποδιών από το τραπέζι. (Βλ. εικ. 16)
3. Ευθυγραμμίστε τις ράγες των ποδιών, πατώντας το κουμπί ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ στο χειριστήριο του τραπέζιού.
4. Προσαρτήστε το παιδιατρικό τραπέζι στις ράγες των ποδιών. Θα κουμπώσει στη θέση του. Όταν η προέκταση προσαρτηθεί στις ράγες των ποδιών, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στην προέκταση και στο τμήμα του καθίσματος του τραπέζιού. (Βλ. εικ. 17)
5. Αφαιρέστε το μαξιλάρι του καθίσματος για να εγκαταστήσετε την πλάκα πλήρωσης της προέκτασης απεικόνισης (OZ 7522675). (Βλ. εικ. 18)



Εικόνα 16



Εικόνα 17



Εικόνα 18

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

6. Επαναπροσαρτήστε το μαξιλάρι του καθίσματος στο τραπέζι.
(Βλ. εικ. 19)



Εικόνα 19

7. Προσαρτήστε το μαξιλάρι πλήρωσης της προέκτασης για να πληρώσετε το κενό. (Βλ. εικ. 20)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά την πλάκα πλήρωσης της προέκτασης με μαξιλάρι. Δεν αποτελεί μέρος της κανονικής συσκευασίας.



Εικόνα 20

8. Αφαιρέστε το τμήμα της κεφαλής από το τραπέζι.

Εγκατάσταση σε αναστροφο προσανατολισμό (Βλ. εικόνα 21)

1. ΣΥΡΕΤΕ το τραπέζι πλήρως προς την κεφαλή.
2. Αποσπάστε το τμήμα της κεφαλής και της ράχης.
3. Ευθυγραμμίστε το τραπέζι, πατώντας το κουμπί ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ στο χειριστήριο.
4. Επανατοποθετήστε το τμήμα της ράχης με το παιδιατρικό τραπέζι.



Εικόνα 21

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Όταν το παιδιατρικό τραπέζι προσαρτηθεί στις ράγες των ποδιών, παραμένει ένα κενό στο τμήμα του καθίσματος. (Βλ εικόνα 22) Μια πλάκα πλήρωσης περινέου με μαξιλάρι (OZ 7519975) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση του κενού.

5. Προσανατολίστε ΑΝΑΣΤΡΟΦΑ το τραπέζι, στρέφοντας τη μεγάλη βάση του προφίλ του τραπέζιού προς την αναισθησία.
6. Πατήστε το κουμπί προσανατολισμού ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ του χειριστηρίου.



Εικόνα 22

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

7. Αφαιρέστε το μαξιλάρι του τμήματος του καθίσματος και προσαρτήστε την πλάκα πλήρωσης περινέου με μαξιλάρι. (Βλ. εικ. 23)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η πλάκα πλήρωσης περινέου δεν αποτελεί μέρος της κανονικής συσκευασίας και θα πρέπει να την παραγγείλετε ξεχωριστά.




Εικόνα 23

8. Επαναπροσαρτήστε το μαξιλάρι του καθίσματος στο τραπέζι. (Βλ. εικ. 24)



Εικόνα 24

9. Βεβαιωθείτε ότι οι πράσινες κουκκίδες είναι ορατές για την ασφαλή προσάρτηση του παρελκομένου παιδιατρικού τραπεζιού. (Βλ. εικ. 25)

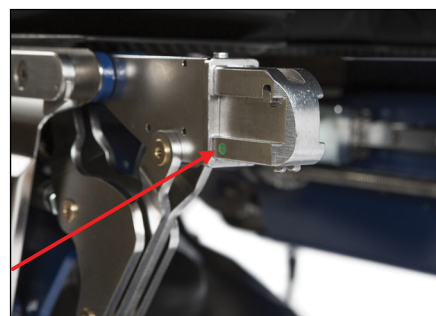

Εικόνα 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Αφαίρεση του παρελκομένου παιδιατρικού τραπεζιού από το χειρουργικό τραπέζι

1. Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα από το παιδιατρικό τραπέζι, εάν υπάρχουν.
2. Με τη βοήθεια δεύτερου μέλους του προσωπικού, απελευθερώστε τα μάνταλα (βλ. εικόνα 26) κάτω από το παιδιατρικό τραπέζι και αφαιρέστε προσεκτικά το παρελκόμενο.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΑΤΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.



Εικόνα 26

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η μονάδα προέκτασης απεικόνισης και το παρελκόμενο παιδιατρικού τραπεζιού μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο, μη αποξεστικό διάλυμα καθαρισμού ή απολύμανσης. Για τον καθαρισμό, εφαρμόστε διάλυμα σε καθαρό πανί και σκουπίστε την επιφάνεια.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα παρακάτω υλικά καθαρισμού έχουν δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των επιφανειών της μονάδας προέκτασης απεικόνισης και του παρελκόμενου παιδιατρικού τραπεζιού. Για την απολύμανση της επιφάνειας, ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες από τον παρασκευαστή του παράγοντα καθαρισμού.

- Νερό
- Διάλυμα λευκαντικού 10% Clorox®
- Ισοπροπυλική αλκοόλη
- Διάλυμα ενεργοποιημένης διαλδεΐδης Cidex® 2,4%
- Σαπούνι και νερό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε σχολαστικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση με διάλυμα απολύμανσης/καθαρισμού με τεταρτοταγές αμμώνιο, ακολουθώντας τη σύσταση του παρασκευαστή για την επίτευξη απολύμανσης χαμηλού επιπέδου.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ελέγχετε για βαθουλώματα ή ζημιές στις συνδέσεις της προέκτασης απεικόνισης.

Ελέγχετε για βαθουλώματα ή ζημιές στις συνδέσεις του παιδιατρικού τραπεζιού.

Ελέγχετε για βαθουλώματα ή ζημιές στη ράβδο στήριξης της προέκτασης απεικόνισης (εάν έχει εγκατασταθεί) και βεβαιωθείτε ότι τα μάνταλα και η τηλεσκοπική κίνηση της ράβδου λειτουργούν ομαλά.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο σύνδεσης του χειρουργικού τραπεζιού στην προέκταση απεικόνισης δεν έχει υποστεί ζημιά ή κάμψη, πριν από την εγκατάσταση οποιωνδήποτε παρελκομένων.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο σύνδεσης του χειρουργικού τραπεζιού στο παιδιατρικό τραπέζι δεν έχει υποστεί ζημιά/κάμψη, πριν από την εγκατάσταση οποιωνδήποτε παρελκομένων.

Ελέγχετε τα μαξιλάρια για τυχόν ακαθαρσίες, αποχρωματισμό ή σκίσιμο. Επανεπεξεργαστείτε το μαξιλάρι για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες (βιολογικό υλικό) και αντικαταστήστε το μαξιλάρι εάν έχει αποχρωματιστεί ή φθαρεί.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQMedical.com

☎ +1 712.737.8688 / 800.842.8688

✉ info@CQMedical.com

2007720_EL_1
2025-04