


ANEXĂ

RT-4546AA-01 și RT-4546AW-01

Suporturi pentru braț și încheietura mâinii

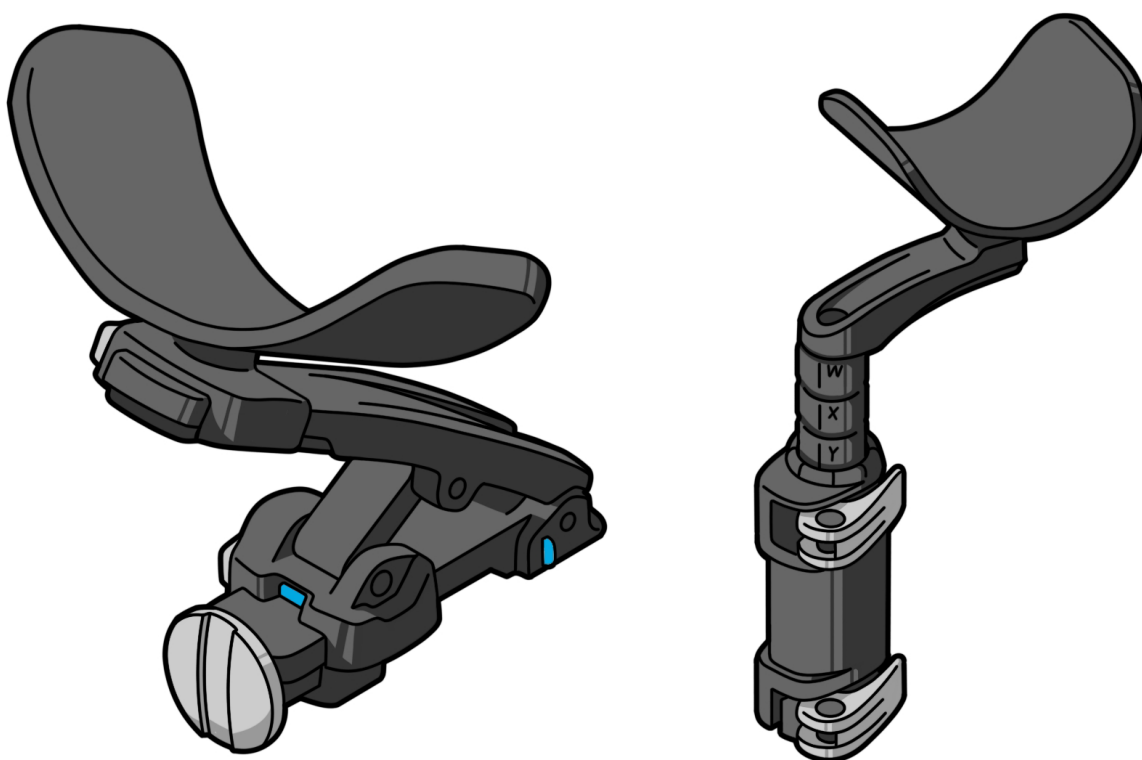


MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

! AVERTISMENT ! NU SE PERMITE NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ INADECVAT, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU LA TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! AVERTISMENT ! NU PERMITEȚI PACIENTULUI SĂ REGLEZE POZIȚIA CU AJUTORUL SUPORTURILOR PENTRU BRAȚ ȘI ÎNCHEIETURA MÂINII.

! AVERTISMENT ! NU RIDICAȚI ȘI NU TRANSPORTAȚI DISPOZITIVUL ȚINÂND DE SUPORTURILE PENTRU BRAȚ SAU ÎNCHEIETURA MÂINII.

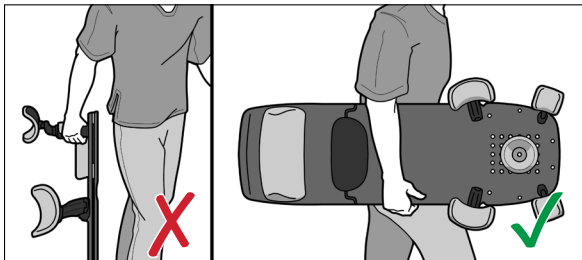

ZONE PERICULOASE

- La reglarea înălțimii suportului pentru braț sau a celui pentru încheietura mâinii pot să apară zone periculoase.
- La reglarea unghiului suportului pentru braț sau a celui pentru încheietura mâinii pot să apară zone periculoase.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL IRM



Testele non-clinice au demonstrat că suporturile pentru braț și încheietura mâinii au o compatibilitate RM condiționată. Aceste dispozitive pot să fie folosite într-un sistem RM care îndeplinește următoarele condiții:

- Suporturile pentru braț și încheietura mâinii pot să fie amplasate în deschiderea unui sistem RM cu un câmp magnetic static de cel mult 1,5 T.
- Suporturile pentru braț și încheietura mâinii trebuie să fie folosite împreună cu versiunea Access Supine (RT-4546MRI) care prezintă siguranță în mediul RM, în conformitate cu utilizarea prevăzută, înainte de scanare.
- Versiunea Access Supine (RT-4546MRI) care prezintă siguranță în mediul RM este indicată clar cu următorul simbol:



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

Access, MR Secure, kVue, VacQFix și ArmShuttle Elite sunt mărci comerciale ale Qfix.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

CONFIGURARE

SUPORT PENTRU BRAȚ

1. Pentru a atașa suportul pentru braț, slăbiți butonul și introduceți-l într-unul din cele două locuri (marcate cu „X” și „Y”). Strângeți butonul pentru a bloca suportul pentru braț pe suprafața pentru pacient. (Fig. 1)
2. Pentru a regla rotația suportului pentru braț, slăbiți butonul și rotiți suportul pentru braț în poziția dorită și strângeți butonul. (Fig. 2)

! ATENȚIE ! NU STRÂNGEȚI PREA TARE.

3. Pentru a regla înălțimea, apăsați pe butonul aflat pe glisorul de înălțime și glisați de-a lungul brațului, eliberând butonul în poziția dorită. (Fig. 3)
4. Pentru a regla lungimea brațului, apăsați pe butonul aflat pe glisorul de lungime și glisați de-a lungul brațului, eliberând butonul în poziția dorită. (Fig. 4)

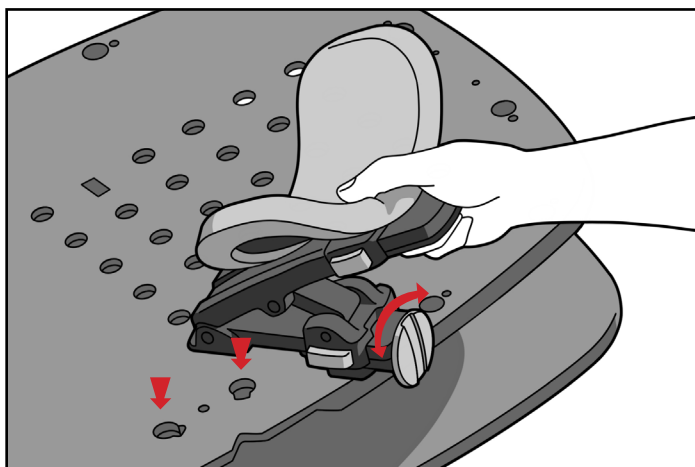


FIG. 1

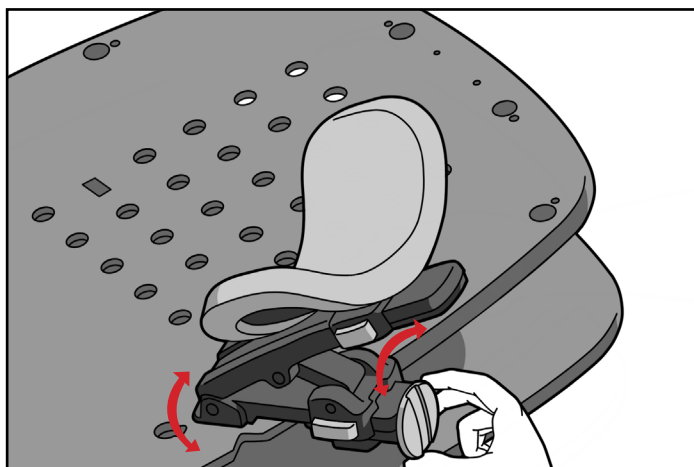


FIG. 2

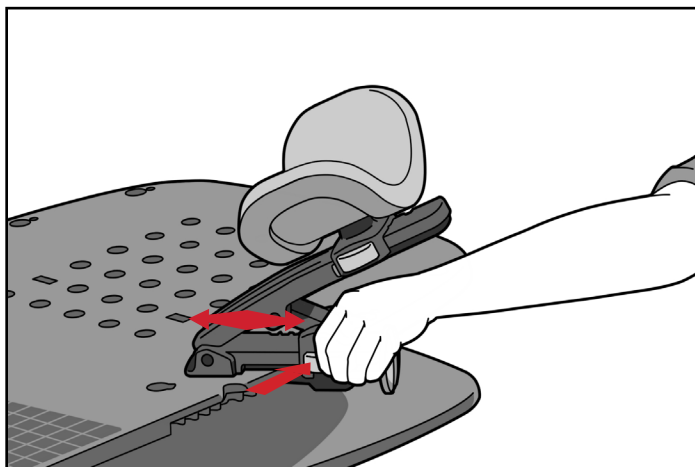


FIG. 3

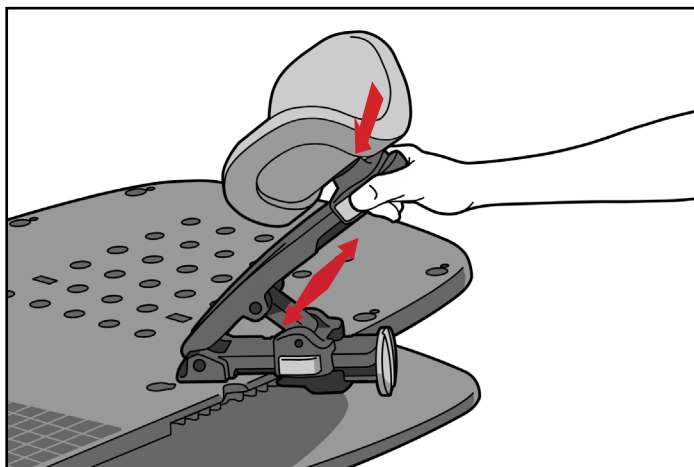


FIG. 4

DEMONTARE

Pentru a scoate suportul pentru braț, slăbiți butonul, rotiți suportul pentru braț astfel încât să se alinieze la canelura de pe laterala suprafeței pentru pacient și trageți suportul pentru braț afară din orificiile suprafeței pentru pacient.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

CONFIGURARE

SUPORT PENTRU ÎNCHEIETURA MÂINII

1. Pentru a atașa suportul pentru încheietura mâinii, aliniați ambele bolțuri din partea de jos a suportului pentru încheietura mâinii cu orificiile corespunzătoare din suprafața pentru pacient. (Fig. 5)
2. Închideți maneta inferioară pentru blocarea în poziție. (Fig. 6)
3. Pentru a ridica sau a coborî cupa suportului pentru încheietură, deschideți maneta superioară. Ridicați, coborâți sau rotiți cupa în poziția dorită și închideți maneta superioară. (Fig. 7 și fig. 8)

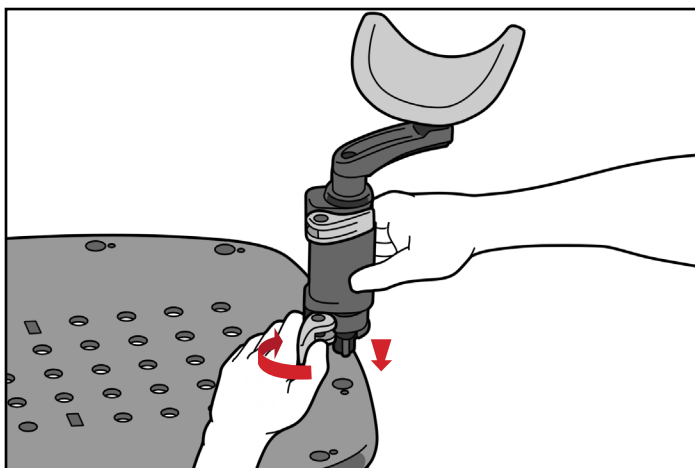


FIG. 5

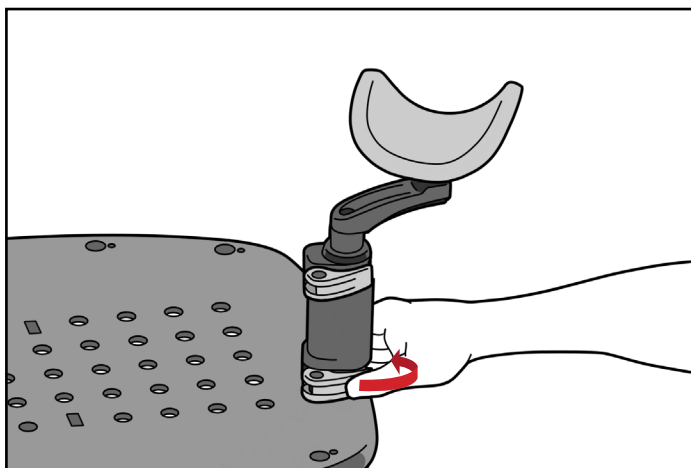


FIG. 6

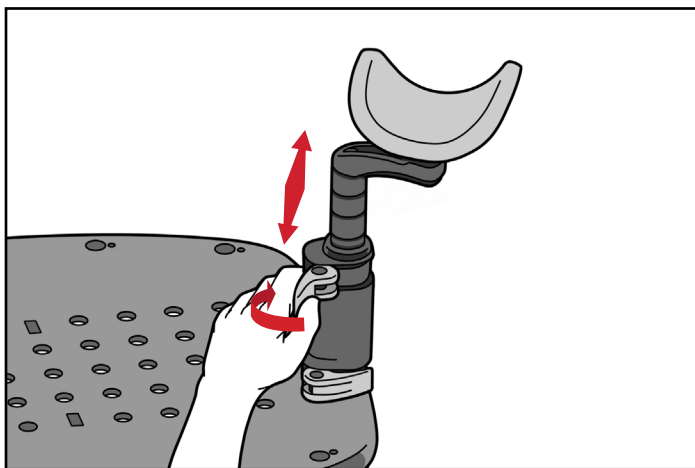


FIG. 7

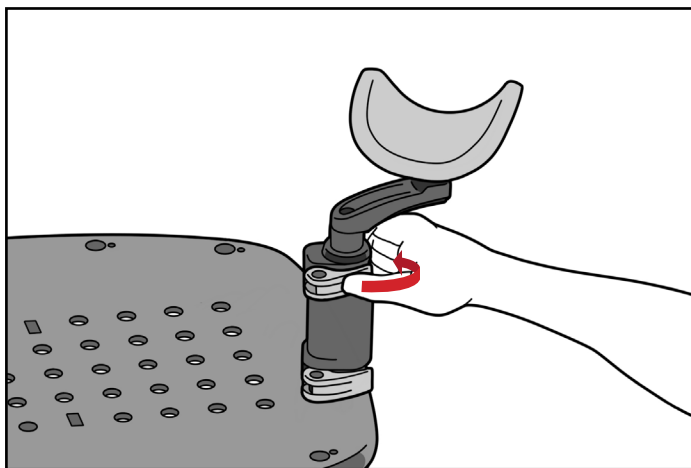


FIG. 8

DEMONTARE

Pentru a demonta suportul pentru încheietura mâinii, deschideți maneta inferioară și trageți suportul pentru încheietura mâinii din orificiile din suprafața pentru pacient.

FISĂ DE CONFIGURARE

RT-4546: Access Supine pentru sâni și plămâni, RT-4546MRI: Access Supine RM pentru sâni și plămâni,
RT-4546-01: Access Supine pentru sâni sau RT-4546-02: Access Supine pentru sâni și plămâni, fără grilă

Numele pacientului:


Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:

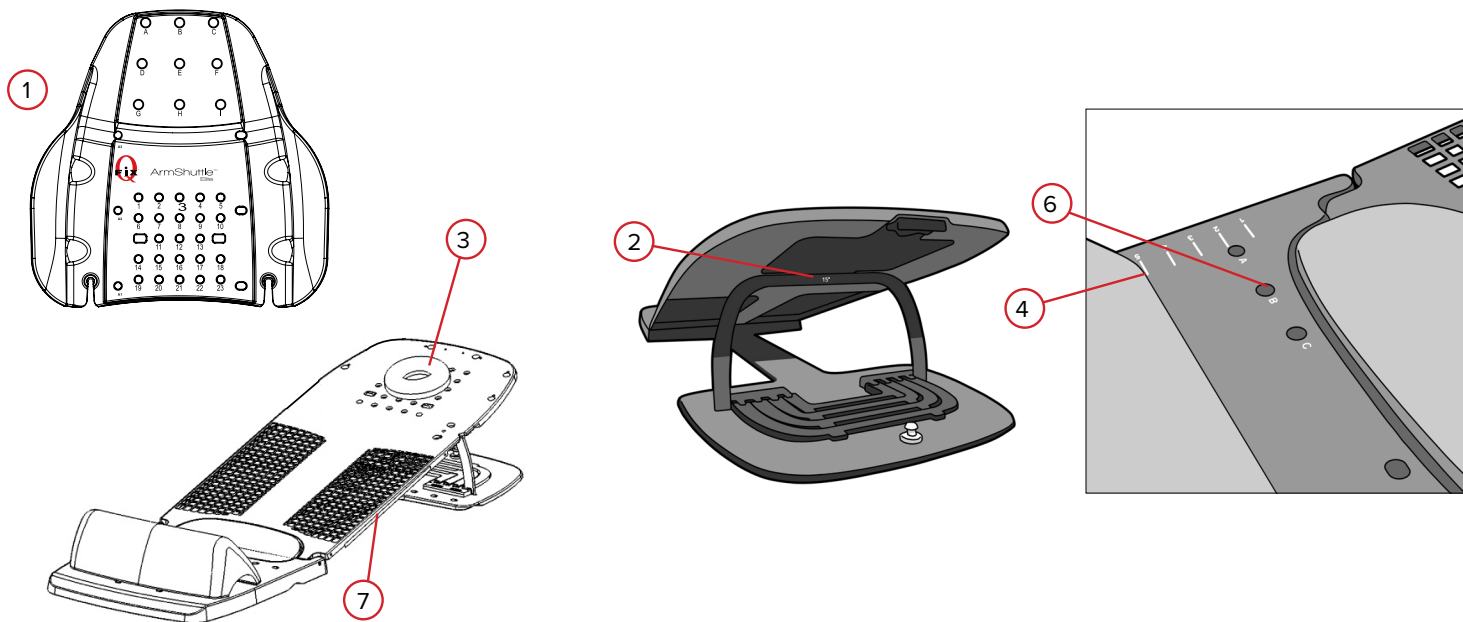

1. Folosit cu ArmShuttle: **Da** **Nu**

2. Unghiul suprafeței pentru pacient (selecți unul): **0°** **5°** **7,5°** **10°** **12,5°** **15°**
20° **25°**

3. Poziția tetierei (numărul 1–28):

4. Este folosit un opritor pentru partea de jos? **Da** **Nu**
Dacă da, ce setare? (numărul 1–8)

5. Indexat la masa de simulare sau tratament? **Da** **Nu**
Dacă da, setarea canelurii de indexare

6. Poziția știftului barei de localizare (selecți una): **A** **B** **C**

7. Locul laserului de marcare lateral:

ANEXĂ – 2007847_Arm & Wrist Supports_RO

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | ☎ +1 610-268-0585 | 📠 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

FIȘĂ DE CONFIGURARE

RT-4546: Access Supine pentru sâni și plămâni, RT-4546MRI: Access Supine RM pentru sâni și plămâni,
RT-4546-01: Access Supine pentru sâni sau RT-4546-02: Access Supine pentru sâni și plămâni, fără grilă

Numele pacientului:


Numărul de identificare al pacientului:

Configurare realizată de:

Medic:

Data:

Comentarii:

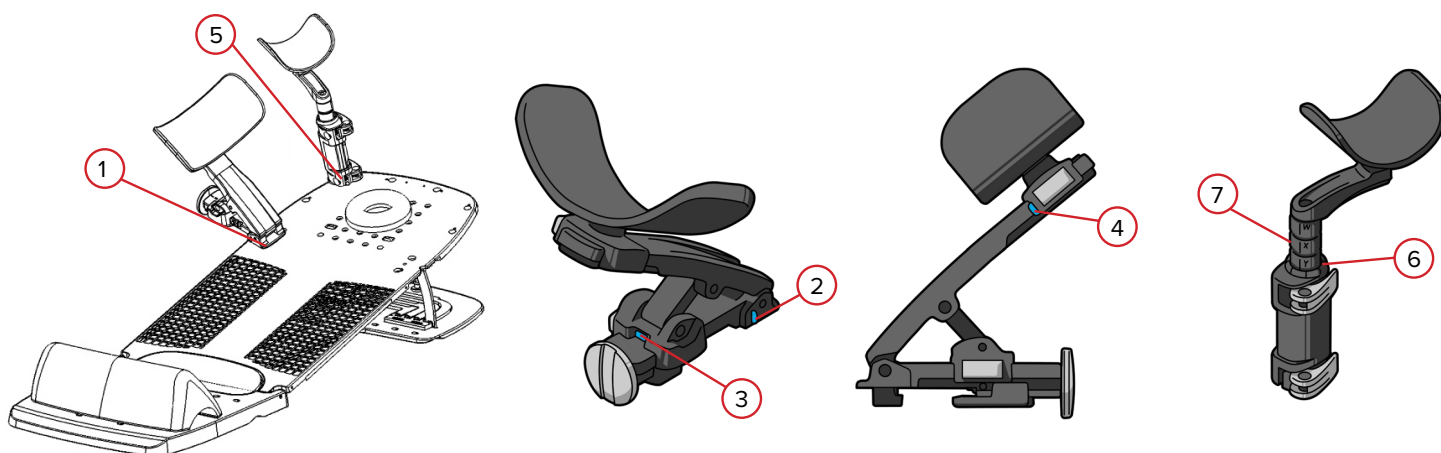

1. Locul suporturilor pentru braț (selecțai unul)—stânga pacientului: **X** **Y** Dreapta pacientului: **X** **Y**
2. Unghiul suporturilor pentru braț:
Stânga pacientului: **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
Dreapta pacientului: **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
3. Înălțimea suporturilor pentru braț (numărul 1–8): Stânga pacientului
Dreapta pacientului
4. Lungimea suporturilor pentru braț (selecțai una): Stânga pacientului: **A** **B** **C**
Partea dreaptă: **A** **B** **C**
5. Locul suporturilor pentru încheietura mâinii (literă de la A la F): Stânga pacientului
Dreapta pacientului
6. Unghiul suporturilor pentru încheietura mâinii:
Stânga pacientului: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
Dreapta pacientului: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
7. Înălțimea suporturilor pentru încheietura mâinii (literă de la W la Z): Stânga pacientului
Dreapta pacientului



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com