




positioning
patients for life.®

附件

RT-4546AA-01 和 RT-4546AW-01

臂部和腕部支撑

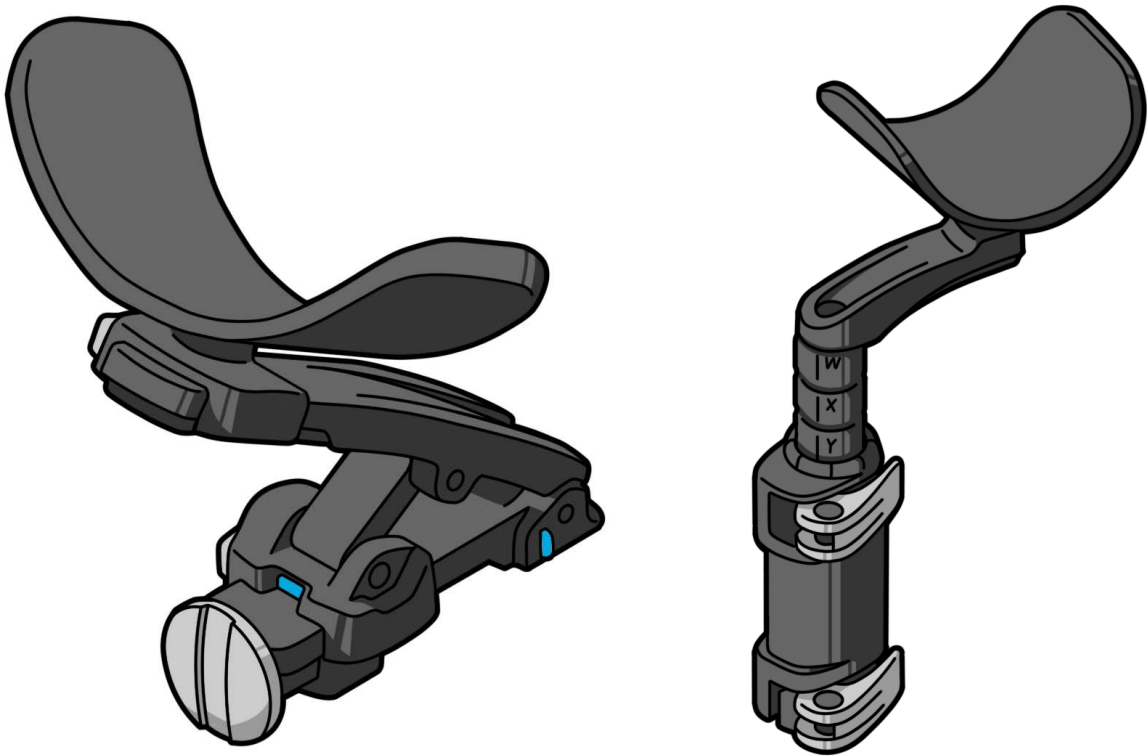


一般注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

！警告！请勿让患者使用臂部和腕部支撑调整位置。

！警告！切勿通过握住臂部支撑或腕部支撑架来抬起或搬运装置。

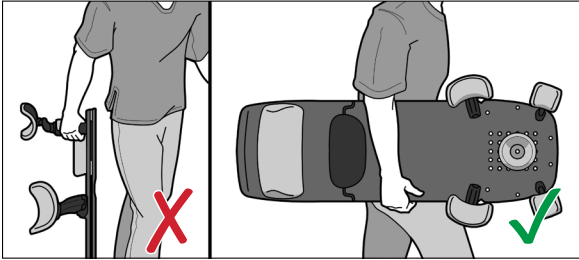

夹伤危险区

- 调节臂部支撑或腕部支撑高度时可能会出现夹伤危险区。
- 调节臂部支撑或腕部支撑角度时可能会出现夹伤危险区。

MRI 安全信息

⚠️ 非临床试验已证明，臂部和腕部支撑在 MR 特定条件下安全。这些装置可用于符合以下条件的 MR 系统：

- 臂部和腕部支撑可放置在具有 1.5T 或更低静态磁场的 MR 系统的孔中。
- 在扫描之前，臂部和腕部支撑必须根据预期用途与 MR 安全版 Access Supine (RT-4546MRI) 结合使用。
- MR 安全版 Access Supine (RT-4546MRI) 明确标记以下符号：



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

产品名称：人体定位袋

医疗器械备案号：20150038

Access、MR Secure、kVue、VacQFix 和 ArmShuttle Elite 是 Qfix 的商标。

操作说明

设置

臂部支撑

1. 要连接臂部支撑, 请松开旋钮并插入两个位置 (标有 "X" 和 "Y") 中的一个。拧紧旋钮, 将臂部支撑锁定在患者表面上。(图 1)
2. 要调节臂部支撑的旋转, 请松开旋钮并将臂部支撑旋转至所需位置然后拧紧旋钮。(图 2)

！小心！请勿过度拧紧。

3. 要调节高度, 按下位于高度滑块上的按钮并沿着臂部进行滑动, 滑到所需位置后释放按钮。(图 3)
4. 要调节臂部的长度, 按下位于长度滑块上的按钮并沿着臂部进行滑动, 滑到所需位置后释放按钮。(图 4)

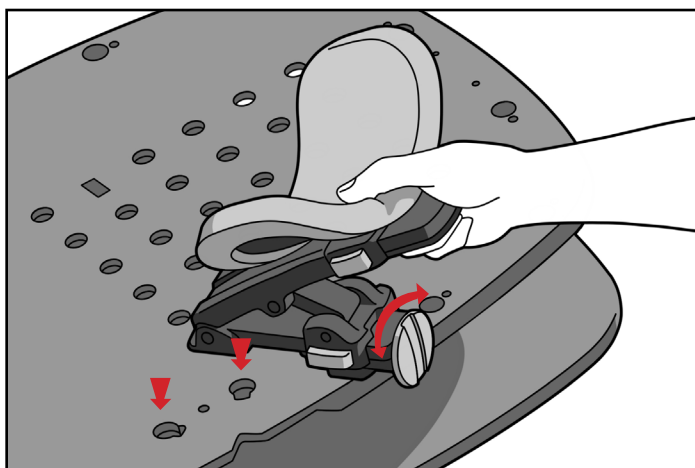


图 1

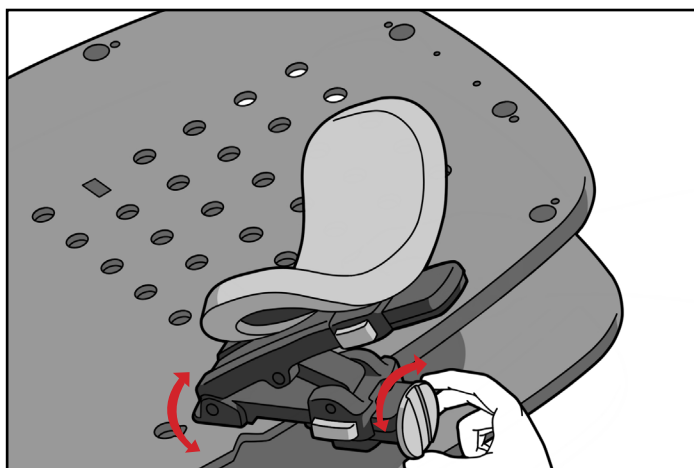


图 2

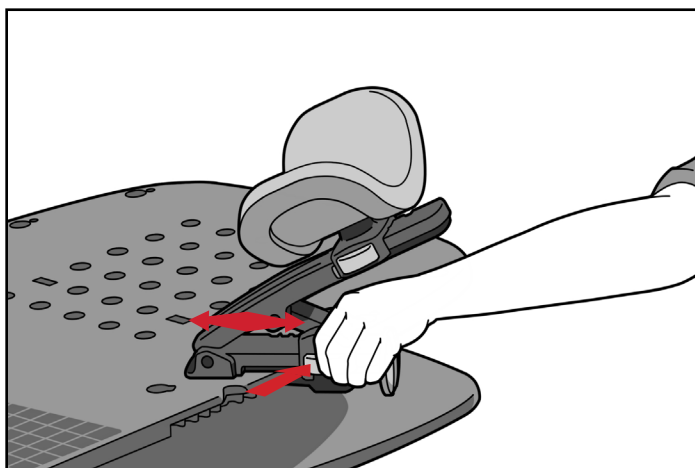


图 3

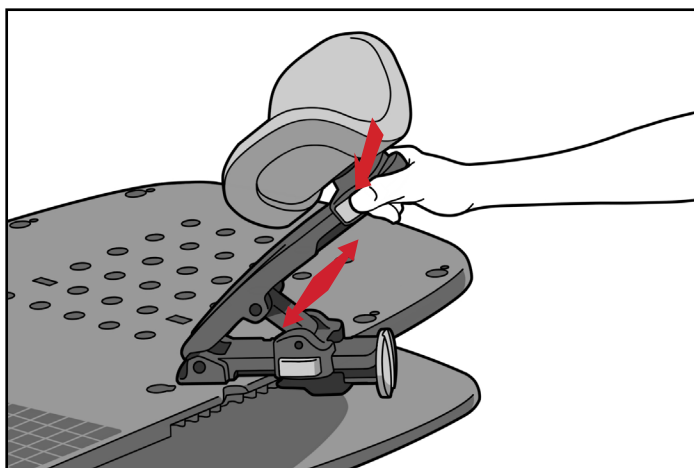


图 4

拆卸

要取下臂部支撑, 请松开旋钮, 旋转臂部支撑使其与患者表面一侧的凹槽对齐, 并将臂部支撑从患者表面的孔中拉出。

操作说明

设置

腕部支撑

1. 要连接腕部支撑, 请将腕部支撑底部的两个短桩与患者表面相应的两个孔对齐。(图 5)
2. 关闭下杆以锁定到位。(图 6)
3. 要抬高或降低腕部支撑的杯体, 请打开上杆。将杯体抬高、降低或旋转至所需位置并关闭上杆。(图 7 和图 8)

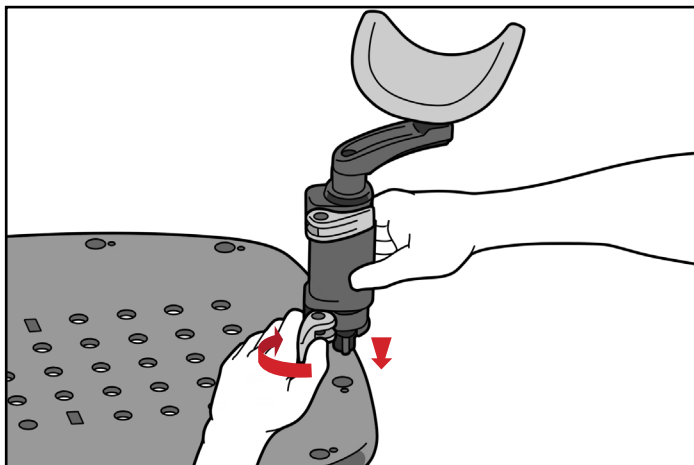


图 5

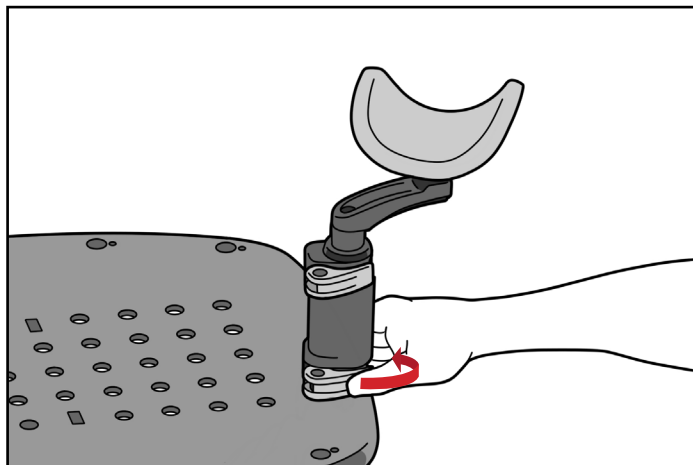


图 6

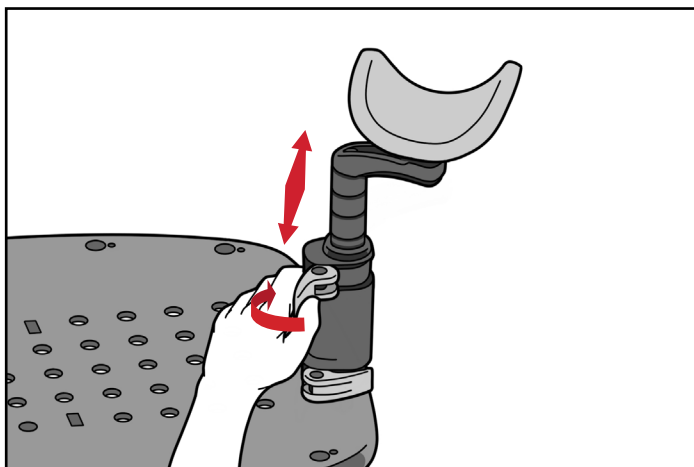


图 7

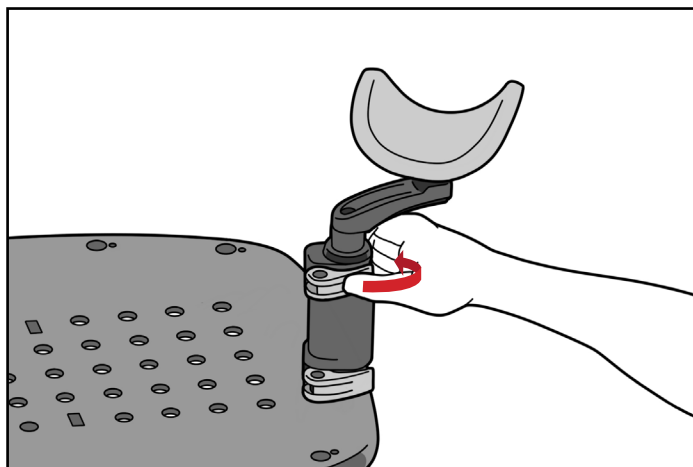


图 8

拆卸

要取下腕部支撑, 请打开下杆, 并将腕部支撑从患者表面的孔中拉出。

设置表

RT-4546: Access Supine (胸部和肺), RT-4546MRI: Access Supine MR (胸部和肺),
RT-4546-01: Access Supine (胸部), 或 RT-4546-02: 无网格 Access Supine (胸部和肺)

患者姓名:


患者 ID 号:

设置人:

医生:

日期:

注释:

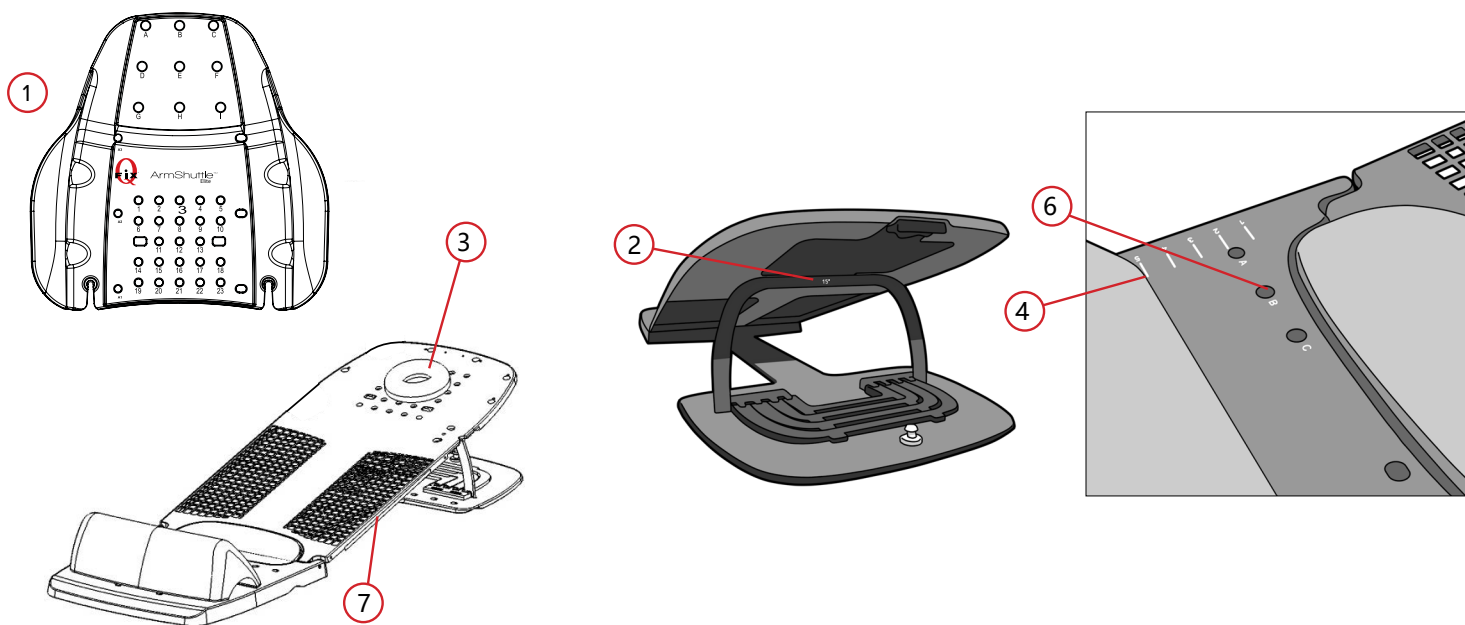

1. 与 ArmShuttle 一同使用: ☐ 是 ☐ 否
2. 患者表面角度 (选择一项): ☐ 0° ☐ 5° ☐ 7.5° ☐ 10° ☐ 12.5° ☐ 15° ☐ 20° ☐ 25°
3. 头枕位置 (编号 1-28):
4. 是否使用底部制动装置? ☐ 是 ☐ 否 如果选择是, 如何设置? (编号 1-8)
5. 变位至模拟或治疗台? ☐ 是 ☐ 否 如果选择是, 则设置变位凹槽
6. 定位杆销钉位置 (选择一项): ☐ A ☐ B ☐ C
7. 侧面标记激光位置:

设置表

RT-4546: Access Supine (胸部和肺), RT-4546MRI: Access Supine MR (胸部和肺),
RT-4546-01: Access Supine (胸部), 或 RT-4546-02: 无网格 Access Supine (胸部和肺)

患者姓名:


患者 ID 号:

设置人:

医生:

日期:

注释:

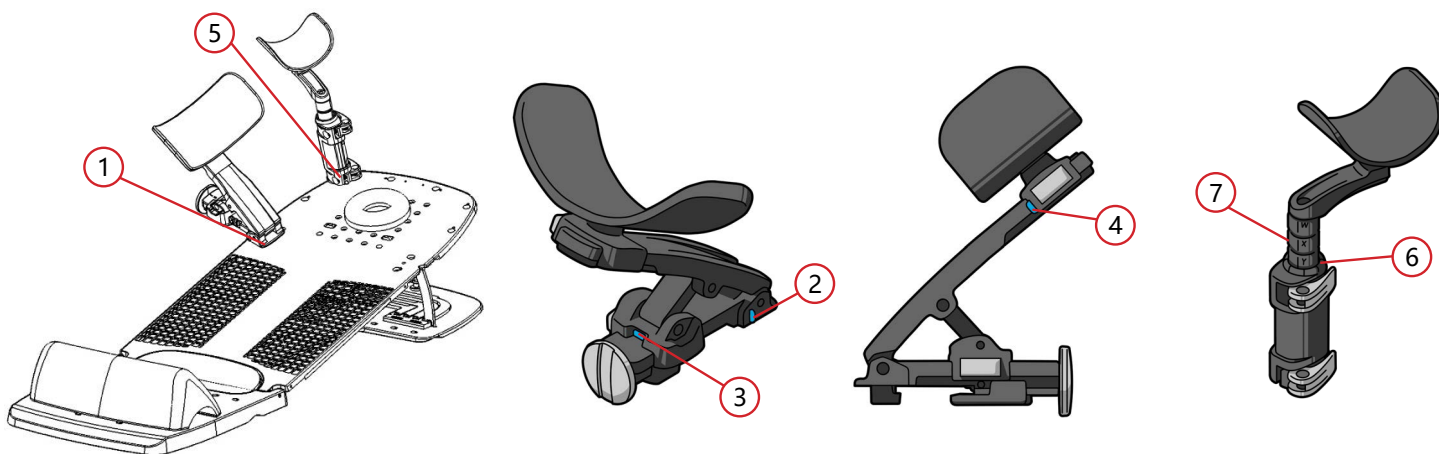

1. 臂部支撑位置 (选择一项) — 患者左侧: **X** **Y** 患者右侧: **X** **Y**

2. 臂部支撑的角度:

患者左侧: **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**
患者右侧: **-30°** **-15°** **0°** **15°** **30°**

3. 臂部支撑高度 (编号 1–8): 患者左侧 患者右侧

4. 臂部支撑长度 (选择一项): 患者左侧: **A** **B** **C** 右侧: **A** **B** **C**

5. 腕部支撑的位置 (从字母 A–F): 患者左侧 患者右侧

6. 腕部支撑角度:

患者左侧: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**
患者右侧: **0°** **45°** **90°** **135°** **180°** **225°** **270°** **315°**

7. 腕部支撑高度 (从字母 W–Z): 患者左侧 患者右侧



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com