



positioning
patients for life.®

TERMÉKÚTMUTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RT-2075-110 ÉS RT-2075-220

Rapidheat™ Kemence



TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS	3
ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA	4
FIGYELMEZTETÉS	4
ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK	5
A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE	5
BEÜZEMELÉSI TERÜLET	6
FELKÉSZÜLÉS A BEÜZEMELÉSRE	7
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	8
KÁBELES CSATLAKOZÁS	9
SPECIFIKÁCIÓK	10
EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	12
UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA	13
FIGYELMEZTETÉS	13
FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK ÉS LEÍRÁSOK	13
A KEMENCE ELSŐ HASZNÁLATA	14
KARBANTARTÁS	15
TISZTÍTÁS: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK	15
A MELEGÍTŐKAMRA TISZTÍTÁSA	15
KÜLSŐ TISZTÍTÁS	15
A LÁMPÁK CSERÉJE	16
A RAPIDHEAT KEMENCE BIZTOSÍTÉKÁNAK CSERÉJE	16
HIBAELHÁRÍTÁS	18
PÓTALKATRÉSZEK	18
A DIGITÁLIS KEMENCE VEZÉRLŐPANELE	19
A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	20
A KEMENCE HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	20
A KEMENCE BEPROGRAMOZÁSA	22
ALKATRÉSZLISTA	25
RT-2075-110	25
RT-2075-220	26

BEVEZETÉS

Ez a termékismertető és felhasználói kézikönyv a kemence beüzemelésére, használatára és karbantartására vonatkozó információkat tartalmazza. A kézikönyv célja, hogy a szakember és a felhasználó megtegye a RapidHeat™ kemence biztonságos, hatékony és hosszú távú használatához szükséges intézkedéseket, valamint, hogy betartsa a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

A kézikönyvet a termék teljes élettartama alatt biztonságos helyen kell tárolni; ennek célja, hogy a kijelölt kezelők és a szaktechnikusok számára referenciaként szolgálhasson.

Amennyiben a kézikönyv elveszik vagy megrongálódik, kérjük, hogy annak pótlásáért vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival.

A Qfix nem vállal felelősséget a kemence nem rendeltetésszerű használata, az illetéktelen személyek által végzett módosítások vagy javítások, illetve a Qfix által nem ajánlott és a nem ehhez a modellhez tervezett pótalkatrészek használatából eredő károkért.

Ez a kemence megfelel a hatályban lévő EGK-irányelveknek.

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

FIGYELMEZTETÉS

A TELEPÍTÉSI ÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MŰVELETEK MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A TERMÉKIÚTMUTATÓT ÉS A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET.

MINDEN BEÜZEMELÉSI, ÖSSZESZERELÉSI, SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MŰVELETET

SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYNEK KELL VÉGEZNI; A MŰVELETEK ELVÉGZÉSE SORÁN ÜGYELNI KELL A MUNKAHELYI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁRA.

A HELYTELENÜL VÉGZETT BEÜZEMELÉS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS VAGY MÓDOSÍTÁS HIBÁS MŰKÖDÉSHEZ VEZETHEZ, VALAMINT SÉRÜLÉST ÉS ANYAGI KÁRT OKOZHAT.


A KEMENCE CSAK TERMOPLASZTIKUS ANYAGOK MELEGÍTÉSÉRE HASZNÁLHATÓ. A TERMOPLASZTKUS ANYAGOK MELEGÍTÉSÉN KÍVÜL BÁRMILYEN MÁS CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS TILOS ÉS VESZÉLYES. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT OLVASSA EL AZ ALKALMAZOTT TERMOPLASZTIKUS ANYAGHOZ TARTOZÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET.

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA



ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK

A termék átvételekor ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, és győződjön meg arról, hogy semmilyen módosítás vagy sérülés nem történt. Az esetleges sérülésekről vagy bizonyos alkatrészek hiányáról értesítse a szállítást végző vállalatot, és vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Tüntesse fel a **termékkódot "Ref"** és a **sorozatszámot "Ser. No."** és csatoljon egy fényképet. A termékkód és a sorozatszám a kemence hátoldalán lévő adattáblán található.

! FIGYELEM ! A KEMENCE A SZÁLLÍTÁS SORÁN ELMOZDULHAT, AMI A KÉSZÜLÉK SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJA, VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. A KEMENCE SÚLYÁT ELBÍRÓ, MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓESZKÖZT HASZNÁLJON. A KEMENCÉT NE HÚZZA, NE DÖNTSE MEG ÉS NE FORDÍTSA FEL. A KEMENCÉT EMELJE FEL A PADLÓRÓL, ÉS HELYEZZE VÍZSZINTES POZÍCIÓBA.

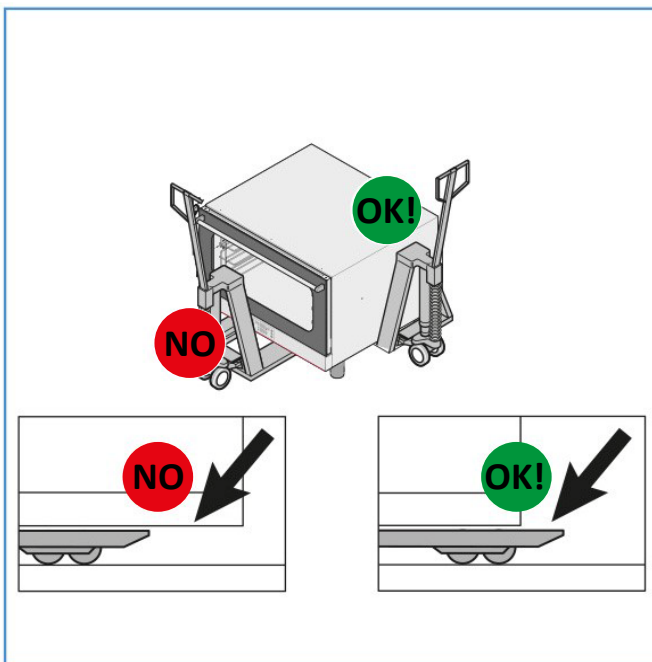

A KOMPONENSEK ELLENŐRZÉSE

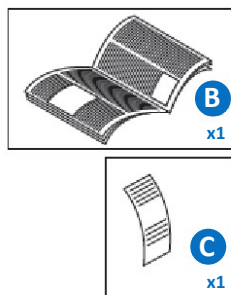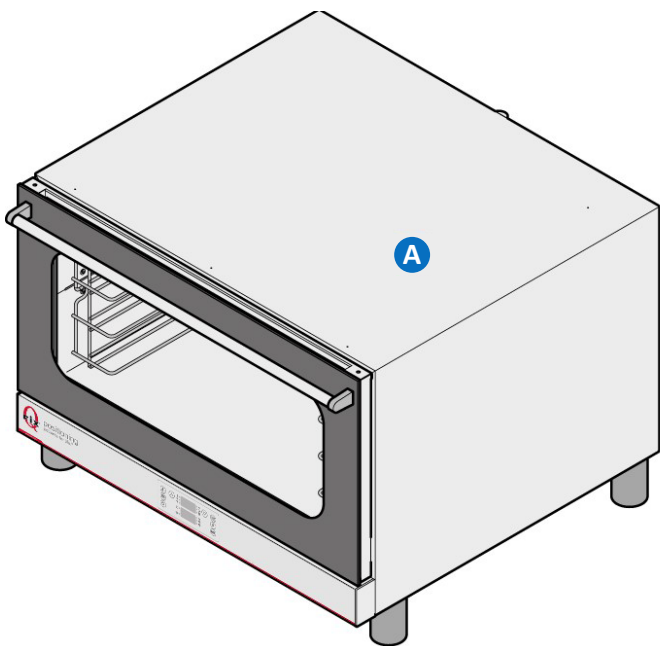

- A** OVEN
- B** INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE BOOKLET
- C** TEST RECEIPT

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

BEÜZEMELÉSI TERÜLET

Az ajtók, a folyosók és az átjárók hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a beüzemelési terület szabadon kell hagyni. A kemencét zárt és jól szellőző helyiségben kell elhelyezni (nem a szabadban).

A kemence elhelyezése előtt ellenőrizze a készülék méreteit és a konnektor pontos helyét.

A kemencét sík felületen kell elhelyezni. Győződjön meg róla, hogy a kemence nem fog elcsúszni el, nem fog leesni, és nem fog felborulni.

A kemencét olyan helyen kell elhelyezni, amely elbírja a készülék súlyát. A bruttó súly a kemence hátulján lévő adattáblán található.

A kemencét úgy kell elhelyezni, hogy a hátulja könnyen hozzáférhető legyen; erre a karbantartási műveletek elvégzésének biztosítása érdekében van szükség. A kemencét a csatlakozóaljzat közelében kell elhelyezni.

Annak érdekében, hogy a felhasználó a kemencében lévő termoplasztikus anyagot könnyen megtekinthesse, azt javasoljuk, hogy a kemencét úgy helyezze el, hogy annak belseje körülbelül szemmagasságban legyen. A javasolt telepítési magasság

160 cm (5,25 láb). A kemence szekrények, rozsdamentes asztalok vagy más kemencék tetején történő elhelyezése esetén vegye figyelembe a felhasználó magasságra vonatkozó igényeit.

A kemencét nem úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedjen egy burkolatba. A kemence mellett minden irányban 10 cm (4 hüvelyk) távolságot kell biztosítani.


A kemencét **NE** helyezze hőforrás vagy forró folyadékok közelébe.

A tűzveszély elkerülése érdekében **NE** tegye a készüléket falak, bútorok, paravánok vagy gyúlékony folyadékokat tartalmazó tartályok, például gálpalackok közelébe.


A készülék működtetéséhez a következő távolságokat kell biztosítani: 50 cm (20 hüvelyk) a kemence oldala mellett, 50 cm (20 hüvelyk) a kemence teteje felett, és 70 cm (28 hüvelyk) a kemence hátoldala mögött.

Győződjön meg arról, hogy az ajtó teljesen kinyílik.

A szellőző- és a levegőztetőnyílásoknak nyitva kell lenniük, és semmivel nem szabad akadályozni a levegő szabad áramlását.

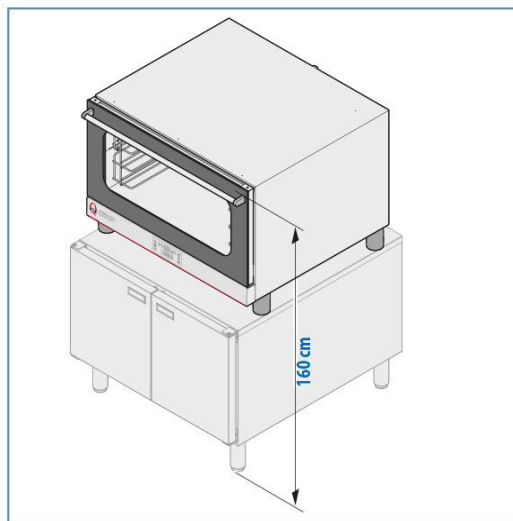

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

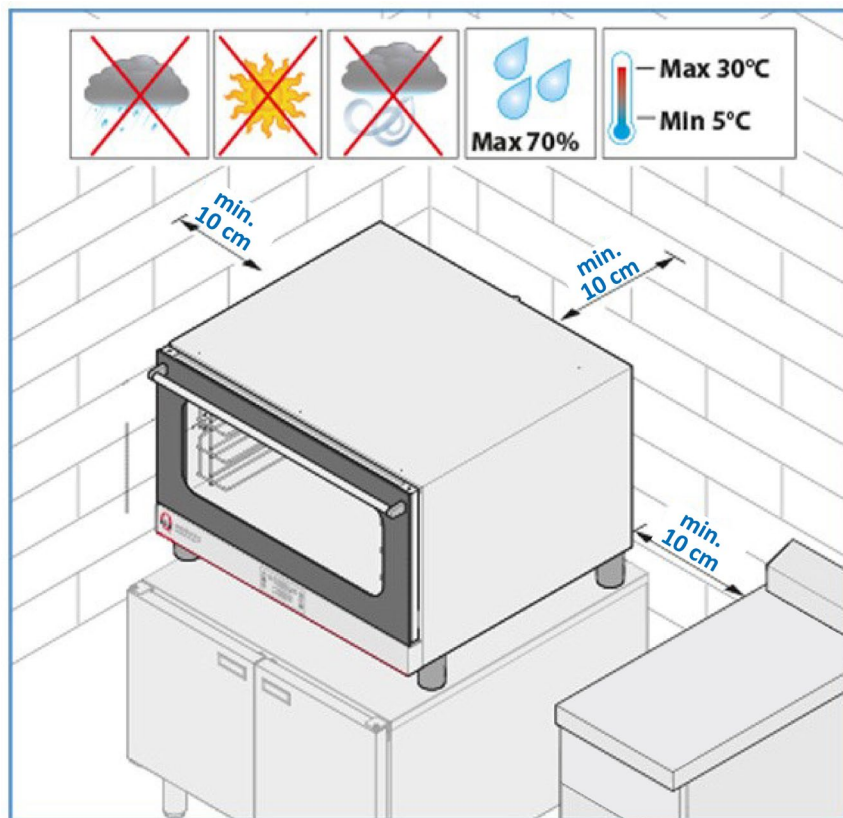

FELKÉSZÜLÉS A BEÜZEMELÉSRE


Távolítsa el a külső csomagolást (faláda és/vagy kartondoboz), és a helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa azt.

TÁVOLÍTSA EL A VÉDŐFÓLIÁT

Távolítsa el a külső falakon található védőfóliát. (Ahogy a képen látható). **A védőfólia eltávolításához ne használjon szivacsot, pengét vagy egyéb éles tárgyat.**

Vegye ki a termékhez tartozó dokumentációt a kemence

Távolítson el minden műanyagcsomagolást.

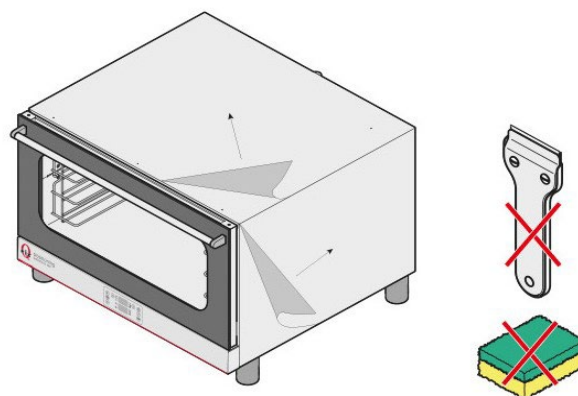

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA


A LÁBAK BEÁLLÍTÁSA

Csavarozza fel az állítható lábakat a kemence alá.

A lábak nélkül ne használja a kemencét.

A lábakat NE távolítsa el. A lábak lehetővé teszik, hogy a légáramlat lehűtse a kemencét, megakadályozva ezzel a készülék túlmelegedését és az alkatrészek károsodását.

A kemencét vízszintes, sík felületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzet ellenőrzéséhez használjon szintező szerszámot. A vízszintes pozíció elérése érdekében a lábak szükség esetén külön-külön is beállíthatók; ehhez szorítsa meg vagy lazítsa meg azokat.

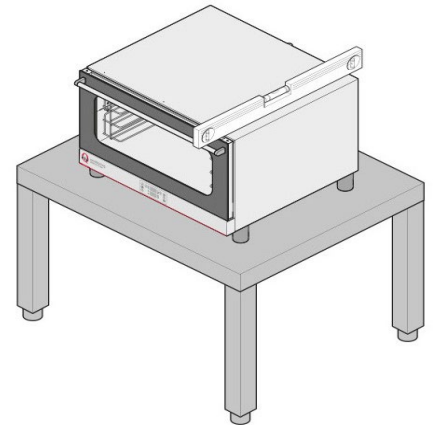

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

! FIGYELEM ! AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁST A BEÜZEMELÉS HELYE SZERINTI ORSZÁG SA NEMZETKÖZI ÉS A HELYI JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT EGY KÉPESÍTÉSSEL ÉS ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIÉ.

AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS ELŐTT A FREKVENCIA (HZ) ÉS A FESZÜLTSG (V) MEGFELEL A KEMENCE HÁTOLDALÁN LÉVŐ ADATTÁBLÁN FELTÜNTETETT KÖVETELMÉNYEKNEK.

! FIGYELEM ! AMENNYIBEN A KEMENCE SZÁLLÍTÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ KOCSI NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, AZ JAVASOLJUK, HOGY A KÉSZÜLÉKET ELŐSZÖR A CSATLAKOZÓALJZATHOZ CSATLAKOZTASSA, MAJD HELYEZZE A KEMENCÉT A MUNKATERÜLETRE; ÍGY BIZTOSÍTHATÓ, HOGY AZ ELHELYEZÉS SORÁN NEM SÉRÜL MEG A TÁPKÁBEL. EZ A FOLYAMAT EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS CSATLAKOZÁST TESZ LEHETŐVÉ.

KÁBELLEL VAGY EGYFÁZISÚ CSATLAKOZÓVAL ELLÁTOTT KEMENCÉK

kemencék 3xAWG14 15A kórházi használatra alkalmas kábelrel és csatlakozóval: a csatlakozót a megfelelő hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó mindig hozzáférhető legyen.

Csak a kábel cserélhető. A kábel cseréje esetén ügyeljen arra, hogy a földelővezeték sárga-zöld színű legyen.

A kábel cseréjét szakképzett és engedéllyel rendelkező szakembernek kell elvégeznie.

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

KÁBELES CSATLAKOZÁS

A tápkábel csatlakoztatásához végezze el a következő műveleteket:

- (A1) Lazítsa meg a kábeltömszelence tetejét. A csavarok meglazításával nyissa ki a kemence hátuljának alsó részét.
- (A2) Vezesse át az új kábelt a kábeltömszelencén. A kemence hátulján található kapcsolási rajz használatával csatlakoztassa a kábelt a terminálcsíkokhoz. Csak azt csatlakoztassa, amely a rézhíd és az elektromos vezeték egymásba illesztésével, a csavarok alatt, a megszorítási irányban feltüntetésre került; így a csavar meghúzásával a kábel és a híd szorosan rögzül.
- (A4) A csavarok meghúzásával zárja le a kemence hátuljának alsó részét. A kábeltömszelence felső részének meghúzásával rögzítse a kábelt.

A hibás csatlakoztatás a zárótábla túlmelegedéséhez vezethet, amely robbanást és áramütést okozhat.

A kemencének a hálózati aljzathoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó szorosan rögzítésre került.

PE = sárga/zöld: "FÖLDELÉSI" védőérintkezés

N = Kék: nulla vezető

L1, L2, L3 = Barna, szürke, Fekete: feszültség alatt álló vezetők

Győződjön meg arról, hogy a feszültség alatt álló és a földelt vezetők között nincs sztatikus kisülés. Ellenőrizze a végálláskapcsoló folytonosságát a külső burkolat és a csatlakozóaljzat földelt vezetéke között. A fenti műveletek elvégzéséhez multi teszter használatát javasoljuk.

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

SPECIFIKÁCIÓK

Forgalmazó: Qfix

440 Church Road

Avondale, Pennsylvania 19311 USA

+1 610-268-0585 | sales@Qfix.com

Gyártó: Piron SRL

Via Belladoro, 25

35010 Cadoneghe (Pd) – OLASZORSZÁG

Termékek

- 110V: RT-2075-110
- 220V: RT-2075-220

ADATTÁBLA

	Distributed by: Qfix 440 Church Road Avondale, PA 19311 USA +1 610-268-0585 sales@Qfix.com	Manufactured by: Piron SRL Via Belladoro, 25–35010 Cadoneghe Padova ITALY +39 049 9624228 info@piron.it						
Ref:	RT-2075-110	  RoHS MADE IN ITALY						
Art :	PF8003D_QF4							
Ser. No.:	XXXXXXXXXX							
Type:	—							
Súly ←	<table><tr><td colspan="3"> 2017</td></tr><tr><td>1.6 kW</td><td>110V 1N~</td><td>60 Hz</td></tr></table>		 2017			1.6 kW	110V 1N~	60 Hz
	 2017							
1.6 kW	110V 1N~	60 Hz						
	50 kg							
	<i>Energiafogyasztás</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Frekvencia</i>					


PF8003D QF4

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA



Distributed by:
Qfix
440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
+1 610-268-0585 | sales@Qfix.com

Manufactured by:
Piron SRL
Via Belladuro, 25–35010 Cadoneghe
Padova ITALY
+39 049 9624228 | info@piron.it

Ref: RT-2075-220

Art : PF8003D_QF5

Ser. No.: XXXXXXXXX

Type: —

 2017		
1.6 kW	220V 1N~	60 Hz

RoHS
MADE IN ITALY



PF8003D QF5

Súly ← **50 kg**

Energiafogyasztás Teljesítmény Frekvencia

- Ref:** QFIX utánrendelési szám
- Art :** PIRON modellszám
- Ser. No.** sorozatszám, minden termék esetén különböző
- Típus:** a műszaki tulajdonságok szerint meghatározott termékmodell A gyártás időpontja, ÉÉÉÉ
- Energiafogyasztás:** a kemence névleges teljesítménye kW mértékegységben
- Tápegység:** A ZÁRÓTÁBLA CSATLAKOZÁS TÍPUSA: a készülék feszültsége V mértékegységben, a fázisok és a nullák száma (3N = 3 fázis több nulla).
- Tápfeszültség:** a kemence frekvenciája Hz mértékegységben.

ÚTMUTATÓ A BEÜZEMELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY SZÁMÁRA

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelel a kisfeszültségű villamossági berendezésekre vonatkozó 2014/35/UE irányelv szabványainak:

BS EN 60335-2-42 + A1:2008

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek – Biztonság – 2-42. rész Nagykonyhai, villamos, légkavarásos sütők, gőzzel főzők és gőzkavarásos sütők egyedi előírásai

BS EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. Általános követelmények

BS EN 62233:2008

Háztartási és hasonló jellegű készülékek elektromágneses terének mérési módszerei az emberi expozícióra vonatkozóan

Megfelel a kisfeszültségű villamossági berendezésekre vonatkozó 2014/30/UE irányelv szabványainak:

BS EN 55014-1:2006 + A1:2009

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási villamos készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. Zavarkibocsátás

BS EN 55014-1:1997 + A1:2001 + A2:2008

Elektromágneses összeférhetőség. Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei – 1. rész: Zavarkibocsátás – Termékcsaládszabvány

IEC 61000-6-3:2006 + A1:2009 + A2:2009

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 6-3. rész Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és a kisipari környezet zavarkibocsátási szabványa

IEC 61000-4-2:2008

Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 4-2. rész Vizsgálati és mérési technikák-Elektromos kisülés elleni védelem vizsgálata

UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMESEN OLVASSA EL A TERMÉKÚTMUTATÓT ÉS A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET. EZ A KÉZIKÖNYV A KEMENCE BIZTONSÁGÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZZA.

A KÉZIKÖNYVET MINDIG HASZNÁLJA REFERENCIAKÉNT.

A HELYTELENÜL VÉGZETT BEÜZEMELÉS, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS VAGY MÓDOSÍTÁS HIBÁS MŰKÖDÉSHEZ VEHETHEZ, VALAMINT SÉRÜLÉST ÉS ANYAGI KÁRT OKOZHAT.

FIGYELMEZTETŐ SZIMBÓLUMOK ÉS LEÍRÁSOK

FELHEVÜLT/FORRÓ FELÜLET



! FIGYELEM ! MŰKÖDÉS KÖZBEN A KEMENCE FELÜLETE ÁTFORRÓSODIK. A KEMENCE MŰKÖDTETÉSEKOR MINDIG LEGYEN ÓVATOS. AZ ESETLEGES ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KEMENCE MŰKÖDÉSE KÖZBEN NE ÉRINTSE MEG A KEMENCE KÜLSŐ RÉSZEIT. AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN HASZNÁLJON KÉZVÉDŐ ESZKÖZT.

! VIGYÁZAT ! A KEMENCÉBEN FELMELEGÍTETT ANYAG FORRÓ LEHET. A FELHEVÍTETT ANYAG KEZELÉSÉNél ÜGYELJEN AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE.

A kemence kizárólag termoplasztikus anyagok melegítésére használható. A TERMOPLASZTKUS ANYAGOK MELEGÍTÉSÉN KÍVÜL BÁRMILYEN MÁS CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS TILOS ÉS VESZÉLYES. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT OLVASSA EL AZ ALKALMAZOTT TERMOPLASZTIKUS ANYAGHOZ TARTOZÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET.

A kemence professzionális, kizárólag szakképzett személyzet általi használatra készült:

- Gyermekek jelenlétében a kemencét ne hagyja felügyelet nélkül, és gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez.
- Ne helyezzen hőforrást a kemence közelébe.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen gyúlékony anyagokat vagy gyúlékony folyadékokat a kemence közelébe.
- A digitális panel kezelését az ujjaival végezze: egyéb tárgyak károsíthatják a kemencét, ezáltal a garancia érvényét veszítheti.

A sérült üvegajtók alkatrészeit azonnal ki kell cserélni (hívja a Qfix munkatársait a +1 484-720-6054 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a techsupport@Qfix.com címre).

Ha a kemencét hosszabb ideig (több napig) nem használja, húzza ki az elektromos kábelt a csatlakozóaljzatból.

A Qfix nem vállal felelősséget a kemence nem rendeltetésszerű használata, az illetéktelen személyek által végzett módosítások vagy javítások, illetve a Qfix által nem ajánlott és a nem ehhez a modellhez tervezett pótalkatrészek használatából eredő károkért.

Ez a kemence megfelel a hatályban lévő EGK-irányelveknek.

UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

A KEMENCE ELSŐ HASZNÁLATA

Győződjön meg arról, hogy a beüzemelést végző személy a jelen kézikönyvben megadott utasításoknak, valamint a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően végezte el a beüzemelési folyamatot. A kemence működtetése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az összes figyelmeztetést és biztonsági utasítást megértette, és képes azok betartására.

Győződjön meg arról, hogy sem a kemence belsejében, sem pedig a külső részén nem találhatók műanyag anyagok, kézikönyvek vagy műanyagfólia. Minden csomagolást, többek között a kemence falán található védőfóliát is el kell távolítani.

A szellőző- és a levegőztetőnyílásoknak nyitva kell lenniük, és semmivel nem szabad akadályozni a levegő szabad áramlását.

Győződjön meg arról, hogy a kemencének a beüzemelés során leszerelt részei visszaszerelésre kerültek, és a megfelelő helyen vannak.

TESZTELÉS

Az első használat előtt a kemencét egy próba fűtési ciklus végrehajtásával kell tesztelni. A próba fűtési ciklussal ellenőrizhető a működés; hibás működés esetén a készülék jelzi a hibát a felhasználónak. A próba fűtési ciklus során a rácsoknak a helyükön, a kemence belsejében kell lenniük.

1. Kapcsolja be a kemencét az ON/OFF (BE/KI) gomb megnyomásával.
2. Várjon, amíg a programjelző (P01) abbahagyja a villogást.
3. A hőmérséklet legmagasabb értékre történő beállításához nyomja meg az INCREASE (NÖVELES) gombot.
4. Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot, majd a melegítési idő 15-20 percre történő beállításához használja az INCREASE/DECREASE (NÖVELES/CSÖKKENTÉS) gombokat.
5. Nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.
6. Az előmelegítés megkezdődik, és a kijelzőn villogni kezd a "PrH" jelzés.
7. Az előmelegítési ciklus végén a kemence kijelzőjén a PrH READY (PrH KÉSZ) jelzés lesz látható.
8. A PrH READY (PrH KÉSZ) jelzés törléséhez nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.
9. Az időzítő aktiválásához és a visszaszámlálás megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.

A kemencerácsokat a gyártási folyamat során maradékolajjal vonják be. A 15–20 perces próba melegítési ciklus alatt ez a maradék "leég". A "leégési" időszak alatt kisebb mértékű füstölés tapasztalható.

A melegítési ciklus alatt gondosan ellenőrizze a következőket:

- Nyomja meg a LAMP (LÁMPA) gombot. A melegítőkamra belsejében lévő lámpa világítani kezd. 60 másodperc elteltével a melegítőkamra lámpája kialszik.
- A kemenceajtó kinyitásakor az időzítő leáll. A kemenceajtó becsukásakor az időzítő folytatja a visszaszámlálást.
- A kemenceajtó kinyitásakor a készülék leállítja a melegítést, valamint a motor és a ventilátorok működése is leáll. A kemenceajtó becsukása után a kemence, a motor és a ventilátorok ismét működésbe lépnek.
- A beállított hőmérséklet elérésekor a melegítési hőmérsékletet érzékelő termosztát kikapcsolja a fűtőelemeket.
- A melegítőkamra ventilátorai ugyanabba az irányba forognak.

KARBANTARTÁS

A napi karbantartás elvégzéséért kizárólag a felhasználó felelős.

TISZTÍTÁS: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A tisztítás megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és győződjön meg róla, hogy a kemence teljesen kihűlt.

! FIGYELEM ! A KEMENCE TISZTÍTÁSÁT SOHA NE VÉGEZZE NAGYNYOMÁSÚ VÍZSUGÁR HASZNÁLATÁVAL

A tisztítás alatt gondoskodjon a szem, a száj és a kéz megfelelő védelméről.

A kemencét nedves ruha használatával alaposan ki kell mosni. Ügyeljen arra, hogy a kemencében soha ne hagyjon oldószer- vagy tisztítószer maradványokat. A maradványok felületes eltávolítása esetén az anyag korrodálódhat.

A MELEGÍTŐKAMRA TISZTÍTÁSA

Rendszeres tisztítással fenntartható a melegítőkamra megfelelő higiéniai állapota, és megelőzhető az acél alkatrészek károsodása.

Kövesse a központ tisztításra vonatkozó protokolljait.

Tisztítsa meg a melegítőkamra falát szappannal és forró vízzel, majd alaposan öblítse le. A kemence melegítőkamrájának rendszeres takarítását súrolószert nem tartalmazó tisztítószerrel kell végezni. A tisztításhoz ne használjon nagynyomású gőzfúvót vagy gőzölőeszközt. A savas, valamint a dörzsölő, a maró és a homok- vagy szódadabikarbóna alapú tisztítószerek használata tilos.


A forrázásveszély elkerülése érdekében a melegítőkamrát tilos 70 °C-nál (158 °F) magasabb melegítési hőmérsékleten tisztítani.

A szennyeződések eltávolításához használjon műanyag sörtéket vagy ecettel és meleg vízzel átitatott szivacsot.

Csak a Qfix által ajánlott termékeket használja.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS

A külső tisztítást meleg vízzel átitatott ruhával vagy rozsdamentes acél tisztítására alkalmas termékekkel végezze. Ne használjon savas termékeket vagy ammóniát.

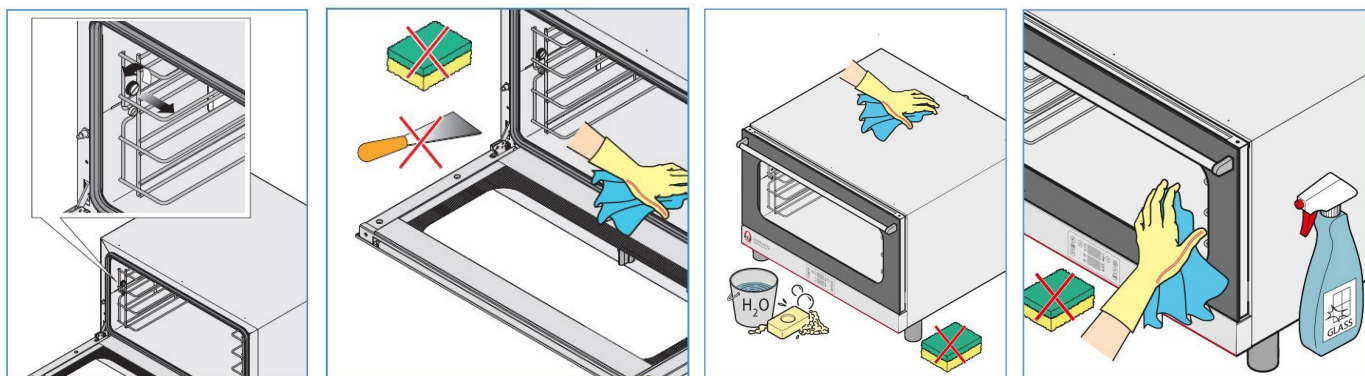


KARBANTARTÁS

A LÁMPÁK CSERÉJE

! FIGYELEM ! AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A TESTI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN SZIGORÚAN TARTSA BE AZ ALÁBBIKAT:


- **Húzza ki a kemence elektromos csatlakozóját, és hagyja kihűlni a készüléket.**
- Távolítsa el az oldalsó rácsokat.
- Távolítsa el az "A" jelű üveget, vegye ki a kiégett "B" jelű lámpát, cserélje ki azt egy új lámpára, majd szerelje vissza az alkatrészeket.

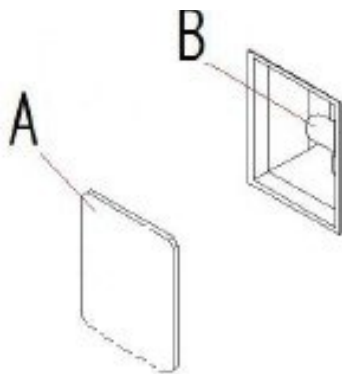

- Szerelje vissza a kemence oldalsó rácsait.

A RAPIDHEAT KEMENCE BIZTOSÍTÉKÁNAK CSERÉJE

1. Csavarja ki a kemence hátlapján található, a képen megjelölt csavarokat.

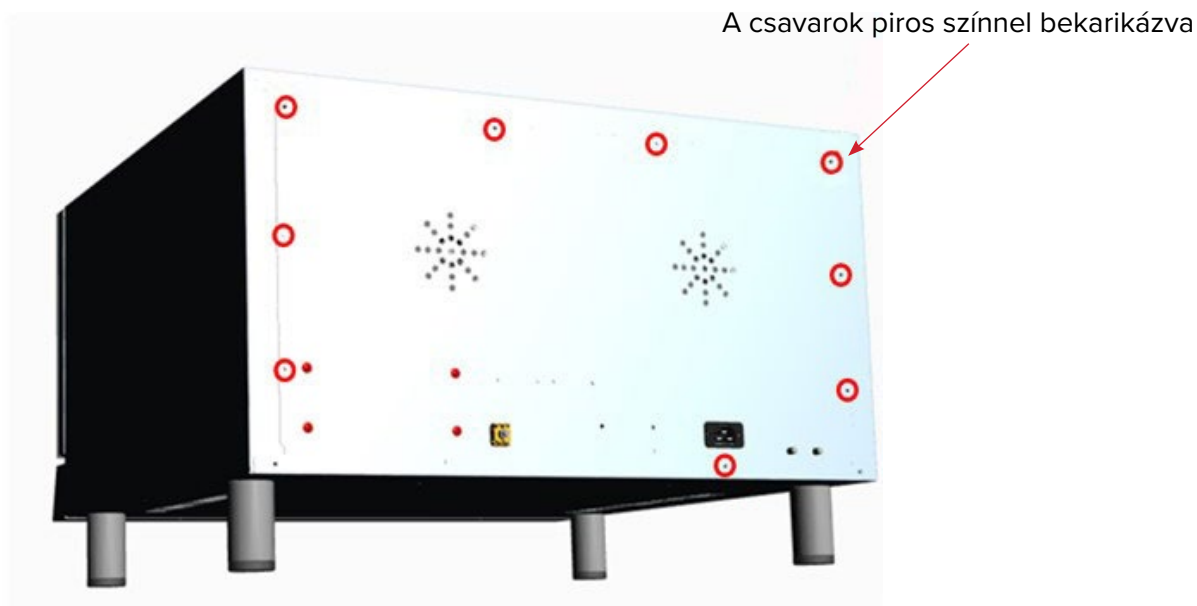


KARBANTARTÁS

2. Húzza ki a panelt.

! MEGJEGYZÉS ! Ügyeljen arra, hogy a panelhez csatlakoztatott vezetékeket ne húzza ki. Ha lehetséges, a panelt sík felületre helyezze.


3. A biztosítékokhoz történő hozzáféréshez húzza ki a biztosítékreeszt

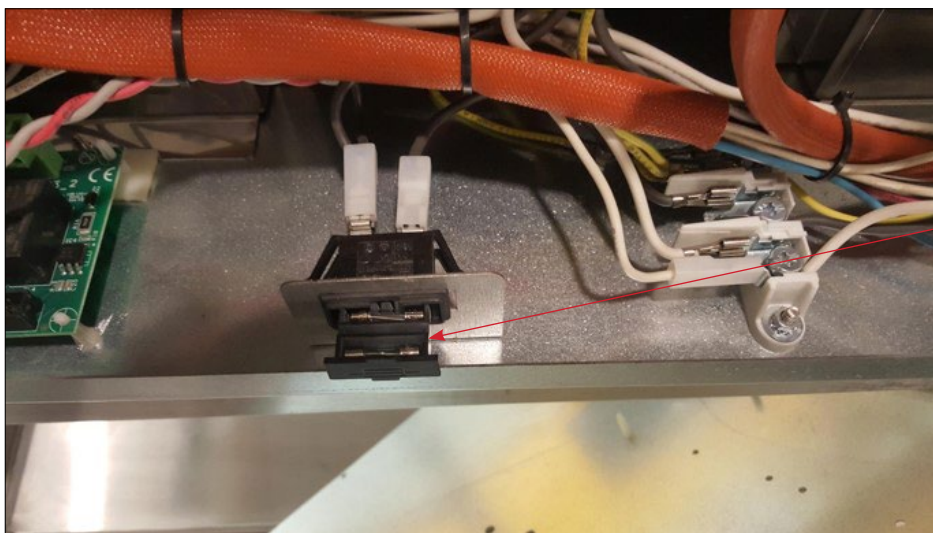

Biztosítékreesz

4. Vegye ki a soros biztosítékot, és cserélje ki azt a tartalékbiztosítékra. Semmisítse meg a soros biztosítékot.

5. Helyezze vissza a hátsó panelt, és csavarja vissza a csavarokat

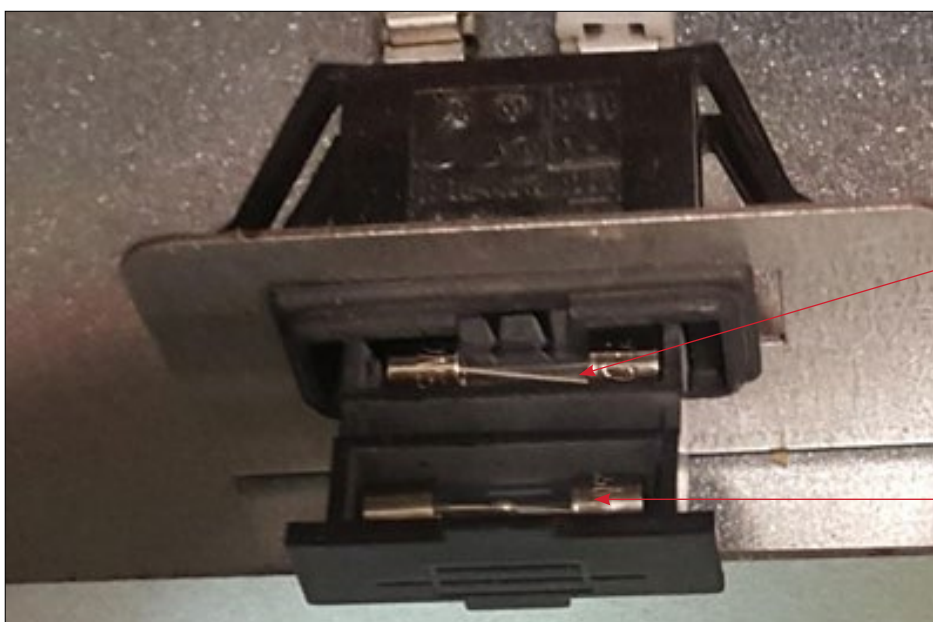

Soros biztosíték

Tartalékbiztosíték

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a kemence megsérült, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

HIBA	OK	MEGOLDÁS
A START (INDÍTÁS) gomb megnyomásakor a kemence nem kapcsol be	Az ajtó nyitva van	Győződjön meg róla, hogy az ajtó zárva van
	A mikrokapcsoló nem jelzi, hogy az ajtó zárva van	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
A kemence lámpája KIKAPCSOLT állapotban van	A lámpa meglazult	Illessze be megfelelően a lámpát a lámpatartóba
	A lámpa kiégett	Cserélje ki a lámpát (Karbantartás fejezet)
A kamrában nem egyenletes a melegítés	A ventilátorok nem változtatják meg a forgásirányt	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
	A ventilátor meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
	Az egyik ellenállás meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
A kemence KIKAPCSOLT állapotban van	A hálózati feszültség meghibásodása	Ellenőrizze a csatlakozóaljzat tápellátását
	A tápegységhez történő helytelen csatlakoztatás	Ellenőrizze a csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatást
	A biztonsági termosztát mérési hibája	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
A kemence be van kapcsolva, de a ventilátor leáll	A biztonsági termosztát motorjának meghibásodása	Kapcsolja ki a kemencét, és várja meg, hogy a motor hővédelmi funkciója magától újrainduljon.
	A motor kondenzátorának meghibásodása	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.
A digitális kemencéken látható hibaüzenet: ER1 vagy ER2	Egy komponens meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival. Az elérhetőségeket az alábbiakban találja.



Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival a +1 484-720-6054 telefonszámot, vagy küldjön e-mailt a techsupport@Qfix.com címre. Tüntesse fel **a termék kódját "Ref"** és **a kemence sorozatszámát "Ser. No."**. A termék kód és a sorozatszám a kemence hátulján található ADATTÁBLÁN olvasható.

PÓTALKATRÉSZEK

A termék javításához csak jóváhagyott alkatrészeket szabad használni. Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Qfix munkatársaival a +1 484-720-6054 telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a techsupport@Qfix.com címre.

HIBAELHÁRÍTÁS

A DIGITÁLIS KEMENCE VEZÉRLŐPANELE

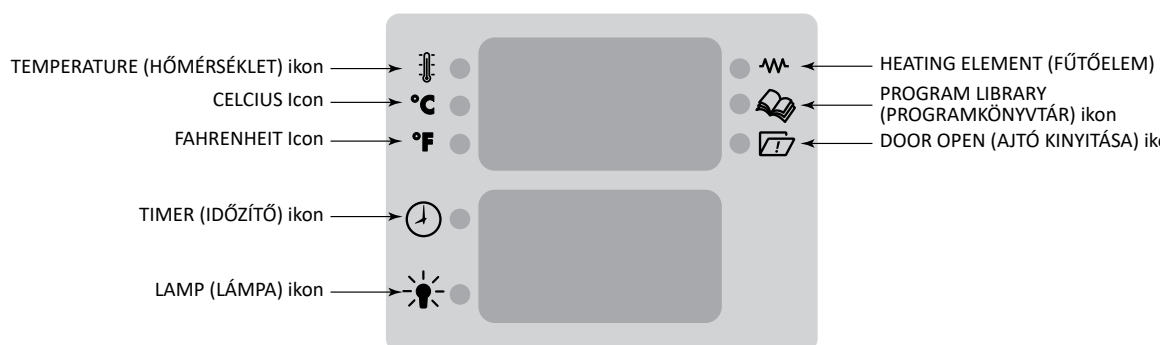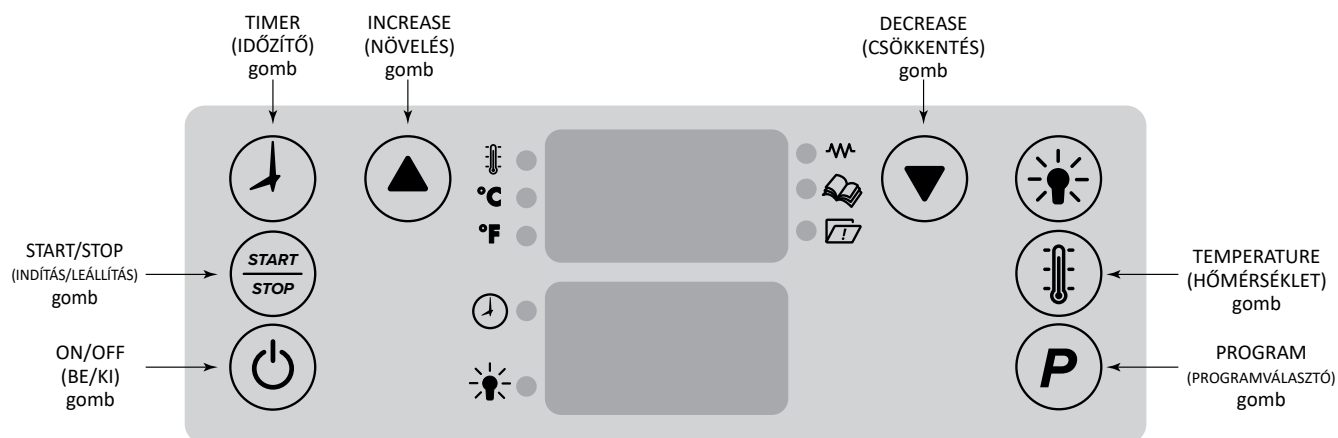

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A KEMENCE HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

! MEGJEGYZÉS ! A kemence első használata előtt egy tesztciklus végrehajtására van szükség. A tesztciklus végrehajtásához olvassa el a **KEMENCE ELSŐ HASZNÁLATA** című fejezetet, és kövesse az abban foglalt utasításokat.

Minden használat előtt végezze el a kemence és a kábelek ellenőrzését.

! FIGYELEM ! OLVASSA EL A HASZNÁLT TERMOPLASZTIKUS ANYAGHOZ TARTOZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT VAGY TERMÉKÚTMUTATÓT, VALAMINT A FELHASZNÁLÓI KÉZIÖNYVET. TARTSA BE A TERMOPLASZTIKUS ANYAG FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÉBEN TALÁLHATÓ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST, ÓVINTÉZKEDÉST ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

A kemence bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot. Olvassa el a Manuális módhoz vagy a Program módhoz tartozó utasításokat.

MANUÁLIS MÓD

Amikor a Programjelző (P01, P02 stb.) már nem villog, a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg az INCREASE (NÖVELES) vagy a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombot.

! MEGJEGYZÉS ! A TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) ikon mellett található fényjelzés villogni kezd.

Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot. A TIMER (IDŐZÍTŐ) ikon mellett található fényjelzés villogni kezd. A kívánt melegítési idő beállításához nyomja meg az INCREASE (NÖVELES) vagy a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombot.

Az előmelegítési ciklus megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. A kijelzőn villogni kezd a "PrH" jelzés, amely az előmelegítési ciklus megkezdését jelzi. Ugorjon a "Preheat Cycle (előmelegítési ciklus)" fejezetre.

! MEGJEGYZÉS ! A hőmérséklet módosítása előtt győződjön meg arról, hogy a TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) ikon melletti lámpa villog. A melegítési hőmérséklet módosítása előtt győződjön meg arról, hogy a TIMER (IDŐZÍTŐ) ikon melletti lámpa villog.

PROGRAM MÓD

Az egyéni programoknak a kemence memóriájába történő bevitelére vonatkozó utasításokat a VII., azaz a KEMENCE BEPROGRAMOZÁSA című fejezetben olvashatja.

Amikor a Programjelző (P01, P02 stb.) villog, a kívánt program kiválasztásához nyomja meg az INCREASE (NÖVELES) vagy a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombot.

Az előmelegítési ciklus megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot.

! MEGJEGYZÉS ! A kijelző a P01 (1. program), P02 (2. program) stb. jelzés villogásával jeleníti meg a legutóbb elmentett programot. Ha a programválasztás előtt a kijelző nem villog, a kívánt program kiválasztásához nyomja meg a "P" gombot, majd használja az INCREASE (NÖVELES) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombokat.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ELŐMELEGÍTÉSI CIKLUS

Az előmelegítési ciklus végén a kemence kijelzőjén az ajtó kinyitásáig a PrH READY (PrH KÉSZ) jelzés lesz látható.

LÁGYÍTÁSI CIKLUS

Az előmelegítési ciklus befejezése és a beállított hőmérséklet elérése után a kemence készen áll a lágyítási folyamat megkezdésére. Helyezze a termoplasztikus maszkot (vagy a bólust) a hálós bélésre. A hálós bélést transzferlapként használva helyezze be a termoplasztikus maszkot (vagy a bólust) a kemencében található rácsra.

! MEGJEGYZÉS ! A maszkkeret alsó szélének a kemence hátsó oldala felé kell mutatnia. A maszk alsó szélének a kemencerács hátsó széléhez kell igazodnia. A maszk fejrészét a kemence elülső részén található kemencerács elülső széléhez kell igazítani.

Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. Az időzítő megkezdzi a visszaszámlálást.

! MEGJEGYZÉS ! A lágyítási ciklus alatt a TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizheti a kamra aktuális hőmérsékletét.

Ha az ajtó a lágyítási folyamat közben kinyitásra kerül, az időzítő leállítja a visszaszámlálást. Az ajtó becsukását követően az időzítő újraindul. A lágyítási ciklus alatt az időzítő a TIMER (IDŐZÍTŐ) gomb használatával állítható be, a kívánt időtartam megadásához az INCREASE (NÖVEELÉS) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombokat kell használni.

A lágyítási ciklus alatt a kívánt hőmérsékleti érték az INCREASE (NÖVEELÉS) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombok használatával adható meg.

A kemence belső terének megvilágításához nyomja meg a LAMP (LÁMPA) gombot. A lámpa 60 másodpercig világít.

A beprogramozott melegítési időtartam végén a kemence az ajtó kinyitásáig három alkalommal, majd 60 másodpercenként egyszer ad hangjelzést. Az ajtó becsukása után a kemence megtartja a megadott hőmérsékleti értéket.

Az előmelegítés után a kemence a megadott hőmérsékletet a legutolsó műveletet után még 2 órán keresztül tartja.

Egy másik termoplasztikus maszk (vagy bólus) a hőmérséklet-megtartási módban történő lágyításához nyissa ki az ajtót, helyezze be a termoplasztikus maszkot (vagy a bólust), csukja be az ajtót, és az új melegítési ciklus elindításához nyomja meg a START/STOP (INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS) gombot. Szükség szerint állítsa be az időt és a hőmérsékletet. Új előmelegítési ciklus elvégzésére nincs szükség.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

MEGJELENÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

A Megjelenítési beállítások személyre szabásához néhány percig tartsa egyidejűleg lenyomva az INCREASE (NÖVELES) és DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombot.

A TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) gomb megnyomásával a következő kategóriák közül választhat:

- Nyelv (angol, francia, német, spanyol, olasz)
- Kilépés
- Kijelző (fényerősség: 1–7 = gyenge-erős)
- Mértékegység (Fahrenheit vagy Celsius)
- PrH (a gyárilag beállított 1°C értéket ne módosítsa)

Ha a kívánt kategória megjelenik a kijelzőn, a paraméterek módosításához nyomja meg a LAMP (LÁMPA) gombot.

A kívánt érték megadásához használja az INCREASE (NÖVELES) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombokat.

Az új értékek elmentéséhez nyomja meg a "P" gombot.

Az összes módosítás befejezése után görgessen az ESCAPE (KILÉPÉS) menüpontra, majd a kilépéshez nyomja meg a "P" gombot.

A KEMENCE BEPROGRAMOZÁSA

A MELEGÍTÉSI CIKLUSOK KÖZÖTTI PROGRAMVÁLTÁS

A melegítési ciklusok között történő programváltáshoz a kemencét az új program kiválasztása előtt ki kell kapcsolni. Például: ha a 01-es program (P01) használatával az A jelű maszk lágyításának folyamata befejeződött, és a kemence hőmegtartó módba kapcsol, a készüléket az ON/OFF (BE/KI) gomb megnyomásával ki kell kapcsolni. Az ON/OFF (BE/KI) gomb ismételt megnyomásával kapcsolja vissza a kemencét. Az új program kiválasztásának folyamatát a VI. fejezetben (A KEMENCE HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK) olvashatja.

PROGRAMOZOTT MELEGÍTÉS

A memóriában kilencvenkilenc (99) program tárolható.

! MEGJEGYZÉS ! Új programok létrehozása és a meglévő programok frissítése csak abban az esetben lehetséges, ha a kemence be van kapcsolva; az ilyen típusú műveletek a melegítési vagy a lágyítási ciklus során nem végezhetők el.

Egy új termoplasztikus anyag lágyítási folyamatának programozása:

Győződjön meg arról, hogy a kemence be van kapcsolva. Nyomja meg a "P" gombot, ekkor a PROGRAM LIBRARY (PROGRAMKÖNYVTÁR) ikon melletti lámpa világítani kezd. A korábban elmentett programokat a PROGRAM LIBRARY (PROGRAMKÖNYVTÁR) ikon mellett található VÖRÖS LED fény jelzi. A szabad helyet ZÖLD LED fény jelzi. A zöld LED megjelenítéséhez az INCREASE (NÖVELES) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombok használatával görgessen a programok között. Amikor a program száma már nem villog, lehetőség van egyéni paraméterekkel rendelkező új program beállítására.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A paraméterek beállítása:

1. Hőmérséklet

Nyomja meg egyszer az INCREASE/DECREASE (NÖVELES/CSÖKKENTÉS) gombot, ekkor a TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) ikon melletti lámpa villogni kezd. A kívánt hőmérséklet beállításához használja az INCREASE/DECREASE (NÖVELES/CSÖKKENTÉS) gombokat. A hőmérséklet csak akkor választható ki, ha a TEMPERATURE (HŐMÉRSÉKLET) ikon mellett található zöld LED villog. A hőmérsékleti tartomány 60°C–80°C (140°F–176°F).

2. Melegítési idő

Nyomja meg a TIMER (IDŐZÍTŐ) gombot. A TIMER (IDŐZÍTŐ) ikon melletti zöld LED villogni kezd. A melegítési idő beállításához használja az INCREASE (NÖVELES) és a (CSÖKKENTÉS) gombokat. A idő csak akkor állítható be, ha a TIMER (IDŐZÍTŐ) ikon mellett található zöld LED villog. A kemence az időt percben méri, az időtartomány 0 ("N") és 97 perc között van, de bármilyen időtartam megadható.

3. A program elmentése:

Tartsa lenyomva a "P" gombot 4 másodpercig. A mentést egy hangjelzés erősíti meg, és a kijelzőn megjelenik a program száma. A kijelzőn megjelenik a NEN jelzés.

Új program létrehozása egy meglévő programból:

A "P" gomb egyszeri megnyomásával válassza ki a módosítani kívánt programot. A PROGRAM LIBRARY (PROGRAMKÖNYVTÁR) ikon melletti lámpa világítani kezd. A kijelzőn villogni kezd a programjelző (pl. P01). A programjelző villogásakor az INCREASE (NÖVELES) és a DECREASE (CSÖKKENTÉS) gombok használatával válassza ki a kívánt melegítési programot. Amikor a programjelző már nem villog, a kijelzőn megjelennek a kiválasztott programhoz tartozó előre elmentett értékek.

Kövesse a "A paraméterek beállítása" című fejezetben található utasításokat. A hőmérséklet és a melegítési idő értékének megadása után tartsa lenyomva a "P" gombot 4 másodpercig. A mentést egy hangjelzés erősíti meg, és a kijelzőn megjelenik a program száma. A kijelzőn megjelenik a NEN jelzés.

A LAMP (LÁMPA) gomb

A kemence ajtajának kinyitásakor a lámpa kigyullad.

A kemence ajtajának becsukásakor a lámpa elalszik.

A LAMP (LÁMPA) gomb megnyomása után a lámpa 60 másodpercig világít.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A KEMENCE AJTAJA

Az ajtó kinyitásakor a TIMER (IDŐZÍTŐ) SZÜNETELTETI a visszaszámlálást. A DOOR OPEN (AJTÓ NYITVA) piros LED fény világítani kezd. Az ajtó becsukásakor az OPEN DOOR (AJTÓ KINYITÁSA) zöld LED fény kezd világítani. A lámpa kialszik.

ÁRAMKIMARADÁS

Ha a melegítési ciklus alatt megszakad az áramellátás, a kemence kikapcsol.

JELZÉSEK ÉS RIASZTÁSOK

A riasztások a kijelzőn jelennek meg.

A folyamatos hangjelzés valamilyen rendellenességre figyelmeztet. A hangjelzés a START/STOP (INDÍTÁS/ LEÁLLÍTÁS) gomb megnyomásával állítható le.

ER1 Kamraszonda riasztás

- A kamraszonda meghibásodása
- A kemence kikapcsol, a lámpa azonban égve marad.

ER2 Kemence biztonsági termosztát riasztás

- A kemence melegítési funkciójának meghibásodása
- A kemence kikapcsol

ER4 Gomb meghibásodáson

- Egy funkciógomb meghibásodása

ALKATRÉSZLISTA

RT-2075-110

Cikkszám	Leírás
3002143	Előlap PF8003D Qfix
3002144	Pótalkatrész készlet tömítés
3002145	Pótalkatrész készlet led lámpa 5w 120v g9
3002146	Pótalkatrész készlet motor 110-120v 50/60hz 80w ul
3002147	Pótalkatrész készlet fűtőelem ø186 700w 1GIK3R279 110v
3002148	Pótalkatrész készlet vezérlőpanel
3002149	Pótalkatrész készlet kamrai hőmérsékletszonda
3002150	Pótalkatrész készlet ventilátor
3002151	Pótalkatrész készlet kapcsolótábla el. 824/524 mikr. M023, 110 v
3002152	Pótalkatrész készlet termosztát kézi visszaállítás TY62R 150c
3002153	Pótalkatrész készlet ajtó mikrokapcsoló
3002174	Külső üveg 110 V-os és 220 V-os kemencékhez
3002413	110 V sütőbiztosíték időkésleltetés 250 V váltakozó áram 5 x 20 mm üveg FST 5 x 20 sorozat
3002263	Tápkábel 110 V-os kemencéhez
3002265	Rapid Heat kemenceajtó régi stílusú zsanérral
3002266	Rapid Heat kemenceajtó új stílusú zsanérral

ALKATRÉSZLISTA

RT-2075-220

Cikkszám	Leírás
3002143	Előlap PF8003D Qfix
3002144	Pótalkatrész készlet tömítés
3002154	Pótalkatrész készlet lámpa 5w 230v g9
3002155	Pótalkatrész készlet motor 200-240v 50/60hz 80w ul
3002156	Pótalkatrész készlet fűtőelem ø186 700w 1GIK3R279 230v
3002148	Pótalkatrész készlet vezérlőpanel
3002149	Pótalkatrész készlet kamrai hőmérsékletszonda
3002150	Pótalkatrész készlet ventilátor
3002157	Pótalkatrész készlet kapcsolótábla el. 824/524 mikr. M023, 220v
3002152	Pótalkatrész készlet termosztát kézi visszaállítás TY62R 150c
3002153	Pótalkatrész készlet ajtó mikrokapcsoló
3002174	Külső üveg 110 V-os és 220 V-os kemencékhez
3002251	Hengeres biztosíték 2200 V-os kemencéhez Késleltető 8 A 250 VAC 5x20 mm kerámia patron
3002264	Tápkábel 220 V-os kemencéhez
3002265	Rapid Heat kemenceajtó régi stílusú zsanérral
3002266	Rapid Heat kemenceajtó új stílusú zsanérral



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

RapidHeat is a trademark of Qfix.

2007856_HU_B
2022-11