



positioning
patients for life.®

ADDENDUM

RT-5100-01

Symphony®-standaardtransferapparaat


Gebruiksaanwijzing bij kantelen

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Dit addendum is uitsluitend van toepassing bij gebruik van het Symphony®-standaardtransferapparaat bij een gekantelde toepassing. De inhoud is een aanvulling op de producthandleiding en gebruiksaanwijzing van het Symphony-standaardtransferapparaat 2007235. Lees en begrijp voor gebruik de producthandleiding en gebruiksaanwijzing alsook dit addendum.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Raadpleeg de producthandleiding en gebruiksaanwijzing van het Symphony-standaardtransferapparaat (onderdeelnummer 2007235) of Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.

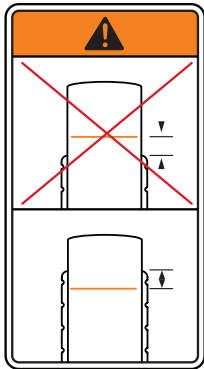

KANTELWAARSCHUWING

! WAARSCHUWING ! LAAT HET SYMPHONY-STANDAARDTRANSFER-APPARAAT NIET UITSTEKEN VOORBIJ DE ORANJE KANTELIJN AAN HET UITEINDE VAN HET STEUNAPPARAAT. DIT KAN LETSEL BIJ DE PATIËNT OF HET PERSONEEL VEROOZAKEN.

Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt wanneer de patiënt er op- of afstapt. Gebruik van de juiste verdeeladapter wordt van harte aangeraden.



OF



NIET BETREDEN-LIJN

Staan of zitten op het transferapparaat voorbij de kantellijn kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.

AANVULLENDE VOORZORGSMATREGELEN

! WAARSCHUWING ! HET SYMPHONY-STANDAARDTRANSFERAPPARAAT MAG NIET GEBRUIKT WORDEN IN EEN GEKANTELE POSITIE TENZIJ DE KANTELIJN EN DE BIJBEHORENDE WAARSCHUWINGSLABELS AANWEZIG ZIJN OP HET APPARAAT.

! WAARSCHUWING ! DE PATIËNT MOET MET HET HOOFD RICHTING OF OP HET KANTELENDE EIND GEPOSITIONEERD ZIJN WANNEER HET APPARAAT GEKANTELD WORDT. DE PATIËNT MAG NIET OVER HET UITEINDE VAN HET APPARAAT UITSTEKEN.

! WAARSCHUWING ! ZORG ERVOOR DAT HET ONDERLIGGENDE STEUNAPPARAAT OF ONTVANGSTOPPERVLAK DE GEKANTELE BELASTING VAN HET TRANSFERAPPARAAT, DE PATIËNT EN ENIGE AANVULLENDE APPARATUUR KAN DRAGEN.

AANVULLENDE INSTRUCTIES

1. Plaats het transferapparaat op het steunapparaat in gekantelde positie. Zorg ervoor dat het niet verder dan de aangegeven lijn wordt gekanteld.

! WAARSCHUWING ! HET TRANSFERAPPARAAT MOET IN POSITIE ZIJN VOORDAT DE PATIËNT PLAATSNEEMT. PROBEER EEN PATIËNT NIET OVER TE DRAGEN OP OF VAN DE GEKANTELE POSITIE MET BEHULP VAN HET TRANSFERAPPARAAT.

2. Help de patiënt op het transferapparaat door aan te geven dat deze dichtbij het midden van het apparaat kan gaan zitten. Draai de patiënt in rugligging met het hoofd richting of op het gekantelde eind. Raadpleeg de WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN en AANVULLENDE VOORZORGSMATREGELEN.
3. Om de patiënt van het apparaat te helpen, helpt u deze rechtop te gaan zitten op het niet-gekantelde deel van het apparaat en daarna op de vloer te stappen.