



ANEXĂ

RT-5100-01

Dispozitiv de transfer standard Symphony®


Instrucțiuni de utilizare la fixarea în consolă

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Această anexă se aplică în mod specific utilizării dispozitivului de transfer standard Symphony® în cadrul fixării în consolă. Conținutul suplimentează ghidul produsului și manualul de utilizare pentru dispozitivul de transfer Symphony 2007235. Înainte de utilizare, în plus față de această anexă, citiți și înțelegeți ghidul produsului și manualul de utilizare.

ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI SUPLIMENTARE

Consultați ghidul produsului și manualul de utilizare pentru dispozitivul de transfer standard Symphony (cod de articol 2007235) sau Qfix.com pentru o listă de simboluri și definițiile a acestora.

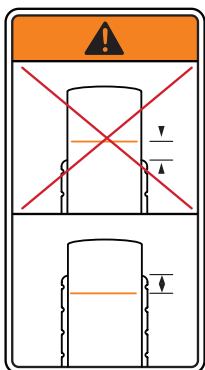

AVERTIZARE LEGATĂ DE CONSOLĂ

! AVERTIZARE ! NU EXTINDEȚI DISPOZITIVUL DE TRANSFER STANDARD SYMPHONY ÎN AFARA CAPĂTULUI DISPOZITIVULUI DE SUSȚINERE, DINCOLO DE LINIA PORTOCALIE A CONSOLEI. ACEST LUCRU POATE PROVOCA VĂTĂMĂRI CORPORALE PACIENTULUI SAU OPERATORULUI.

Asigurați-vă că dispozitivul nu se mișcă atunci când pacientul este încărcat sau descărcat. Este recomandată cu tărie folosirea unui adaptor de indexare.



SAU



LINIA „NU PĂȘIȚI AICI”

Staționarea sau așezarea pe dispozitivul de transfer dincolo de linia consolei poate deteriora dispozitivul sau poate provoca vătămări corporale.

MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLIMENTARE

! AVERTIZARE ! DISPOZITIVUL DE TRANSFER STANDARD SYMPHONY NU TREBUIE SĂ FIE FOLOSIT CU FIXARE ÎN CONSOLĂ DECÂT DACĂ LINIA PENTRU CONSOLĂ ȘI ETICHETELE DE AVERTIZARE ASOCIATE SUNT PREZENTE PE DISPOZITIV.

! AVERTIZARE ! ATUNCI CÂND FOLOSIȚI DISPOZITIVUL FIXAT ÎN CONSOLĂ, PACIENTUL TREBUIE SĂ FIE ORIENTAT CU CAPUL SPRE SAU PE CAPĂTUL CONSOLEI. PACIENTUL NU TREBUIE SĂ TREACĂ DE CAPĂTUL DISPOZITIVULUI.

! AVERTIZARE ! ASIGURAȚI-VĂ CĂ DISPOZITIVUL DE SUSȚINERE DE BAZĂ SAU SUPRAFAȚA RECEPTOARE ESTE CAPABILĂ SĂ SUSȚINĂ SĂRACINA ÎN CONSOLĂ A DISPOZITIVULUI DE TRANSFER, A PACIENTULUI ȘI A ORICĂRUI ECHIPAMENT SUPLIMENTAR.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

1. Așezați dispozitivul de transfer pe dispozitivul de susținere în poziție în consolă, având grijă ca linia indicată să nu fie depășită de consolă.

! AVERTIZARE ! DISPOZITIVUL DE TRANSFER TREBUIE SĂ FIE ÎN POZIȚIE ÎNAINTĂ DE ÎNCĂRCAREA PACIENTULUI. NU ÎNCERCAȚI SĂ EFECTUAȚI UN TRANSFER AL PACIENTULUI ÎN SAU DIN POZIȚIA ÎN CONSOLĂ FOLOSIND DISPOZITIVUL DE TRANSFER.

2. Asistați pacientul la poziționarea pe dispozitivul de transfer, ghidându-l să stea aproape de mijlocul dispozitivului. Rotiți pacientul în poziție culcat pe spate cu capul spre sau pe capătul consolei. Consultați ETICHETELE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERILE ȘI MĂSURILE DE PRECAUȚIE SUPLIMENTARE.
3. Pentru a descărca pacientul, cereți-i să se ridice pe partea susținută, care nu se află în consolă a dispozitivului și apoi să coboare pe podea.