



positioning
patients for life.®

TERMÉKÚTMUTATÓ ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RT-4546-03

Portrait™ csak fejen alkalmazható maszkadapter
Access™ Supine Mellkas eszközhöz

RT-4546-04

Portrait™ fejen és vállon alkalmazható maszkadapter
Access™ Supine Mellkas eszközhöz

RT-4546-05

Opti-Handle™ termoplasztikus adapter
Access™ Supine Mellkas eszközhöz

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉSEK

! FIGYELEM! AZ ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA NEM MEGENGEDETT. AMENNYIBEN AZ ESZKÖZ BÁRMELYIK RÉSZÉ TÚLSÁGOSAN NAGY TERHELÉST KAP, SÉRÜLTNEK TŰNIK VAGY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, AZONNAL HAGYJA ABBA AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁT, ÉS VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A QFIX MUNKATÁRSAIVAL A +1 484-720-6054 TELEFONSZÁMON, VAGY ÍRJON E-MAILT A TECHSUPPORT@QFIX.COM CÍMRE.

A KEZELŐNYALÁB GYENGÜLÉSE

Bármilyen eszközzel történő kezelés megnövekedett bőrdózist eredményez. A termoplasztikus anyagból készült maszkok csillapítják a sugárterápia során használt nyaláb erejét, és növelik a bőrdózist. A tervezés és a kezelés során figyelembe kell venni a gyengülés mértékét és a megnövekedett bőrdózist.

MR BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

MR A nem klinikai tesztek igazolták, hogy az **RT-4546-04 Portrait™** fej és nyak maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, az **RT-4546-03 Portrait™** fej maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, valamint az **RT-4546-05 Opti-Handle™** termoplasztikus adapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz MR-vizsgálatok során is alkalmazható. Az **RT-4546-04 Portrait™** fej és nyak maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, az **RT-4546-03 Portrait™** fej maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, valamint az **RT-4546-05 Opti-Handle™** termoplasztikus adapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz MR-környezetben is használható.

- Az **RT-4546-04 Portrait™** fej és nyak maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, az **RT-4546-03 Portrait™** fej maszkadapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz, valamint az **RT-4546-05 Opti-Handle™** termoplasztikus adapter **Access™** Supine Mellkas eszközhöz az **Access™** Supine (**RT-4546MRI**) MR-vizsgálatok során is alkalmazható verziójával együtt, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályok betartása mellett használható.
- Az **Access™** Supine (**RT-4546MRI**) MR-vizsgálatok során is alkalmazható verzióján a következő szimbólum látható:



FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK ÉS LEÍRÁSOK

A szimbólumok és a definícióik listáját a Qfix.com oldalon találja.





MR-VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉHEZ IS HASZNÁLHATÓ

A termék bármilyen MR-környezetnek kitéhető, az ilyen típusú használatnak nincsenek ismert veszélyei. Az MR-környezetben használható termékek elektromos vezetőképességgel nem rendelkező, nem fémes és nem mágneses anyagokból készülnek.




A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS

Csak fejre

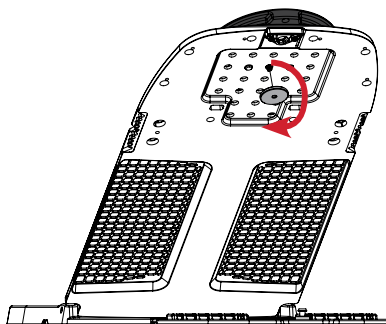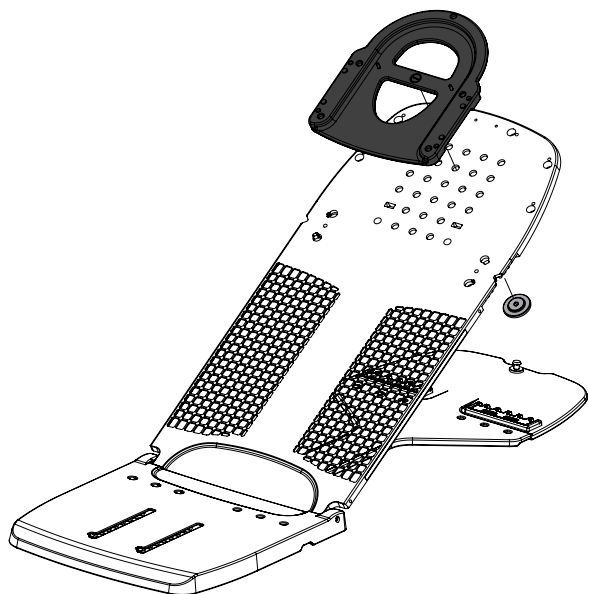

Fejre és vállra

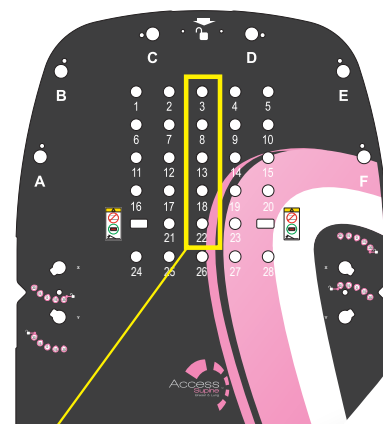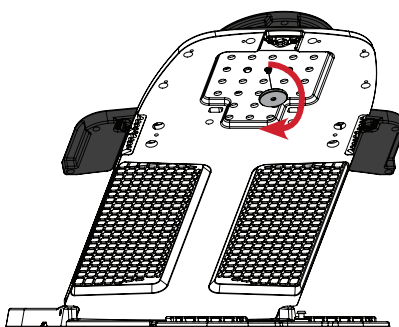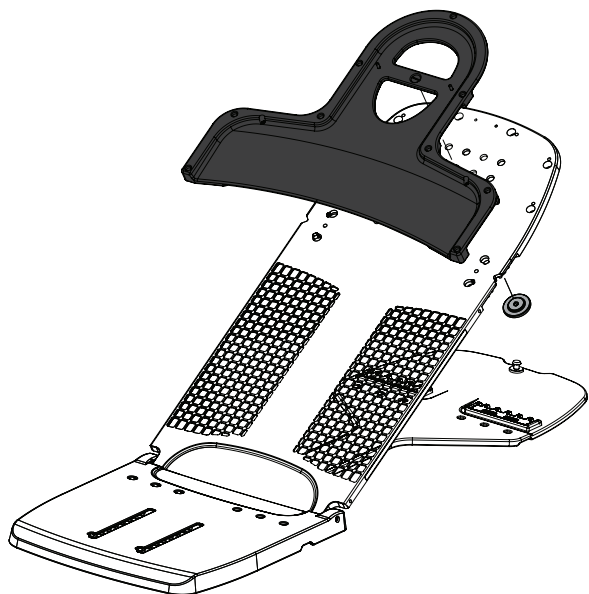


Rögzítse a Portrait™ maszkadapert az Access™ Supine eszközhöz a 3., a 8., a 13., a 18. vagy 22. számú furat használatával.


A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

AZ ELMOZDULÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉG ESETÉN VÉGEZZEN KIIGAZÍTÁST

A meghúzáshoz csavarja el

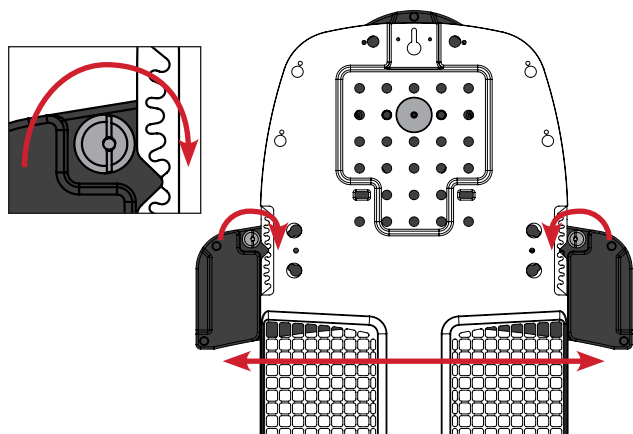



Lezárva

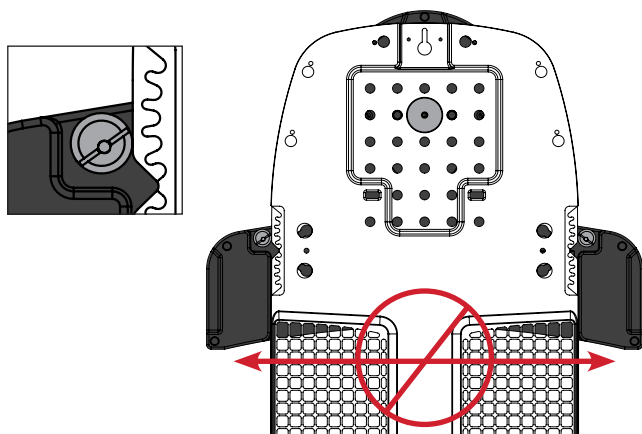



A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ELTÁVOLÍTÁS

Csak fejre

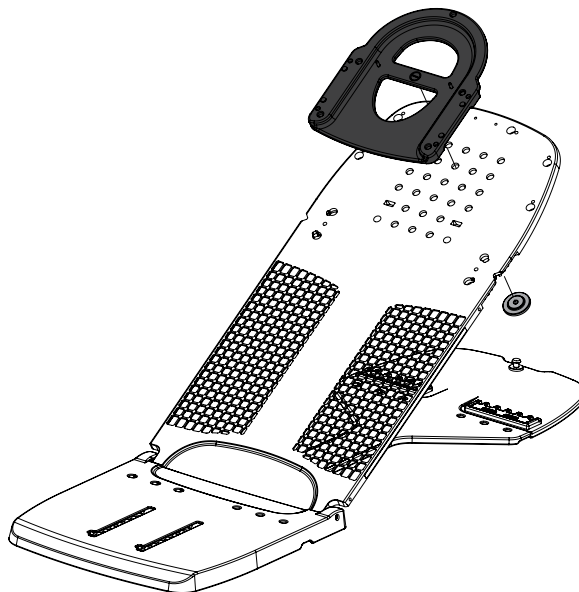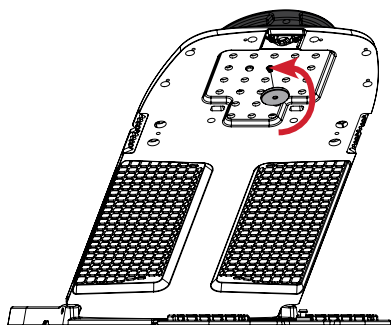

Fejre és vállra

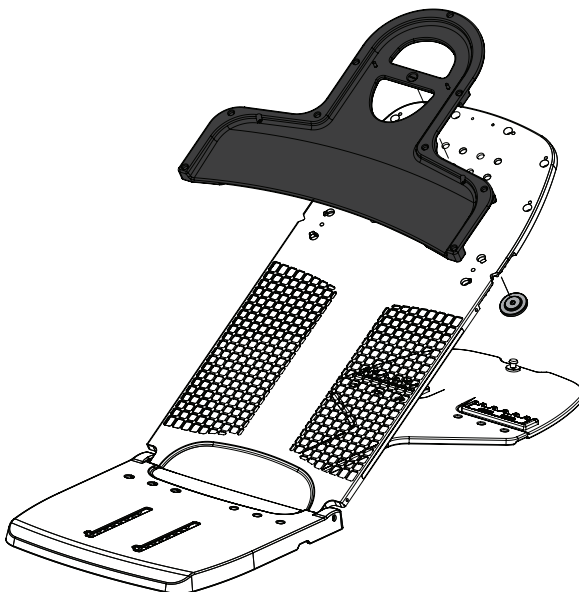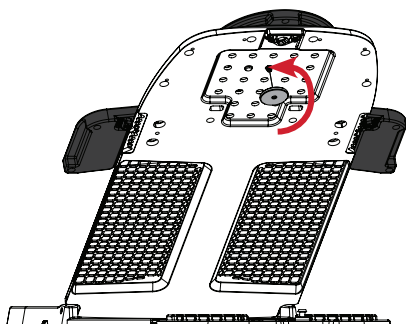


A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK


BEÁLLÍTÁS

Opti-Handle™ termoplasztikus adapter


1. lépés

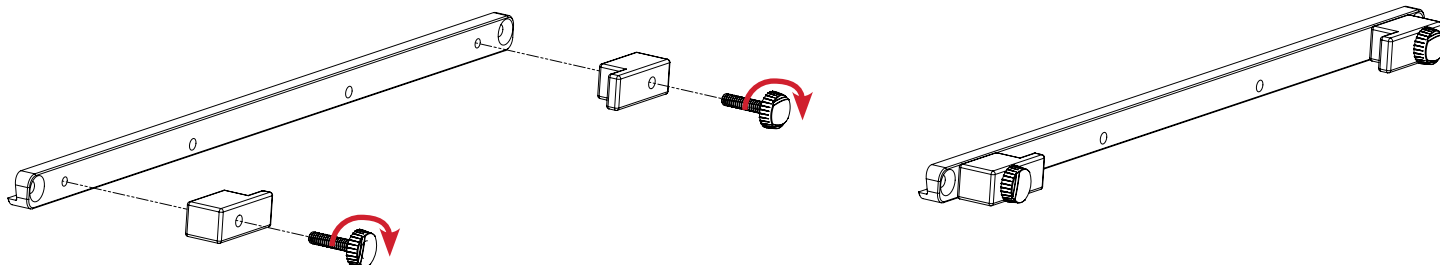

2. lépés

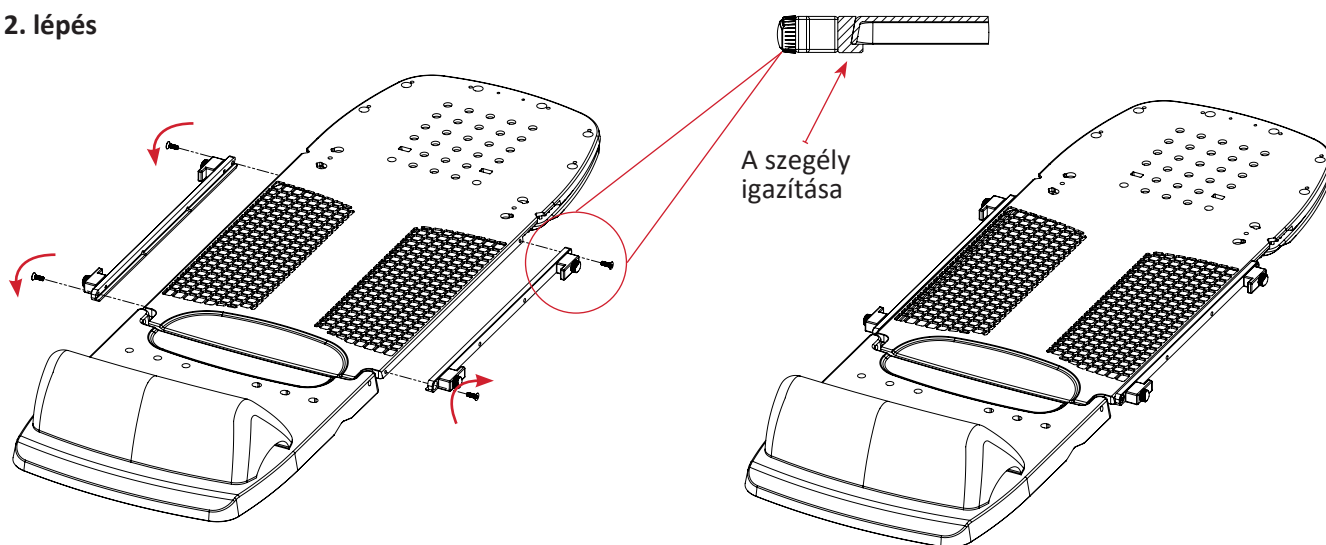

3. lépés

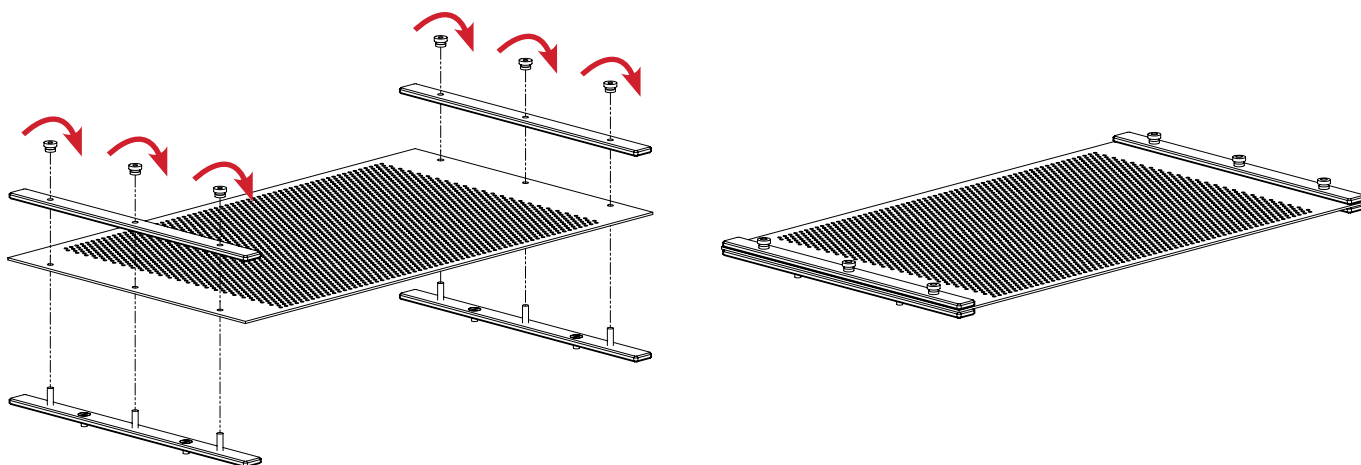

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS


4. lépés

Helyezze megfelelő pozícióba a páciens az Access Supine Mellkas eszközön.

! MEGJEGYZÉS! Az Access Supine (P/N 2004394) használatára vonatkozó utasításokat, a termékjellemzőket, a specifikációkat, a figyelmeztetéseket, az óvintézkedéseket és egyéb általános óvintézkedéseket az eszközhöz tartozó terméktűtmutató és felhasználói kézikönyv tartalmazza.

Végezze el a termoplasztikus anyag (RT-1783P3) lágyítását a mellékelt Opti-Handles (RT-4454-14) használatával.

A termoplasztikus anyag mindkét oldalán végezze el a 4A, a 4B, a 4C és a 4D lépést.

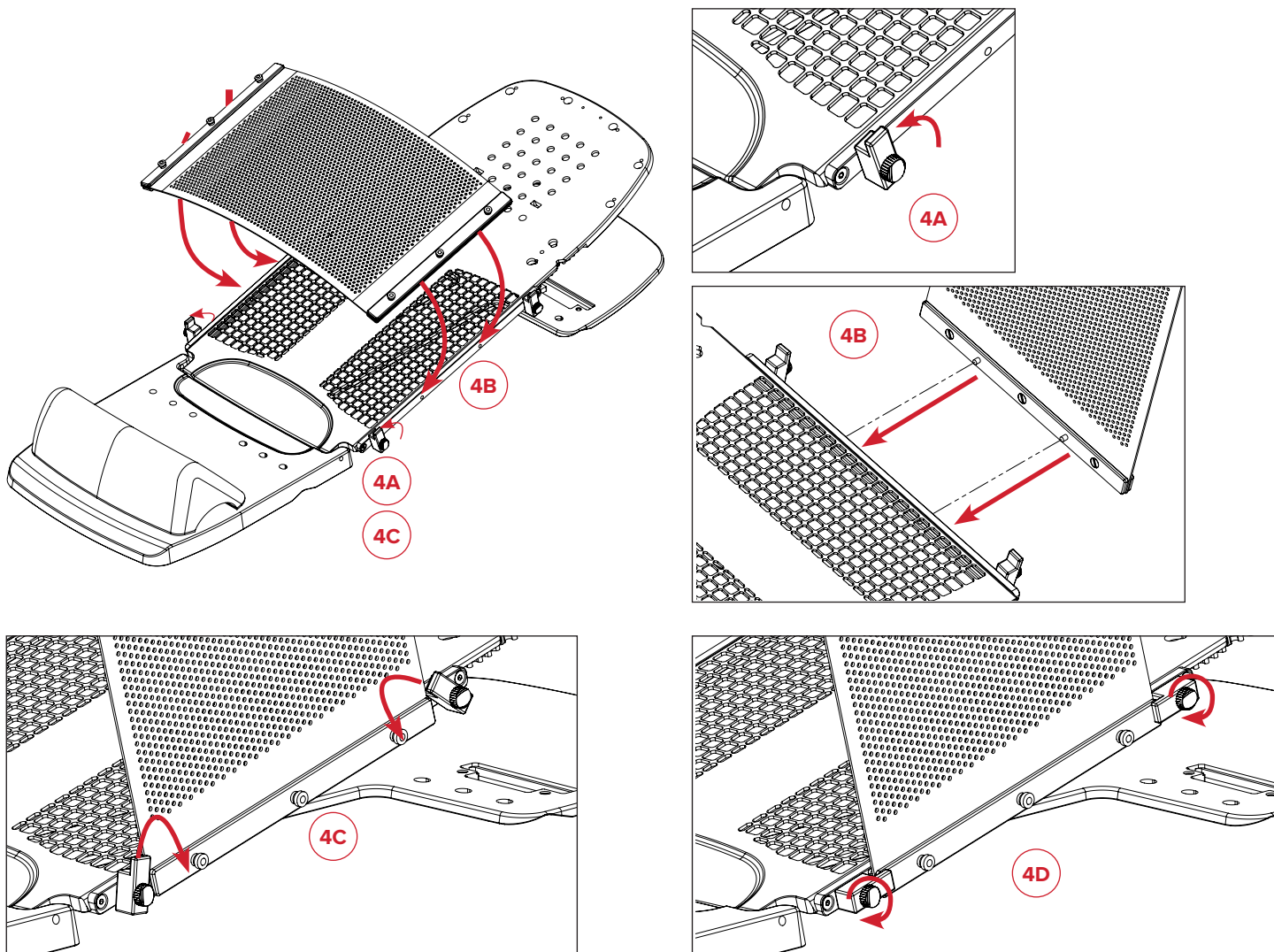

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ELTÁVOLÍTÁS





Opti-Handle™ termoplasztikus adapter

1. lépés

A termoplasztikus anyag mindkét oldalán végezze el az 1A, az 1B, és az 1C lépést.

Vegye le a páciens az Access Supine Mellkas eszkösről.


! MEGJEGYZÉS! Az Access Supine (P/N 2004394) használatára vonatkozó utasításokat, a termékjellemzőket, a specifikációkat, a figyelmeztetéseket, az óvintézkedéseket és egyéb általános óvintézkedéseket az eszközhöz tartozó termékútmutató és felhasználói kézikönyv tartalmazza.

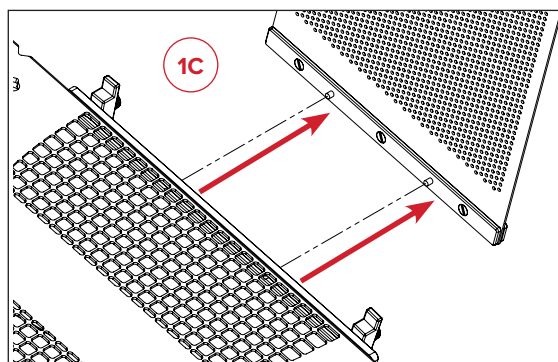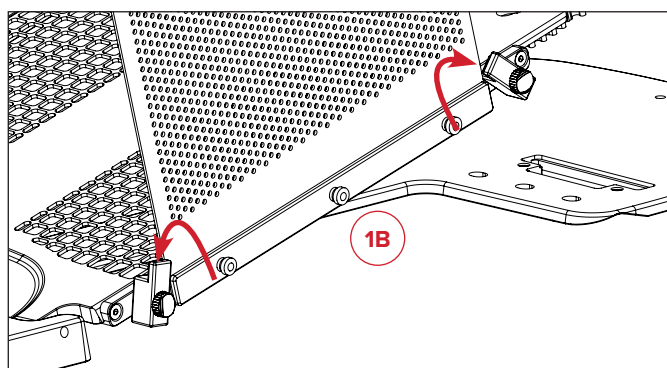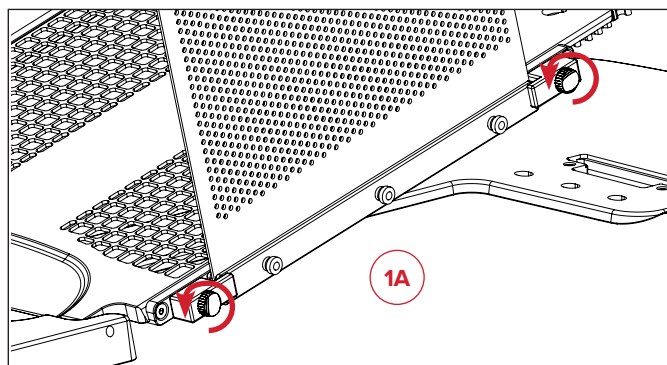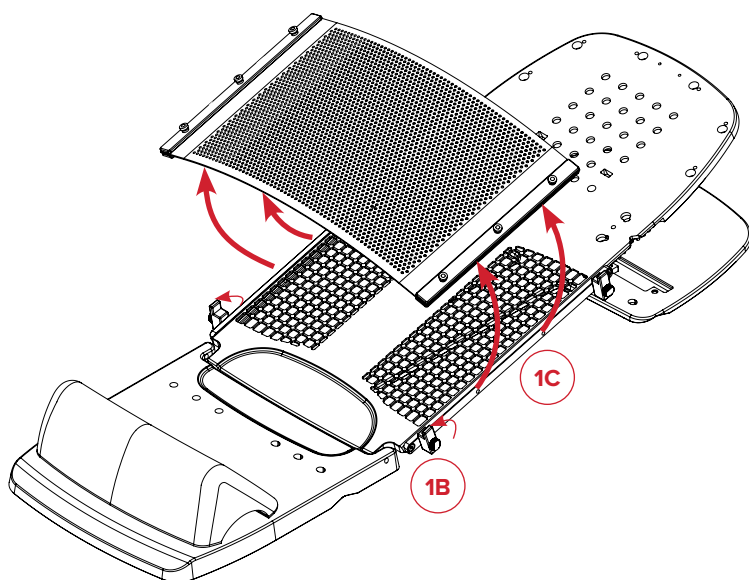



A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

ELTÁVOLÍTÁS

2. lépés

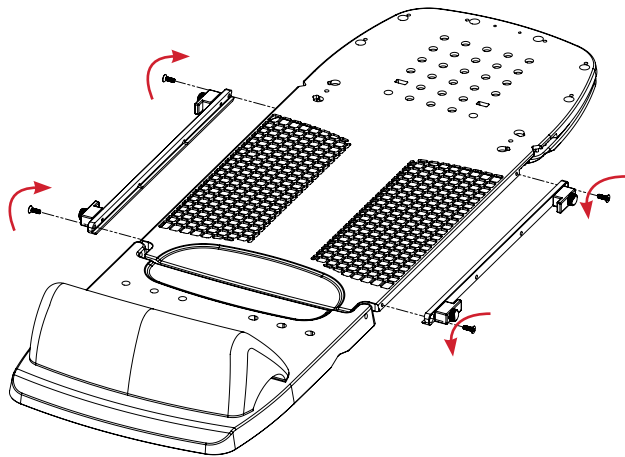

3. lépés

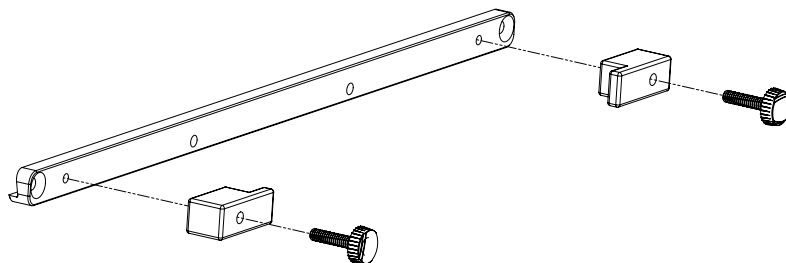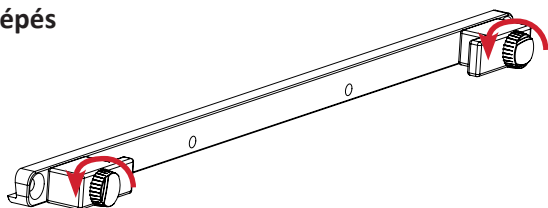

ALKATRÉSZLISTA

RT-4546-03 ÉS RT-4546-04

A Portrait™ S-keret maszkokkal kompatibilis

RT-4546-05

Az RT-1783P3 eszközzel és az Aquaplast RT® lappal (12" x 18", 2,4 mm) kompatibilis; Perf

Az RT-4454-14 eszközzel (35,36 cm, 14 hüvelyk) és az Opti-Handles eszközzel kompatibilis; 2 darabos készlet



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

 +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

 sales@Qfix.com