



positioning
patients for life.®

附件

RT-4546AA 和 RT-4546AW

臂部和腕部支撑

适用于 *Access™ Supine*





<table><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>		EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 484-720-6053 www.Qfix.com
EC	REP				

产品名称：人体定位袋
医疗器械备案号：20150038

Access 是 Qfix 的商标。


一般注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分承受过大载荷、出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6053 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

！警告！请勿让患者使用臂部和腕部支撑调整位置。

！警告！切勿通过握住臂部支撑或腕部支撑架来抬起或搬运装置。

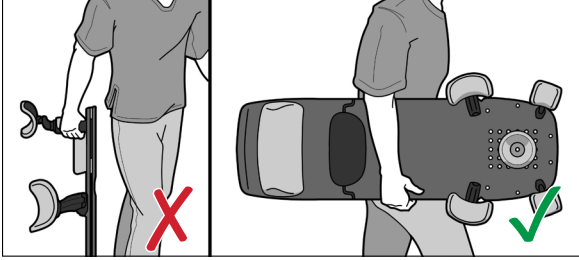

夹伤危险区

- 调节臂部支撑或腕部支撑高度时可能会出现夹伤危险区。
- 调节臂部支撑或腕部支撑角度时可能会出现夹伤危险区。

操作说明

设置

臂部支撑

1. 要连接臂部支撑, 请拉起旋转操纵杆并插入两个位置 (标有 "X" 和 "Y") 中的一个。(图 1)
2. 要调节臂部支撑的旋转, 请拉起旋转操纵杆, 并将臂部支撑旋转至所需角度然后释放。(图 2 和 3)
3. 要调节高度, 推起臂部支撑, 其将通过棘轮固定到位。(图 4)
4. 要降低臂部支撑, 按下按钮将外罩沿底座滑动到所需位置。(图 5)
5. 要调节臂部的长度, 按下位于支撑垫下方的按钮并沿着臂部进行滑动, 在所需位置释放按钮。(图 6, 7 和 8)

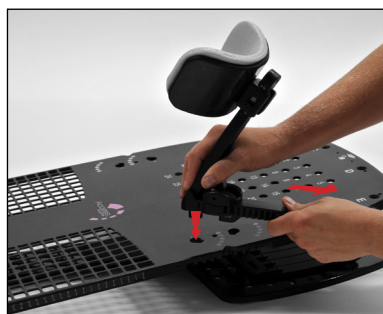


图 1

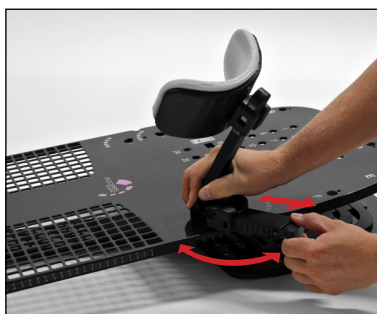


图 2

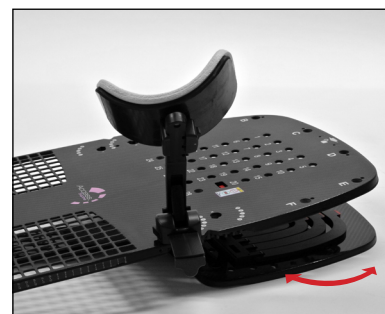


图 3



图 4

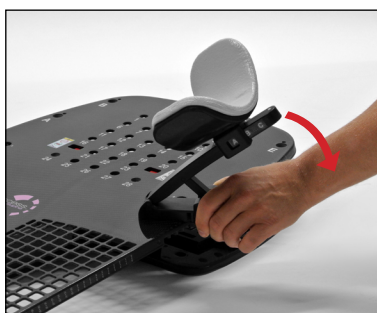


图 5



图 6



图 7



图 8

操作说明

设置

腕部支撑

1. 要连接腕部支撑, 请将腕部支撑底部的两个短桩与患者表面相应的两个孔对齐。(图 9)
2. 顺时针转动腕部支撑的下部, 直至其锁定到位。(图 10)
3. 要重新定位腕部支撑, 逆时针转动旋松旋钮。(图 11)
4. 旋转上部至所需的位置, 然后顺时针旋紧旋钮。(图 12)
5. 要重新放置于一个不同的位置, 逆时针转动腕部支撑的底部, 直至解锁, 然后拆卸腕部支撑并重复步骤 1-2。



图 9

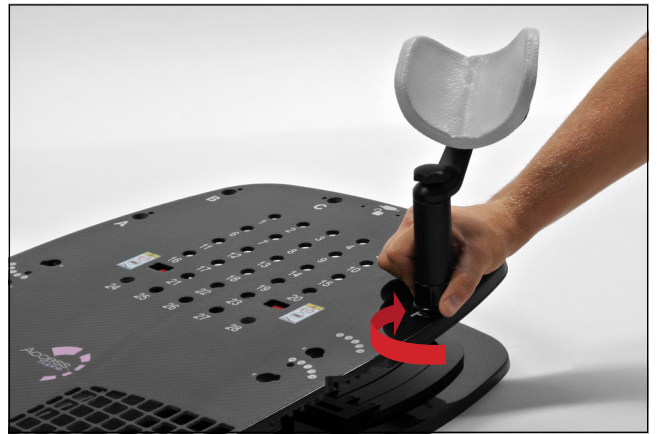


图 10

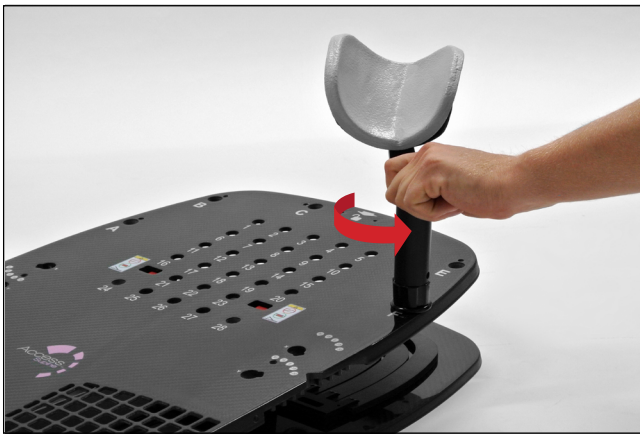


图 11



图 12

操作说明

拆卸

RT-4546AA — 臂部支撑

1. 拉动旋转操纵杆, 将臂部支撑旋转至解锁位置。
2. 拉动旋转操纵杆的同时, 将臂部支撑抬离定位孔。

RT-4546AW — 腕部支撑

1. 逆时针转动腕部支撑的底部, 直至解锁,
2. 从定位孔中抬起腕部支撑。

部件列表

RT-4546AA — 臂部支撑

- 2005353 – 泡沫臂部杯型环绕衬垫
- 2006857 – O 形环, 1.5" – 内有 10 件

RT-4546AW — 腕部支撑

- 2005386 – 泡沫腕部杯型环绕衬垫

设置表

RT-4546: Access Supine (胸部和肺), RT-4546MRI: Access Supine MR (胸部和肺),
RT-4546-01: Access Supine (胸部), 或 RT-4546-02: 无网格 Access Supine (胸部和肺)

患者姓名:




患者 ID 号:

设置人:

医生:

日期:

注释:

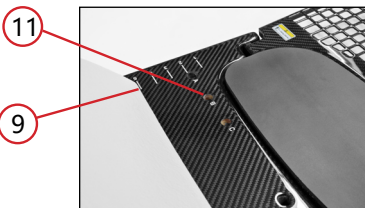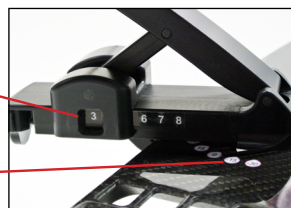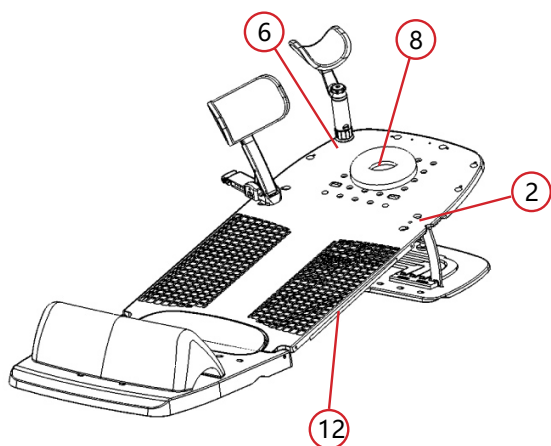

1. 与 ArmShuttle 一同使用: **是** **否** (如果是, 则采用 ArmShuttle 设置页并跳至 8)
2. 臂部支撑位置 (选择一项) — 患者左侧: **X** **Y** 患者右侧: **X** **Y**
3. 臂部支撑的角度 (范围): 患者左侧 患者右侧
4. 臂部支撑高度 (编号 1–8): 患者左侧 患者右侧
5. 臂部支撑长度 (选择一项): 患者左侧: **A** **B** **C** 右侧: **A** **B** **C**
6. 腕部支撑的位置 (从字母 A 到 H): 患者左侧 患者右侧
7. 患者表面角度 (选择一项): **0°** **5°** **7.5°** **10°** **12.5°** **15°** **20°** **25°**
8. 头枕位置 (编号 1–28):
9. 是否使用底部制动装置? **是** **否** 如果选择是, 如何设置? (编号 1–8)
10. 变位至模拟或治疗台? **是** **否** 如果选择是, 则设置变位凹槽
11. 定位杆销钉位置 (选择一项): **A** **B** **C**
12. 侧面标记激光位置:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008087_ZH_C
2021-08