



ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Access™ Supine құрылғысына арналған
RT-4546H-02 бас қойғышының адаптер тақтасы

RT-4552P етпетінен жатуға арналған бас
қойғышы

RT-4552A Silverman істіктеріне арналған бас
қойғыш адаптері

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӨРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 484-720-6054 НӨМІРІ НЕМЕСЕ TECHSUPPORT@QFIX.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША QFIX КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСҢЫЗ.

МРТ ОРТАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

MR Бейклиникалық сынақтар Access™ Supine құрылғысына арналған бас қойғышының адаптер тақтасы, етпетінен жатуға арналған бас қойғышы және Silverman істіктеріне арналған бас қойғыш адаптері МР ортасында қауіпсіз екенін көрсетті.

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын Qfix.com сайтынан қараңыз.




МР ОРТАСЫНДА ҚАУІПСІЗ

Қандай да бір МР ортасының ықпалына ұшырау нәтижесінде ешқандай қауіп байқалмаған элемент. «МР ортасында қауіпсіз» элементтер электр тогын өткізбейтін, металдан жасалмаған және магнитсіз материалдардан тұрады.


ACCESS™ SUPINE ҚҰРЫЛҒЫСЫНА АРНАЛҒАН RT-4546H-02 БАС ҚОЙҒЫШЫНЫҢ АДАПТЕР ТАҚТАСЫ

1 және 2-суреттерде көрсетілгендей, бас жастықшасының адаптер тақтасындағы істіктерді Access™ Supine құрылғысының тиісті саңылауларына кіргізу арқылы бас қойғыш адаптерін Access™ Supine құрылғысына орналастырыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Access™ Supine құрылғысына (P/N 2004394) қатысты пайдалану нұсқауларын, емделушіні баптау парағын, өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларын, ескертулерді және оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Access™ Supine құрылғысының Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

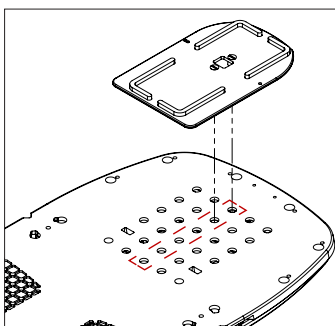

1-сурет

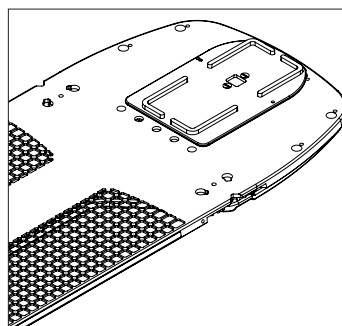


2-сурет

RT-4552A ЖӘНЕ RT-4552P SILVERMAN ІСТІКТЕРІНЕ АРНАЛҒАН БАС ҚОЙҒЫШ АДАПТЕРІ ЖӘНЕ ЕТПЕТІНЕН ЖАТУҒА АРНАЛҒАН БАС ҚОЙҒЫШЫ


3-суретте көрсетілгендей, бас қойғыштың адаптер тақтасындағы саңылауларға құрылғыдағы Silverman істіктерін басу арқылы бас қойғыштың адаптер тақтасын құрылғыға орналастырыңыз.

Етпетінен жатуға арналған бас қойғышты бас қойғыш адаптеріне орналастырыңыз (4-сурет).

! ЕСКЕРТПЕ ! Құрылғыға қатысты пайдалану нұсқауларын, өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларын, ескертулерді, сондай-ақ оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын тиісті құрылғының Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

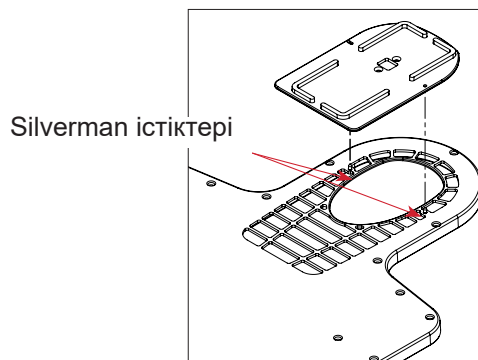

3-сурет

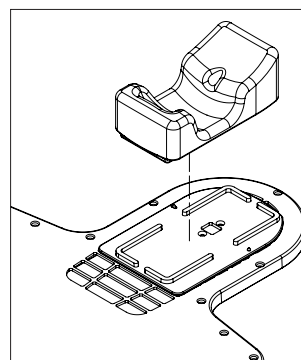

4-сурет



АҚШ-та жасаған өндіруші

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com