



# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

RT-4546H-02, пластина адаптера подушки для головы для Access™ Supine

RT-4552P, подушка для головы Prone

RT-4552A, Адаптер подушки для головы для штифтов Silverman

## ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ЭТО УСТРОЙСТВА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ QFIX ПО ТЕЛЕФОНУ +1 484-720-6054 ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ [TECHSUPPORT@QFIX.COM](mailto:TECHSUPPORT@QFIX.COM).**

## ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МРТ

**MR** Доклинические испытания показали, что пластина адаптера подушки для головы для Access™ Supine, подушка для головы Prone и адаптер подушки для головы для штифтов Silverman безопасны для использования в МР-окружении.

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

Список символов и их значения см. на сайте [Qfix.com](http://Qfix.com).



### БЕЗОПАСНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МР-ОКРУЖЕНИИ

Изделие, которое не представляет никаких известных опасностей в результате воздействия любой МР-среды. Безопасные для использования в МР-окружении изделия состоят из токонепроводящих, немагнитных и немагнитных материалов.

## RT-4546H-02

# ПЛАСТИНА АДАПТЕРА ПОДУШКИ ДЛЯ ГОЛОВЫ ДЛЯ ACCESS™ SUPINE

Поместите адаптер подушки для головы на Access™ Supine как показано на рис. 1 и рис. 2, вставив штифты пластины на пластине адаптера подушки для головы в соответствующие отверстия на устройстве Access™ Supine.

**! ПРИМЕЧАНИЕ !** Инструкции по эксплуатации, инструкции по размещении пациента, характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием устройства Access™ Supine, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Access™ Supine (P/N 2004394).

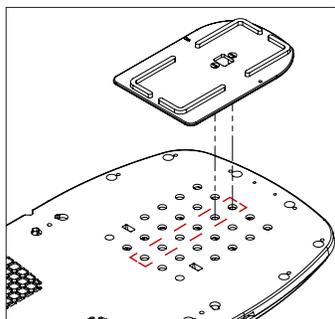


Рис. 1

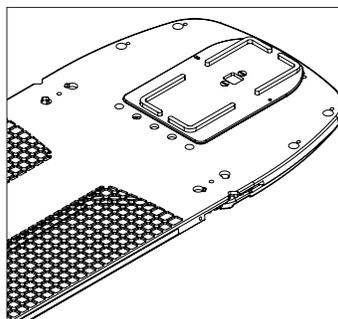


Рис. 2

## RT-4552A И RT-4552P

# АДАПТЕР ПОДУШКИ ДЛЯ ГОЛОВЫ ДЛЯ ШТИФТОВ SILVERMAN И ПОДУШКА ДЛЯ ГОЛОВЫ PRONE

Установите пластину адаптера подушки для головы на устройство, как показано на рис. 3, нажав на пазы на пластине адаптера подушки для головы над штифтами Silverman на устройстве.

Поместите подушку для головы Prone на адаптер подушки для головы (рис. 4).

**! ПРИМЕЧАНИЕ !** Инструкции по эксплуатации, характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием устройства, см. в описании изделия и руководстве пользователя соответствующего устройства.

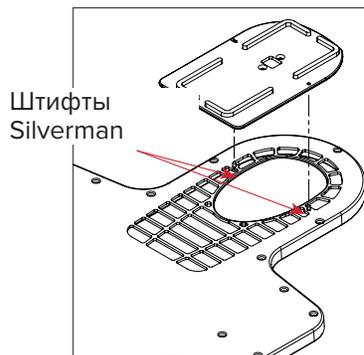


Рис. 3

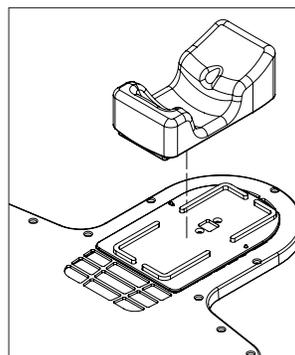


Рис. 4

