



positioning
patients for life.®

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RT-4600-20

Подставка для подушки SRS





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Изготовлено в США компанией Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

Encompass и Integrabite являются товарными знаками компании Qfix.

Fibreplast® является зарегистрированным товарным знаком компании Qfix.

Moldcare® является зарегистрированным товарным знаком компании ALCARE Co., Ltd.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	4
ПОГЛОЩЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛУЧА	4
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МРТ.....	4
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ.....	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	5
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
СНЯТИЕ.....	6

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ЭТО УСТРОЙСТВА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ QFIX ПО ТЕЛЕФОНУ +1 484-720-6054 ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ПОГЛОЩЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛУЧА

Проведение терапии сквозь любое устройство приведет к увеличению дозы облучения кожи. Термопластические маски ослабляют терапевтический пучок излучения и увеличивают его дозу для кожи. Ослабление излучения и увеличение дозы для кожи следует учитывать при планировании и проведении лечения.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МРТ

MR Подставка для подушки SRS (RT-4600-20) безопасна для использования в МР-окружении.

- Подставку для подушки SRS следует использовать с автономным устройством Encompass, обеспечивающим иммобилизацию головы и шеи при проведении МРТ (RT-4600-01-MRI), убедившись перед МРТ в наличии на нем следующего символа:



MR Маски Encompass™ Fibreplast® безопасны для использования в МР-окружении.

MR Система IntegraBite™ безопасна для использования в МР-окружении.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

Список символов и их значения см. на сайте Qfix.com.



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МР-ОКРУЖЕНИИ

Изделие, которое не представляет никаких известных опасностей в результате воздействия любой МР-среды. Безопасные для использования в МР-окружении изделия состоят из токонепроводящих, немагнитных и немагнитных материалов.

! ПРИМЕЧАНИЕ ! Для RT-4600-01-MRI

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Сведения об установке, нагревании и размягчении термопластического материала, характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения и предостережения, а также другие общие меры предосторожности, связанные с использованием устройства Encompass или адаптера SRS, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Encompass™ (P/N 2005445) или в описании изделия и руководстве пользователя адаптера SRS для устройств Portrait™ и S-Type (P/N 2008120).
2. Установите подставку подушки SRS на установочные штифты на устройстве Encompass (рис. 1) или адаптере SRS (рис. 2).
3. Начните формование подушки, например RT-4492U, U-образной подушки для головы MoldCare, в соответствии с инструкциями по применению определенной подушки.
4. Поместите подушку в подставку для подушки SRS.

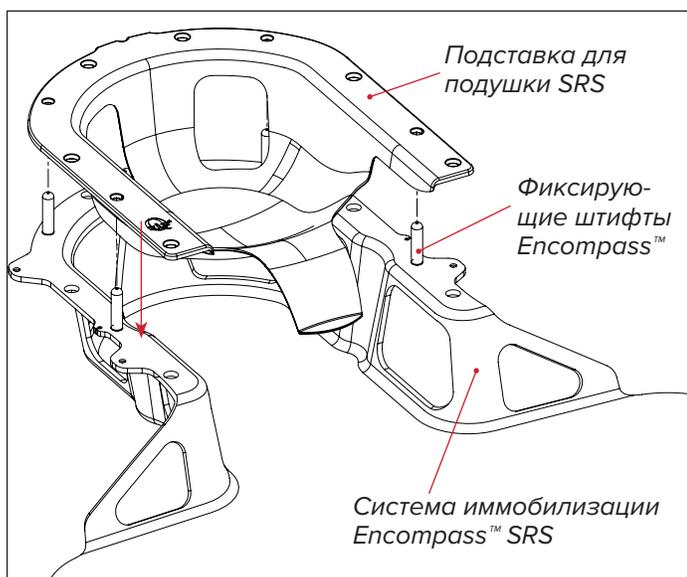


Рис. 1

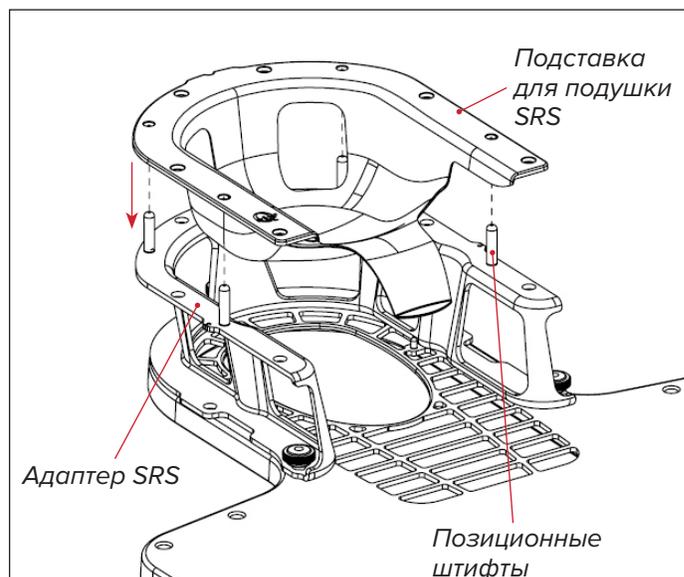


Рис. 2

! ПРИМЕЧАНИЕ ! Подушка должна быть полностью установлена в подставку для подушки SRS и не должна подниматься выше опорного фланца для подушки.

! ВНИМАНИЕ ! ПОДУШКА НЕ ДОЛЖНА СОПРИКАСАТЬСЯ С ТЕРМОПЛАСТИКОМ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЕЕ ПРИЛИПАНИЕ К ТЕРМОПЛАСТИКУ.

5. Уложите пациента на устройство таким образом, чтобы его голова лежала на подушке.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Используя боковые отверстия внутри устройства Encompass™ или адаптера SRS, продолжайте формировать подушку вокруг шеи и головы пациента, чтобы обеспечить комфорт пациента и правильное положение (рис. 3).

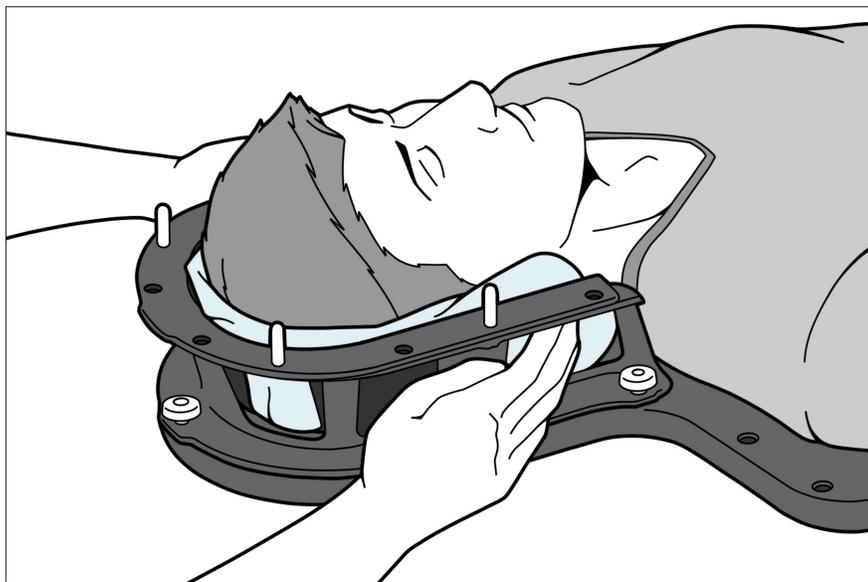


Рис. 3

- Инструкции по нагреванию и формованию передней маски, а также характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием маски Encompass™ Fibreplast®, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Encompass™ (P/N 2005445).

СНЯТИЕ

- Инструкции по снятию маски Encompass™ Fibreplast®, а также характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием маски Encompass™ Fibreplast®, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Encompass™ (P/N 2005445).
- Извлеките пациента из устройства.
- Извлеките подушку.
- Потяните вверх подставку для подушки SRS и снимите ее с устройства Encompass™ или адаптера SRS.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2008208_RU_A
2023-07