

# SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4600-20

Podpora vankúša SRS





|    |     |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC | REP | Advena Limited<br>Tower Business Centre, 2nd Flr<br>Tower Street, Swatar, BKR 4013<br>Malta |  | Vyrobené v USA spoločnosťou<br>Qfix<br>440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA<br>+1 610-268-0585 <a href="http://www.Qfix.com">www.Qfix.com</a> |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Encompass a Integrabite sú ochranné známky spoločnosti Qfix.

Fibreplast® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Qfix.

Moldcare® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ALCARE Co., Ltd.

# OBSAH

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .....        | 4 |
| VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA .....                   | 4 |
| ZOSLABENIE OŽAROVACIEHO ZVÄZKU .....          | 4 |
| INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA MR ..... | 4 |
| VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY .....               | 4 |
| NÁVOD NA POUŽITIE .....                       | 5 |
| NASTAVENIE .....                              | 5 |
| ODSTRÁNENIE .....                             | 6 |

# VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

## VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

**! VAROVANIE ! AKÉKOĽVEK ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOĽVEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.**

## ZOSLABENIE OŽAROVACIEHO ZVÄZKU

Ožarovanie skrz akékoľvek zariadenie povedie k zvýšenej dávke aplikovanej na kožu. Termoplastické masky zoslabia zväzok ionizujúceho žiarenia a zvýšia dávku aplikovanú na kožu. Zoslabenie žiarenia a zvýšenú dávku aplikovanú na kožu treba vziať do úvahy počas plánovania a ožarovania.

## INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA MR

 **Podporu vankúša SRS (RT-4600-20)** je možné bezpečne použiť v prostredí MR.

- **Pred skenovaním pomocou MR treba podporu vankúša SRS použiť so samostatným zariadením Encompass MRI pre hlavu a krk, RT-4600-01-MRI, ktoré je jasne označené nasledovným symbolom:**



 **Masky Encompass™ Fibreplast®** je možné bezpečne používať v prostredí MR.

 **Pomôcku IntegraBite™** je možné bezpečne použiť v prostredí MR.

## VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke [Qfix.com](http://Qfix.com).



### BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR


Predmet, ktorý nepredstavuje žiadne známe riziká pri vystavení akémukoľvek prostrediu MR. Predmety bezpečné v prostredí MR pozostávajú z materiálov, ktoré sú elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.

**! POZNÁMKA ! Pre RT-4600-01-MRI**


# NÁVOD NA POUŽITIE

## NASTAVENIE

1. Pokyny na nastavenie zariadenia, zohriatie a zmäkčenie termoplastu, vlastnosti produktu, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa použitia zariadenia Encompass alebo adaptéra SRS nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie zariadenia Encompass™ (P/N 2005445) alebo v sprievodcovi produktom a návode na použitie adaptéra SRS pre zariadenia Portrait™ a zariadenie typu S (P/N 2008120).
2. Podporu vankúša SRS položte na nastavovacie kolíky na zariadení Encompass (obr. 1) alebo adaptéri SRS (obr. 2).
3. Podľa návodu na použitie konkrétneho vankúša začnite s tvarovaním vankúša. Môže ísť napríklad o vankúš MoldCare pod hlavu v tvare U, RT-4492U.
4. Vankúš umiestnite do podpory vankúša SRS.

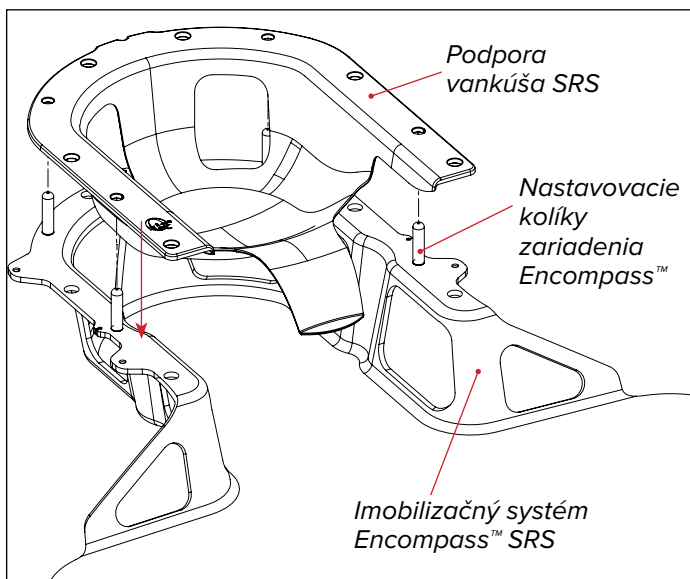

Obrázok 1

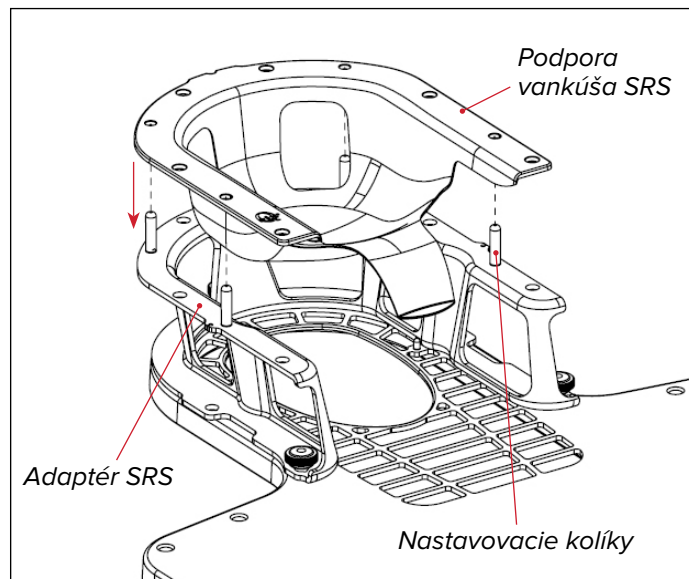

Obrázok 2


**! POZNÁMKA !** V podpore vankúša SRS musí byť vložený celý vankúš. Vankúš nesmie prečnievať ponad prírubu podpory vankúša.

**! UPOZORNENIE ! VANKÚŠ SA NESMIE DOSTAŤ DO KONTAKTU S TERMOPLASTOM, ABY SA ZABRÁNILO PRILEPENIU VANKÚŠA K TERMOPLASTU.**

5. Pacienta umiestnite na zariadenie tak, aby jeho hlava spočívala na vankúši.

# NÁVOD NA POUŽITIE

6. Pomocou bočných otvorov na zariadení Encompass™ alebo adaptéri SRS pokračujte v tvarovaní vankúša okolo krku a hlavy pacienta, aby ste zabezpečili správne umiestnenie pacienta a čo najväčšie pohodlie (obr. 3).

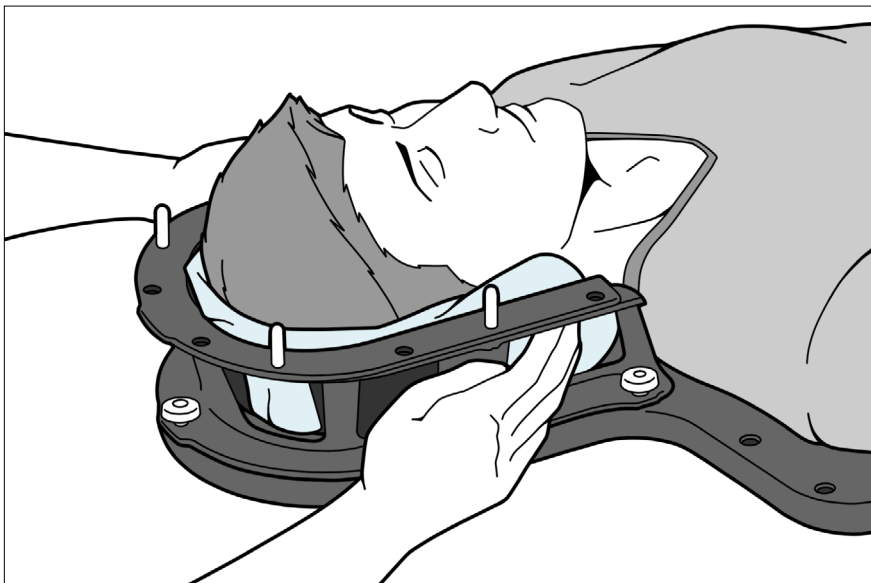

Obrázok 3

7. Pokyny na zahriatie a tvarovanie prednej masky spolu s vlastnosťami produktu, špecifikáciami, výstrahami, upozorneniami a inými bezpečnostnými opatreniami týkajúcimi sa masky Encompass™ Fibreplast® nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie zariadenia Encompass™ (P/N 2005445).

## ODSTRÁNENIE

1. Pokyny na odstránenie masky Encompass™ Fibreplast® spolu s vlastnosťami produktu, špecifikáciami, výstrahami, upozorneniami a inými všeobecnými bezpečnostnými opatreniami týkajúcimi sa použitia masky Encompass™ Fibreplast® nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie zariadenia Encompass™ (P/N 2005445).
2. Vyberte pacienta zo zariadenia.
3. Odstráňte vankúš.
4. Vytiahnite podporu vankúša SRS a odstráňte zariadenie Encompass™ alebo adaptér SRS.





440 Church Road  
Avondale, PA 19311 USA  
[www.Qfix.com](http://www.Qfix.com)

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ [sales@Qfix.com](mailto:sales@Qfix.com)