



# GUIDE PRODUIT ET MA- NUEL DE L'UTILISATEUR

RT-4800-01 & RT-4800-05

Dispositif polyvalent Alta™ &

Dispositif polyvalent Alta™ compatible avec  
le système HexaPOD™ evo RT



  <p>Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta</p>	<p><b>UK Responsible Person</b> QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

Alta, ArmShuttle, Aquaplast RT, Portrait, ZiFix, Access, Insight,  
VacQfix, SofTouch, FlexLock, InfinityLock et InfinityEdge sont des marques commerciales de Qfix.

Fibreplast® et Symphony® sont des marques commerciales déposées de Qfix.

Clorox® est une marque déposée de The Clorox Company.

Super Sani-Cloth® est une marque commerciale déposée de PDI Healthcare.

Moldcare® est une marque commerciale déposée d'ALCARE CO, LTD

# TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.....	4
AVERTISSEMENTS.....	4
INCIDENTS GRAVES .....	4
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	4
ATTÉNUATION DU FAISCEAU DE TRAITEMENT .....	4
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IRM.....	4
PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES .....	5
ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS.....	6
UTILISATION PRÉVUE.....	7
CARACTÉRISTIQUES .....	8
COMPOSANTS DU SYSTÈME .....	8
INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....	9
INSTALLATION.....	9
INSTALLATION.....	12
RETRAIT.....	13
INSTALLATION ET CONFIGURATION .....	14
INSTALLATION.....	15
CONFIGURATION .....	15
INSTRUCTIONS D'UTILISATION .....	16
RETRAIT.....	16
INSTALLATION.....	17
ACCESSOIRES .....	18
ENTRETIEN .....	19
PRÉPARATION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION .....	19
NETTOYAGE DU SYSTÈME .....	19
CARACTÉRISTIQUES .....	20
POIDS.....	20
INFORMATIONS D'ATTÉNUATION .....	21
LISTE DES PIÈCES .....	22
OFFRE STANDARD DU DISPOSITIF POLYVALENT ALTA (RT-4800-100).....	22
FEUILLE DE CONFIGURATION.....	23
DISPOSITIF POLYVALENT RT-4800-01 ALTA™ .....	23

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

## AVERTISSEMENTS

- ⚠ ! AVERTISSEMENT ! AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CE DISPOSITIF SUBIT UNE CHARGE EXCESSIVE DANS UN CONTEXTE D'ÉVÉNEMENT CATASTROPHIQUE, SEMBLE ENDOMMAGÉE OU FONCTIONNE MAL, INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONTACTER CQ MEDICAL AU +1 712-737-8688 OU À L'ADRESSE INFO@CQMEDICAL.COM.**
- ⚠ ! AVERTISSEMENT ! LA SIMULATION ET LE TRAITEMENT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR UN DISPOSITIF POLYVALENT ALTA™. D'AUTRES DISPOSITIFS PEUVENT ÊTRE SENSIBLEMENT DIFFÉRENTS ET CONDUIRE À UNE SIMULATION CLINIQUEMENT INCOHÉRENTE PAR RAPPORT AUX PLANS DE TRAITEMENT.**

## INCIDENTS GRAVES

Veillez signaler tout incident grave (par ex. incidents provoquant ou pouvant provoquer la mort ou des blessures graves) à CQ Medical ainsi qu'aux autorités compétentes de votre pays.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Pour garantir une utilisation sûre du dispositif polyvalent Alta™, il est recommandé de former l'utilisateur au bon fonctionnement du système avant son utilisation.

Pour utiliser le dispositif polyvalent Alta™ avec précision et en toute sécurité, l'utilisateur doit avoir acquis l'expertise nécessaire dans un environnement hospitalier.

S'assurer que les accessoires sélectionnés sont bien verrouillés sur la surface de support du patient et vérifier la bonne configuration avant le début du traitement.

Vérifier que le dispositif n'est pas endommagé avant chaque utilisation.

## ATTÉNUATION DU FAISCEAU DE TRAITEMENT


Le dispositif polyvalent Alta™ atténue le faisceau radiothérapeutique. L'atténuation effective, qui dépend de la configuration du système, doit être vérifiée avec votre propre équipement. Cette atténuation et l'augmentation de la dose à la peau doivent être prises en compte au cours de la planification et du traitement.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IRM

- MR** Des tests non cliniques ont démontré que le **dispositif polyvalent Alta™** est compatible RM. Ce dispositif peut être utilisé dans un système RM.
- MR** Des tests non cliniques ont démontré que la **poignée InfinityLock™ (RT-4800-04)** est compatible RM. Ce dispositif peut être utilisé dans un système RM.
- MR** Des tests non cliniques ont démontré que l'**adaptateur Alta Silverman (RT-4800-03)** est compatible RM. Ce composant peut être utilisé dans un système RM.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'IRM (SUITE)

 Des tests non cliniques ont démontré que la barre de positionnement RM (RT-4551BARMRI) est compatible RM. Cet accessoire peut être utilisé dans un système RM.

 Des tests non cliniques ont démontré que l'Alta ArmShuttle Elite (RT-4800-02) est compatible RM sous conditions. Ces dispositifs peuvent être utilisés dans un système RM répondant aux conditions suivantes :

- L'Alta ArmShuttle Elite peut être placé à l'intérieur d'un système RM avec un champ magnétique statique de 1,5 T ou moins.
- L'Alta ArmShuttle Elite doit être fixé au dispositif polyvalent Alta (RT-4800-01) avant l'examen.

 **! AVERTISSEMENT ! L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE CQ MEDICAL EST RECOMMANDÉE AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ, LES PERFORMANCES ET LA COMPATIBILITÉ IRM DES PRODUITS, ET DE MAINTENIR LA VALIDITÉ DES GARANTIES APPLICABLES.**

 **! AVERTISSEMENT ! L'UTILISATION D'ACCESSOIRES RM NON APPROUVÉS PEUT ENTRAÎNER :**

- Des blessures au patient
- Des dommages à l'équipement

Utiliser uniquement des accessoires compatibles RM ou compatibles RM sous conditions testés et approuvés pour le système RM.

Lorsque le dispositif polyvalent Alta est utilisé dans un environnement RM, utiliser uniquement des accessoires compatibles RM ou compatibles RM sous conditions, testés et approuvés pour le système RM. Tenir compte de la compatibilité RM des accessoires avant toute utilisation sur le système RM

 **! AVERTISSEMENT ! L'ENTRETIEN ET LES AUTRES SERVICES DE MAINTENANCE DES PRODUITS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE RÉALISÉS DANS UN ENVIRONNEMENT RM.**

## PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ne pas monter ou s'asseoir sur la poignée car cela pourrait l'endommager ou causer des blessures. Les poignées ne sont pas conçues pour supporter le poids du patient. NE PAS utiliser les poignées pour positionner le patient. NE PAS utiliser les poignées pour monter ou descendre du dispositif.

Ne pas transporter le dispositif avec des accessoires.


## CHARGE NOMINALE

NE PAS dépasser soit une charge de 226 kg (500 livres) répartie uniformément, soit la charge de travail maximale du socle de table (la plus faible de ces deux valeurs). Le poids de tous les dispositifs et accessoires doit être pris en compte lors du calcul de la charge.

# PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

## ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS

Consulter le site [CQmedical.com](http://CQmedical.com) pour obtenir une liste des symboles et de leur définition.

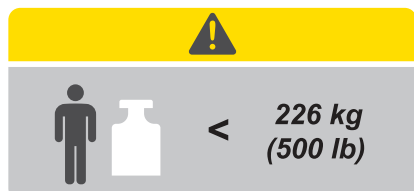

### CHARGE NOMINALE

La charge de travail maximale de sécurité pour le dispositif polyvalent Alta™ est de 226 kg (500 livres).



### COMPATIBLE RM


Dispositif ne présentant aucun danger connu suite à une exposition à un environnement RM. Les éléments compatibles RM sont composés de matériaux non conducteurs électriquement, non métalliques et non magnétiques.



### COMPATIBLE RM SOUS CONDITIONS

Dispositif dont la sécurité en environnement RM est démontrée sous certaines conditions.

Se reporter aux conditions définies dans la section Informations de sécurité IRM.

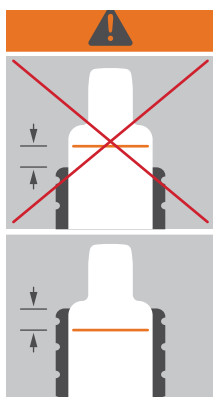

### AVERTISSEMENT

NE PAS étendre le dispositif polyvalent Alta™ à l'extrémité du plateau de table au-delà de la ligne en porte-à-faux orange. Cela risquerait de blesser le patient ou le personnel.

# UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif polyvalent Alta™ sert à immobiliser, soutenir, positionner et transférer des patients suivant des procédures de radiothérapie utilisant des électrons, des photons et des protons, notamment des traitements SBRT et SRS, des procédures d'imagerie telles que les rayons X, la tomодensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique, et d'autres procédures impliquant le transfert d'un patient.

Le dispositif polyvalent Alta™ est conçu pour interagir avec le système de transport de patient Symphony™ et d'autres dispositifs de positionnement, tels que les plateaux, les masques thermoplastiques, les dispositifs et adaptateurs de traitement spécifiques à l'installation, les supports et coussinets de positionnement.

**! REMARQUE ! En vertu de la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.**

## **GROUPES CIBLES DE PATIENTS**

Patients en radiothérapie ou suivant des procédures d'imagerie diagnostique.

## **UTILISATEURS PRÉVUS**

L'utilisateur prévu pour les produits est une personne qualifiée selon les exigences de la région de réglementation.

# CARACTÉRISTIQUES

## COMPOSANTS DU SYSTÈME

### 1. DISPOSITIF POLYVALENT ALTA™

Le dispositif polyvalent Alta™ offre une plate-forme polyvalente qui prend en charge l'utilisation de masques thermoplastiques S-Frame. Il est doté de l'InfinityEdge™ pour une fixation rapide des accessoires de positionnement InfinityLock™ afin de rationaliser les flux de travail d'imagerie RM et CT et de traitement pour la radiothérapie par faisceau externe.

### 2. POIGNÉE INFINITYLOCK

La poignée permet un positionnement indexé fiable des mains du patient. Ce dispositif en option permet d'assurer un alignement précis du patient, de la simulation au traitement.

### 3. ADAPTATEUR ALTA SILVERMAN


L'adaptateur Silverman permet d'indexer les repose-tête et les coussins de tête Silverman sur le dispositif.

### 4. ALTA ARMSHUTTLE ELITE

L'Alta™ ArmShuttle™ Elite permet un positionnement indexé de la tête et des bras du patient en position suspendue.

### 5. BARRE DE POSITIONNEMENT COMPATIBLE RM

Les barres de positionnement à deux broches compatibles RM sont utilisées pour indexer le dispositif sur les plateaux de table de simulation et de traitement. Elles peuvent également être utilisées pour indexer les accessoires de positionnement et d'immobilisation à la surface du dispositif polyvalent Alta.

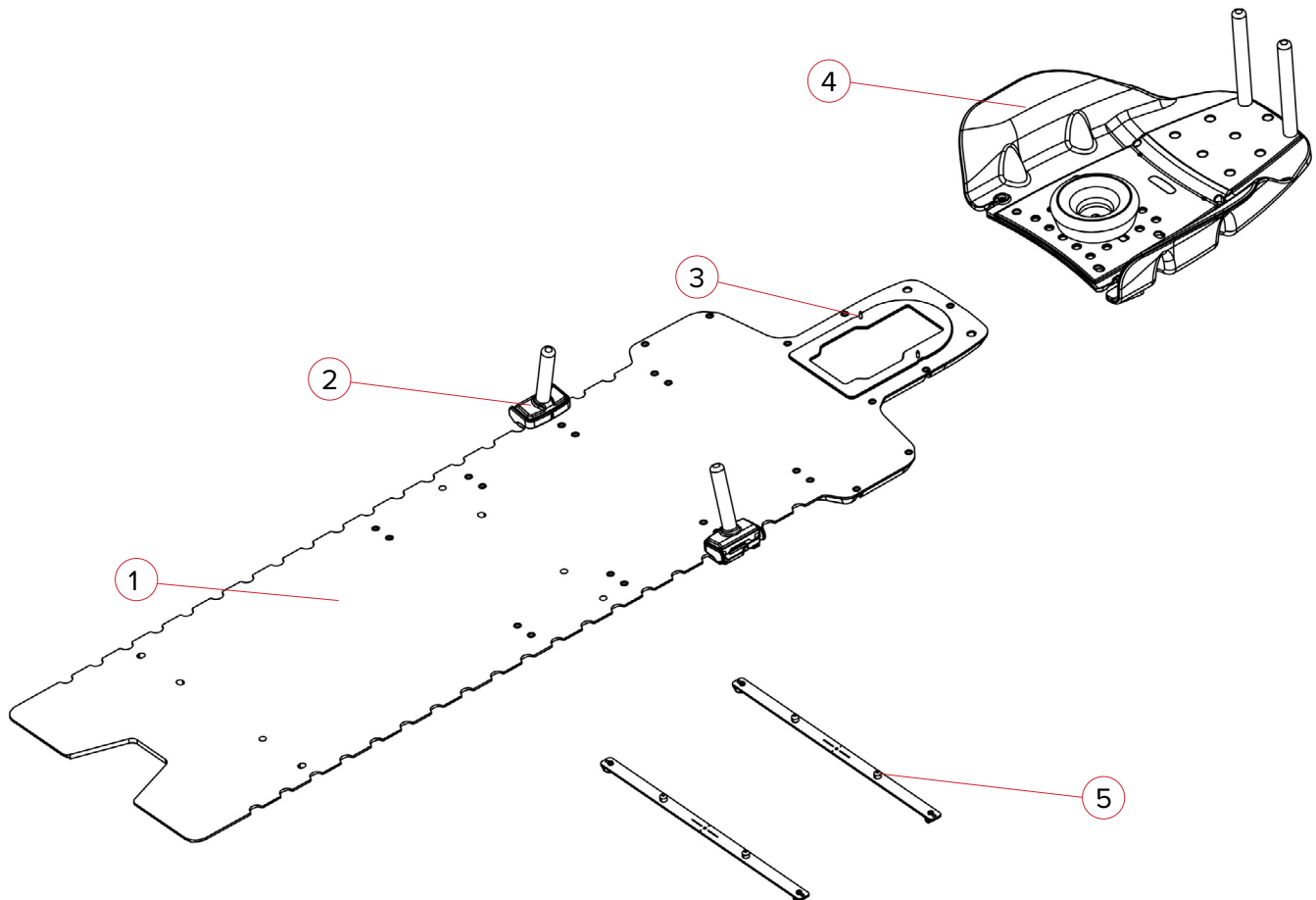

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION

### INSTALLATION DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

La barre de positionnement est dotée de deux broches de positionnement qui peuvent accueillir la plupart des accessoires de positionnement standard. Pour la fixer, placer la barre de positionnement (quel que soit le sens) dans les encoches de repérage appropriées.

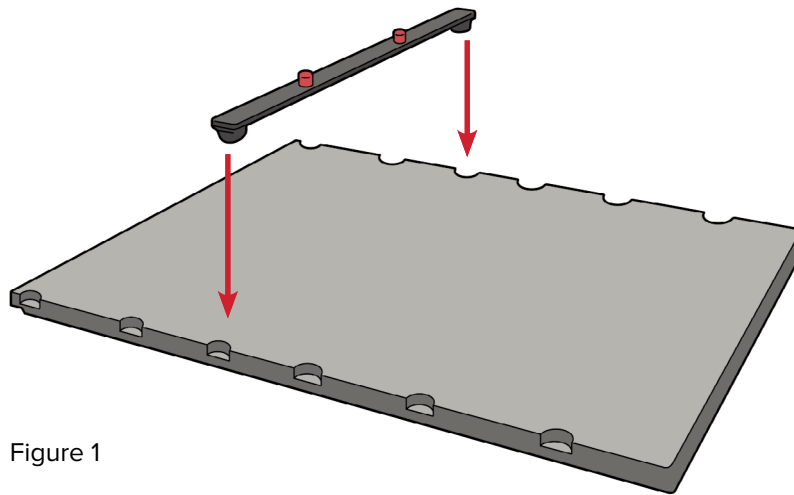



Figure 1

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION

### BARRE DE POSITIONNEMENT

Insérer les extrémités des 2 barres de positionnement dans les encoches de repérage du plateau de table ou de la table de traitement à 700 mm de distance, et les enclencher en place (Figures 2 et 3).

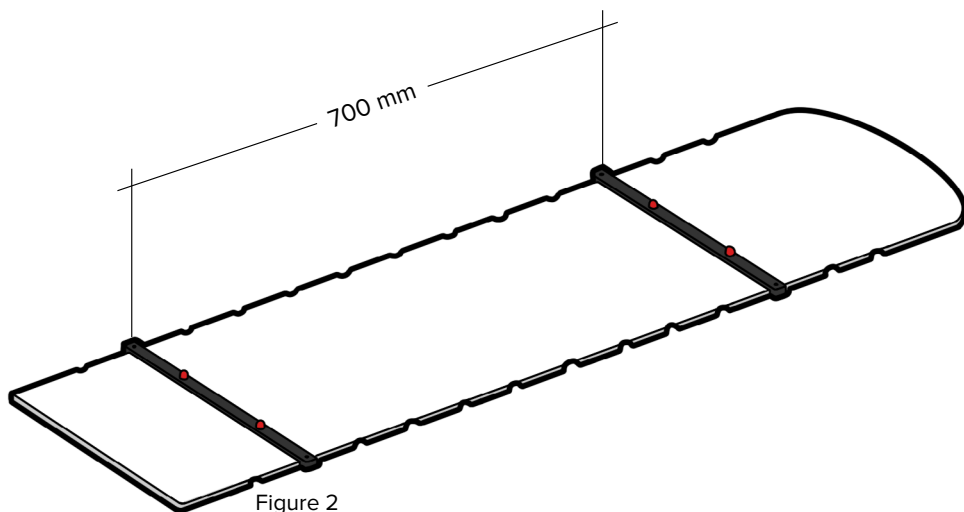

1. Aligner les broches rouges de la barre de positionnement sur les trous de positionnement du dispositif polyvalent Alta™ (Figure 3).
2. Placer le dispositif polyvalent Alta™ sur le plateau de table et sur les broches rouges (Figure 4).

**⚠ ! AVERTISSEMENT ! NE PAS ÉTENDRE LE DISPOSITIF POLYVALENT ALTA™ À L'EXTRÉMITÉ DU PLATEAU DE TABLE AU-DELÀ DE LA LIGNE D'AVERTISSEMENT.**

3. S'assurer que le dispositif est solidement fixé avant de déplacer le patient sur le plateau de table.

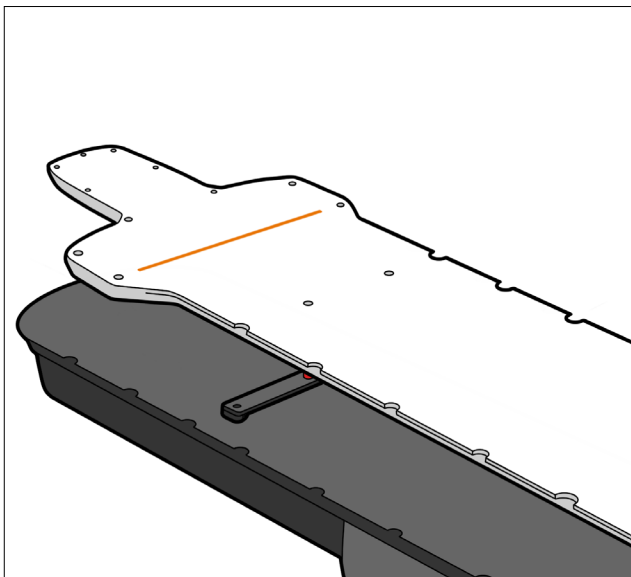


Figure 3


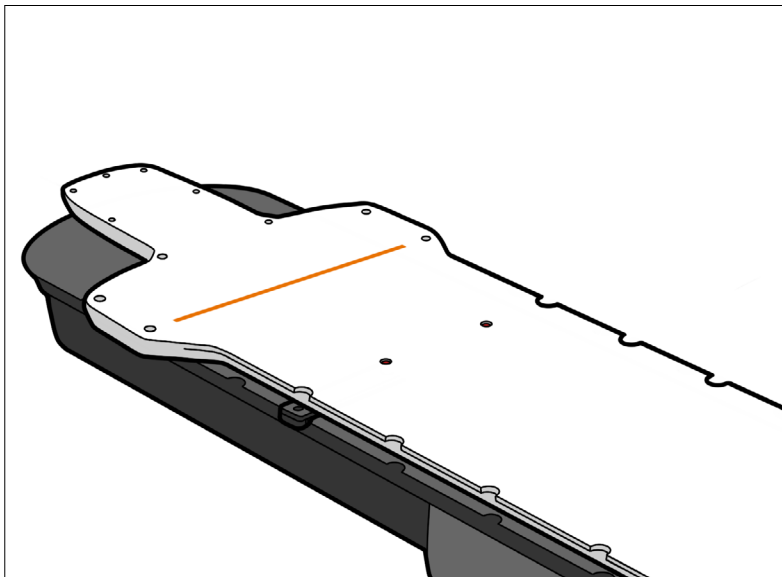


Figure 4

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION

### ADAPTATEUR ALTA SILVERMAN

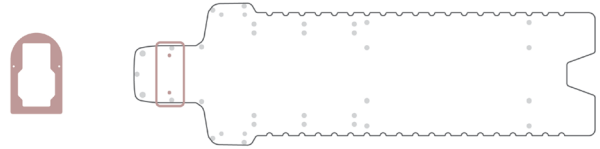

1. Aligner les broches noires de l'adaptateur Silverman sur les trous de positionnement du dispositif polyvalent Alta™ (Figure 5).
2. Placer l'adaptateur Silverman sur le dispositif polyvalent Alta.
3. S'assurer que le dispositif est solidement fixé et aligné sur la surface supérieure du dispositif avant de placer un repose-tête.

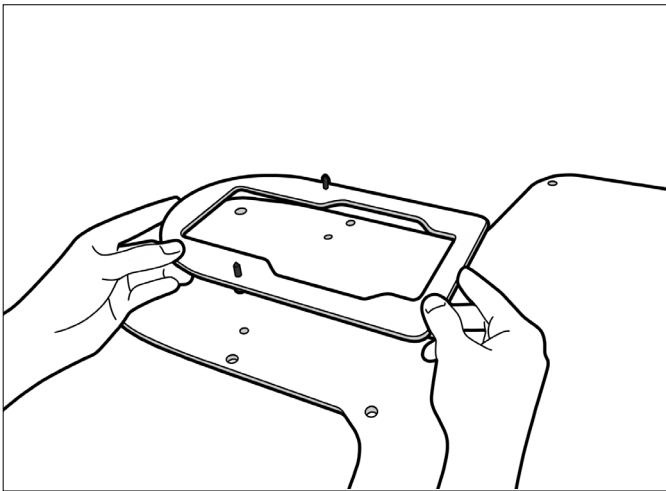


Figure 5

4. Placer un repose-tête Silverman ou en mousse approprié sur le dispositif polyvalent Alta™ (Figures 6 et 7).

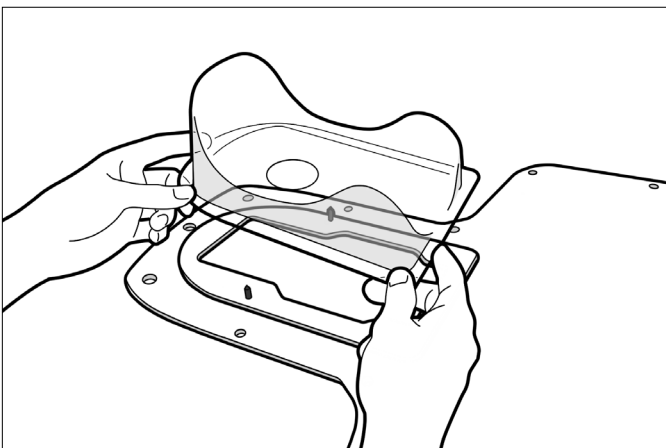


Figure 6

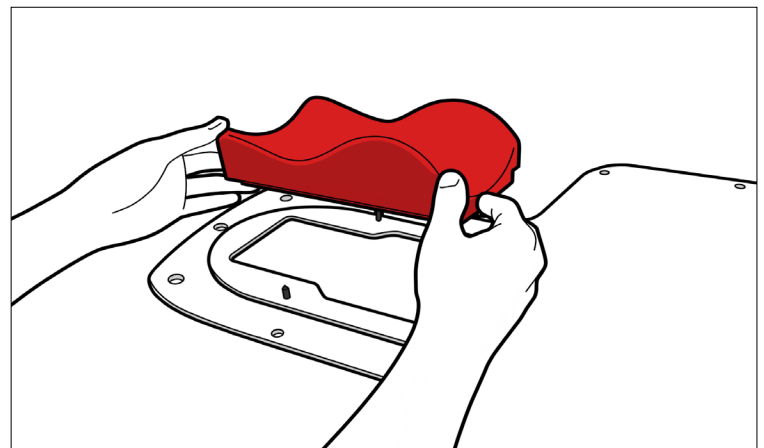


Figure 7

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION

### POSITIONNEMENT DU PATIENT

1. Assoir le patient sur le côté inférieur du dispositif polyvalent Alta™.
2. Soulever et faire pivoter les jambes du patient sur le plateau de table de traitement, puis allonger le patient doucement vers l'arrière jusqu'à ce que la tête du patient se trouve sur le repose-tête Silverman.
3. Former le coussin de tête MOLDCARE® comme souhaité (voir le mode d'emploi du MOLDCARE®) (Figure 8).
4. Placer le masque sur le patient, en alignant les broches du Portrait S-Frame avec les trous de fixation du dispositif polyvalent Alta™ (Figure 9).
5. Insérer les broches dans les trous du Portrait S-Frame et appuyer jusqu'à ce que chaque broche se bloque en place (Figure 10).
6. Mouler le masque du Portrait S-Frame Aquaplast RT™ ou Fibreplast® en exerçant une légère pression autour du nasion jusqu'à ce que le thermoplastique durcisse complètement (Figure 11). Consulter le guide produit et le manuel de l'utilisateur des masques Aquaplast RT™ et Fibreplast® (réf. 2002890) pour connaître les instructions d'utilisation, les caractéristiques du produit, les caractéristiques techniques, les avertissements, les mises en garde et les autres précautions générales liées à l'utilisation des masques Aquaplast RT™ et Fibreplast®.



Figure 8

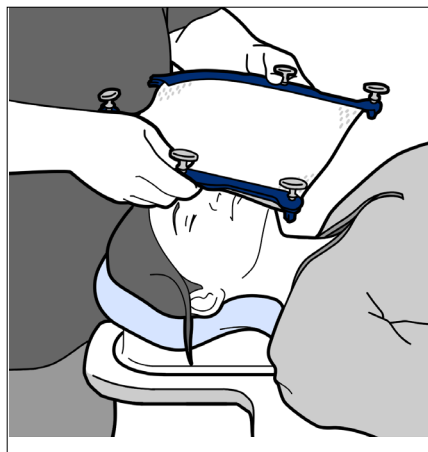


Figure 9

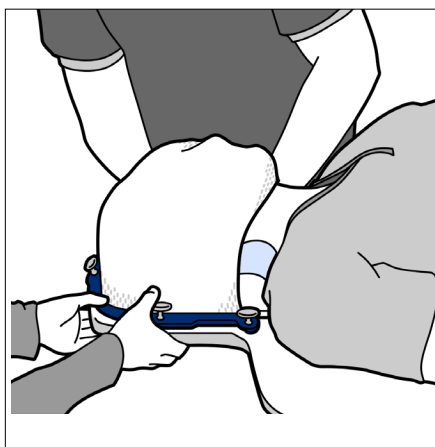


Figure 10

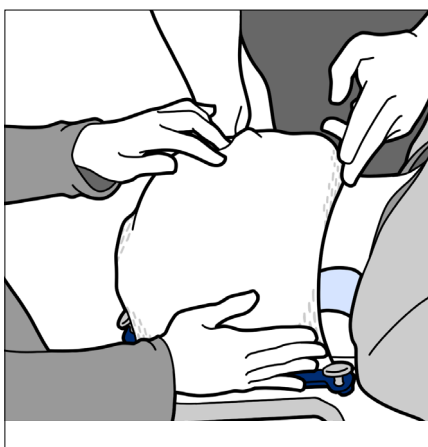


Figure 11

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## RETRAIT

### THERMOPLASTIQUE PORTRAIT S-FRAME

1. Pour retirer le masque, tirer chaque broche vers le haut (Figure 12).
2. Dégager le masque du patient.

### PORTRAIT

Retirer le MOLDCARE®, le repose-tête Silverman ou l'insert en mousse et l'adaptateur Silverman du dispositif polyvalent Alta™.


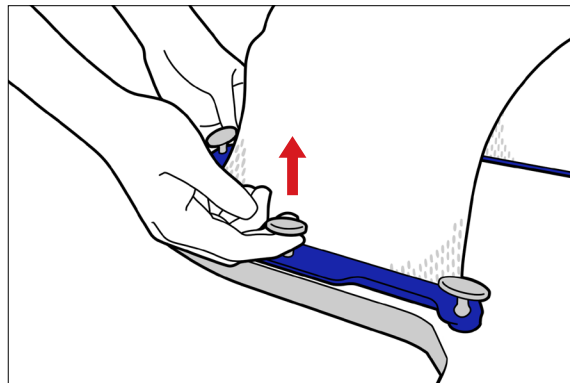


Figure 12

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION ET CONFIGURATION

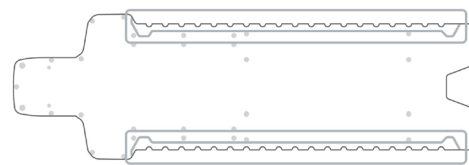

### POIGNÉES INFINITYLOCK

1. S'assurer que le levier de la poignée Alta est en position déverrouillée (Figure 13).
2. Faire glisser fermement la poignée sur l'InfinityEdge du dispositif jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place (Figure 14).
3. Utiliser l'indicateur bleu sur la poignée et l'échelle du dispositif pour aligner la poignée dans la position souhaitée (Figure 15).
4. Tourner le levier pour verrouiller la poignée sur le dispositif (Figure 16).

**! REMARQUE !** Ne pas tourner le levier en position verrouillée si la poignée n'est pas complètement engagée sur le bord du dispositif. Ne pas ranger la poignée avec le levier en position verrouillée.

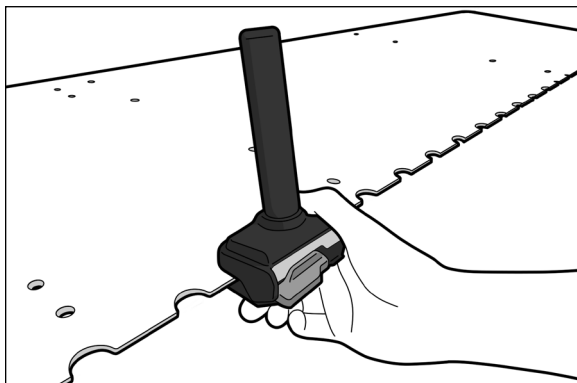


Figure 13

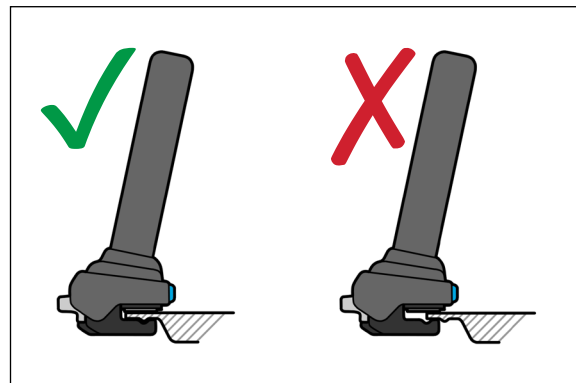


Figure 14

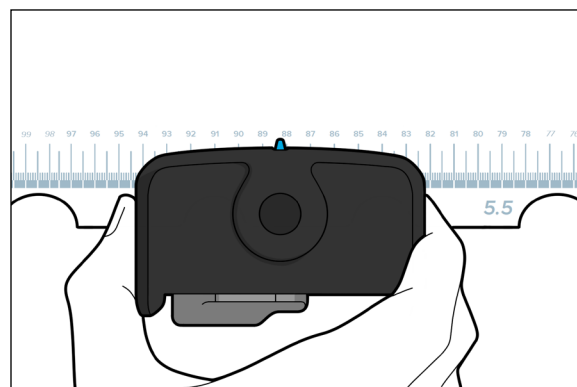


Figure 15

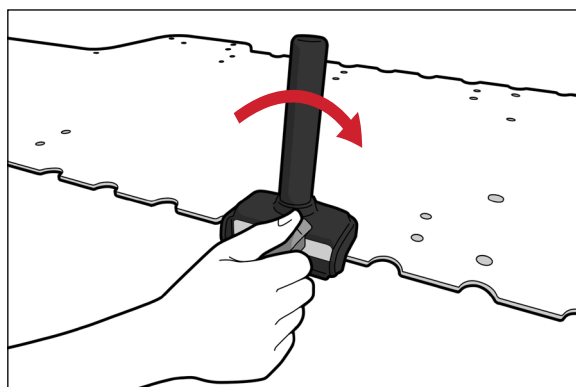



Figure 16

## RETRAIT

### POIGNÉES INFINITYLOCK

Déverrouiller en tournant le levier dans le sens antihoraire et le retirer du dispositif.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

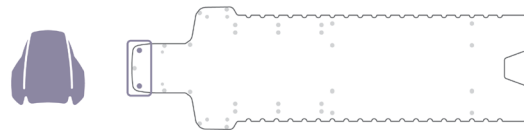

## INSTALLATION

### ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

1. En biais, aligner le bord inférieur de l'Alta ArmShuttle Elite sur la ligne de guidage ArmShuttle du dispositif (Figure 17).
2. Tirer la poignée du loquet de verrouillage et faire glisser le dispositif ArmShuttle vers la ligne de guidage du dispositif. Tout en abaissant l'ArmShuttle, s'assurer que les broches rouges se trouvent dans les trous indiqués dans la tête du dispositif Alta (Figures 18 et 19).

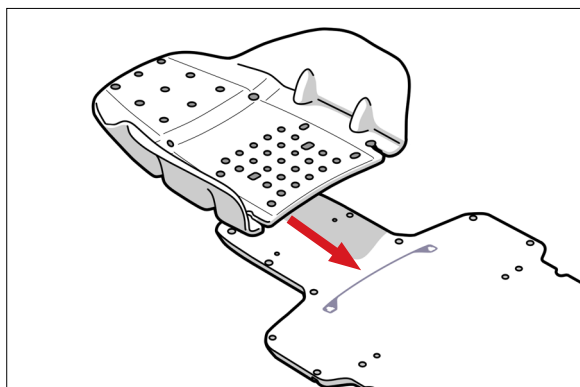


Figure 17

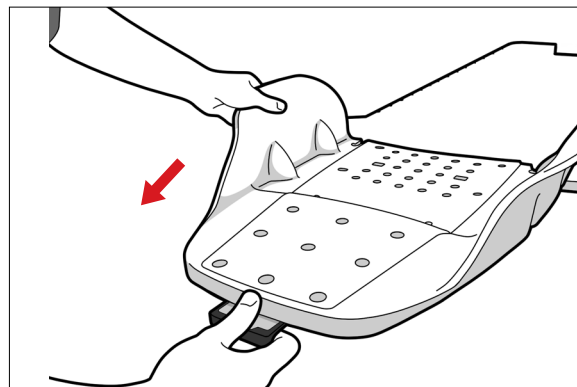


Figure 18

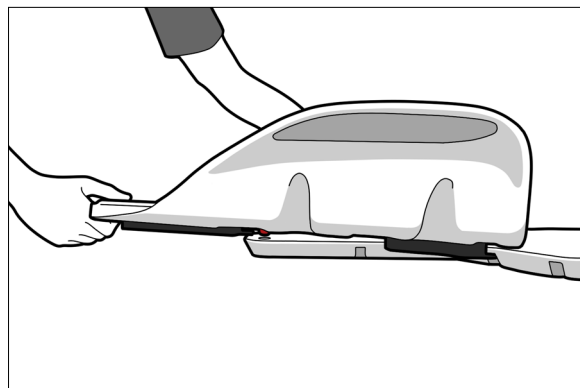


Figure 19

## CONFIGURATION

### ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

Installer le repose-tête et les poignées.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## RETRAIT

### ALTA™ ARMSHUTTLE ELITE

**! REMARQUE !** Ne pas tirer sur l'ArmShuttle sans tirer sur le loquet pour le déverrouiller du dispositif.


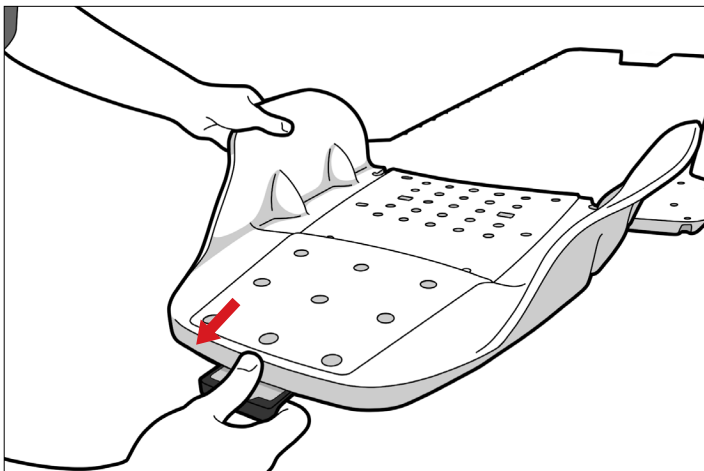


Fig. 20

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## INSTALLATION

**ALTA™, compatible avec le système HexaPOD™ evo RT**

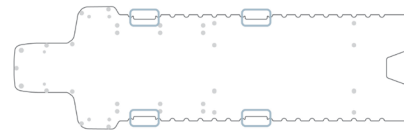

1. Installer le dispositif ALTA sur le plateau de table Elekta iBEAM® evo en veillant à ce que la position souhaitée soit accessible (Fig. 21).
2. Installer le cadre de référence Elekta HexaPOD en position d'indexation sur le plateau de table Elekta iBEAM® evo en suivant les instructions du fabricant (Fig. 22).

**! REMARQUE ! Vérifier l'absence d'interférence entre le cadre de référence et le dispositif ALTA (Fig. 23).**

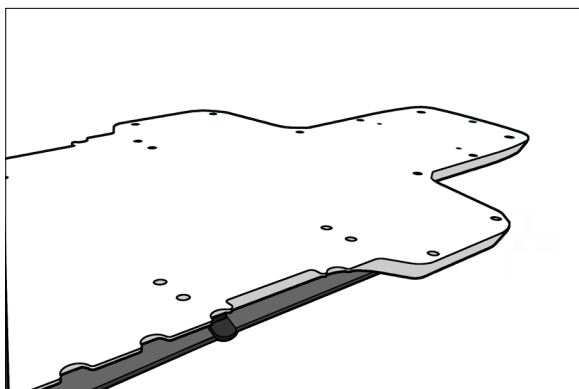


Fig. 21

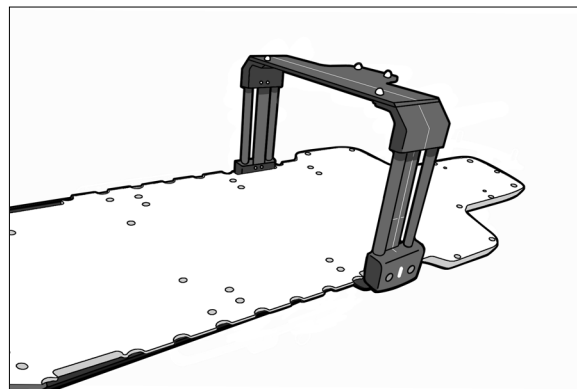


Fig. 22

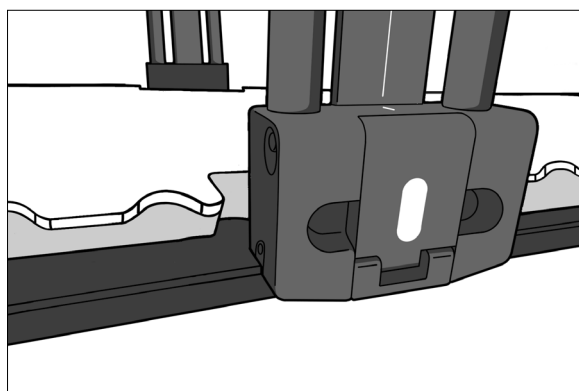


Fig. 23

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Le dispositif polyvalent Alta™ est compatible avec une grande variété de solutions de positionnement et d'immobilisation. La liste des accessoires compatibles avec le dispositif figure ci-dessous. Pour obtenir la dernière liste des accessoires de positionnement et d'immobilisation, veuillez visiter le site [www.CQmedical.com](http://www.CQmedical.com).

Code produit	Description	Manuel de l'utilisateur
Visiter <a href="http://www.CQmedical.com">www.CQmedical.com</a>	Masques Portrait S-Frame	S.O.
RT-4600-03, RT-4600-03-MRI	Adaptateur SRS, adaptateur RM SRS	2008120
RT-4800-B1 et RT-4800-B2	Ponts de compression SBRT InfinityLock	2008358
RT-4558KV4 et RT-4558KV4-01	Palette de compression	2008358
RT-4558CB02	Système de contrôle des mouvements thoraciques/abdominaux ZiFix	2007706
RT-4546MRI	Dispositif mammaire Access Supine	2004394
RT-4700-03	Support d'antenne corps Insight MR	2007254
RT-4517-IND01	Indexeur VacQfix	2002538
Tous les RT-4517	Coussins VacQfix	2002538
RT-4489KW ou RT-4489KW-01	Cale-genoux SofTouch™	2006968
RT-4489FB	Bloc de pied SofTouch™	2006968
RT-4800-KS	Support de genou FlexLock™	2008425
RT-4800-FS	Support de pied FlexLock™	2008425


# ENTRETIEN

**! REMARQUE ! NE PAS vaporiser ni verser de liquides sur la surface du dispositif.**

**! REMARQUE ! NE PAS placer des objets tranchants sur le dispositif.**

## PRÉPARATION POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION

Comme indiqué dans le schéma ci-dessous, retirer tous les accessoires et composants du dispositif polyvalent Alta avant de nettoyer ou de désinfecter le dispositif ou ses accessoires et composants. Il n'y a pas d'ordre particulier à respecter.

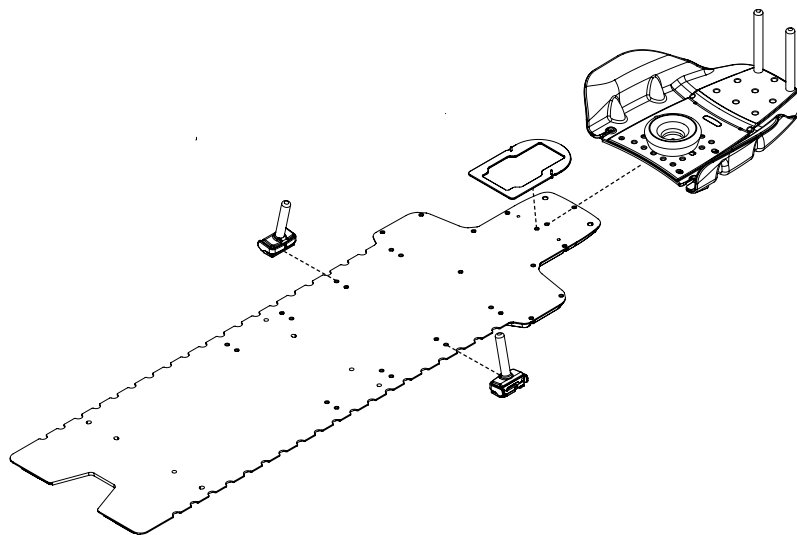


## NETTOYAGE DU SYSTÈME

Si nécessaire, nettoyer la surface en éliminant toute contamination visuelle avec une solution d'eau de Javel Clorox à 10 %. S'il n'est pas possible d'éliminer la contamination visuelle, répéter les étapes de nettoyage et, si nécessaire, jeter le dispositif.

# CARACTÉRISTIQUES



## POIDS

5,4 kg  
(12 livres)

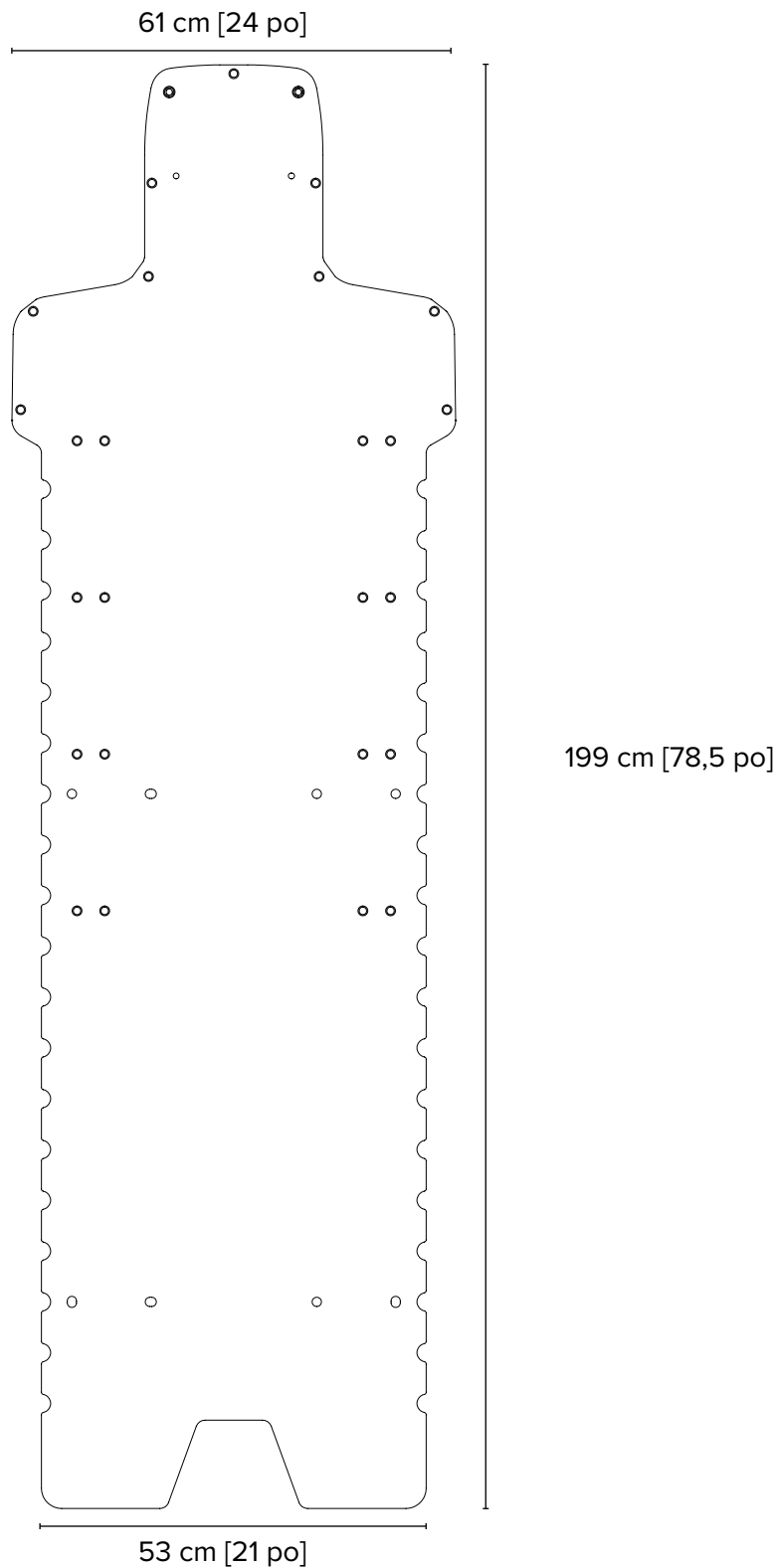


# INFORMATIONS D'ATTÉNUATION

Les valeurs d'atténuation indiquées sont approximatives et mesurées/calculées dans des conditions spécifiques. L'atténuation effective, qui dépend de la configuration du système, doit être vérifiée avec votre propre équipement.

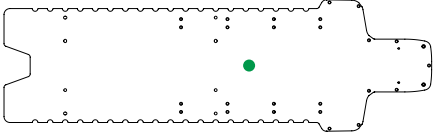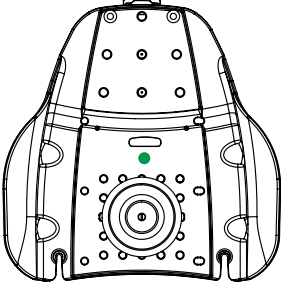Dispositif/composant	Site de mesure	Atténuation approximative (mm EEE à 6 MV)
Dispositif polyvalent Alta™ RT-4800-01 RT-4800-05		< 6,0 mm
Alta™ ArmShuttle™ Elite RT-4800-02		5,33 mm

# LISTE DES PIÈCES

## OFFRE STANDARD DU DISPOSITIF POLYVALENT ALTA (RT-4800-100)

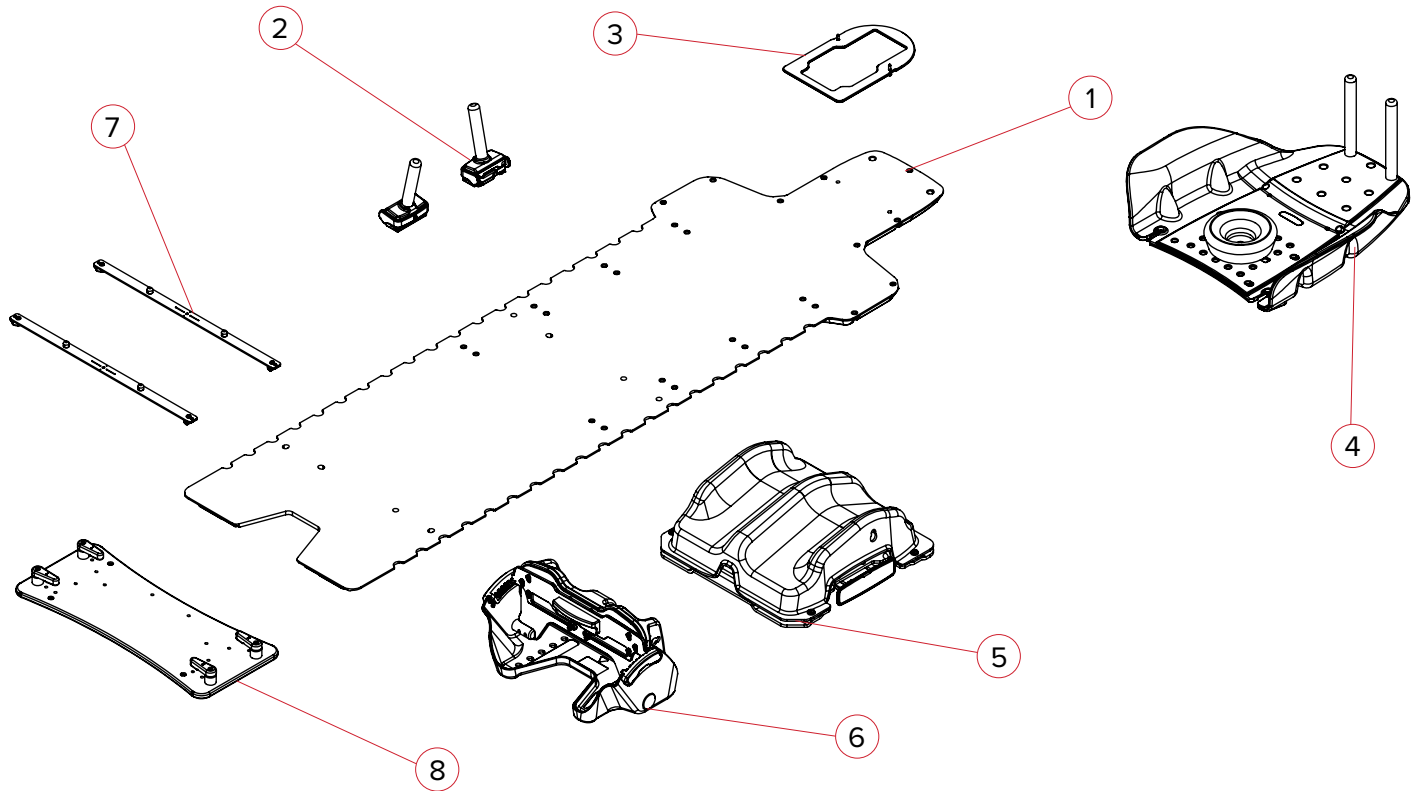

### RT-4800-100

1. RT-4800-01 – Dispositif polyvalent Alta
2. RT-4800-04 – Poignée InfinityLock
3. RT-4800-03 – Adaptateur Alta Silverman
4. RT-4800-02 – Alta ArmShuttle Elite
5. RT-4800-KS – Support de genou FlexLock
6. RT-4800-FS – Support de pied FlexLock
7. RT-4551BARMRI – Barre de positionnement IRM
8. RT-4543WALL – Support mural

# FEUILLE DE CONFIGURATION

## DISPOSITIF POLYVALENT RT-4800-01 ALTA™

Nom du patient :

ID du patient :

Installé par :

Médecin :

Date :

Commentaires :

Remarques :

# FEUILLE DE CONFIGURATION

## DISPOSITIF POLYVALENT RT-4800-01 ALTA™

Les barres de positionnement pour l'indexation du dispositif Alta sont indexées sur la table à l'emplacement suivant :

### Accessoires utilisés (vérifier s'ils sont utilisés)

### Remarques

#### Adaptateur Silverman



Repose-tête utilisé

Moldcare utilisé

#### Alta ArmShuttle Elite



Poignée(s) (lettre A–I)

Repose-tête (numéro 1–23)  
(utiliser le n° indiqué sous le trou)

#### Poignées



Droite du patient

Gauche du patient

#### Pont de compression

**Grand**

**Petit**

Emplacement du pont

Hauteur du pont  
(numéro 1–19)

Alignement laser

#### Palette de compression (en cas d'utilisation)

Emplacement de  
l'accessoire sur le pont

Hauteur de compression  
sur la palette

#### Coussin VacQfix de compression de la cuisse (en cas d'utilisation)

Emplacement de  
l'accessoire sur le pont

Grand clip uniquement (A–I)

# FEUILLE DE CONFIGURATION

## DISPOSITIF POLYVALENT RT-4800-01 ALTA™

**! REMARQUE !** Se reporter au guide produit et au manuel de l'utilisateur pour connaître les accessoires utilisés.

### Accessoires utilisés (vérifier s'ils sont utilisés)

### Remarques

Matelas du plateau de la table SofTouch

Masque tête et épaules Portrait S-Frame

Masque tête seule Portrait S-Frame

Adaptateur SRS

Système de contrôle des mouvements thoraciques/abdominaux ZiFix

Dispositif mammaire Access Supine

Support d'antenne corps Insight MR

Indexeur VacQfix

Coussin VacQfix

Cale-genoux SofTouch

Bloc de pied SofTouch

Support de genou FlexLock

Support de pied FlexLock

### Accessoires supplémentaires







[www.CQmedical.com](http://www.CQmedical.com)

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

[info@CQmedical.com](mailto:info@CQmedical.com)