



positioning
patients for life.®

INSTALLATIONSGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4527EXA

VARIAN IGRT direkt indexeringsadapter



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 <i>Tillverkad i USA av</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass och Hand Grip Array är varumärken som tillhör Qfix.

Exact® och ETR® är registrerade varumärken som tillhör Varian Medical Systems.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
ADAPTERINSTÄLLNING	5
INSTALLATION AV MELLANLÄGG.....	8

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDET

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

Adaptern är utformad att fungera med huvudramen Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ och BoS™. Kontakta Qfix för den senaste listan över enheterna och deras kompatibla adaptrar.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.



! VARNING !

- 1. PRODUKTEN FÅR INTE SKJUTAS UT MER ÄN DESS MAXIMALA UTSKJUTANDE POSITION. UTSKJUTNING FÖRBI DEN MAXIMALA UTSKJUTANDE POSITIONEN KAN ORSAKA ATT ANORDNINGEN FALLER NER FRÅN BORDETS OVANSIDA OCH SKADA PATIENTEN.**
- 2. KONTROLLERA ATT ALLA FÄSTELEMENT ÄR ÅTDRAGNA FÖRE ANVÄNDNING.**

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.

ADAPTERINSTÄLLNING

RT-4527EXA

! OBSERVERA ! Adapterar och Hand Grip Array kan bara användas på en viss sida och får endast installeras på den korrekta sidan av anordningen.

1. Om Encompass™ används behöver ett mellanlägg läggas till mellan Hand Grip Array och adaptern. Se sidan 8 för installation av mellanlägget (Fig. 12). Lossa positioneringsskivorna (Fig. 1).
2. Inrikta adaptern på höger och vänster sida av anordningen (Fig. 2).
3. Montera de medföljande skruvarna i de nedre hålen på undersidan av fästet för Hand Grip Array (Fig. 3).
4. Montera de medföljande skruvarna i de försänkta hålen från ovansidan (Fig. 4).
5. Dra åt de två medföljande positioneringsskivorna från anordningens sida och upprepa på motsatt sida av anordningen (Fig. 5).
6. Öppna IGRT-låset (Fig. 6).

Installera på bordets ovansida

1. Haka fast överlägget på patientens högra sida på IGRT-bordets ovansida (Fig. 7). Försäkra dig om att positioneringsskivorna är inriktade mot skårorna.
2. Sänk ner överlägget på patientens vänstra sida på IGRT-bordets ovansida (Fig. 8). Försäkra dig om att positioneringsskivorna är inriktade mot skårorna.
3. Dra i kolven och vrid in låset under änden av bordets ovansida. Verifiera att kolven återställs (Fig. 9 och 10).
4. Installera handtagsgreppen på önskad plats (Fig. 11).

! VARNING ! VERIFIERA ATT KOLVEN ÄR HELT ANSLUTEN. UNDERLÅTENHETEN ATT GÖRA DET KAN ORSAKA ATT ANORDNINGEN FALLER AV BORDETS OVANSIDA OCH KAN SKADA PATIENTEN.

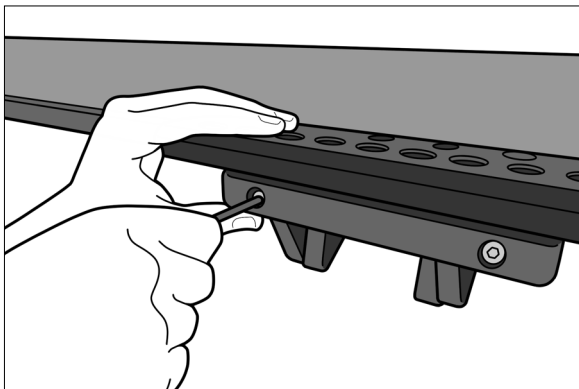


Fig. 1

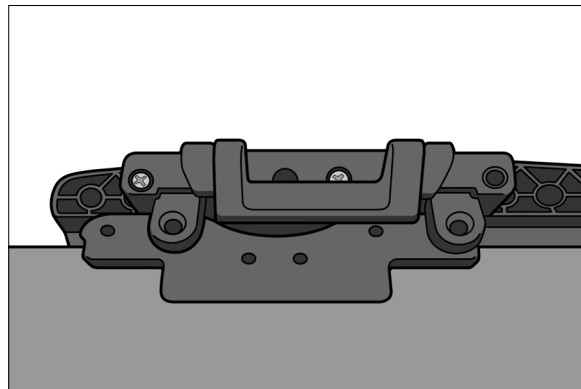


Fig. 2

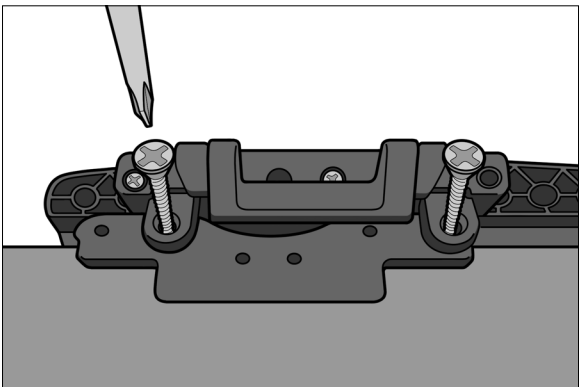


Fig. 3

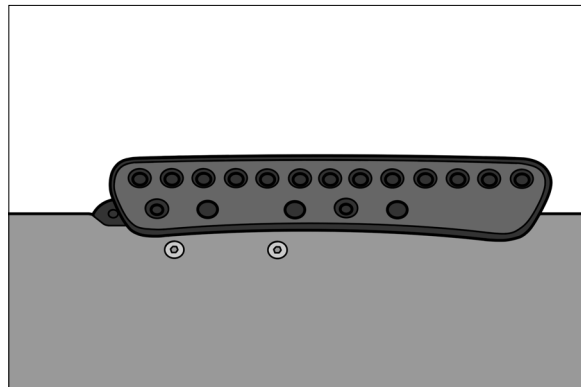


Fig. 4

ADAPTERINSTÄLLNING

RT-4527EXA

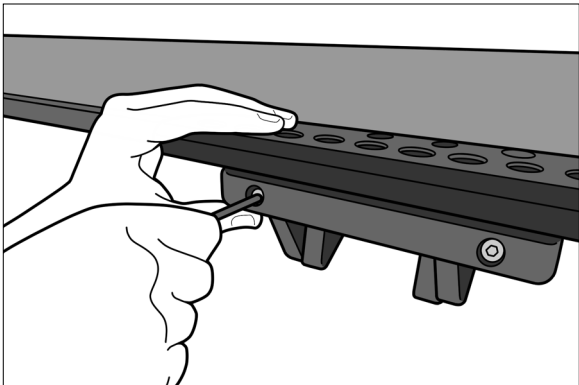


Fig. 5

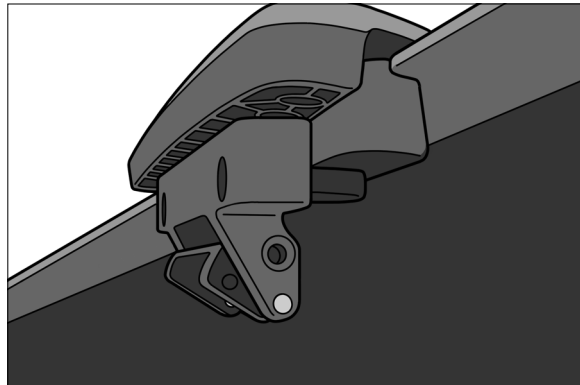


Fig. 6



Fig. 7

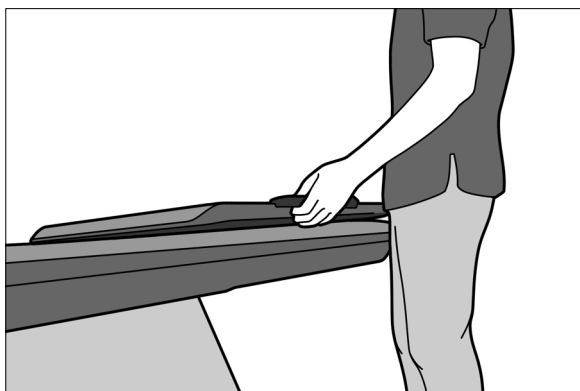


Fig. 8

ADAPTERINSTÄLLNING

RT-4527EXA

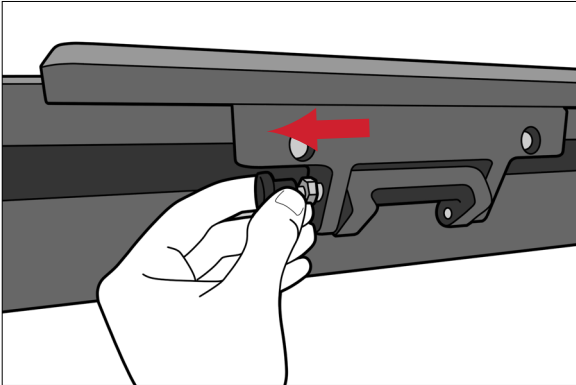


Fig. 9

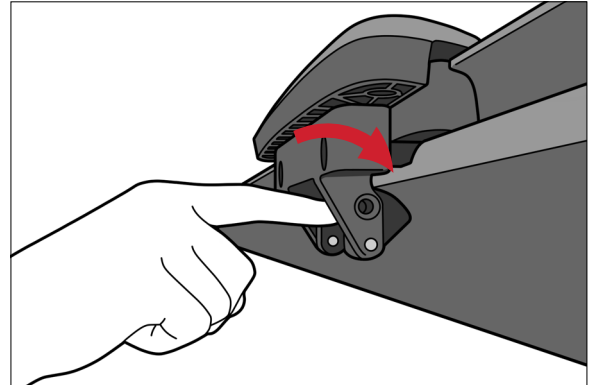


Fig. 10

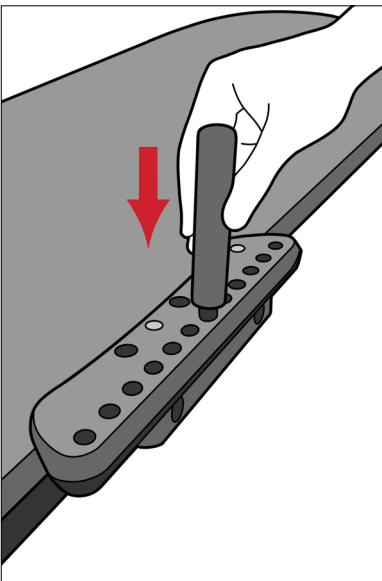


Fig. 11

INSTALLATION AV MELLANLÄGG

RT-4527EXA (Fig. 12)

1. Avlägsna de 2 skruvarna som fäster adaptern vid Hand Grip Array.
2. Placera mellanlägget mellan adaptern och Hand Grip Array och rikta in skruvhålen mot hålen i mellanlägget.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna och dra åt tills de sitter ordentligt.
4. Fortsätt med installationsanvisningarna.

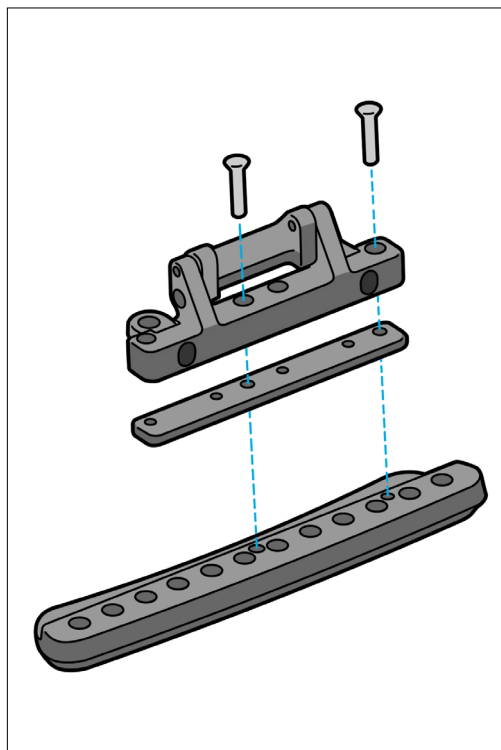


Fig. 12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008323_SV_C
2024-01