



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4800-KS en RT-4800-FS

FlexLock™-kniesteun en voetsteun





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Vervaardigd in de VS door Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
----	-----	---	--	---

FlexLock is een handelsmerk van Qfix.

Exact® is een gedeponeerd handelsmerk van Varian Medical Systems.

Clorox® is een gedeponeerd handelsmerk van The Clorox Company.

Super Sani-Cloth® is een gedeponeerd handelsmerk van PDI Healthcare.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
AANVULLENDE VOORZORGSMATREGELEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN	4
VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE	4
WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN	5
BEOOGD GEBRUIK	6
FUNCTIES	7
COMPONENTEN	7
BEDIENINGSINSTRUCTIES	8
OPSTELLING FLEXLOCK-KNIESTEUN	8
FLEXLOCK-KNIESTEUN VERWIJDEREN	11
BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK (RT-4489STRAP)	12
OPSTELLING FLEXLOCK-VOETSTEUN	13
FLEXLOCK-VOETSTEUN VERWIJDEREN	13
BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK (RT-4489STRAP)	14
ONDERHOUD	15
HET SYSTEEM REINIGEN	15
HET SYSTEEM DESINFECTEREN	15
ONDERDELENLIJST	16
OPSTELLINGSFORMULIER	17
FLEXLOCK™-KNIESTEUN EN VOETSTEUN	17

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE WORDEN GEBRUIKT EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6053 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

AANVULLENDE VOORZORGSMATREGELEN

! OPMERKING ! De toestellen moeten te allen tijde volledig worden ondersteund door het tafeloppervlak.

! OPMERKING ! Plaats **GEEN** scherpe voorwerpen op de hulpmiddelen.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om een veilig gebruik van de knie- en voetsteun te verzekeren, wordt aanbevolen dat de gebruiker voorafgaand aan het gebruik wordt opgeleid en getraind in het veilige gebruik van het systeem.

Om de knie- en voetsteun nauwkeurig en veilig te kunnen gebruiken, moet de gebruiker beschikken over de vereiste expertise in een ziekenhuisomgeving.

Zorg ervoor dat de hulpmiddelen stevig op het patiëntondersteuningsoppervlak zijn gemonteerd en controleer of de opstelling juist is voordat de behandeling wordt gestart.

Controleer het hulpmiddel voorafgaand aan elk gebruik op beschadiging.

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de kniesteun RT-4800-KS MR-veilig is. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt in een MR-systeem.

 Niet-klinische tests hebben aangetoond dat de voetsteun RT-4800-FS MR-veilig is. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt in een MR-systeem.

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.



MRI-VEILIG

Indien aanwezig vormt het item geen bekend gevaar in alle MR-omgevingen. Niet gebruiken met niet-goedgekeurde onderdelen of accessoires. NIET gebruiken in combinatie met ferromagnetische of geleidende voorwerpen.



BEKNELLINGSZONE

Wees voorzichtig bij het gebruik van de FlexLock-kniesteun om letsel bij de patiënt en de gebruiker te voorkomen

- Tussen de FlexLock-voetsteuncups en het onderstel

BEOOGD GEBRUIK

Dit hulpmiddel is bedoeld voor het immobiliseren, positioneren en herpositioneren van patiënten die bestralingstherapie ondergaan.

! OPMERKING ! Volgens de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden gekocht.

PATIËTENDOELGROEPEN


Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

FUNCTIES

COMPONENTEN

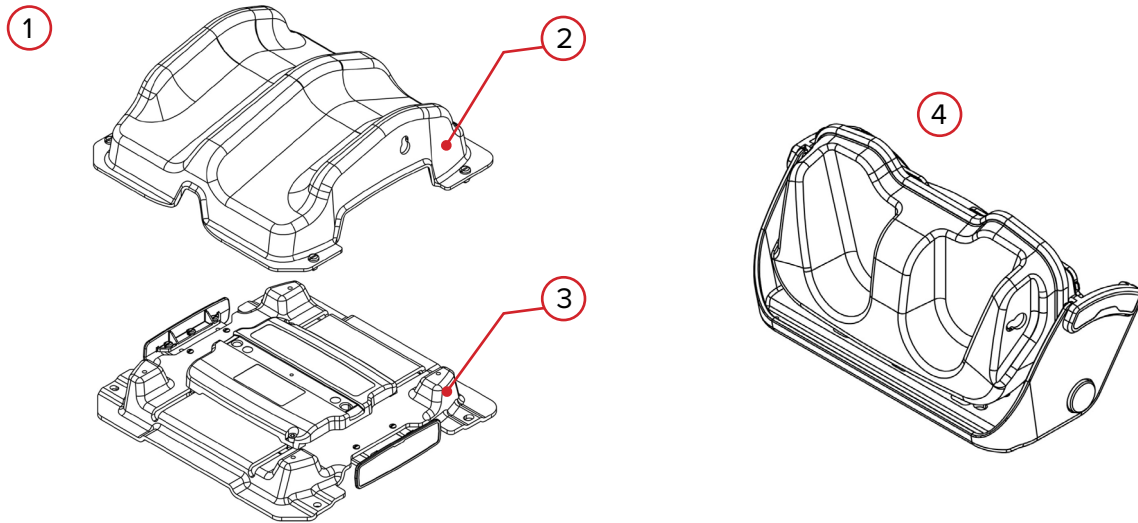

1. FLEXLOCK-KNIESTEUN

De FlexLock-kniesteun is eenvoudig in twee verschillende hoogten te configureren en biedt superieure tot inferieure aanpassingen op het beeldvormings- of behandelingsoppervlak voor nauwkeurige, herhaalbare positionering. De kniesteun is geschikt voor opklembare beenriemen (RT-4489STRAP) voor extra immobilisatie.

2. FLEXLOCK-KNIEKOM

De voorgevormde kom is ontworpen om drukpuntbelasting te verlichten en het comfort van de patiënt te verbeteren.

3. FLEXLOCK-KNIEBASIS

De basis maakt twee snelle hoogteaanpassingen mogelijk en biedt superieure tot inferieure aanpassingen door aan de schuifvergrendeling te trekken of erop te duwen.


4. FLEXLOCK-VOETSTEUN

De FlexLock-voetsteun kan worden gekanteld en biedt ook superieure tot inferieure aanpassingen op het beeldvormings- of behandelingsoppervlak voor nauwkeurige, herhaalbare positionering. De kniesteun is geschikt voor opklembare beenriemen (RT-4489STRAP) voor extra immobilisatie.

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING FLEXLOCK-KNIESTEUN

1. Installeer een 2-pens schuifstang op het tafelblad op de gewenste locatie. (Afb. 1)

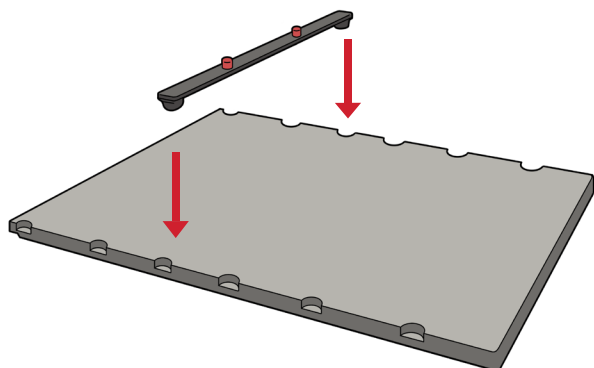


Afb. 1

2. De kniesteunbasis kan in een kleine of grote configuratie worden geïnstalleerd door deze om te draaien. (Afb. 2 en afb. 3)

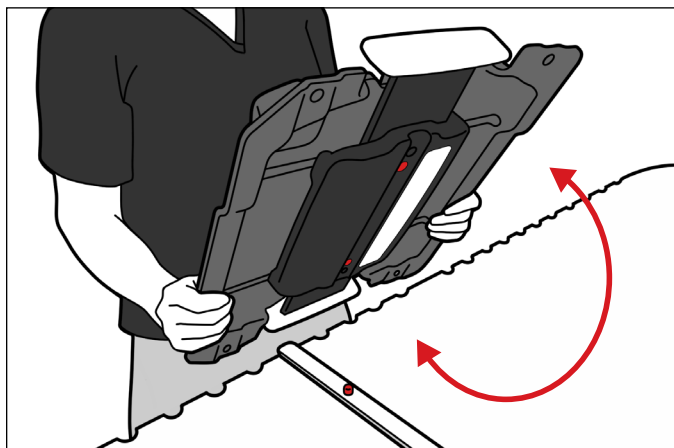

Afb. 2

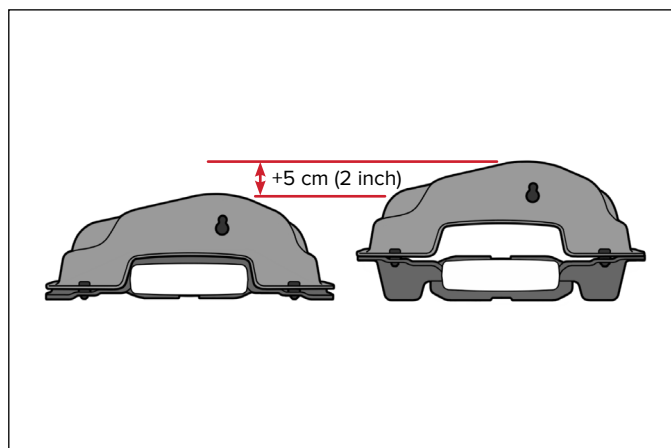


Afb. 3


BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING FLEXLOCK-KNIESTEUN

3. Zorg ervoor dat de basis van de kniesteun in de juiste richting is geplaatst door de richting van het label af te stemmen op de superieure en inferieure richting van de patiënt en monteer de steun vervolgens op de schuifstang. (Afb. 4 en afb. 5)

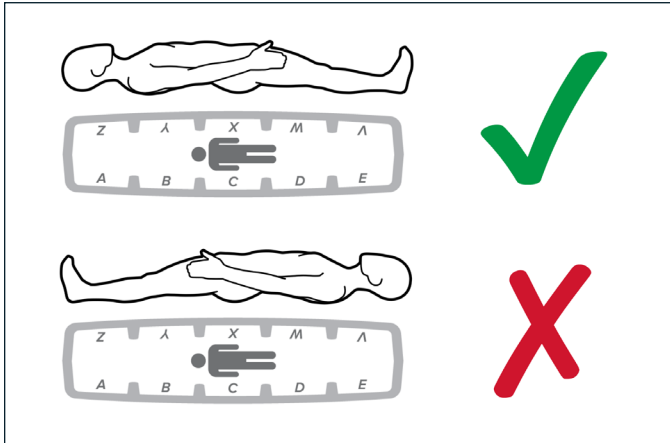

Afb. 4

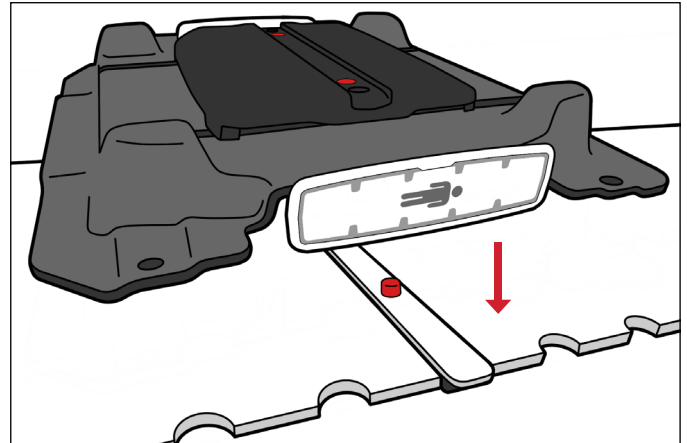

Afb. 5


BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPSTELLING FLEXLOCK-KNIESTEUN


4. Installeer de kniesteunkom door de 4 hoekpennen uit te lijnen met de overeenkomende gaten in de kniesteunbasis. (Afb. 6)

! OPMERKING ! De hoekgeometrie van de kom en basis moet overeenkomen voor de juiste oriëntatie. (Afb. 7)


! OPMERKING ! Zorg ervoor dat alle 4 pennen van de kniesteunkom volledig in de kniesteunbasis zitten. (Afb. 8)

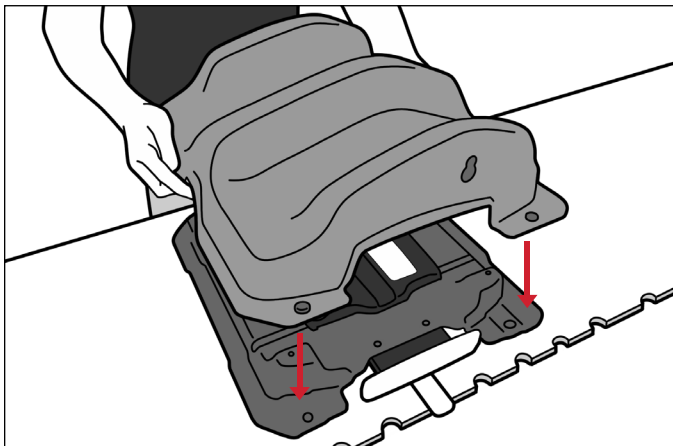

Afb. 6

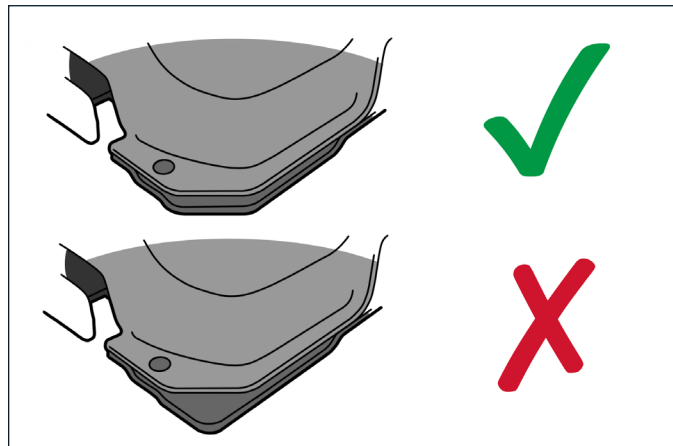

Afb. 7

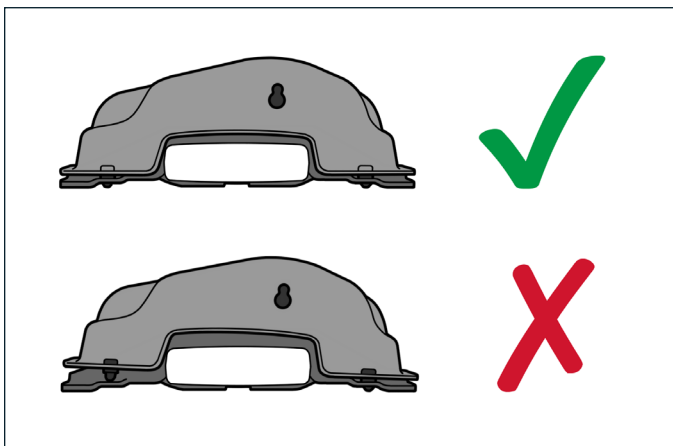


Afb. 8

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING FLEXLOCK-KNIESTEUN

5. Stel de kniesteun in de superieure/inferieure richting af door aan de schuifvergrendeling te trekken of deze in te drukken. Zorg ervoor dat de schuifvergrendeling volledig vergrendeld is en dat de gewenste positie is uitgelijnd met de schuifstang. (Afb. 9 en afb. 10)

! OPMERKING ! Niet aanpassen met het volledige gewicht van de patiënt op het toestel.

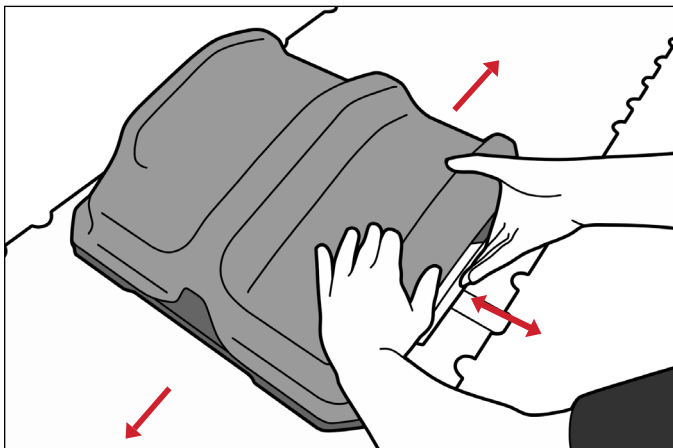

Afb. 9

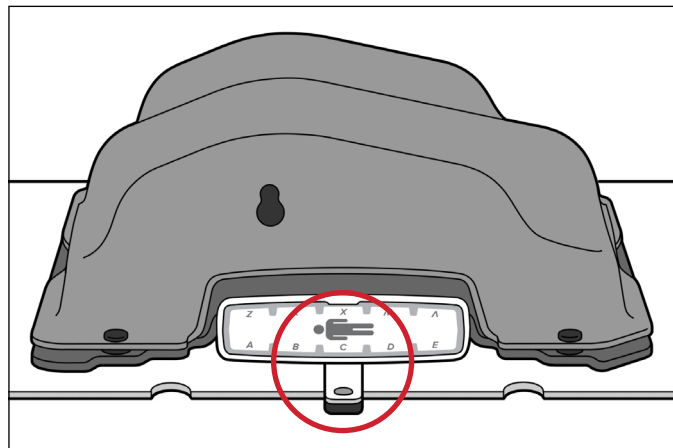


Afb. 10


FLEXLOCK-KNIESTEUN VERWIJDEREN

6. Om de kniesteun te verwijderen, tilt u deze omhoog en weg van de schuifstang en van het tafelblad.

! OPMERKING ! Til of draag het toestel **NIET** aan de schuifvergrendeling. (Afb. 11 en afb. 12)

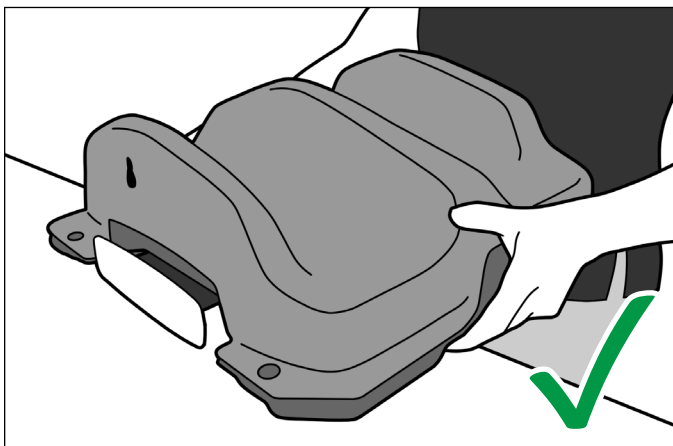

Afb. 11

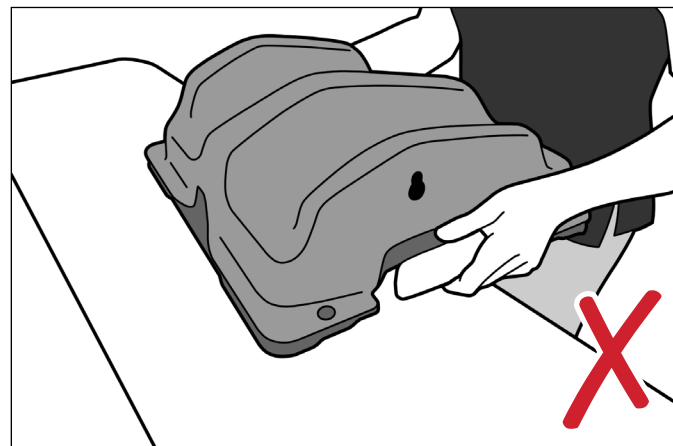

Afb. 12


BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK (RT-4489STRAP)

Optioneel accessoire. *Afzonderlijk verkrijgbaar.*

MONTAGE VAN HET BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK

1. Om het been- en voetriemhulpstuk aan de FlexLock-kniesteun te bevestigen, lijnt u het kunststof steunpunt op het hulpstuk uit met de sleuf in de kom.
2. Druk de nok stevig in de sleuf totdat deze vastklikt.

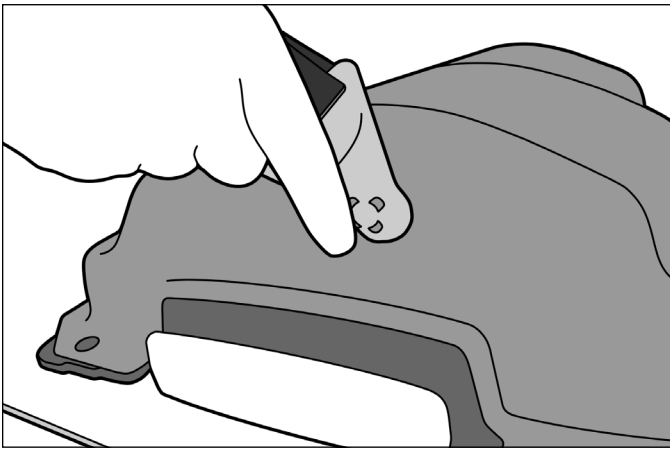

Afb. 13


VERWIJDEREN VAN HET BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK

Om de knie- en beenriem te verwijderen, duwt u het plastic bevestigingsstuk omlaag totdat het uit de sleuf klikt.

BEDIENINGSINSTRUCTIES


OPSTELLING FLEXLOCK-VOETSTEUN

1. Installeer de voetsteun op de schuifstang door de gewenste gaten uit te lijnen met de rode paspennen. (Afb. 14)

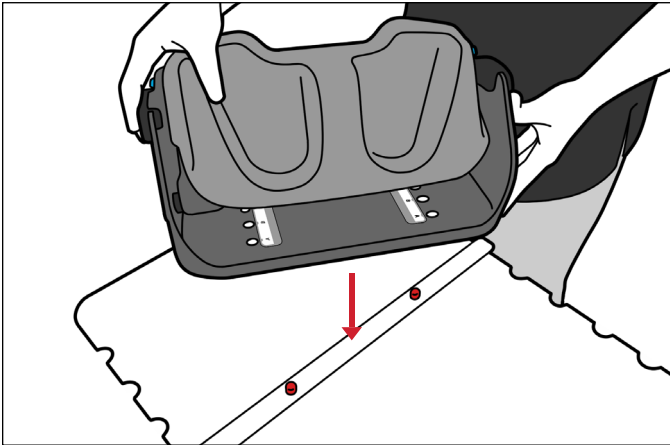

Afb. 14

2. Pas de hoek van de voetsteun aan door de witte trekker aan de achterkant van de voet in te drukken en de voet in de gewenste hoek te kantelen. (Afb. 15)

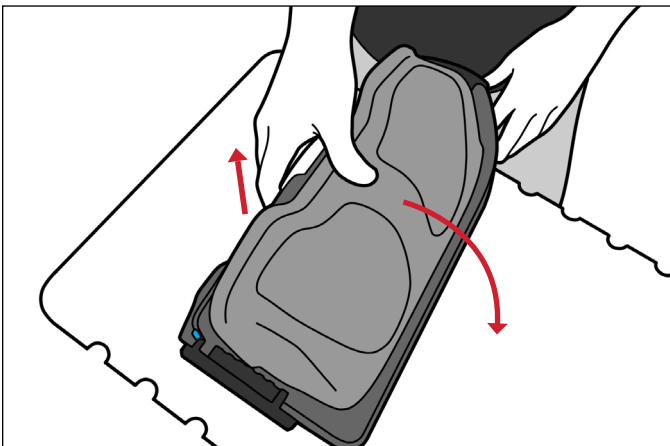

Afb. 15

FLEXLOCK-VOETSTEUN VERWIJDEREN

Om de voetsteun te verwijderen, tilt u deze omhoog en weg van de schuifstang en van het tafelblad.


BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK (RT-4489STRAP)

Optioneel accessoire. *Afzonderlijk verkrijgbaar.*

MONTAGE VAN HET BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK

1. Om het been- en voetriemhulpstuk aan de FlexLock-voetsteun te bevestigen, lijnt u het kunststof steunpunt op het hulpstuk uit met de sleuf in de kom.
2. Druk de nok stevig in de sleuf totdat deze vastklikt.

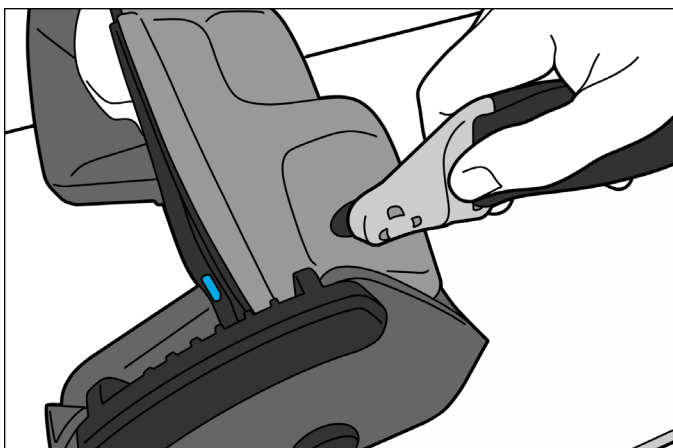

Afb. 16

VERWIJDEREN VAN HET BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK

Om de knie- en beenriem te verwijderen, duwt u het plastic bevestigingsstuk omlaag totdat het uit de sleuf klikt.

ONDERHOUD

! OPMERKING ! Spuit of giet **GEEN** vloeistoffen op het oppervlak van het hulpmiddel.

! OPMERKING ! Plaats **GEEN** scherpe voorwerpen op het apparaat.

HET SYSTEEM REINIGEN

Het hulpmiddel kan worden gereinigd met een milde, niet-schurende reinigingsoplossing. Breng om te reinigen de oplossing aan op een schone doek en veeg het oppervlak af. Inspecteer het apparaat visueel, is het niet schoon, herhaal de voorgaande reinigingsstappen tot het visueel schoon is. Gebruik een schone met water bevochtigde doek om het apparaat af te vegen en achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen. Veeg het apparaat af met een schone, droge doek om het te drogen. Het volgende reinigingsmiddel is getest en geschikt bevonden om het apparaat mee te reinigen.



- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel

HET SYSTEEM DESINFECTEREN

Gebruik een van de volgende desinfectiemiddelen om het hulpmiddel te desinfecteren volgens de instructies van de fabrikant. Veeg het oppervlak van het hulpmiddel af met de doek en laat het hulpmiddel drogen voordat u het gebruikt.

- 70% alcohol
- Super Sani-Cloth®-doekje
- Oplossing van 10% Clorox®-bleekmiddel

ONDERDELENLIJST

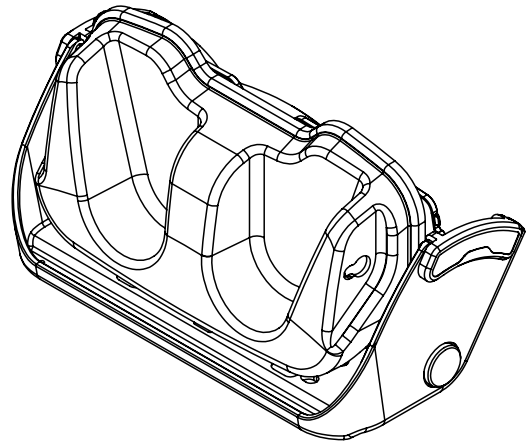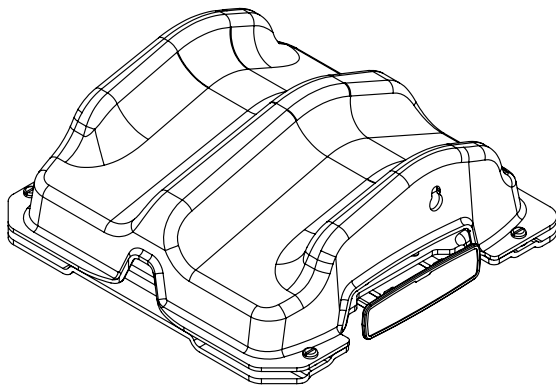

1. RT-4800-KS - FlexLock-kniesteun
2. RT-4800-FS - FlexLock-voetsteun
3. 8003050 - Vervangingskit voor FlexLock-kniesteunveer
4. RT-4489STRAP - Been- en voetriemhulpstuk (optioneel accessoire)

OPSTELLINGSFORMULIER

FLEXLOCK™-KNIESTEUN EN VOETSTEUN

Naam patiënt:

Patiënt-ID:


Opgesteld door:

Arts:


Datum:

Opmerkingen:

RT-4800-KS - FlexLock™-kniesteun

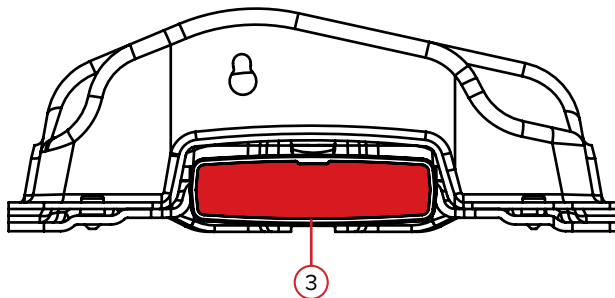

RT-4800-FS - FlexLock™-voetsteun

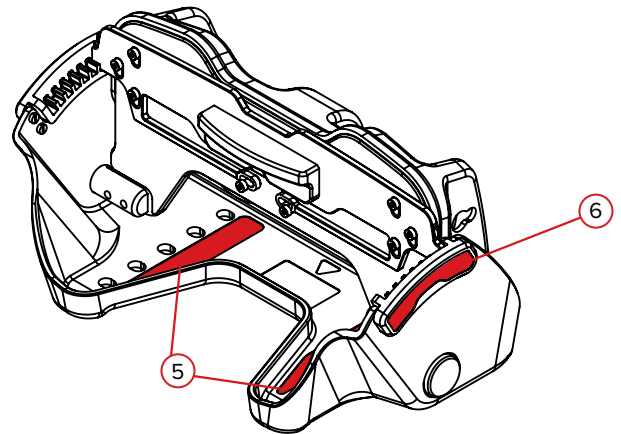

KNIESTEUN

1. Locatie van de schuifstang op het tafelblad:
2. Configuratie van kniesteun (kies één optie): **Klein** **Groot**
3. Locatie van de FlexLock-kniesteun op de schuifstang (kies één optie):

A	B	C	D	E
V	W	X	Y	Z

VOETSTEUN

4. Locatie van de schuifstang op het tafelblad:
5. Locatie van de FlexLock-voetsteun op de schuifstang (kies één optie): **A** **B** **C** **D** **E**
6. Hoek van FlexLock-voetsteun (kies één optie): **0°** **5°** **10°** **15°** **20°** **25°** **30°**

BEEN- EN VOETRIEMHULPSTUK **Ja** **Nee**



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.720.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com