

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4800-KS och RT-4800-FS

FlexLock[™] knästöd och fotstöd





EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com
----	-----	---	--	--

FlexLock är ett varumärke som tillhör Qfix.

Exact® är ett registrerat varumärke som tillhör Varian Medical Systems.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

Super Sani-Cloth® är ett registrerat varumärke som tillhör PDI Healthcare.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
SÄKERHETSINFORMATION	4
INFORMATION OM MRT-SÄKERHET	4
VARNINGSETIKETTER OCH BESKRIVNINGAR	5
AVSEDD ANVÄNDNING	6
FUNKTIONER	7
KOMPONENTER	7
BRUKSANVISNING	8
INSTÄLLNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD	8
BORTTAGNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD	11
FÄSTE FÖR BEN- OCH FOTREM (RT-4489STRAP)	12
INSTALLATION AV FLEXLOCK FOTSTÖD	13
BORTTAGNING AV FLEXLOCK FOTSTÖD	13
FÄSTE FÖR BEN- OCH FOTREM (RT-4489STRAP)	14
UNDERHÅLL	15
RENGÖRA SYSTEMET	15
DESINFICERA SYSTEMET	15
LISTA ÖVER DELAR	16
INSTÄLLNINGSBLAD	17
FLEXLOCK™ KNÄSTÖD OCH FOTSTÖD	17

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDET

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6053 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ANORDNING BLIR KATASTROFALT BELASTAD, VERKAR SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

YTTERLIGARE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

! OBS ! Enheterna måste alltid stödjas helt av bordsytan.

! OBS ! Placera inte vassa föremål på enheterna.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

SÄKERHETSINFORMATION

För att säkerställa säker användning av knästöd och fotstöd rekommenderas att användaren får kunskap om och utbildning i säker användning av systemet före användning.

För att använda knästödet och fotstödet på ett korrekt och säkert sätt måste användaren ha nödvändig kunskap i en sjukhusmiljö.

Kontrollera att enheterna är säkert installerade på patientstödytan och verifiera att inställningen är korrekt innan behandlingen påbörjas.

Inspektera enheten med avseende på skador före varje användning.

INFORMATION OM MRT-SÄKERHET

MR Icke-kliniska tester har visat att knästödet **RT-4800-KS** är MR-säkert. Denna enhet kan användas i ett MR-system.

MR Icke-kliniska tester har visat att fotstödet **RT-4800-FS** är MR-säkert. Denna enhet kan användas i ett MR-system.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSETIKETTER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



MR-SÄKER

Föremålet medför inga kända risker i några MR-miljöer. Får EJ användas med ej godkända komponenter eller tillbehör. Får EJ användas tillsammans med några ferromagnetiska eller ledande föremål.



KLÄMZON

Var försiktig vid användning av FlexLock knästöd för att undvika skador på patient och användare

- Mellan FlexLock fotstödsskålar och bas

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna enhet är avsedd för immobilisering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER


Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.

FUNKTIONER

KOMPONENTER

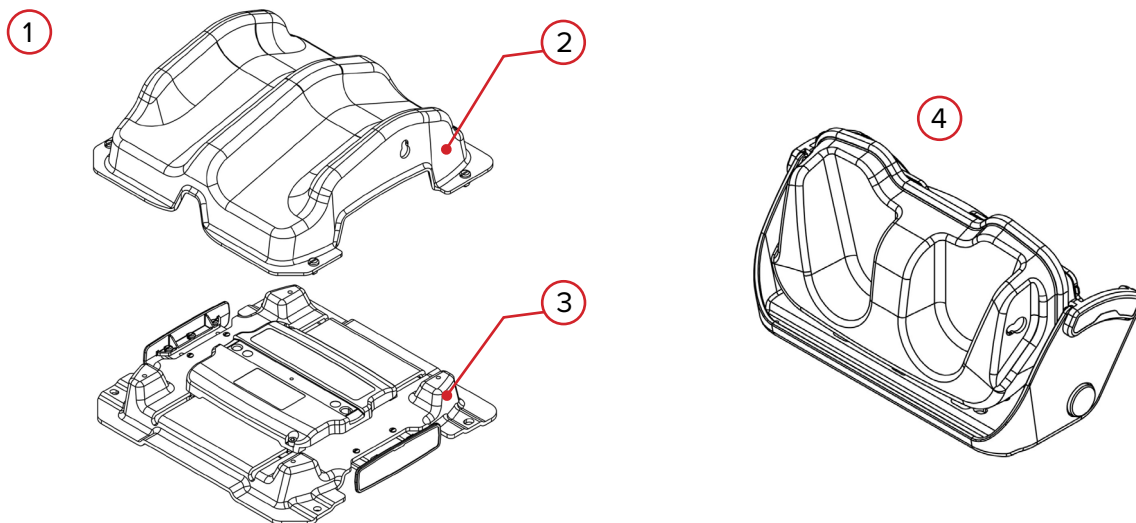

1. FLEXLOCK KNÄSTÖD

FlexLock knästöd kan enkelt konfigureras i två olika höjder och ger överlägsen justering av bildtagning eller behandlingsyta för exakt, upprepningsbar positionering. Det kan användas med benrem med klämma (RT-4489STRAP) för ytterligare immobilisering.

2. FLEXLOCK KNÄSKAL

Det konturerade höljet är utformat för att avlasta tryckpunkten och förbättra patientkomforten.

3. FLEXLOCK KNÄ-BAS

Basen underlättar två snabba höjjusteringar och ger bättre justering uppåt och nedåt genom att dra i eller trycka på skjutlåset.


4. FLEXLOCK FOTSTÖD

FlexLock-fotstödet kan vinklas och ger även överlägsna justeringar av bildtagning eller behandlingsyta för exakt, upprepningsbar positionering. Det kan användas med benrem med klämma (RT-4489STRAP) för ytterligare immobilisering.

BRUKSANVISNING


INSTÄLLNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD

1. Montera en 2-stifts positioneringsstav på bordsytan på önskad plats. (Figur 1)

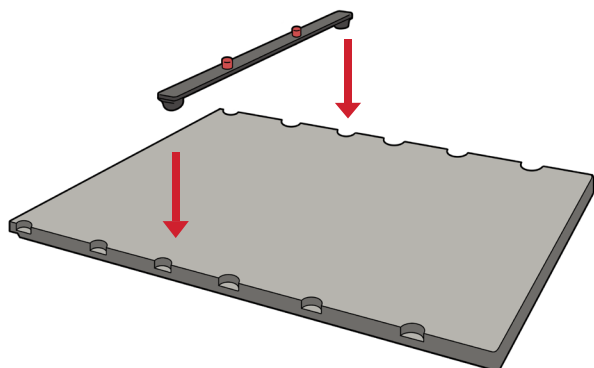


Figur 1

2. Knästödsbasen kan installeras i den lilla eller stora konfigurationen genom att vända den. (Figur 2 och figur 3)

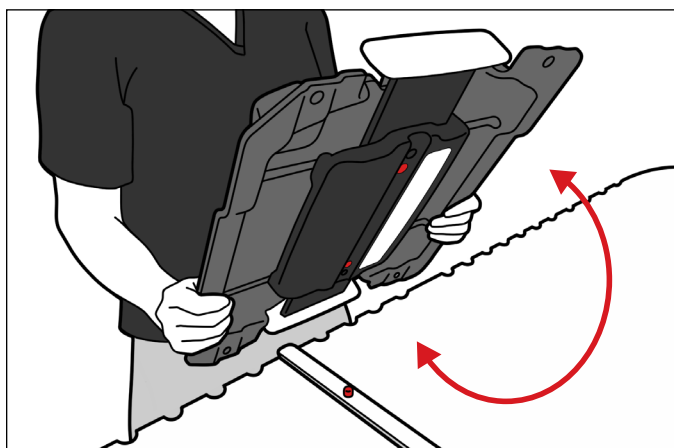

Figur 2

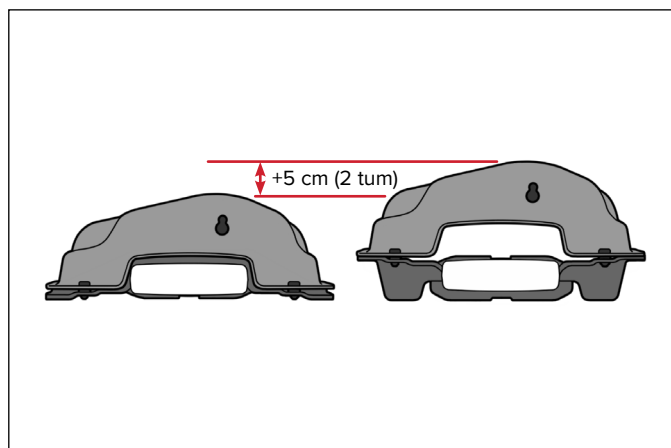


Figur 3


BRUKSANVISNING

INSTÄLLNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD

3. Kontrollera att knästödet bas är rätt inriktad genom att matcha etikettens riktning med patientens superiora och inferiora riktning och installera sedan på positioneringsstaven. (Figur 4 och figur 5)

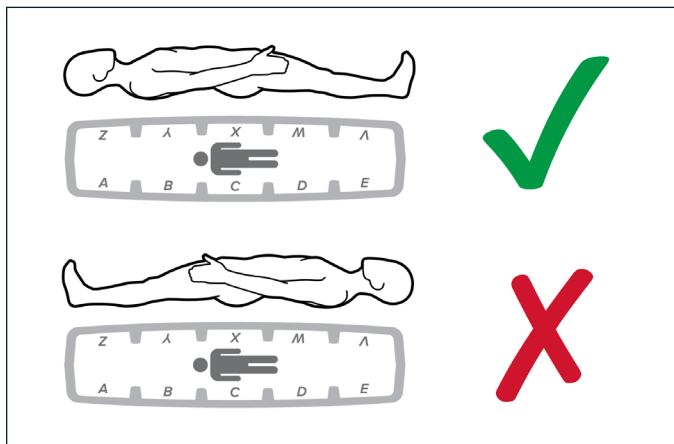

Figur 4

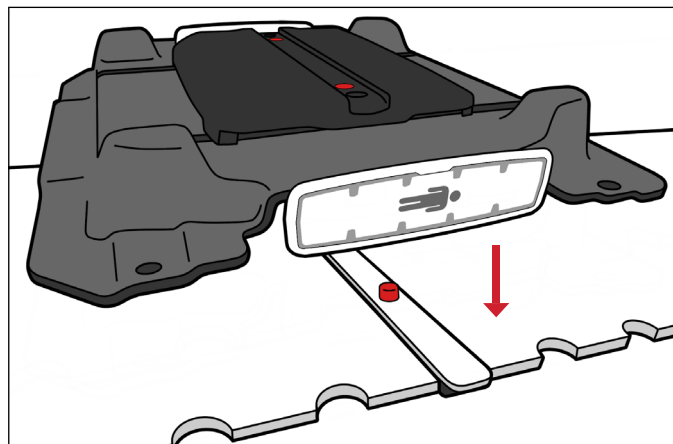

Figur 5


BRUKSANVISNING

INSTÄLLNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD


4. Installera knästödskalet genom att rikta in de 4 hörnstiften mot de motsvarande hålen i knästödet bas. (Figur 6)

! OBS ! Hörngeometrin för skalet och basen ska matcha för korrekt orientering. (Figur 7)


! OBS ! Se till att knästödskalets alla 4 stift sitter ordentligt i knästödet bas. (Figur 8)

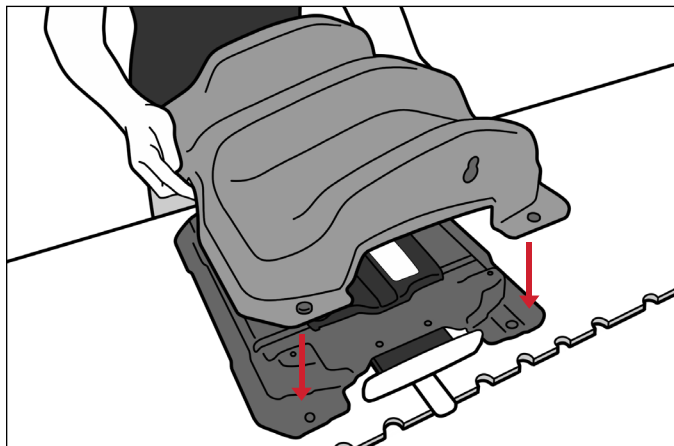

Figur 6

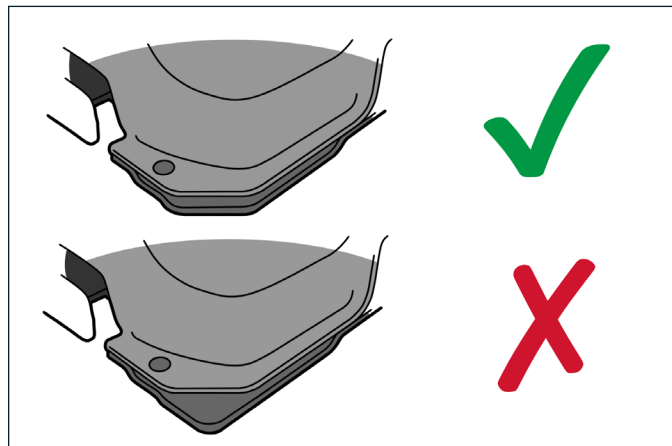

Figur 7

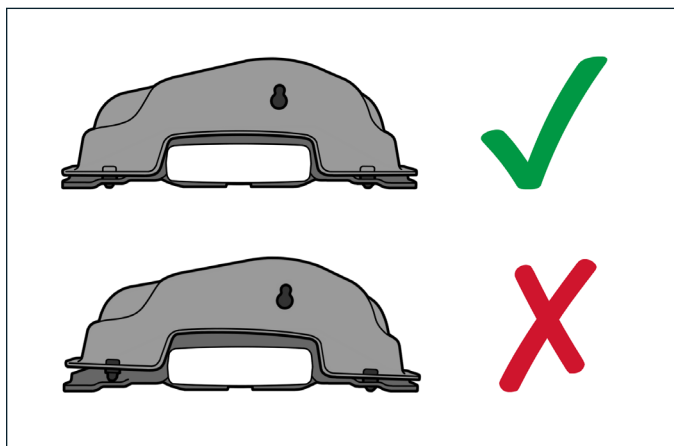


Figur 8

BRUKSANVISNING


INSTÄLLNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD

5. Justera knästödet i riktning uppåt/nedåt genom att dra i eller trycka på skjutlåset. Kontrollera att skjutlåset är helt infört och att den önskade positionen är i linje med positioneringsstaven. (Figur 9 och figur 10)

! OBS ! Justera INTE med patientens fulla vikt på enheten.

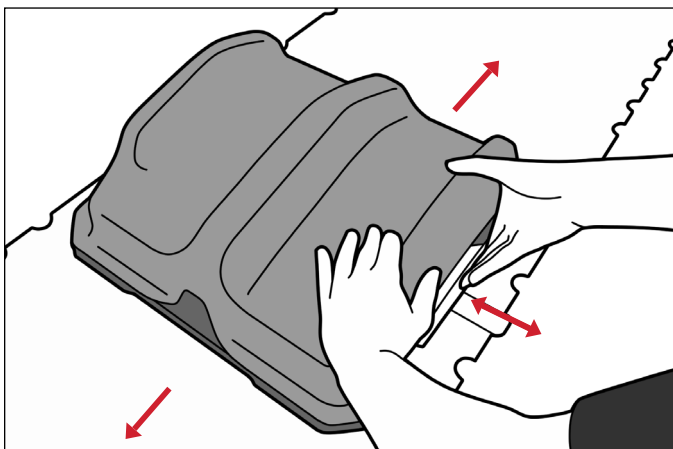

Figur 9

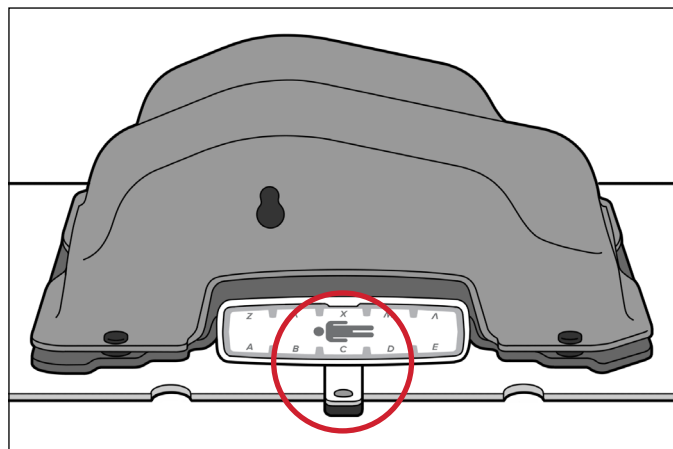


Figur 10


BORTTAGNING AV FLEXLOCK KNÄSTÖD

6. Ta bort knästödet genom att lyfta det uppåt och bort från positioneringsstaven och från bordsytan.

! OBS ! Lyft eller bär inte enheten i skjutlåset. (Figur 11 och figur 12)

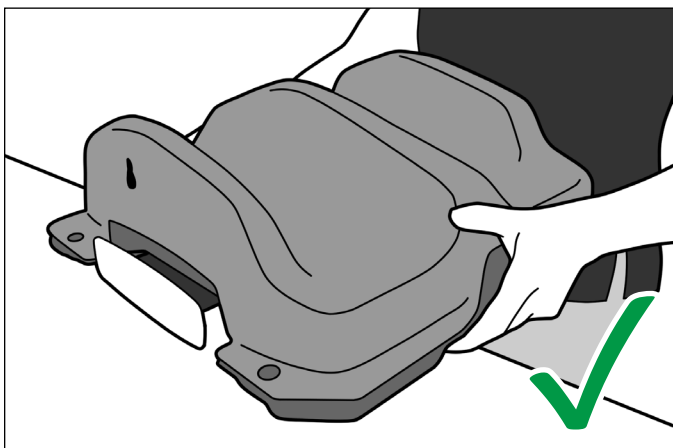

Figur 11

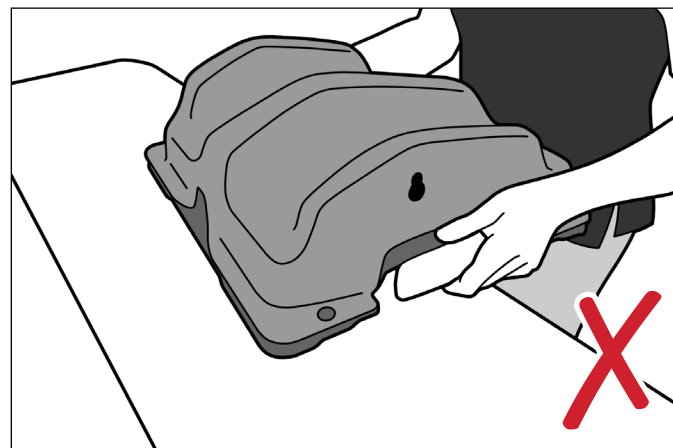

Figur 12


BRUKSANVISNING

FÄSTE FÖR BEN- OCH FOTREM (RT-4489STRAP)

Valfritt tillbehör. Säljs separat.

INSTALLATION AV BEN- OCH FOTREMSFÄSTET

1. För att fästa ben- och fotremsfästet på FlexLock knästöd riktar du in plastklacken på fästet mot skåran i skalet.
2. Tryck bestämt in klacken i öppningen tills den snäpper på plats.

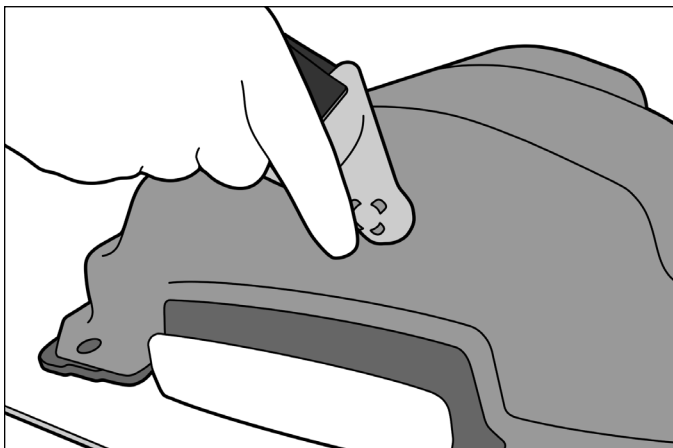

Figur 13


BORTTAGNING AV KNÄ- OCH BENBÄLTET

För att ta bort knä- och benremmen trycker du plastklacken på fästet nedåt tills den snäpper ut ur skåran.

BRUKSANVISNING


INSTALLATION AV FLEXLOCK FOTSTÖD

1. Montera fotstödet på positioneringsstaven genom att rikta in de önskade hålen efter de röda styristiften. (Figur 14)

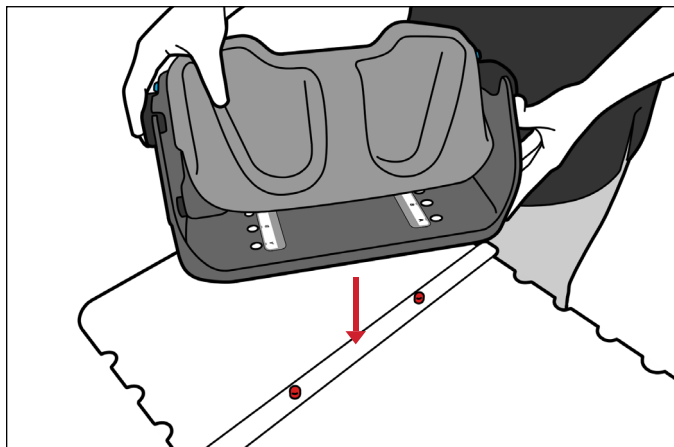

Figur 14

2. Justera fotstödet vinkel genom att trycka på den vita avtryckaren på fotbaksidan och luta den till önskad vinkel. (Figur 15)

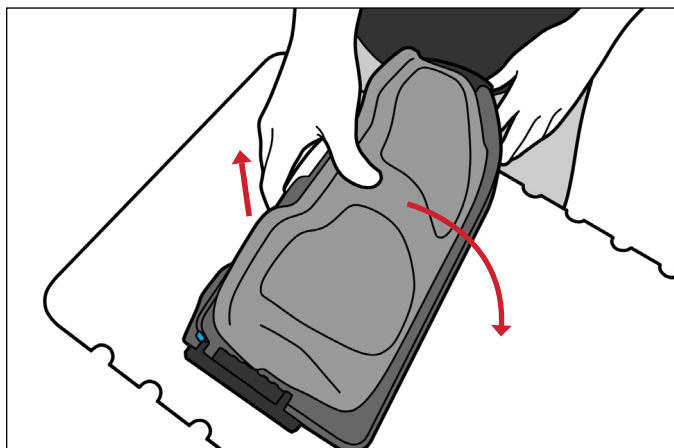

Figur 15

BORTTAGNING AV FLEXLOCK FOTSTÖD

Avlägsna fotstödet genom att lyfta det uppåt och bort från positioneringsstaven och från bordsytan.


BRUKSANVISNING

FÄSTE FÖR BEN- OCH FOTREM (RT-4489STRAP)

Valfritt tillbehör. Säljs separat.

INSTALLATION AV BEN- OCH FOTREMSFÄSTET

1. För att fästa ben- och fotremfästet i FlexLock fotstöd ska plastklacken på fästet passas in mot skåran i skalet.
2. Tryck bestämt in klacken i öppningen tills den snäpper på plats.

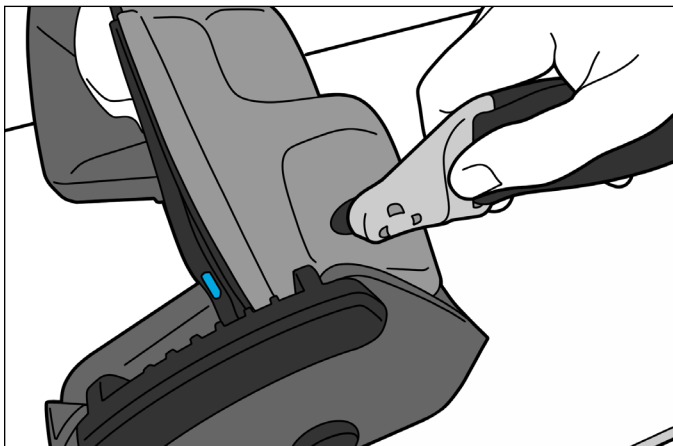

Figur 16

BORTTAGNING AV KNÄ- OCH BENBÄLTET

För att ta bort knä- och benremmen trycker du plastklacken på fästet nedåt tills den snäpper ut ur skåran.

UNDERHÅLL

! OBS ! Spraya inte och häll inte vätskor på enhetens yta.

! OBS ! Placera INTE vassa föremål på enheten.

RENGÖRA SYSTEMET

Enheten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengöringslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan. Inspektera enheten visuellt. Om den inte är ren upprepar du föregående rengöringssteg tills den är visuellt ren. Använd en ren duk fuktad med vatten för att torka av anordningen för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet. Torka genom att torka av anordningen med en ren, torr duk. Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpligt för rengöring av anordningen.



- 10 % Clorox® i lösning med blekmedel

DESINFICERA SYSTEMET

Använd ett av följande medel enligt tillverkarens anvisningar för att desinficera enheten. Torka av enhetens yta med duken och låt enheten torka innan den används.

- 70 % alkohol
- Super Sani-Cloth® torkduk
- 10 % Clorox® i lösning med blekmedel

LISTA ÖVER DELAR

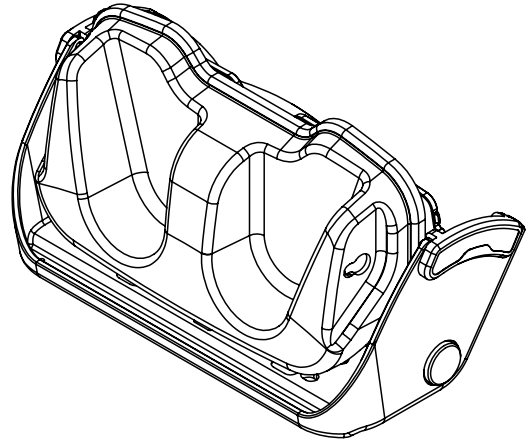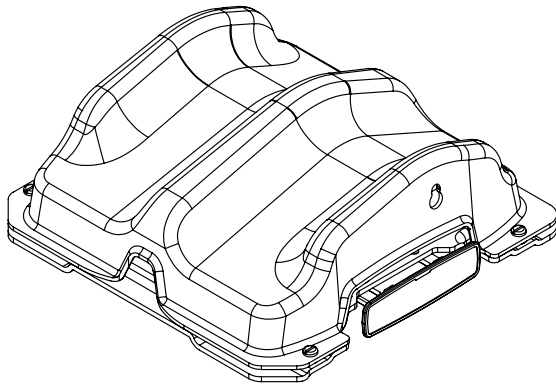

1. RT-4800-KS – FlexLock knästödd
2. RT-4800-FS – FlexLock fotstödd
3. 8003050 – FlexLock knästödsfjäder ersättningssats
4. RT-4489STRAP – fäste för ben- och fotrem (valfritt tillbehör)

INSTÄLLNINGSBLAD

FLEXLOCK™ KNÄSTÖD OCH FOTSTÖD

Patientens namn:

Patientens ID-nummer:


Inställt av:

Läkare:


Datum:

Kommentarer:

RT-4800-KS – FlexLock™ knästöd

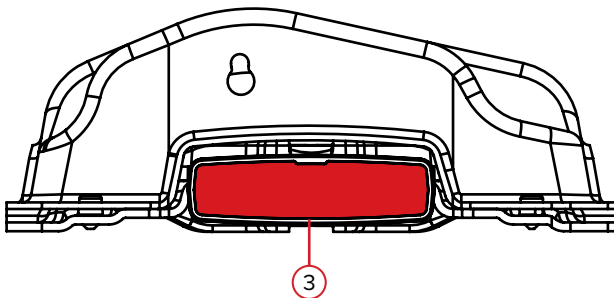

RT-4800-FS – FlexLock™ fotstöd

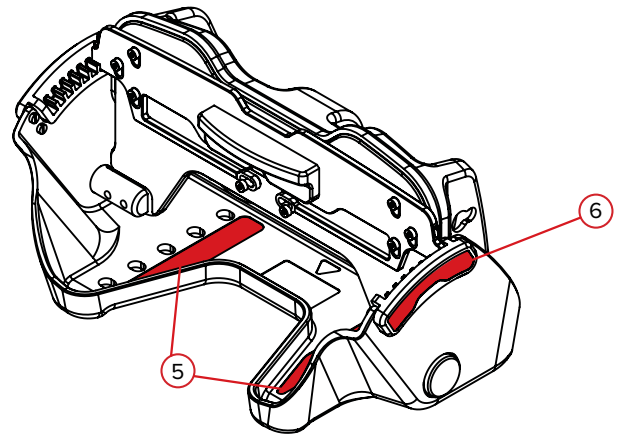

KNÄSTÖD

1. Positioneringsstavens placering på bordsytan:
2. Konfiguration av knästöd (välj ett alternativ): **Liten** **Stor**
3. Placering av FlexLock knästöd på positioneringsstaven (välj ett alternativ):

A	B	C	D	E
V	W	X	Y	Z

FOTSTÖD

4. Positioneringsstavens placering på bordsytan:
5. Placering av FlexLock fotstöd på positioneringsstaven (välj ett alternativ): **A** **B** **C** **D** **E**
6. Vinkel för FlexLock fotstöd (välj ett alternativ): **0°** **5°** **10°** **15°** **20°** **25°** **30°**

FÄSTE FÖR BEN- OCH FOTREM Ja Nej



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008425_SV_A
2023-03